

SANGLES DE SÉCURITÉ 9A214001/002

PIÈCES DU COLIS

No. de la pièce	Description	Qté
053-0148-00	Sangles de sécurité.....	2
040-0010-47	Vis cruciformes n° 10-24 x 3/8 in. ...	4
050-1320-00	Supports des montures des sangles	2
003-0751-02	Montage et utilisation	1


OUTILS REQUIS

Tournevis cruciforme

INTRODUCTION

Sert à attacher un patient à la table pendant un examen ou une procédure.

MONTAGE (MONTURES DES CEINTURES)

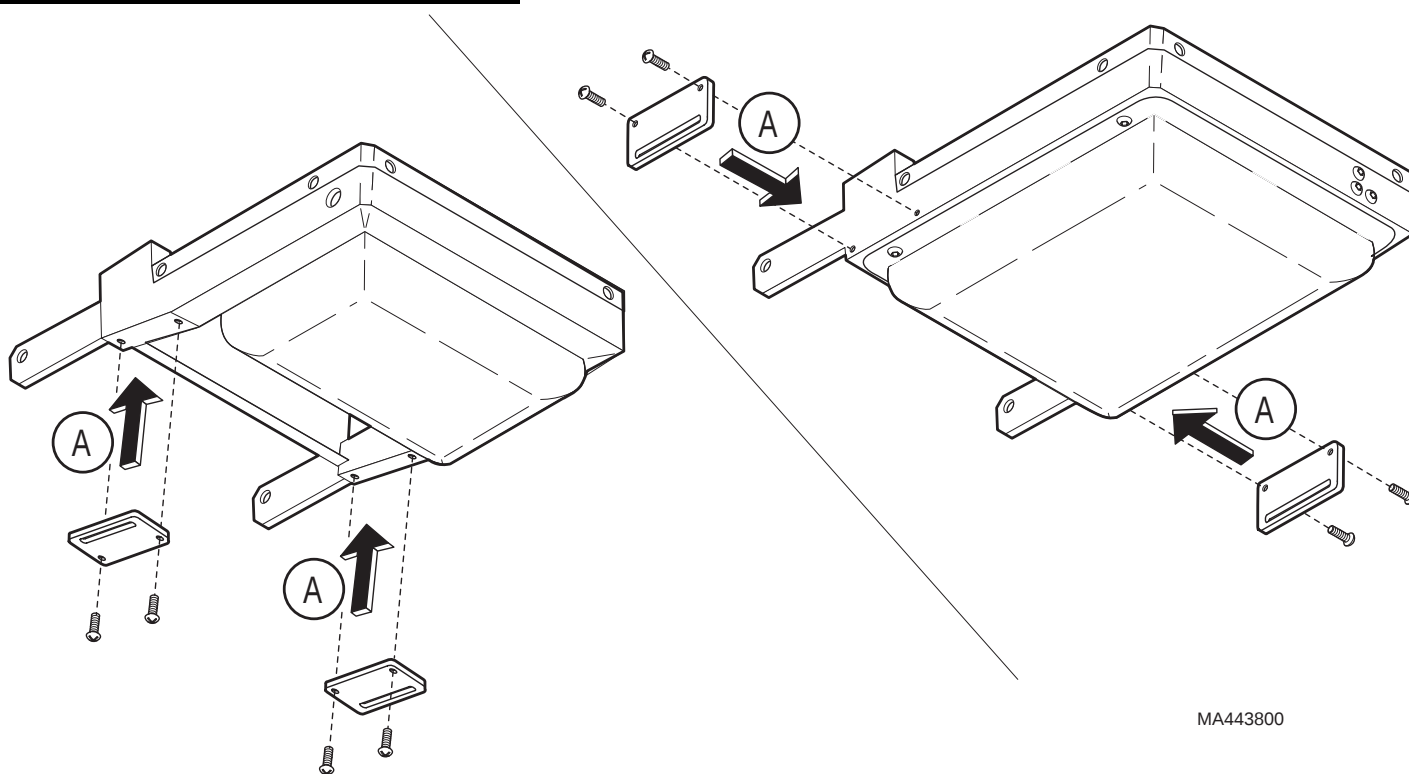


REMARQUE

Pour faciliter le montage, relever la table et le repose-pied et incliner la table vers l'arrière.


A. Poser les montures des sangles de sécurité au bas du repose-pied. Les fixer avec les vis de montage.

MONTAGE (SECTION JAMBES)

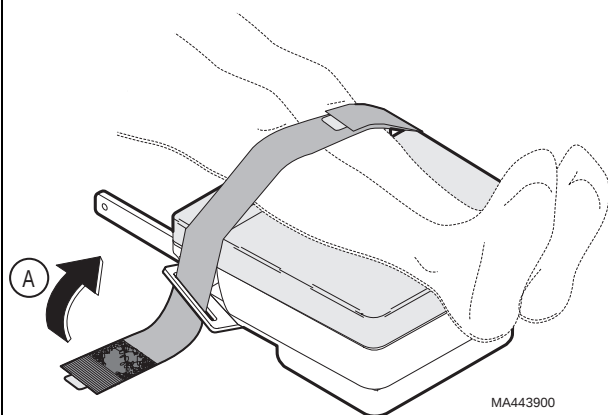

- A.** Placer l'extrémité en velcro de la sangle dans la fente des montures et la ramener sur les jambes du patient pour que le velcro touche le dessus de la sangle.

MONTAGE (SECTION DOSSIER)

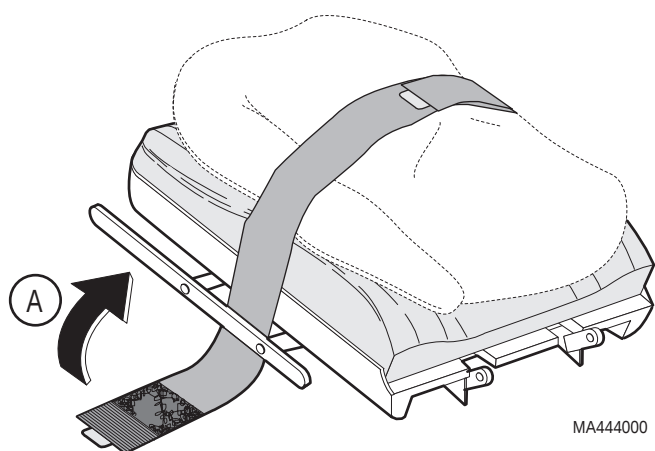

- A.** Placer l'extrémité en velcro de la sangle dans l'ouverture entre la section dossier et le rail latéral et la ramener sur le corps du patient pour que le velcro touche le dessus de la sangle.