

COMPONENTES DEL JUEGO

Nº de pieza	Descripción	Cant.
053-0148-00	Correas de sujeción	2
040-0010-47	Tornillos (#10-24 x 3/8 pulg. Phillips	4
050-1320-00	Soportes para montaje de las correas	2
003-0751-03	Instrucciones de instalación / funcionamiento	1


HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Destornillador Phillips

PRESENTACIÓN

Para sujetar al paciente en la mesa durante la examinación/procedimiento.

INSTALACIÓN (SOPORTES DE LA CORREA)

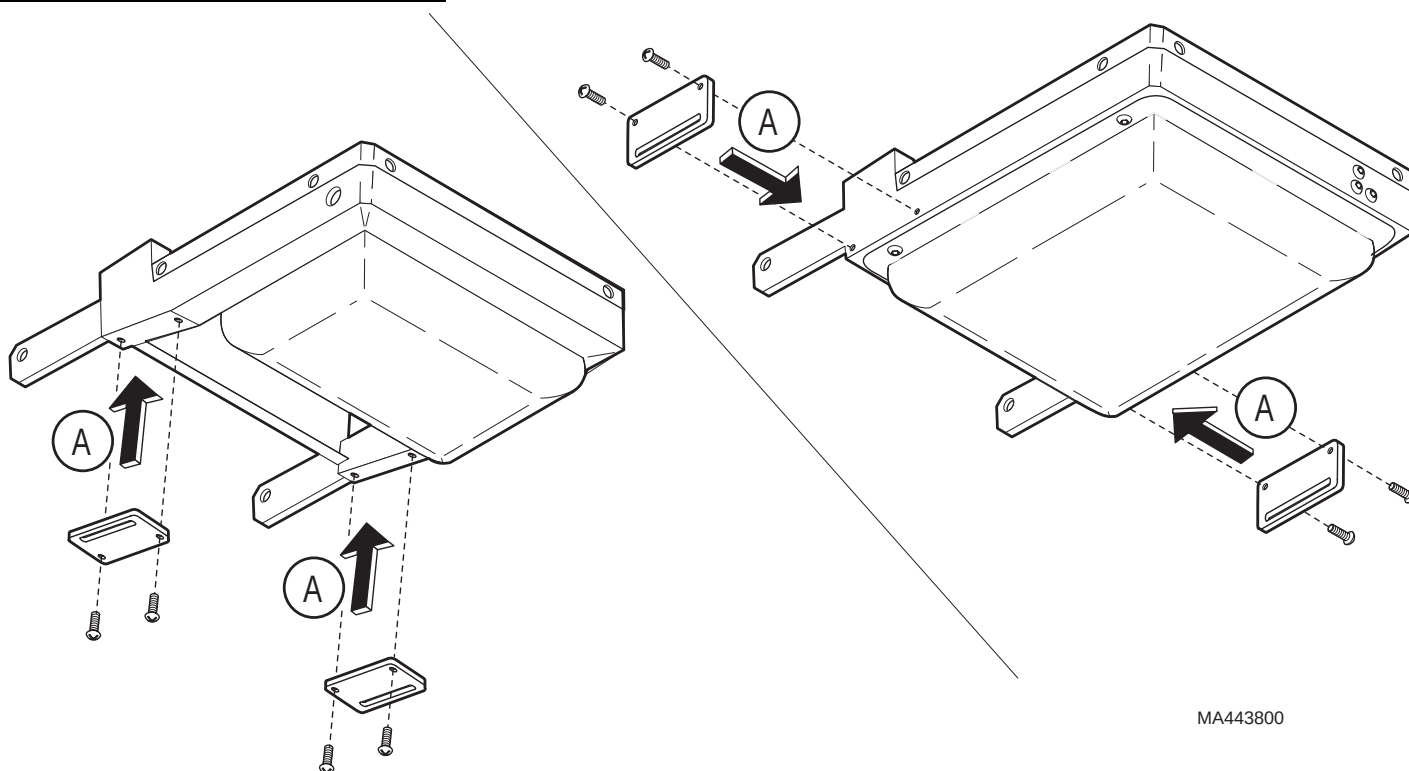


NOTA

Para facilitar la instalación, levantar la mesa y el reposapiés e inclinar la mesa hacia atrás.


A. Colocar los soportes de la correa en la parte inferior del reposapiés. Asegurar con tornillos de montaje.

INSTALACIÓN (SECCIÓN DE LAS PIERNAS)

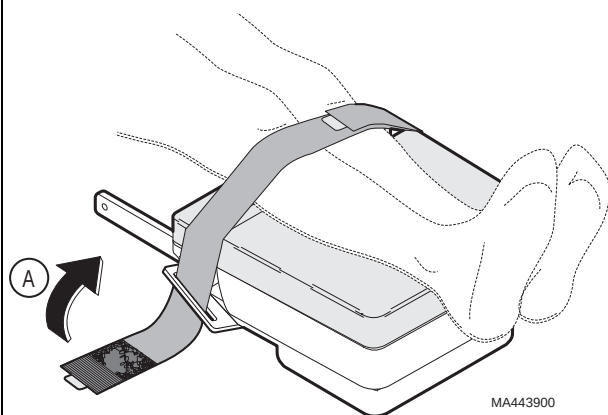

- A.** Colocar el extremo con velcro de la correa a través de la ranura de los soportes de la correa, enlazándola de forma que el velcro haga contacto con la parte superior de la correa.

INSTALACIÓN (SECCIÓN POSTERIOR)

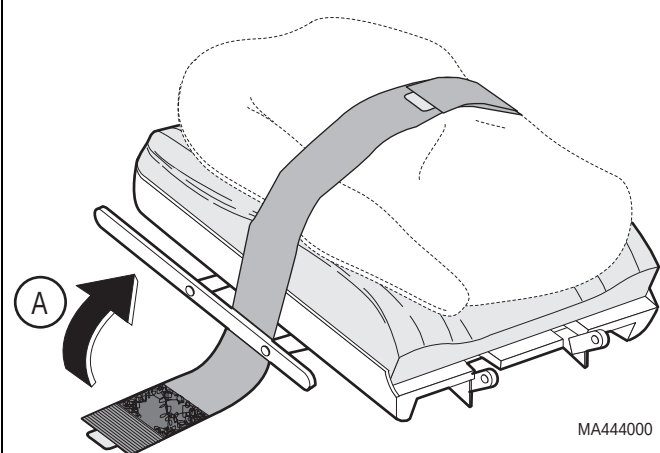

- A.** Colocar el extremo con velcro a través de la ranura entre la sección posterior y la barra lateral, enlazándola de forma que el velcro haga contacto con la parte superior de la correa.