

PIÈCES DU COLIS

Glissières de base..... 1

Outils REQUIS

Poinçon de 1/8 in.ou moins

Pince à bec fin


Clé de 3/8 in.

Clé mâle de 5/32 in.



AVERTISSEMENT

Ne pas installer du côté de la chaise où une glissière de siège réf. 9A22700X est déjà montée. Déposer la ou les glissières de siège avant de poser les glissières de base pour éviter toutes blessures ou dégâts.

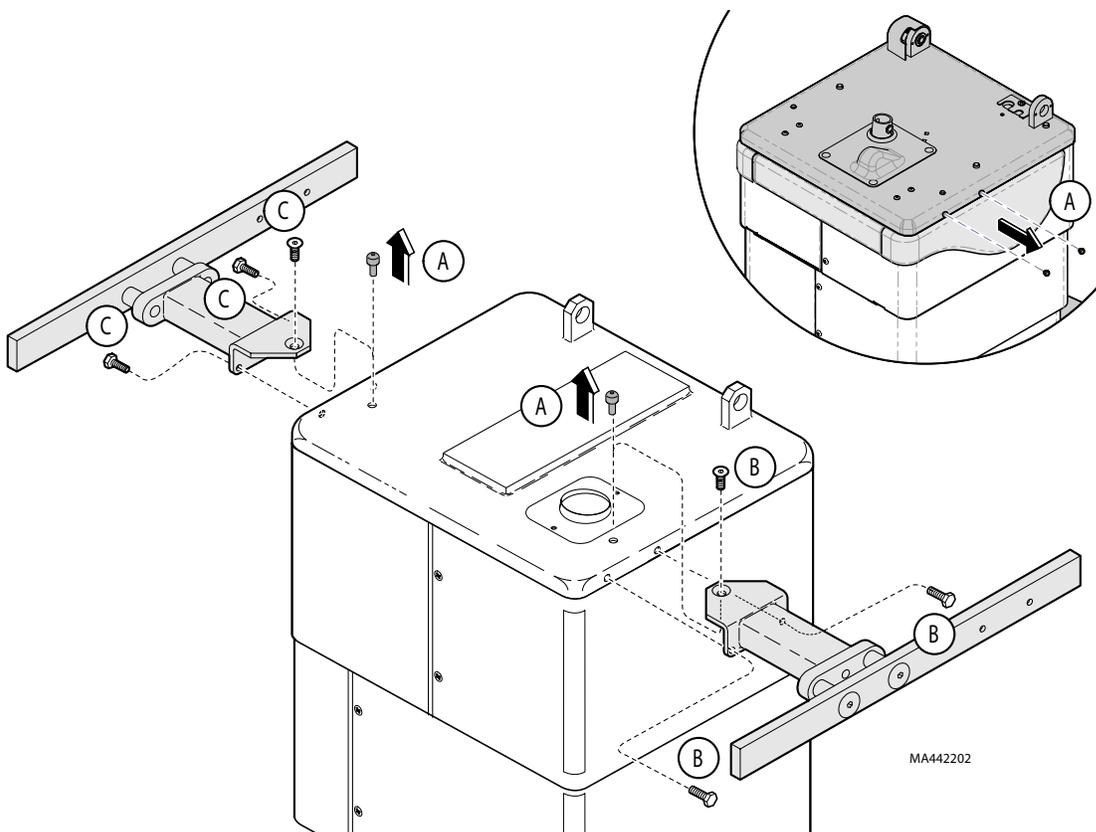

REMARQUE

Pour faciliter l'installation, RELEVER complètement les fonctions CHAISE, DOSSIER et PIED.

- A. À l'aide d'un poinçon et d'une pince à bec fin, déposer les rivets en nylon noirs des trous de montage.
- B. Mettre en place la glissière de gauche et poser les vis de montage.
- C. Poser la glissière de droite de la même façon.



AVERTISSEMENT MATÉRIEL

La longueur de rail qui dépasse de l'ensemble soudé de la glissière de base doit être dirigée vers l'arrière de la chaise au moment du montage.