



ADVERTENCIA


No instalar en el mismo lado de la silla si tiene un carril de asiento 9A22700X. Extraer cualquier carril de asiento antes de instalar el carril de base. Si no se siguen dichas indicaciones, pueden ocurrir lesiones personales o daños al equipo.

COMPONENTES DEL JUEGO

Instalación del carril de la base...1

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Punzón (1/8 pulg. o más pequeño)
Alicate de punta
Llave de 3/8 pulg.
Llave Allen de 5/32 pulg.

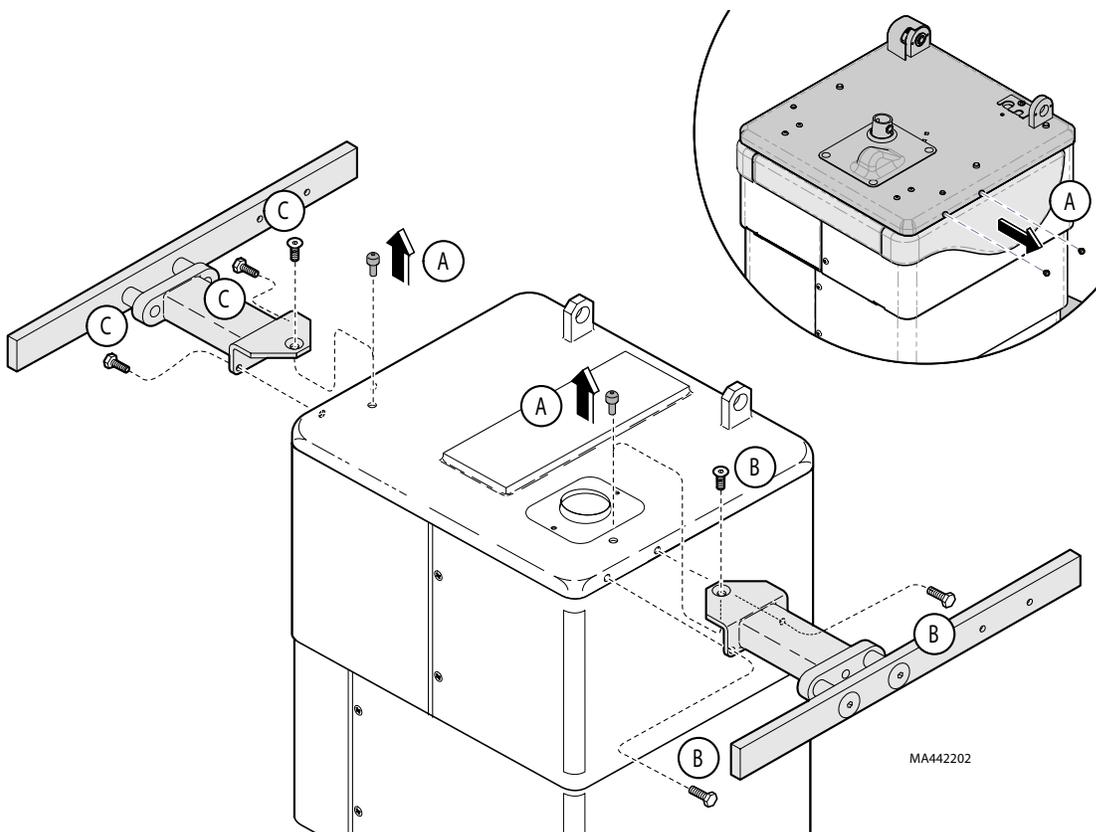

MA442202

NOTA

Para facilitar la instalación, mover las funciones de SILLA, RESPALDO, INCLINACIÓN y PIES totalmente hacia arriba.

- A. Con el botador y el alicate, sacar los remaches de nylon negro de los agujeros de montaje.
- B. Poner el carril izquierdo de la base en su lugar e instalar los tornillos de montaje.
- C. Instalar el carril de la base derecha de la misma manera.



ALERTA DEL EQUIPO

El largo de la base de carril que se extiende más allá del tope de la base de carril debe estar orientada hacia la parte posterior de la silla al instalar.