

# Écran de blocage de la vue [9A78]

**Outils spéciaux :**

aucun

Langue d'origine : anglais

**Emploi :**

Sert à bloquer la vue du patient pendant une procédure ou un examen de caractère général.



**Attention**



Vérifier qu'il n'y a rien sur la table qui puisse entraver l'utilisation de l'écran de blocage.

**Remarque**

L'écran de blocage de la vue est compatible avec le rail pour accessoires et le rail chirurgical Midmark®.

**Installation de l'écran de blocage de la vue...**

- A) Desserrer le bouton à la base du pivot.
- B) Glisser le pivot sur le rail latéral de la table d'examen.
- C) Le placer à l'endroit désiré et resserrer le bouton.

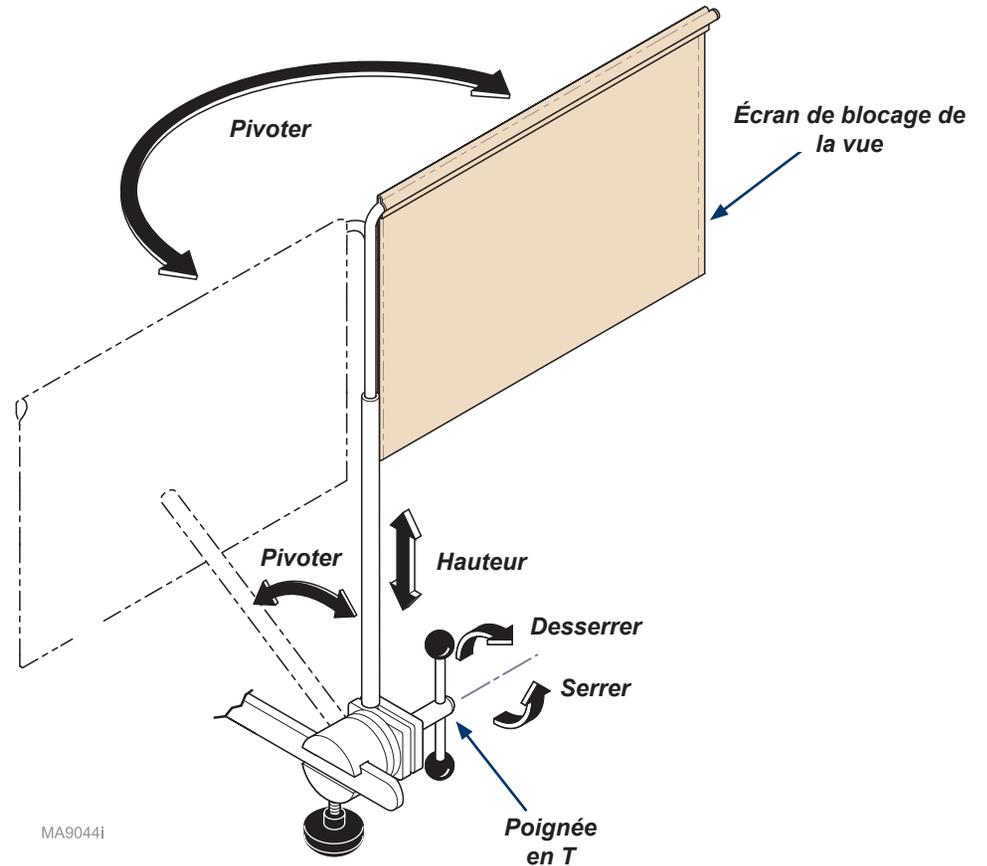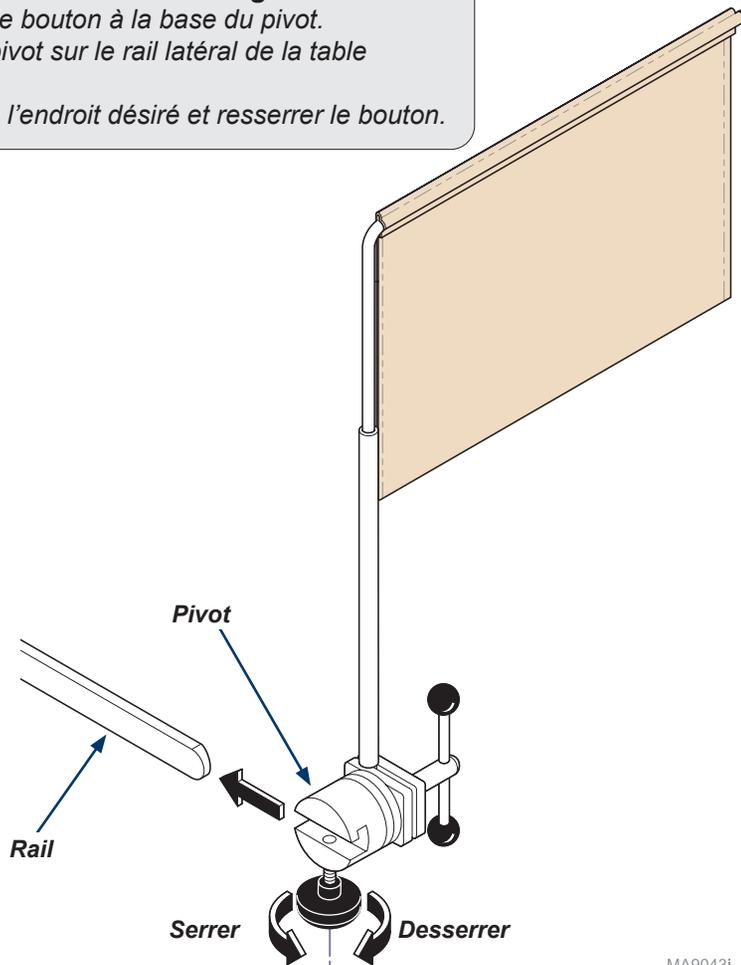

**Utilisation de l'écran de blocage de la vue...**

- A) Soutenir l'écran de blocage de la vue et desserrer la poignée en T.
- B) Mettre l'écran à la hauteur et l'angle voulus.
- C) Resserrer la poignée en T.

TP200 Rév. A