

## Pantalla de bloqueo de la visión [9A78]

**Herramientas especiales:**  
ninguna

Idioma de origen: Inglés

**Uso indicado:**

Bloquear la visión del paciente en un reconocimiento o procedimiento general.



**Precaución**


Asegúrese de que la camilla no tenga ningún obstáculo que pudiera interferir con el funcionamiento de la pantalla de bloqueo de la visión.

**Nota**


La pantalla de bloqueo de la visión funciona tanto con el riel quirúrgico como con el riel para accesorios de Midmark®.

**Instalación de la pantalla de bloqueo de la visión...**

- A) Afloje la perilla inferior en el bloque de giro.
- B) Deslice el bloque de giro en el riel lateral de la camilla de reconocimiento.
- C) Colóquelo en el sitio deseado y apriete la perilla.

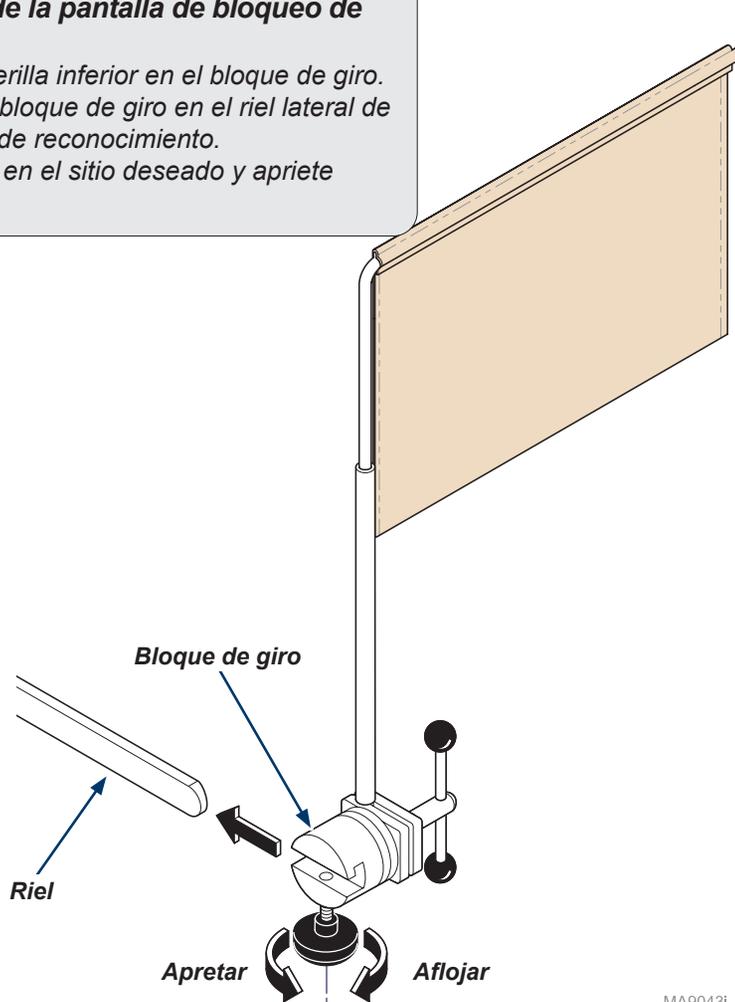

MA9043i

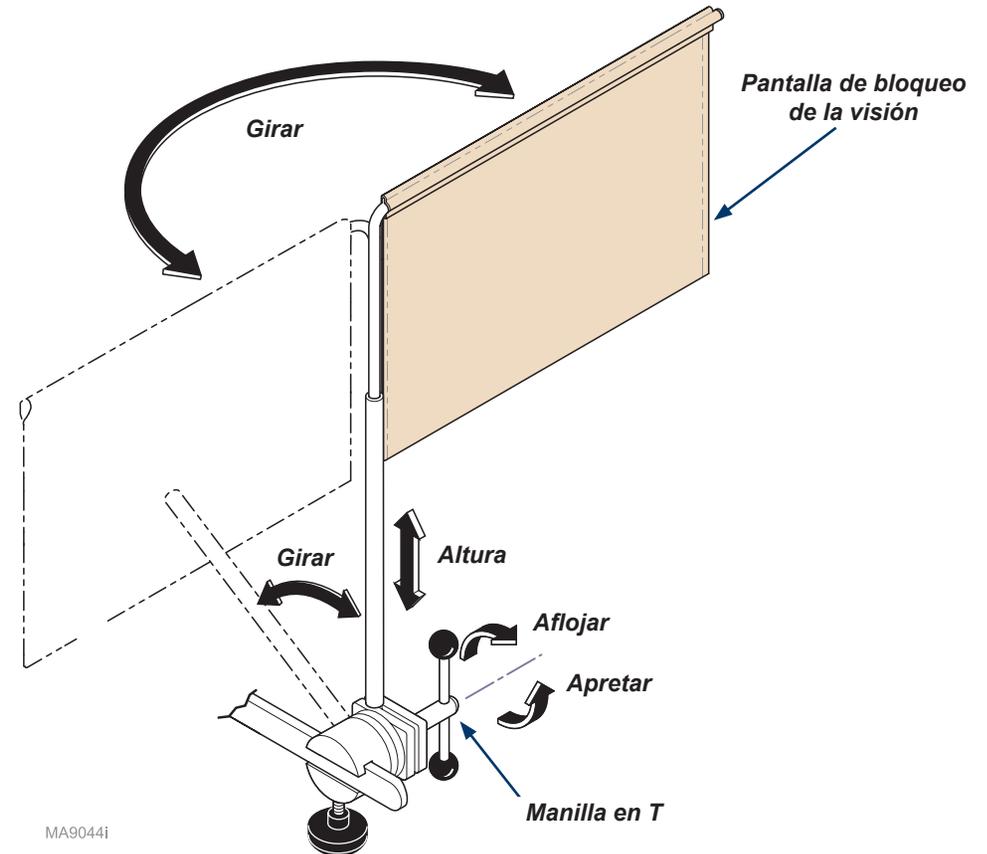

MA9044i

**Funcionamiento de la pantalla de bloqueo de la visión...**

- A) Apoye la pantalla de bloqueo de la visión y afloje la manilla en T.
- B) Coloque la pantalla en el ángulo y la altura deseadas.
- C) Apriete la manilla en T.