

REPOSACABEZAS PARA PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 9A199001 REPOSACABEZAS CIRCULAR 9A198001

COMPONENTES DEL JUEGO

Nº de pieza	Descripción	Cant.
9A198001	Reposacabezas circular	1
o		
9A199001	Reposacabezas para procedimientos especiales	1
003-0940-03	Instrucciones de instalación	1

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Ninguna


PRESENTACIÓN

Para proveer acceso a la cabeza de un paciente durante exámenes/procedimientos.

NOTA

Las unidades 9A198001 y 9A199001 no se adaptarán al montaje del reposamuñecas de un brazo 9A221001.

INSTALACIÓN

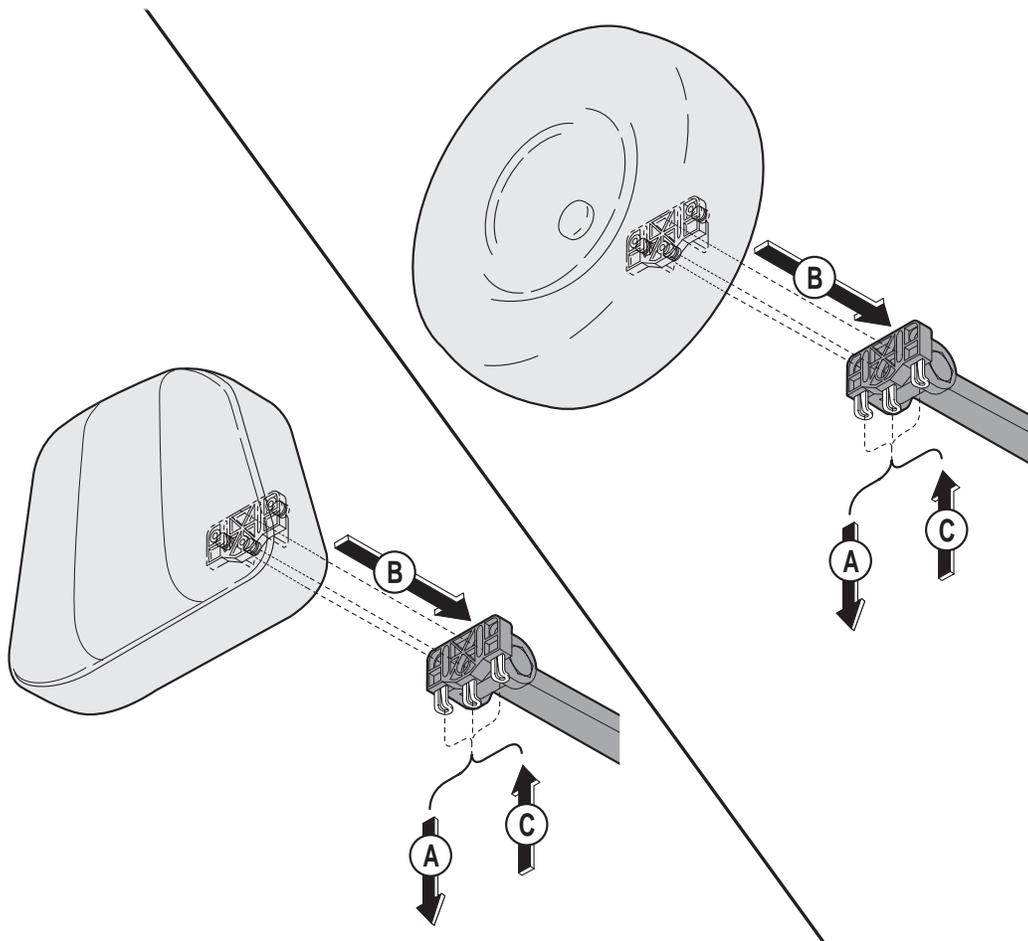

MA442000

- A. Tirar hacia abajo de las barras deslizantes y extraer el reposacabezas viejo.
- B. Colocar el reposacabezas deseado en el montaje giratorio.
- C. Empujar hacia arriba en las barras deslizantes para trabar el reposacabezas en el pivote.