


Para encender y apagar el calentador de cajón...
Pulse y suelte el interruptor del calentador de cajón.

Nota: el interruptor se iluminará cuando el calentador esté encendido.

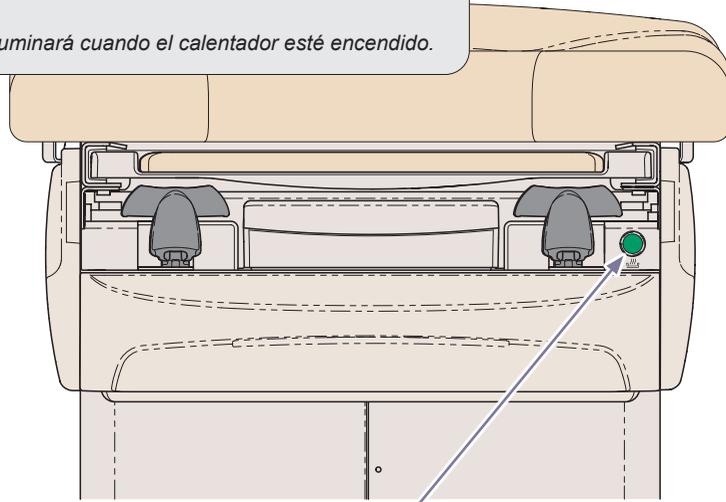


Interruptor del
calentador de cajón

MA102951

Para encender y apagar el calentador de la tapicería...

Pulse y suelte el interruptor del calentador de la tapicería una vez para el ajuste BAJO y dos veces para el ajuste ALTO. Pulse el interruptor del calentador una tercera vez para apagar el calentador de la tapicería.

Nota: el interruptor se iluminará con un verde tenue en el ajuste BAJO y con un verde brillante en el ajuste ALTO.

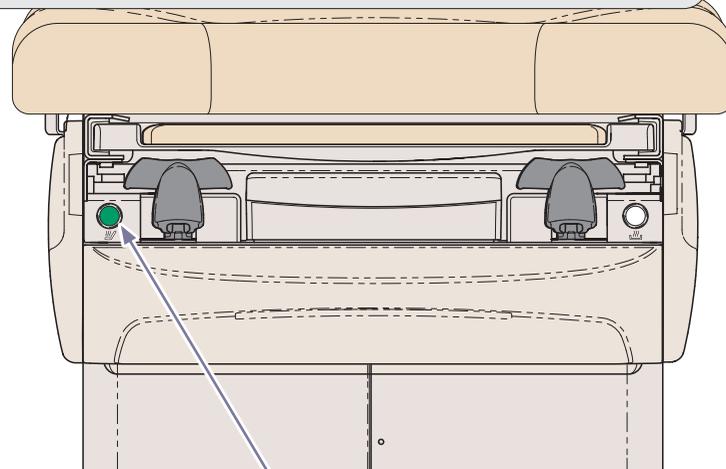

Interruptor del calentador
de la tapicería

MA102961

Mantenimiento

Revise periódicamente que:

- El cable de alimentación no debe tener daños visibles.
- Los cables de alimentación del pedal/mando de control no debe tener daños visibles.
- Todos los elementos de sujeción deben estar colocados y bien apretados.
- Todas las funciones mecánicas deben funcionar correctamente.

Limpieza

Tapicería

Lave la tapicería todas las semanas utilizando una mezcla con un jabón líquido suave y agua, enjuague con agua limpia y seque toda la superficie para eliminar la acumulación de residuos de desinfectante/limpiador.

Desinfecte su tapicería con una solución de lejía común y agua 1:10 (10 %) o productos a base de cloro (consulte las directrices vigentes para la desinfección y esterilización en centros sanitarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). A continuación, enjuague con agua limpia y seque a fondo el material.

Para minimizar la acumulación de residuos de desinfectante/limpiador, no deje que los desinfectantes se acumulen en la superficie de la tapicería. Una vez transcurrido el tiempo de contacto aprobado, retire y seque el exceso de líquido que quede en la superficie.

Con el producto se incluyen instrucciones detalladas de conservación y mantenimiento. Esta información también está disponible en midmark.com en la biblioteca técnica situada en el apartado «Información del usuario» de su producto.

Superficies de metal o plástico pintadas

Limpie semanalmente las superficies de metal o plástico pintadas pasando un paño suave y limpio con limpiadores suaves. El uso de desinfectantes a base de cloro puede provocar daños en el mando de control.

Contactar con el servicio técnico

Póngase en contacto con su distribuidor Midmark si necesita asistencia técnica.

Póngase en contacto con Midmark directamente si necesita asistencia técnica:

EE. UU. 844.856.1230 / Canadá 937.526.8585, de lunes a jueves de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (ET)

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380 EE. UU.
1.800.643.6275
1.937.526.3662
midmark.com


midmark®


midmark®

**Guía de consulta rápida
626 (-001 y -002)**

Sillón de exploración Barrier-Free®

Número de modelo:
Número de serie:


Información del
distribuidor:

Fecha de compra:


Color de la tapicería:

003-10030-03 Rev AA4 (7/12/22)

Esta guía resume el funcionamiento básico del sillón. La Guía del usuario que se incluye ofrece instrucciones adicionales sobre el funcionamiento y cuidado, así como información sobre el cumplimiento normativo. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Midmark si necesita asistencia técnica.

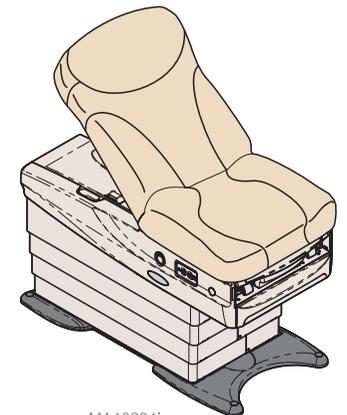

MA102941


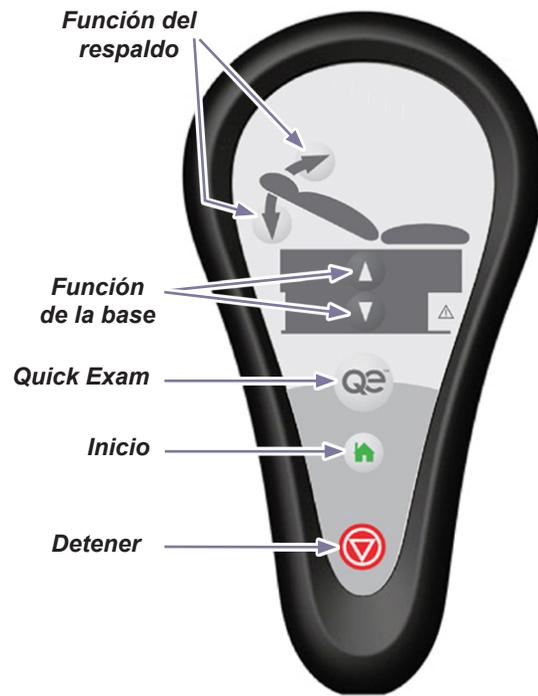


Para accionar las funciones de la base y del respaldo...
 Mantenga pulsado el botón de flecha Arriba o Abajo para activar la función deseada.

Nota: el sillón se detiene automáticamente al llegar a la altura máxima y la mínima.
 En caso de funcionamiento incorrecto, pulse el botón Detener para detener el movimiento.


Para activar la función Inicio o la Quick Exam®...
 Pulse y suelte el botón Inicio o Quick Exam.

Nota: en caso de funcionamiento incorrecto, pulse CUALQUIER botón para detener el movimiento.

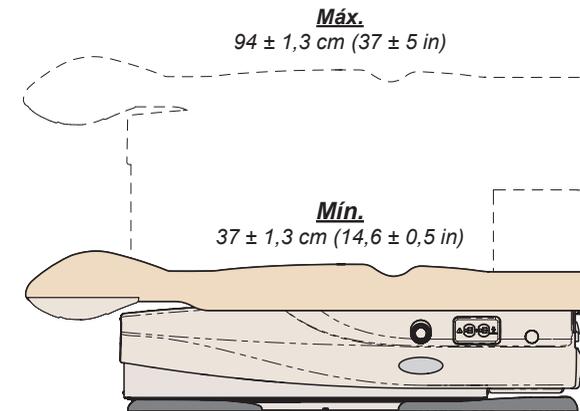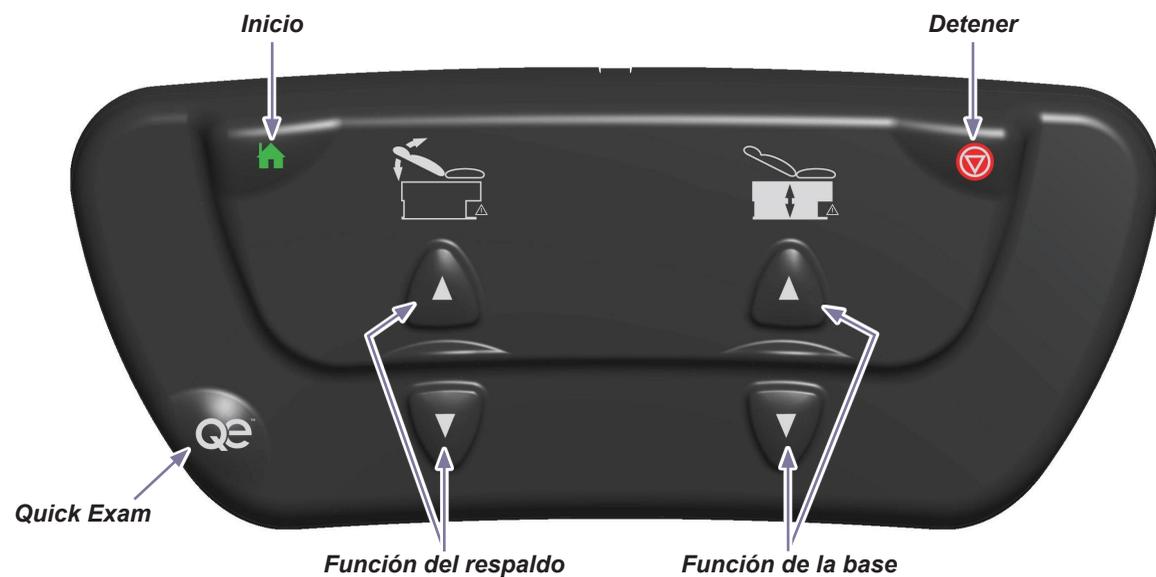

Altura Quick Exam
 Programable
 (ajustada por el usuario)

Altura «Inicio»
 Programable
 (ajustada por el usuario)

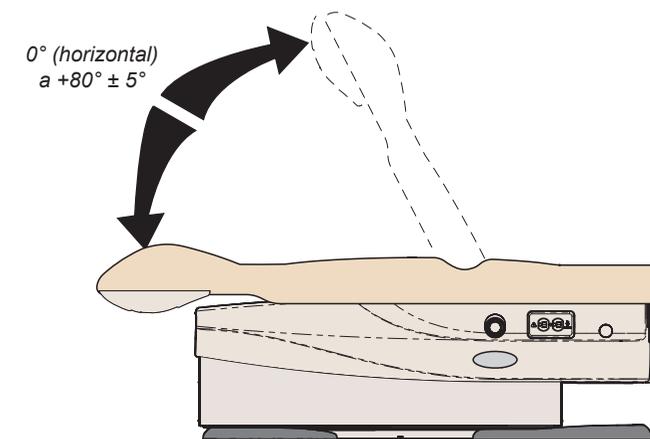

MA10299i

Para programar las funciones Inicio o Quick Exam...

- Pulse el botón Subir/bajar base para mover la base hasta la posición deseada.
- Pulse el botón Subir/bajar respaldo para mover el respaldo hasta la posición deseada.
- Pulse el botón Detener y después el botón Inicio o Quick Exam y manténgalos pulsados de forma simultánea durante tres o cuatro segundos.

Nota: escuchará un tono cuando la nueva posición se haya guardado.