


Pour activer/désactiver l'élément chauffant du tiroir...

Enfoncer puis relâcher le bouton de l'élément chauffant du tiroir.

Remarque : le bouton s'allume lorsque l'élément chauffant est activé.

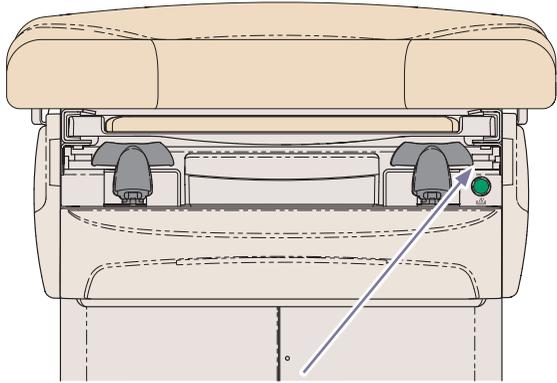


Bouton de l'élément chauffant du tiroir

MA103011

Pour mettre en marche / arrêter l'élément chauffant de garniture...

Enfoncer puis relâcher le bouton de l'élément chauffant de garniture une fois pour le réglage bas et deux fois pour le réglage élevé. Appuyer sur le bouton de l'élément chauffant une troisième fois pour éteindre l'élément chauffant de garniture.

Remarque : le bouton s'allume en vert clair pour le réglage bas et en vert vif pour le réglage élevé.

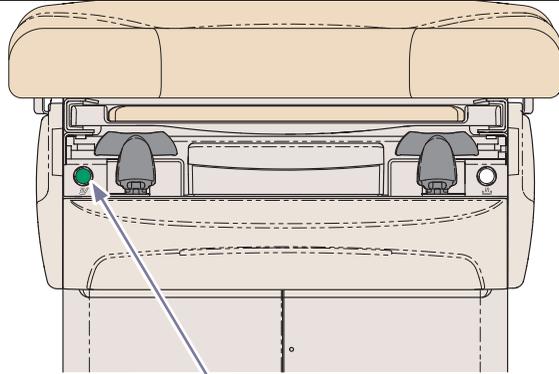


Bouton de l'élément chauffant de garniture

MA103021

Ports pour les connexions de données

Des ports pour les connexions de données sont situés de chaque côté et sur le socle arrière du fauteuil.

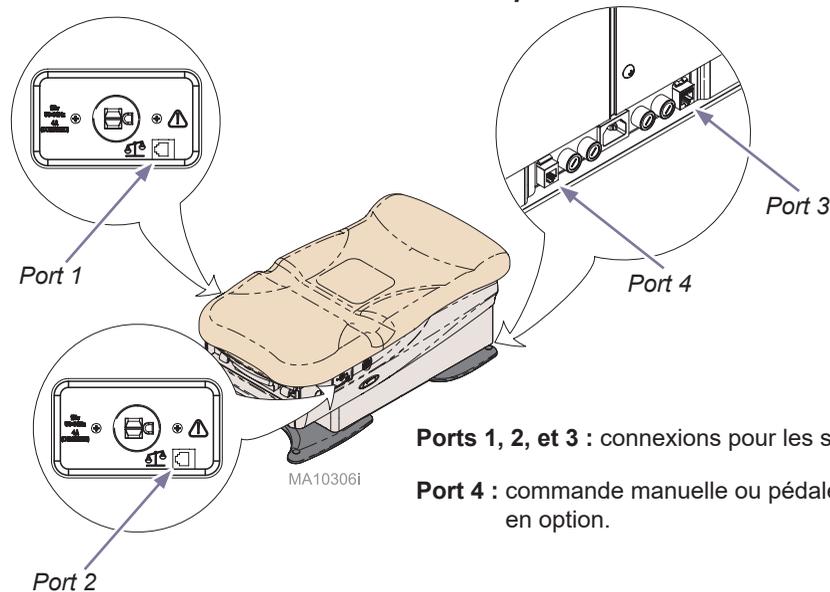

Ports 1, 2, et 3 : connexions pour les signes vitaux.

Port 4 : commande manuelle ou pédale câblée en option.

Style E

Entretien

Examinez régulièrement les points suivants :

- Le cordon d'alimentation ne doit présenter aucun dommage visible.
- Toutes les fixations doivent être en place et bien attachées.
- Tous les dispositifs mécaniques doivent fonctionner.

Nettoyage

Garniture

Laver la garniture toutes les semaines avec un mélange de savon doux liquide et d'eau, rincer à l'eau claire et sécher complètement pour éviter l'accumulation de nettoyant désinfectant.

Désinfecter la garniture avec une solution d'eau de javel standard et d'eau mélangée dans un rapport de 1 pour 10 (10 %) ou de nettoyants à base de chlore (se reporter à la directive actuelle du CDC pour la désinfection et la stérilisation dans des établissements de soins). Puis rincer à l'eau claire et sécher soigneusement.

Pour minimiser le danger dû à l'accumulation de nettoyant désinfectant résiduaire, empêcher les désinfectants de se regrouper à la surface de la garniture. Une fois le temps de contact requis passé, retirer et sécher l'excédent de liquide restant sur la surface.

Votre produit est livré avec un manuel détaillé d'utilisation et d'entretien. Ces informations sont disponibles sur midmark.com dans la bibliothèque technique sous l'onglet Assistance pour votre produit.

Surfaces en métal/en plastique peintes

Chaque semaine, essuyer les surfaces en métal et en plastique peintes de la table à l'aide d'un chiffon doux propre et d'un détergent doux. L'utilisation d'un désinfectant à base de chlore peut endommager la commande manuelle.

Service technique

Si une réparation est nécessaire, contacter votre revendeur Midmark.

Si un entretien est nécessaire, contactez Midmark directement :

É.-U. 844.856.1230 / Canada 937.526.8585 Du lundi au jeudi, de 8 h à 18 h et le vendredi de 8 h à 17 h (HE)

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380 États-Unis
1.800.643.6275
+1.937.526.3662
midmark.com



Guide de référence rapide 626 (-003, -004, -005, et -006) Fauteuil d'examen Barrier-Free®

Numéro de modèle :
Numéro de série :


Renseignements sur le revendeur :

Date d'acquisition :


Couleur de la garniture :

003-10031-02 Rév. AA6 (8/12/22)

Ce guide présente le fonctionnement général du fauteuil. Le guide de l'utilisateur joint fournit des instructions supplémentaires sur le fonctionnement et l'entretien ainsi que des informations sur la conformité réglementaire. Si une réparation est nécessaire, contacter votre revendeur Midmark agréé.

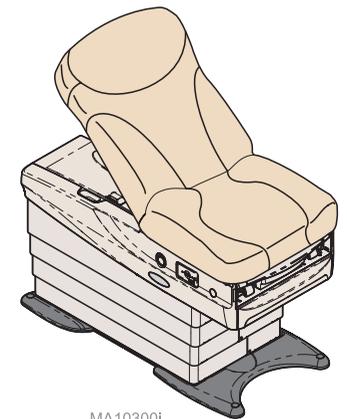

MA103001

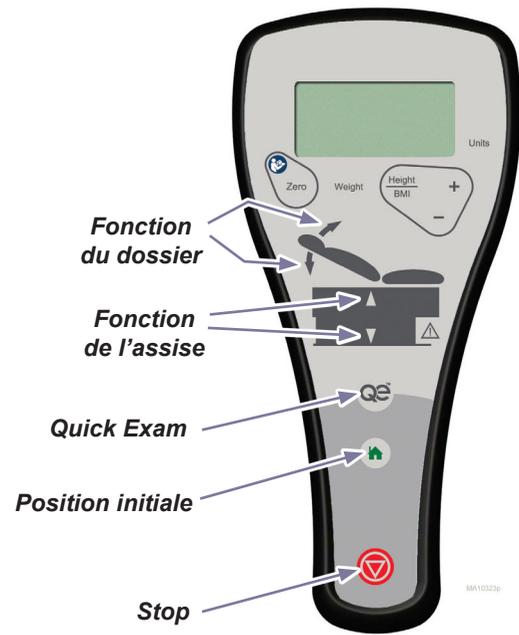

Pour activer les fonctions de l'assise/du dossier...
 Maintenir appuyé le bouton fléché vers le haut ou vers le bas pour la fonction souhaitée.

Remarque : le fauteuil s'arrête automatiquement lorsqu'il atteint sa limite maximale d'élévation et d'abaissement. En cas de dysfonctionnement, appuyer sur le bouton Stop pour arrêter le mouvement.

Pour activer la fonction Position initiale ou Quick Exam®...
 Enfoncer puis relâcher le bouton Position initiale ou Quick Exam.

Remarque : en cas de dysfonctionnement, appuyer sur UN bouton pour arrêter le mouvement.



Pour remettre l'Balance numérique Midmark à zéro...
 Avant de faire asseoir le patient, appuyer brièvement sur le bouton Zéro. Le message « SCALE READY » ; (Balance prête) clignote sur l'écran ; la mise à zéro est terminée et le patient peut être invité à s'asseoir.

Pour peser le patient...
 Lorsque le patient est en position assise, enfoncer puis relâcher le bouton Weight (Poids).

Remarque : pour éviter que les pieds du patient ne touchent le sol, le fauteuil se relève automatiquement à une hauteur de 63,5 cm (25 po.) avant d'afficher le poids.


Pour calculer l'indice de masse corporelle (IMC) du patient...

- Après l'affichage du poids du patient, appuyer brièvement sur le bouton Height/BMI (Taille/IMC).
- Appuyer sur le bouton (+) ou (-) pour augmenter ou diminuer la taille affichée du patient.
- Appuyer à nouveau sur le bouton Height/BMI (Taille/IMC) pour afficher l'IMC du patient.

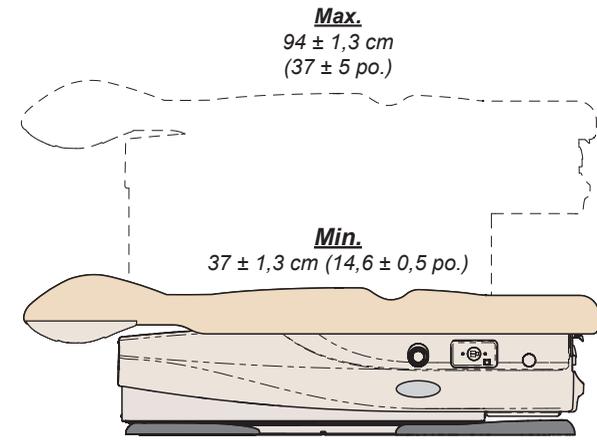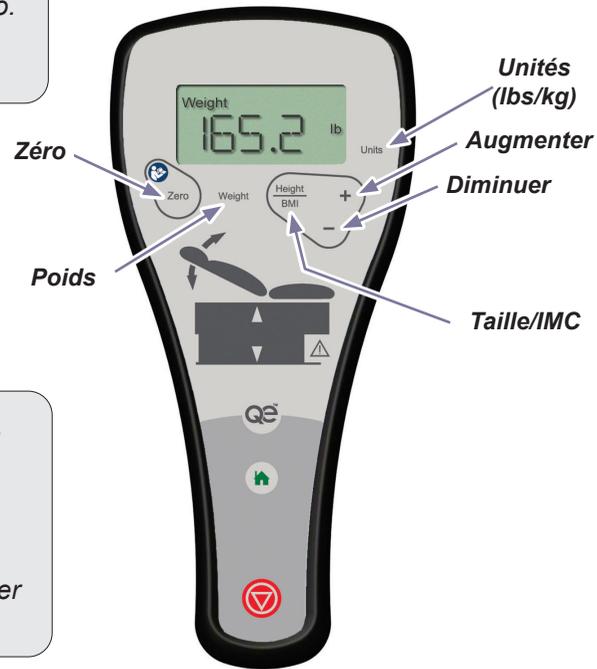

Hauteur Quick Exam
 Programmable
 (définie par l'utilisateur)

Hauteur initiale
 Programmable
 (définie par l'utilisateur)

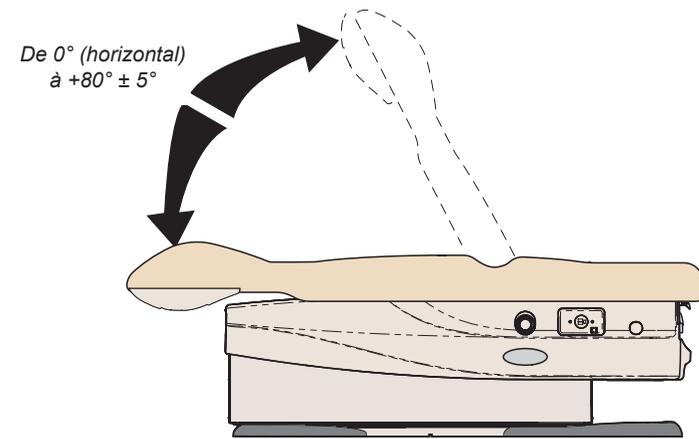

Pour programmer les fonctions Position initiale ou Quick Exam...

- Appuyer sur les boutons Monter/Descendre l'assise pour déplacer l'assise à la hauteur souhaitée.
- Appuyer sur les boutons Monter/Descendre le dossier pour déplacer le dossier à l'angle souhaité.
- Appuyer sur le bouton Stop, puis sur le bouton de position initiale ou Quick Exam, et les maintenir enfoncés simultanément pendant trois à quatre secondes.

Remarque : vous entendrez un signal sonore confirmant l'enregistrement de la nouvelle position.