


### Para encender y apagar el calentador de cajón...

Pulse y suelte el interruptor del calentador de cajón.

Nota: el interruptor se iluminará cuando el calentador esté encendido.

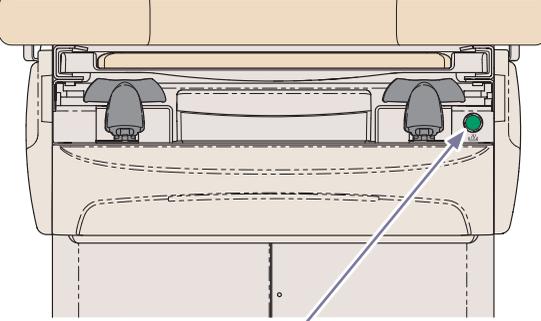


Interruptor del calentador de cajón

MA103011

### Para encender y apagar el calentador de la tapicería...

Pulse y suelte el interruptor del calentador de la tapicería una vez para el ajuste BAJO y dos veces para el ajuste ALTO. Pulse el interruptor del calentador una tercera vez para apagar el calentador de la tapicería.

Nota: el interruptor se iluminará con un verde tenue en el ajuste BAJO y con un verde brillante en el ajuste ALTO.

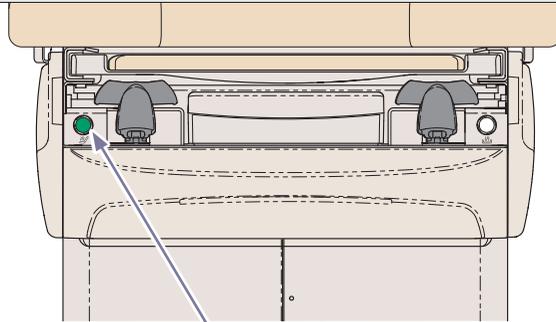

Interruptor del calentador de la tapicería

MA103021

## Mantenimiento

### Revise periódicamente que:

- El cable de alimentación no debe tener daños visibles.
- Todos los elementos de sujeción deben estar colocados y bien apretados.
- Todas las funciones mecánicas deben funcionar correctamente.

### Limpieza

#### Tapicería

Lave la tapicería todas las semanas utilizando una mezcla con un jabón líquido suave y agua, enjuague con agua limpia y seque toda la superficie para eliminar la acumulación de residuos de desinfectante/limpiador.

Desinfecte su tapicería con una solución de lejía común y agua 1:10 (10 %) o productos a base de cloro (consulte las directrices vigentes para la desinfección y esterilización en centros sanitarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). A continuación, enjuague con agua limpia y seque a fondo el material.

Para minimizar la acumulación de residuos de desinfectante/limpiador, no deje que los desinfectantes se acumulen en la superficie de la tapicería. Una vez transcurrido el tiempo de contacto aprobado, retire y seque el exceso de líquido que quede en la superficie.

Con el producto se incluyen instrucciones detalladas de conservación y mantenimiento. Esta información también está disponible en [midmark.com](http://midmark.com) en la biblioteca técnica situada en el apartado «Información del usuario» de su producto.

#### Superficies de metal o plástico pintadas

Limpie semanalmente las superficies de metal o plástico pintadas pasando un paño suave y limpio con limpiadores suaves. El uso de desinfectantes a base de cloro puede provocar daños en el mando de control.

### Contactar con el servicio técnico

Póngase en contacto con su distribuidor Midmark si necesita asistencia técnica.

Póngase en contacto con Midmark directamente si necesita asistencia técnica:

EE. UU. 844.856.1230 / Canadá 937.526.8585

De lunes a jueves de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (ET)

Midmark Corporation  
60 Vista Drive  
Versailles, OH 45380 EE. UU.  
1.800.643.6275  
1.937.526.3662  
[midmark.com](http://midmark.com)



## Guía de consulta rápida 626 (-003, -004, -005, y -006) Sillón de exploración Barrier-Free

Número de modelo:  
Número de serie:


Información del  
distribuidor:

Fecha de compra:

Color de la tapicería:

003-10031-03 Rev AA6 (12/9/22)


Esta guía resume el funcionamiento básico del sillón. La Guía del usuario que se incluye ofrece instrucciones adicionales sobre el funcionamiento y cuidado, así como información sobre el cumplimiento normativo. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Midmark® si necesita asistencia técnica.

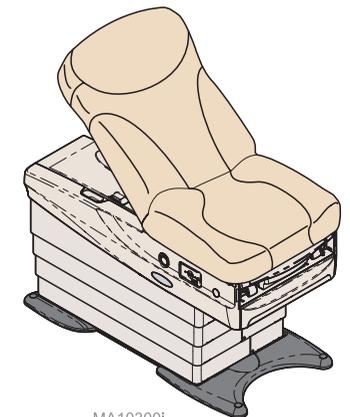

MA103001

## Conexiones de datos

Las conexiones de datos están colocadas en cada lado del sillón y en la parte trasera del mismo.

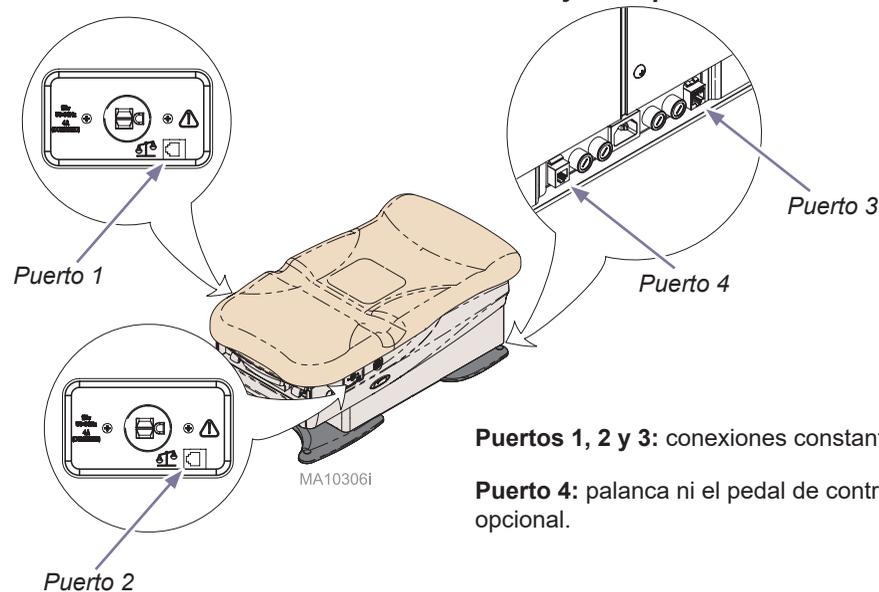

Puertos 1, 2 y 3: conexiones constantes vitales.

Puerto 4: palanca ni el pedal de control por cable opcional.

Style E



**Para accionar las funciones de la base y del respaldo...**  
 Mantenga pulsado el botón de flecha Arriba o Abajo para activar la función deseada.

*Nota:* el sillón se detiene automáticamente al llegar a la altura máxima y la mínima.  
 En caso de funcionamiento incorrecto, pulse el botón Detener para detener el movimiento.

**Para activar la función Inicio o la Quick Exam®...**  
 Pulse y suelte el botón Inicio o Quick Exam.

*Nota:* en caso de funcionamiento incorrecto, pulse CUALQUIER botón para detener el movimiento.

**Para poner la Báscula digital Midmark® a cero...**

Antes de sentar al paciente, pulse y suelte el botón «Zero» (puesta a cero).

En la pantalla parpadeará «SCALE READY» (balanza preparada); se ha completado la tara y el paciente puede sentarse.


**Para medir el peso del paciente...**

Con el paciente sentado, presione y suelte el botón Weight (pesar).

*Nota:* Para evitar que el paciente toque el suelo con los pies, el sillón se elevará automáticamente hasta una altura de sesenta y tres centímetros y medio (veinticinco pulgadas) antes de mostrar el peso.


**Para calcular el IMC del paciente...**

- Una vez mostrado el peso del paciente, pulse y suelte el botón «Height / BMI» (altura / IMC).
- Pulse los botones (+) o (-) para aumentar o disminuir la altura del paciente que aparece en la pantalla.
- Vuelva a pulsar el botón «Height / BMI» (altura / IMC) para mostrar el IMC del paciente.

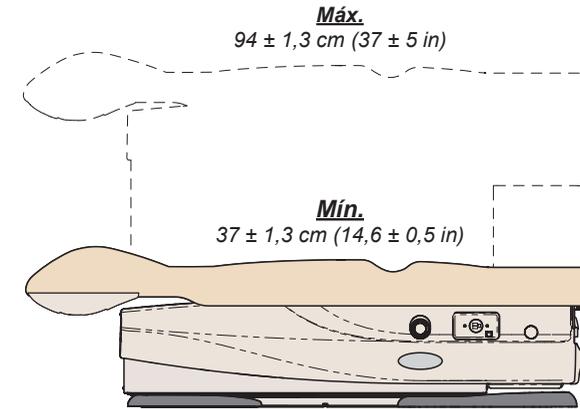

**AlturaQuick Exam**  
 Programable  
 (ajustada por el usuario)

**Altura «Inicio»**  
 Programable  
 (ajustada por el usuario)

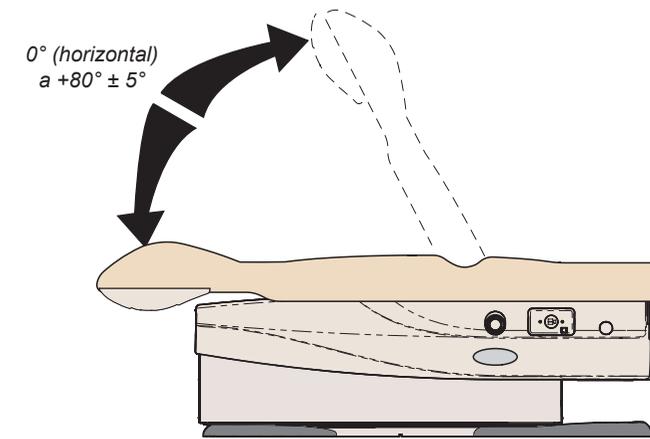

MA10305i

**Para programar las funciones Inicio o Quick Exam ...**

- Pulse el botón Subir/bajar base para mover la base hasta la posición deseada.
- Pulse el botón Subir/bajar respaldo para mover el respaldo hasta la posición deseada.
- Pulse el botón Detener y después el botón Inicio o Quick Exam y manténgalos pulsados de forma simultánea durante tres o cuatro segundos.

*Nota:* escuchará un tono cuando la nueva posición se haya guardado.