


Para elevar la sección del asiento...
Eleve el asiento hasta que el soporte pélvico esté en su sitio.

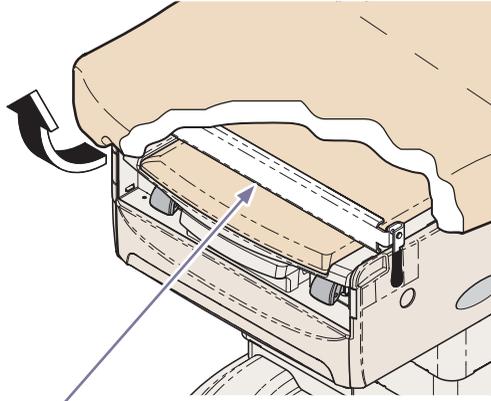

Soporte pélvico

MA10307i

Información del contacto

Contactar con el servicio técnico

Póngase en contacto con su distribuidor Midmark si necesita asistencia técnica.

Póngase en contacto con Midmark directamente si necesita asistencia técnica:

EE. UU. 844.856.1230 / Canadá 937.526.8585
de lunes a jueves de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (ET)

English: Refer to midmark.com
Deutsch: Siehe midmark.com
Français : Référez-vous à midmark.com
Español: Refiera a midmark.com
Dansk: Se midmark.com
Suomi: Katso midmark.com
Italiano: fare riferimento a midmark.com
Svenska: Se midmark.com
Norsk: Se midmark.com
Nederlands: Zie midmark.com
Polski: Patrz midmark.com
Türkçe: midmark.com 'a bakın

Mantenimiento

Revise periódicamente que:

- El cable de alimentación no debe tener daños visibles.
- Los cables de alimentación del pedal de control no deben tener daños visibles.
- Todos los elementos de sujeción deben estar colocados y bien apretados.
- Todas las funciones mecánicas deben funcionar correctamente.

Limpieza

Tapicería

Lave la tapicería todas las semanas utilizando una mezcla con un jabón líquido suave y agua, enjuague con agua limpia y seque toda la superficie para eliminar la acumulación de residuos de desinfectante/limpiador. Desinfecte su tapicería con una solución de lejía común y agua 1:10 (10 %) o productos a base de cloro (consulte las directrices vigentes para la desinfección y esterilización en centros sanitarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). A continuación, enjuague con agua limpia y seque a fondo el material.

Para minimizar la acumulación de residuos de desinfectante/limpiador, no deje que los desinfectantes se acumulen en la superficie de la tapicería. Una vez transcurrido el tiempo de contacto aprobado, retire y seque el exceso de líquido que quede en la superficie.


Con el producto se incluyen instrucciones detalladas de conservación y mantenimiento. Esta información también está disponible en midmark.com en la biblioteca técnica situada en el apartado «Información del usuario» de su producto.

Superficies de metal o plástico pintadas

Limpie semanalmente las superficies de metal o plástico pintadas pasando un paño suave y limpio con limpiadores suaves. El uso de desinfectantes a base de cloro puede provocar daños en el mando de control.

Para volver a colocar la sección del asiento en posición horizontal...

- Levante ligeramente la sección del asiento.
- Gire la manija del soporte pélvico hacia arriba.
- Baje la sección del asiento.

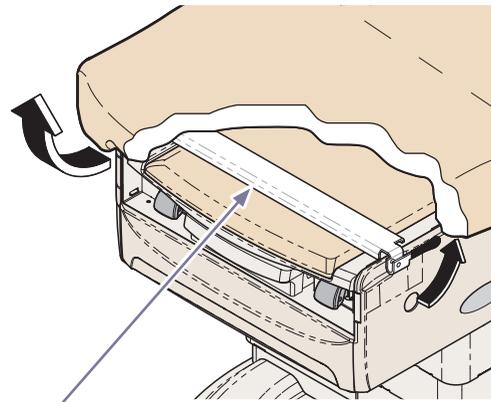

Soporte pélvico

MA10308i

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380 EE. UU.
1.800.643.6275
1.937.526.3662
midmark.com



Guía de consulta rápida 627 (-011)

Sillón de exploración Barrier-Free®

Número de modelo:
Número de serie:


Información del distribuidor:

Fecha de compra:

Color de la tapicería:

003-10032-03 Rev AA5 (1/4/23)

Esta guía resume el funcionamiento básico del sillón. La Guía del usuario que se incluye ofrece instrucciones adicionales sobre el funcionamiento y cuidado, así como información sobre el cumplimiento normativo. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Midmark si necesita asistencia técnica.

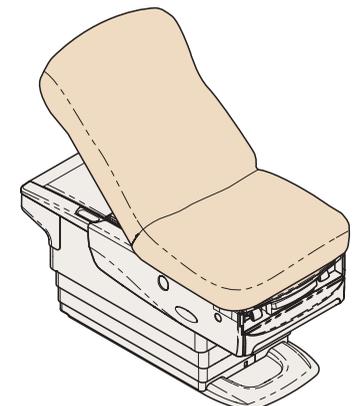



MA10291i

Nota

El sillón se detiene automáticamente al llegar a la altura máxima y la mínima.

Para subir o bajar el sillón...

Mantenga presionado el botón adecuado.

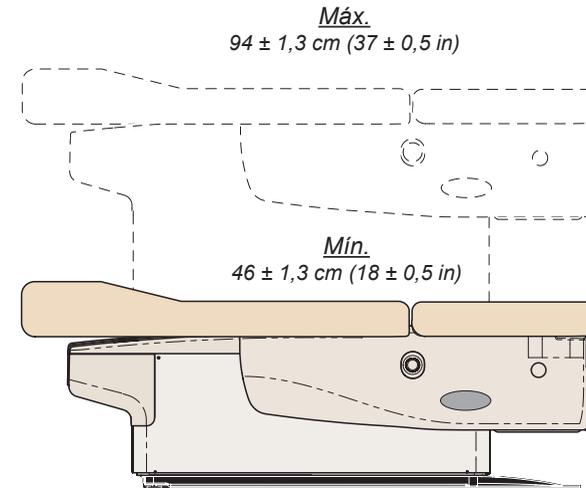
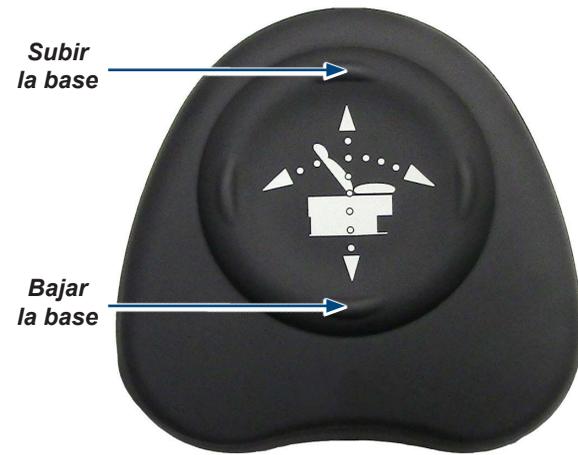


Nota

La sección del respaldo se detiene automáticamente en el límite superior e inferior de su desplazamiento.

Para colocar la sección del respaldo...

Mantenga presionado el botón adecuado.

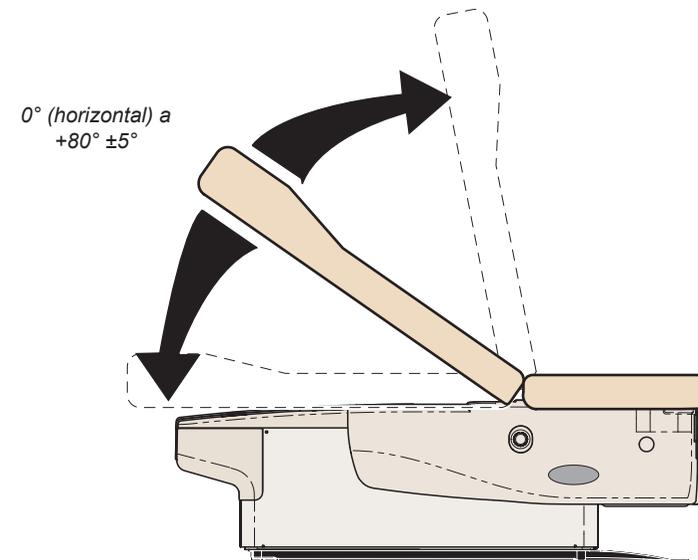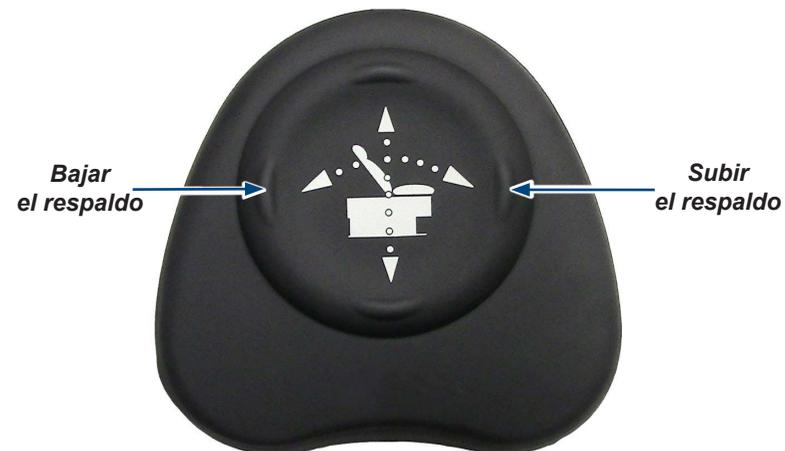

MA10293i