


Om het zitgedeelte te verhogen,

handelt u als volgt:

Til de zitting op tot de bekkensteun op zijn plaats komt.

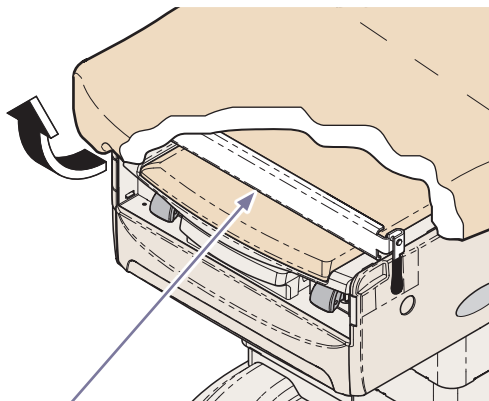


Bekkensteun

MA103071

Om het zitgedeelte weer in de platte positie te brengen, handelt u als volgt:

- Til het zitgedeelte enigszins op.
- Draai de hendel van de bekkensteun omhoog.
- Breng het zitgedeelte omlaag.

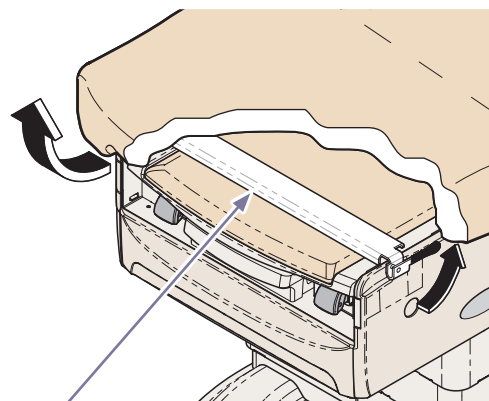

Bekkensteun

MA103081

Style E

Contactgegevens

Contact opnemen met de onderhoudsdienst

Voor reparatie en onderhoud kunt u contact opnemen met de Midmark-distributeur.

Als er service nodig is, neem dan direct contact op met Midmark:

VS 844.856.1230 / Canada 937.526.8585
maandag-donderdag 8:00 tot 18:00 uur en vrijdag 8:00 tot 17:00 uur (ET)

English: Refer to midmark.com

Deutsch: Siehe midmark.com

Français : Référez-vous à midmark.com

Español: Refiera a midmark.com

Dansk: Se midmark.com

Suomi: Katso midmark.com

Italiano: fare riferimento a midmark.com

Svenska: Se midmark.com

Norsk: Se midmark.com

Nederlands: Zie midmark.com

Polski: Patrz midmark.com

Türkçe: midmark.com 'a bakın

Onderhoud

Inspecteer periodiek de volgende onderdelen:

- De stroomkabel mag niet zichtbaar beschadigd zijn.
- De voetregelaar mag niet zichtbaar beschadigd zijn.
- Alle bevestigingsmiddelen moeten aanwezig zijn en goed vastzitten.
- Alle mechanische functies dienen correct te werken

Reiniging

Bekleding

Reinig de bekleding elke week met een mengsel van milde vloeibare zeep en water, spoel de bekleding vervolgens af met schoon water en droog deze volledig af om te voorkomen dat er zich desinfecterend reinigingsmiddel op de bekleding kan ophopen.

Ontsmet de bekleding met een oplossing van standaardbleekmiddel en water in een verhouding van 1 op 10 (10%) of met een op chloor gebaseerd reinigingsmiddel (raadpleeg de geldende richtlijnen voor desinfectie en sterilisatie in instellingen voor gezondheidszorg). Spoel de bekleding vervolgens af met schoon water en droog het materiaal daarna grondig af.

Om het risico van schade als gevolg van het opeenhopen van restanten van desinfecterend reinigingsmiddel zo gering mogelijk te houden, moet worden voorkomen dat er zich op de bekleding geen plasjes desinfectiemiddel vormen. Zodra de voorgeschreven contactduur is bereikt, dient overtollig vloeistof op de bekleding te worden verwijderd en dient de bekleding te worden afgedroogd.

Met uw product zijn gedetailleerde instructies voor verzorging en onderhoud meegeleverd. Deze informatie vindt u ook op midmark.com in de Technische bibliotheek onder het tabblad Gebruikersinformatie voor uw product.

Gelakte metalen/plastic oppervlakken

Reinig gelakte metalen en plastic oppervlakken wekelijks met een schone, zachte doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik van op chloor gebaseerd desinfectiemiddel kan de handregelaar beschadigen.

midmark®

Beknopte naslaghandleiding

627 (-011)

Barrier-Free®-onderzoeksstoel

Modelnummer:

Serienummer:


Informatie
distributeur:

Datum van
aankoop:

Kleur bekleding:

003-10032-10 Rev. AA5 (1/4/23)

In deze handleiding wordt de basiswerking van de stoel uitgelegd. De bijgesloten gebruikershandleiding geeft aanvullende instructies over de bediening en verzorging en informatie over naleving van wet- en regelgeving. Voor reparatie en onderhoud kunt u contact opnemen met de geautoriseerde Midmark-distributeur.

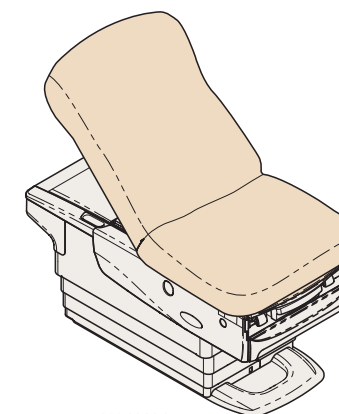

MA102911

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380 VS
1.800.643.6275
+1.937.526.3662
midmark.com

midmark®


Opmerking

De stoel wordt op de maximale en minimale hoogte automatisch stopgezet.

Om de stoel omhoog of omlaag te brengen, handelt u als volgt:
Druk op de knop Omhoog of Omlaag en houdt deze ingedrukt.


Basis
omhoog

Basis
omlaag

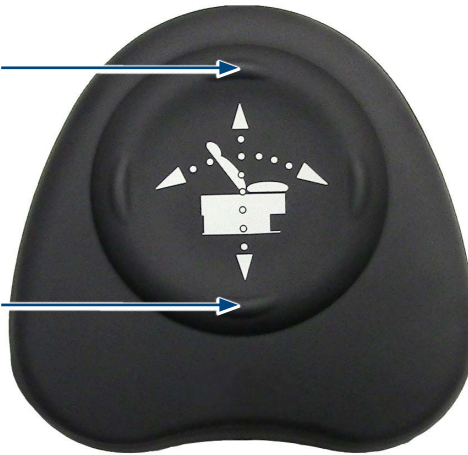

Max.
 $94 \pm 1,3 \text{ cm}$ ($37 \pm 0,5 \text{ inch}$)

Min.
 $46 \pm 1,3 \text{ cm}$ ($18 \pm 0,5 \text{ inch}$)

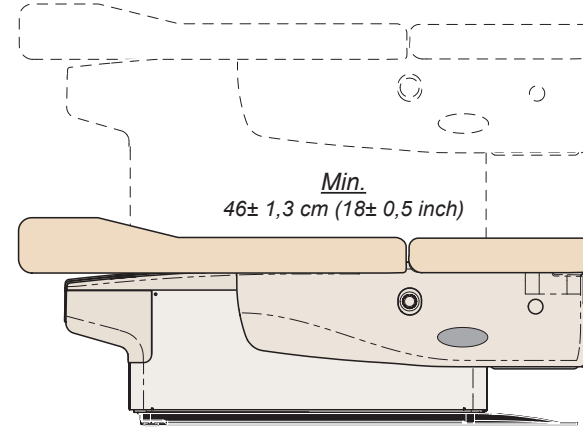


Opmerking

Het ruggedeelte wordt automatisch stopgezet zodra de hoogste of laagste positie van het instelbereik is bereikt.


Om het ruggedeelte in de gewenste positie te brengen, handelt u als volgt:
Druk op de knop Omhoog of Omlaag en houdt deze ingedrukt.

Rugleuning
omlaag

Rugleuning
omhoog

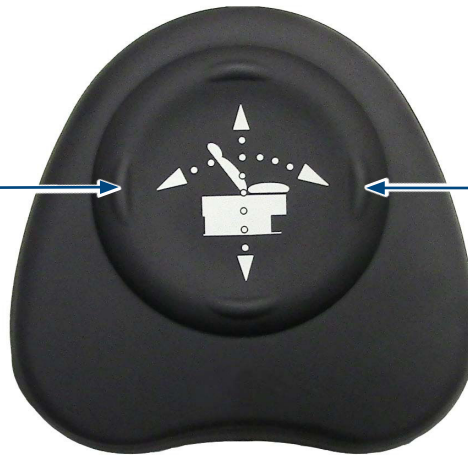

0° (horizontaal)
tot
 $+80^\circ \pm 5^\circ$

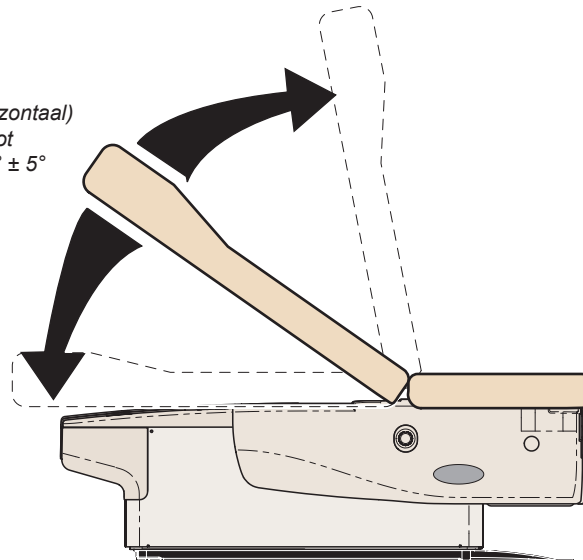

MA10293i