


Aby unieść sekcję siedziska...

podnosić siedzisko, aż podpora miednicy opadnie, ustawiając się we właściwej pozycji.

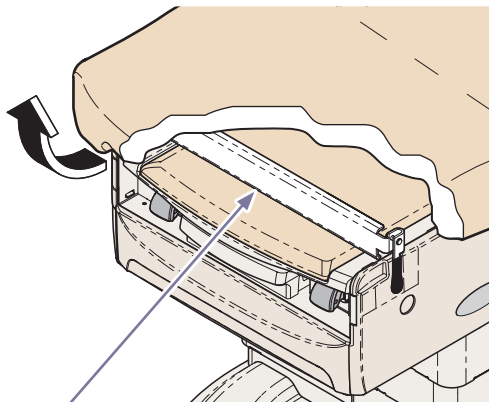


Podpora miednicy

MA10307i

Aby przywrócić płaską pozycję sekcji siedziska...

- A) Lekko unieść sekcję siedziska.
- B) Odchylić uchwyt podpory miednicy w górę.
- C) Opuścić sekcję siedziska.

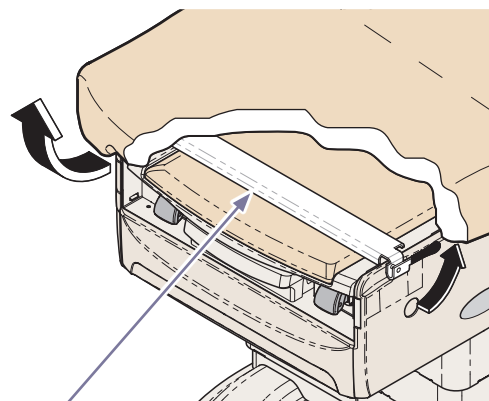

Podpora miednicy

MA10308i

Informacje kontaktowe

Wzywanie serwisu

W razie konieczności serwisowania skontaktować się ze sprzedawcą firmy Midmark.

Jeśli wymagany jest serwis, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Midmark:

USA 844.856.1230 / Kanada 937.526.8585

Od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 18:00 Piątek od 8:00 do 17:00 (ET)

English: Refer to midmark.com

Deutsch: Siehe midmark.com

Français : Référez-vous à midmark.com

Español: Refiera a midmark.com

Dansk: Se midmark.com

Suomi: Katso midmark.com

Italiano: fare riferimento a midmark.com

Svenska: Se midmark.com

Norsk: Se midmark.com

Nederlands: Zie midmark.com

Polski: Patrz midmark.com

Türkçe: midmark.com 'a bakın

Konserwacja

Okresowo sprawdzać następujące elementy:

- Kabel zasilający nie może mieć żadnych widocznych uszkodzeń.
- Kabel sterownika nożnego nie może mieć żadnych widocznych uszkodzeń.
- Wszystkie mocowania muszą być założone i zaciśnięte.
- Wszystkie funkcje mechaniczne powinny działać.

Czyszczenie

Tapicerka

Myć tapicerkę raz w tygodniu mieszaniną łagodnego mydła w płynie i wody, spłukać czystą wodą i całkowicie wysuszyć, aby usunąć nagromadzony środek dezynfekcyjny.

Dezynfekować tapicerkę roztworem standardowego wybielacza wymieszanego z wodą w stosunku 1:10 (10%) lub środkami czyszczącymi na bazie chloru (sprawdzić najnowsze wytyczne CDC dotyczące dezynfekcji i sterylizacji w placówkach opieki zdrowotnej). Następnie spłukać czystą wodą i dokładnie wysuszyć materiał.

Aby zminimalizować uszkodzenia spowodowane przez nagromadzone pozostałości środka dezynfekcyjnego, nie dopuszczać do zbierania się takich środków na powierzchni tapicerki. Po odczekaniu zatwierdzonego czasu kontaktu usunąć i wysuszyć nadmiar płynu pozostający na powierzchni.

Wraz z produktem dostarczane są szczegółowe instrukcje dbania o sprzęt i konserwacji. Te informacje są też dostępne na stronie midmark.com w sekcji Technical library (Biblioteka techniczna) w zakładce User Information (Informacje dla użytkownika) dla danego produktu.

Malowane powierzchnie metalowe / z tworzyw sztucznych

Malowane powierzchnie metalowe / z tworzyw sztucznych czyścić raz w tygodniu czystą, miękką ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym. Środki dezynfekcyjne na bazie chloru mogą spowodować uszkodzenia sterownika ręcznego.

midmark®

**Krótki przewodnik
627 (-011)**

Fotel diagnostyczny Barrier-Free®

Numer modelu:

Numer seryjny:


Informacje
o sprzedawcy:

Data zakupu:

Kolor tapicerki:

003-10032-18 ver. AA5 (1/4/23)

Niniejszy przewodnik opisuje podstawy obsługi fotela. Załączona instrukcja użytkownika zawiera dodatkowe wskazówki dotyczące obsługi i utrzymania urządzenia oraz informacje o zgodności z przepisami. W razie konieczności serwisowania skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Midmark.

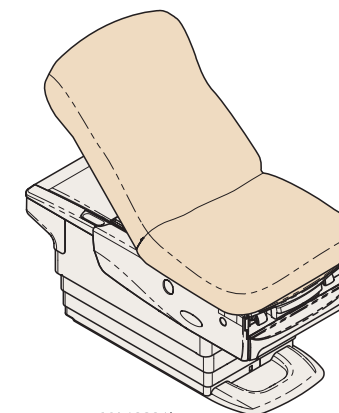

MA10291i

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380 Stany Zjednoczone
1.800.643.6275
+1.937.526.3662
midmark.com

midmark®


Uwaga

Fotel automatycznie zatrzymuje się na maksymalnej i minimalnej wysokości.

Aby przemieszczać fotel w górę lub w dół...
nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk.

Podnoszenie
podstawy

Opuszczanie
podstawy

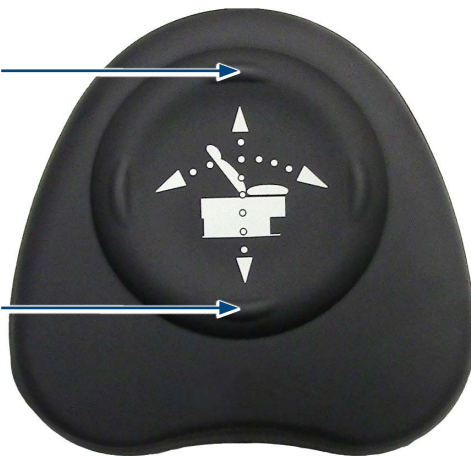
**Uwaga**

Sekcja oparcia automatycznie zatrzymuje się na górze i dole swojego toru ruchu.

Aby ustawić sekcję oparcia...
nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk.


Opuszczanie
oparcia)

Podnoszenie
oparcia)

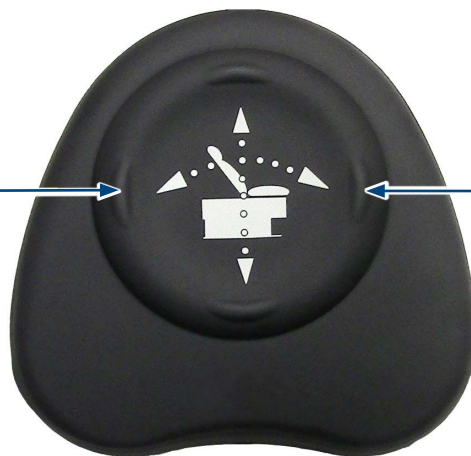


Maks.
 $94 \pm 1,3 \text{ cm } (37 \pm 0,5'')$

Min.
 $46 \pm 1,3 \text{ cm } (18 \pm 0,5'')$

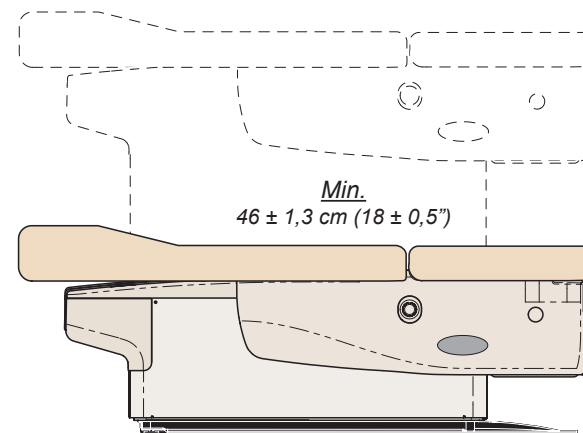

0° (w poziomie) do
 $+80^\circ \pm 5^\circ$

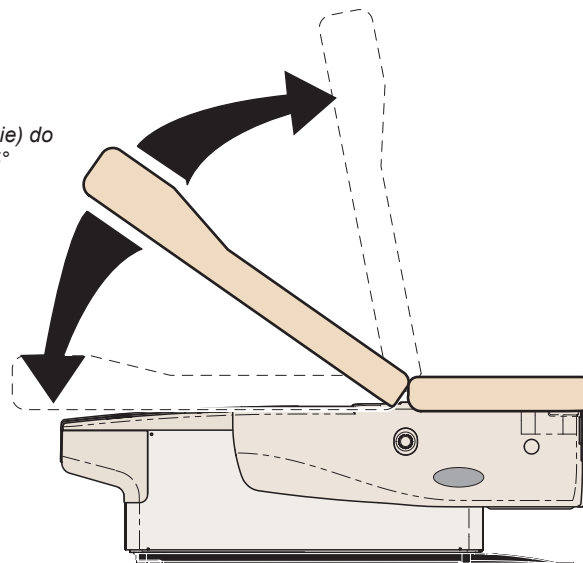

MA10293i