


Informations de contact

Pour élever l'assise...

Relever l'assise jusqu'à ce que le support du bassin s'encliquète en place.

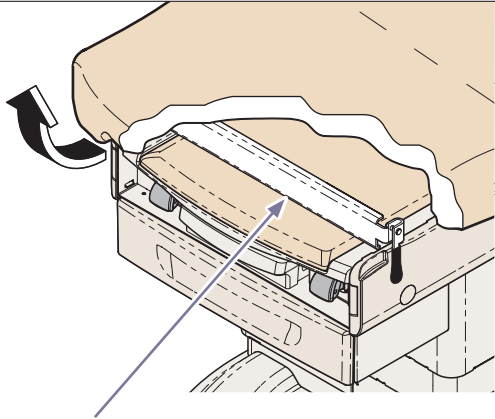


Support du bassin

MA10514i

Pour remettre l'assise à plat...

- A) Soulever l'assise légèrement.
- B) Faire pivoter la poignée du support du bassin vers le haut.
- C) Rabaissier l'assise.

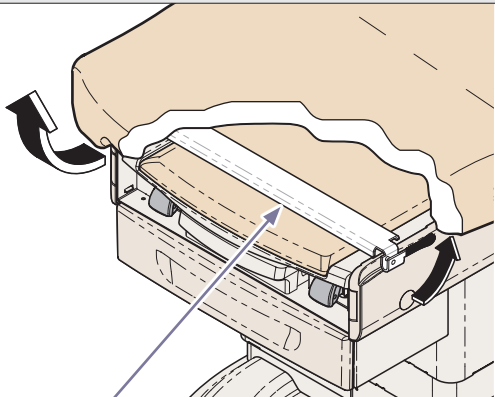

Support du bassin

MA10515i

Service technique

Si une réparation est nécessaire, contacter votre revendeur Midmark.

Si un entretien est nécessaire, contactez Midmark directement :

É.-U. 844.856.1230 / Canada 937.526.8585

Du lundi au jeudi, de 8 h à 18 h

et le vendredi de 8 h à 17 h (HE)

English: Refer to midmark.com

Deutsch: Siehe midmark.com

Français : Référez-vous à midmark.com

Español: Refiera a midmark.com

Dansk: Se midmark.com

Suomi: Katso midmark.com

Italiano: fare riferimento a midmark.com

Svenska: Se midmark.com

Norsk: Se midmark.com

Nederlands: Zie midmark.com

Polski: Patrz midmark.com

Türkçe: midmark.com 'a bakın

Entretien

Examinez régulièrement les points suivants :

- Le cordon d'alimentation ne doit présenter aucun dommage visible.
- Le cordon d'alimentation de la pédale de commande ne doit présenter aucun dommage visible.
- Toutes les fixations doivent être en place et bien attachées.
- Tous les dispositifs mécaniques doivent fonctionner.

Nettoyage

Garniture

Laver la garniture toutes les semaines avec un mélange de savon doux liquide et d'eau, rincer à l'eau claire et sécher complètement pour éviter l'accumulation de nettoyant désinfectant.

Désinfecter la garniture avec une solution d'eau de javel standard et d'eau mélangée dans un rapport de 1 pour 10 (10 %) ou de nettoyants à base de chlore (se reporter à la directive actuelle du CDC pour la désinfection et la stérilisation dans des établissements de soins). Puis rincer à l'eau claire et sécher soigneusement.

Pour minimiser le danger dû à l'accumulation de nettoyant désinfectant résiduaire, empêcher les désinfectants de se regrouper à la surface de la garniture. Une fois le temps de contact requis passé, retirer et sécher l'excédent de liquide restant sur la surface.

Votre produit est livré avec un manuel détaillé d'utilisation et d'entretien. Ces informations sont disponibles sur midmark.com dans la bibliothèque technique sous l'onglet Assistance pour votre produit.

Surfaces en métal/en plastique peintes

Chaque semaine, essuyer les surfaces en métal et en plastique peintes de la table à l'aide d'un chiffon doux propre et d'un détergent doux. L'utilisation d'un désinfectant à base de chlore peut endommager la commande manuelle.

Ritter®

Guide de référence rapide 224 (-011)

Fauteuil d'examen Barrier-Free®

Numéro de modèle :

Numéro de série :

Renseignements

sur le revendeur :


Date d'acquisition :

Couleur de la

garniture :

003-10137-02 Rév. AA5 (5/23/23)

Ce guide présente le fonctionnement général du fauteuil. Le guide de l'utilisateur joint fournit des instructions supplémentaires sur le fonctionnement et l'entretien ainsi que des informations sur la conformité réglementaire. Si une réparation est nécessaire, contacter votre revendeur Midmark agréé.

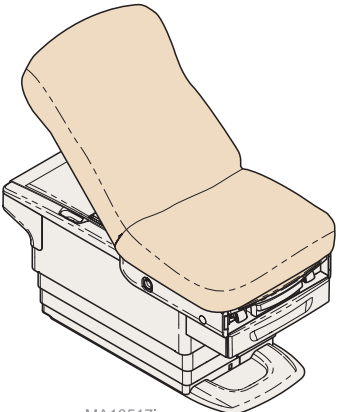

MA10517i

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380
États-Unis
1.800.643.6275
+1.937.526.3662
midmark.com




Remarque

Le fauteuil s'arrête automatiquement lorsqu'il atteint sa limite maximale de levage et d'abaissement.

Pour relever ou abaisser le fauteuil...


Maintenir enfoncé le bouton approprié.

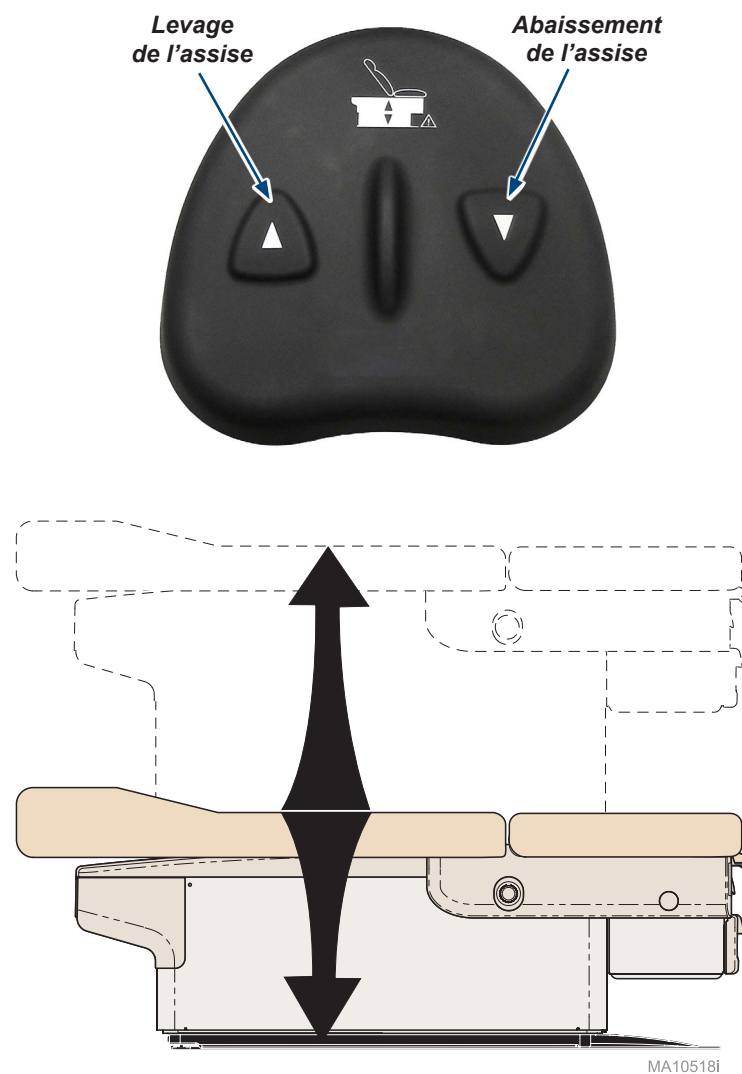

MA10518i

Pour positionner le dossier 224...

- A) Tout en maintenant le dossier en place, serrer la poignée de relâchement du dossier (d'un côté ou de l'autre de la table).
- B) Positionner le dossier.
- C) Relâcher la poignée pour bloquer le dossier.

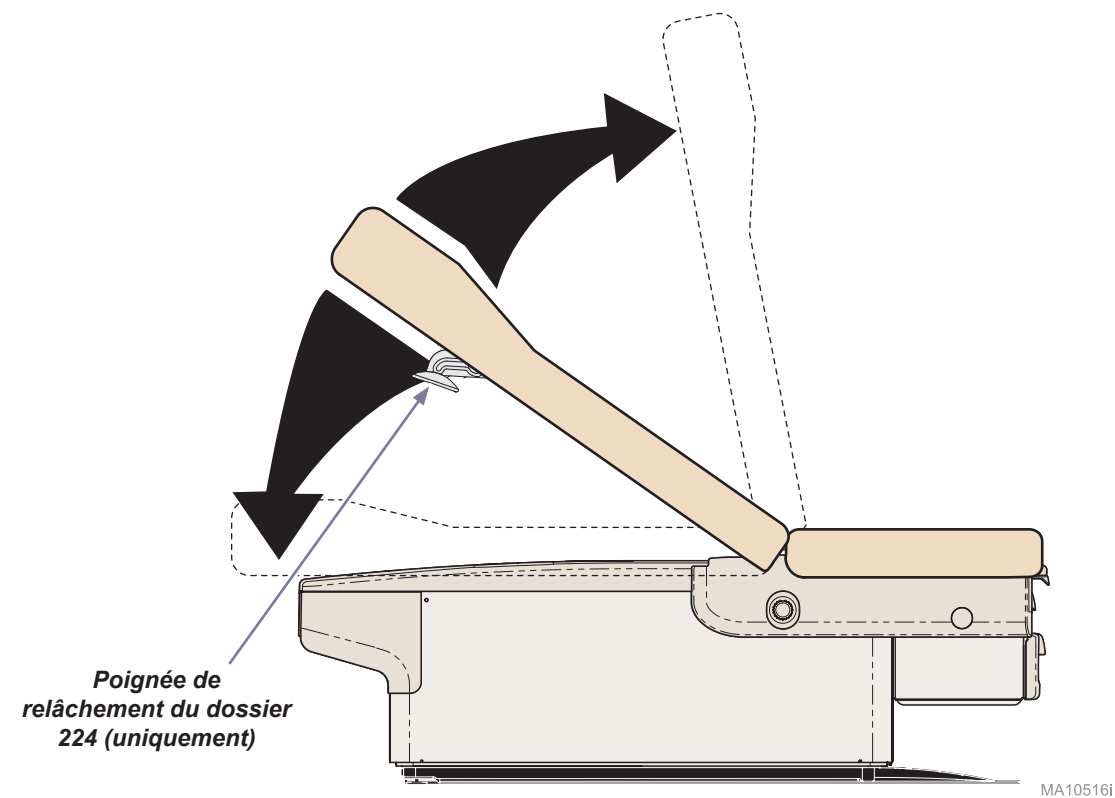

MA10516i