


Para elevar la sección del asiento...
Eleve el asiento hasta que el soporte pélvico esté en su sitio.

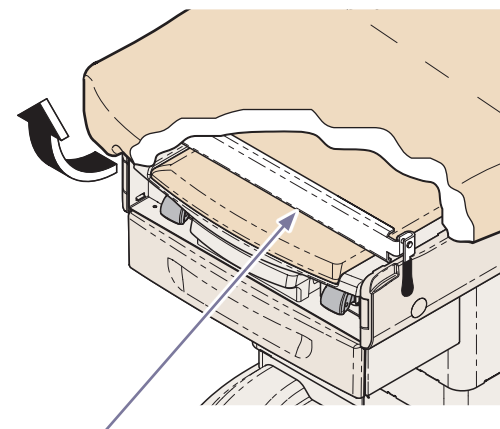


Soporte pélvico

MA10514i

Para volver a colocar la sección del asiento en posición horizontal...

- A) Levante ligeramente la sección del asiento.
- B) Gire la manija del soporte pélvico hacia arriba.
- C) Baje la sección del asiento.

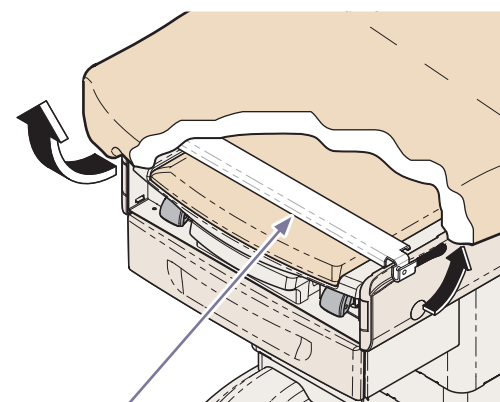

Soporte pélvico

MA10515i

Información del contacto

Contactar con el servicio técnico

Póngase en contacto con su distribuidor Midmark si necesita asistencia técnica.

Póngase en contacto con Midmark directamente si necesita asistencia técnica:

EE. UU. 844.856.1230 / Canadá 937.526.8585

de lunes a jueves de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (ET)

English: Refer to midmark.com

Deutsch: Siehe midmark.com

Français : Réferez-vous à midmark.com

Español: Refiera a midmark.com

Dansk: Se midmark.com

Suomi: Katso midmark.com

Italiano: fare riferimento a midmark.com

Svenska: Se midmark.com

Norsk: Se midmark.com

Nederlands: Zie midmark.com

Polski: Patrz midmark.com

Türkçe: midmark.com 'a bakın

Mantenimiento

Revise periódicamente que:

- El cable de alimentación no debe tener daños visibles.
- Los cables de alimentación del pedal de control no deben tener daños visibles.
- Todos los elementos de sujeción deben estar colocados y bien apretados.
- Todas las funciones mecánicas deben funcionar correctamente.

Limpieza

Tapicería

Lave la tapicería todas las semanas utilizando una mezcla con un jabón líquido suave y agua, enjuague con agua limpia y seque toda la superficie para eliminar la acumulación de residuos de desinfectante/limpiador. Desinfecte su tapicería con una solución de lejía común y agua 1:10 (10 %) o productos a base de cloro (consulte las directrices vigentes para la desinfección y esterilización en centros sanitarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). A continuación, enjuague con agua limpia y seque a fondo el material.

Para minimizar la acumulación de residuos de desinfectante/limpiador, no deje que los desinfectantes se acumulen en la superficie de la tapicería. Una vez transcurrido el tiempo de contacto aprobado, retire y seque el exceso de líquido que quede en la superficie.

Con el producto se incluyen instrucciones detalladas de conservación y mantenimiento. Esta información también está disponible en midmark.com en la biblioteca técnica situada en el apartado «Información del usuario» de su producto.

Superficies de metal o plástico pintadas

Limpie semanalmente las superficies de metal o plástico pintadas pasando un paño suave y limpio con limpiadores suaves. El uso de desinfectantes a base de cloro puede provocar daños en el mando de control.

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380 EE. UU.
1.800.643.6275
1.937.526.3662
midmark.com



Ritter®

Guía de consulta rápida
224 (-011)

Sillón de exploración Barrier-Free®

Número de modelo:

Número de serie:


Información del
distribuidor:

Fecha de compra:

Color de la tapicería:

003-10137-03 Rev AA5 (5/24/23)

Esta guía resume el funcionamiento básico del sillón. La Guía del usuario que se incluye ofrece instrucciones adicionales sobre el funcionamiento y cuidado, así como información sobre el cumplimiento normativo. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Midmark si necesita asistencia técnica.

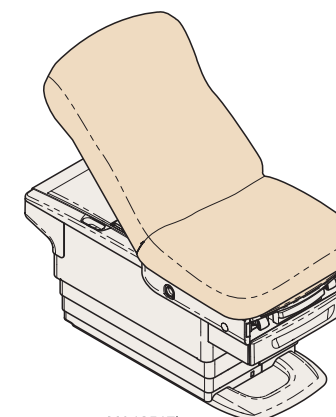


MA10517i

Nota

El sillón se detiene automáticamente al llegar a la altura máxima y la mínima.

Para subir o bajar el sillón...

Mantenga presionado el botón adecuado.

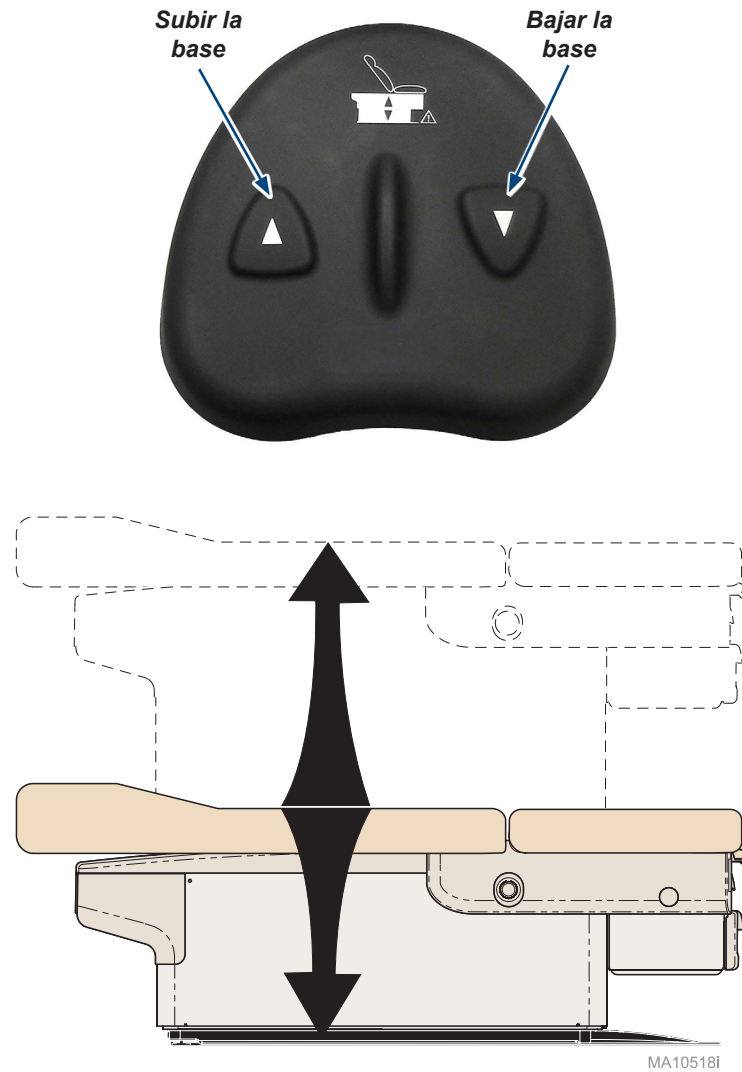**Para colocar la sección del respaldo 224...**

- A) Mientras sostiene la sección del respaldo en su sitio, apriete la manilla de desbloqueo del respaldo (a cualquier lado).
- B) Mueva la sección del respaldo.
- C) Suelte la manilla para fijar la sección del respaldo en su sitio.

