


Für Modelle:

(222 ,223, 622, 623 und 625)
(230, 630, 631-001, 641 und 647)
(224, 225, 626 und 627)
(244)

Hinweis

Für zusätzliche Sprachen siehe technicallibrary.midmark.com

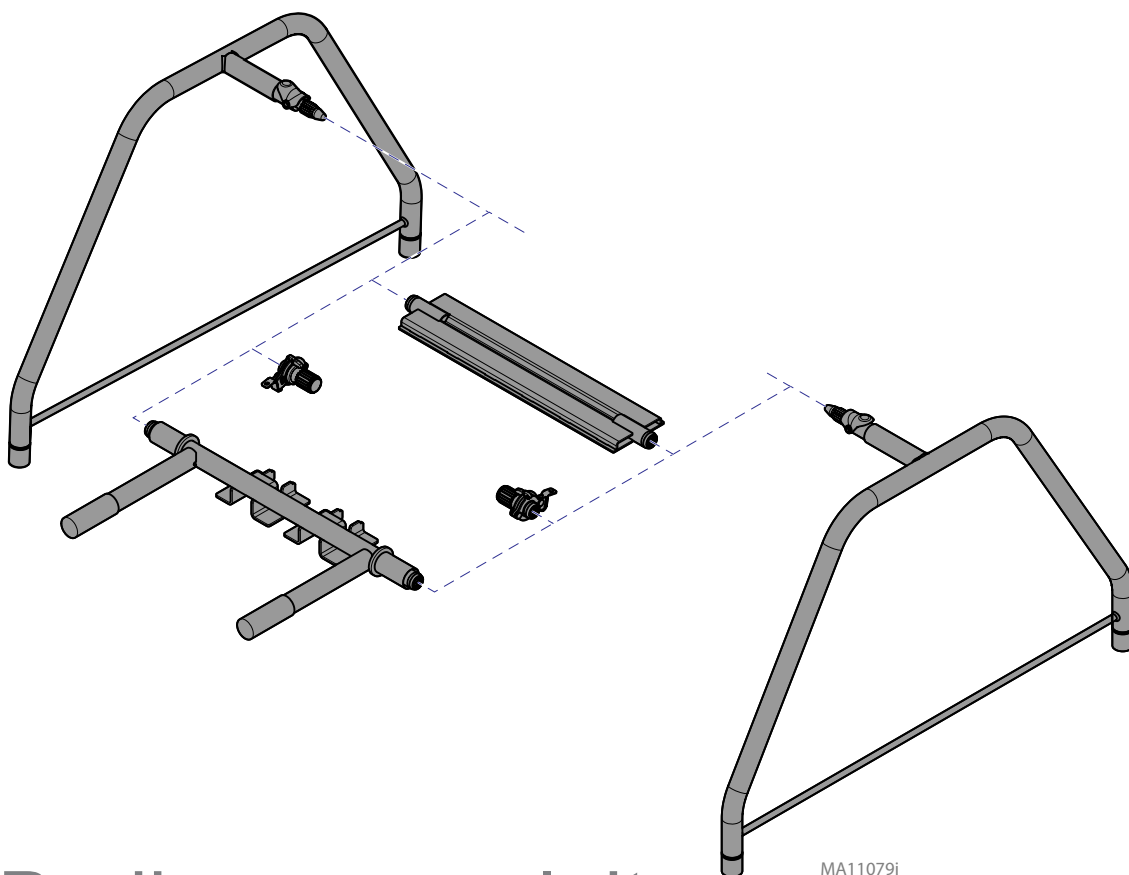

MA11079i

Bedienungsanleitung

Style P

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

<u>Wichtige Informationen</u>	3
<u>Sicherheitshinweise</u>	3
<u>Sicherheitssymbole</u>	3
<u>Versandsymbole</u>	3
<u>Transport- und Lagerbedingungen</u>	3
<u>Zweckbestimmung</u>	4
<u>Montagehilfswerkzeug: Warn- und Vorsichtshinweise</u>	4

Bedienung

<u>Modelle 224, 225, 626 und 627</u>	5
<u>Modelle 222, 223, 622, 623 und 625</u>	6
<u>Modelle 230, 630(-001 bis -009), 641 und 647</u>	7
<u>Modell 244, 630(-010 bis -013) (-020 bis -023) und 631-001</u>	8

Wartung

<u>Teileliste</u>	9
-------------------------	---

Garantieinformationen

<u>Eingeschränkte Garantie</u>	10
--------------------------------------	----

Wichtige Informationen

Diese Symbole sind möglicherweise am Gerät und/oder in den Anleitungen vorhanden.

Sicherheitshinweise

Midmark liegt vor allem daran, dass dieses Gerät so betrieben und gewartet wird, dass die Sicherheit der Benutzer jederzeit gewährleistet ist. Um eine sichere und verlässliche Bedienung zu garantieren, sollten Sie:

- Diese Anleitung lesen und verstehen, bevor Sie das Montagehilfswerkzeug bedienen.
- Sicherstellen, dass das entsprechende Personal mit dem Inhalt dieser Anleitung vertraut gemacht wurde.

Sicherheitssymbole



WARNING

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann.



Vorsicht

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann. Das Symbol kann auch auf unsichere Handlungsweisen aufmerksam machen.



Gerätewarnung

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann.

Versandsymbole



Korrekte Ausrichtung
beim Versand



Vorsicht vor
Versandschäden



Vor Feuchtigkeit
schützen



Hersteller

Transport- und Lagerbedingungen

Umgebungstemperaturbereich –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Luftdruck 500 hPa bis 1060 hPa

Wichtige Informationen

Zweckbestimmung

Das Montagehilfswerkzeug bietet eine Methode zum Anheben von Patientenstühlen von einer Transportpalette oder einem Möbelroller für eine einfachere Montage.

Montagehilfswerkzeug: Warn- und Vorsichtshinweise



WARNUNG

- *Nur mit unterstützten Stühlen von Midmark benutzen.*
- *Verletzungsgefahr, wenn die Armlehnen vor der Benutzung nicht vollständig in die Adapterplatte eingerastet sind.*
- *Nur auf einer sauberen, ebenen Fläche benutzen.*
- *Während der Benutzung nicht am Stuhl lehnen oder auf ihm sitzen.*
- *Nicht benutzen, wenn das Montagehilfswerkzeug oder der Stuhl beschädigt ist.*
- *Gefahr schwerer Verletzungen oder Lebensgefahr, wenn die Last über Personen hängt.*
- *Stuhl nicht warten, während er angehoben wird.*
- *Während der Benutzung keine Gegenstände auf den Stuhl stellen.*
- *Nicht benutzen, während sich ein Patient auf dem Stuhl befindet.*
- *Etiketten nicht entfernen, verdecken, beschädigen oder auf andere Weise unlesbar machen.*
- *Maximale Last: 250 kg (550 lbs).*





Vorsicht

Sicherstellen, dass sich der Rollwagen mittig unter dem Stuhl befindet.

Bedienung

Modelle 224, 225, 626 und 627

Schritt 1: Keilwellenadapter auf die Beine des Montagehilfswerkzeugs schieben.

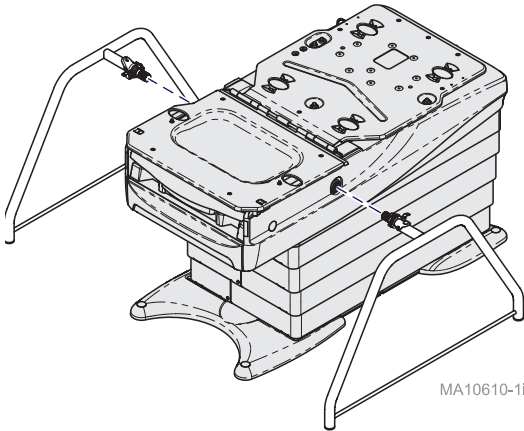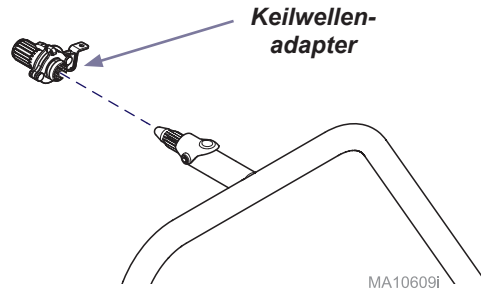


Schritt 2:

- A) „Stuhl auf“ an der Handbedienung drücken, um den Stuhl höher zu stellen.
- B) Beine des Montagehilfswerkzeugs in die Keilwellenhalterungen einfügen.
- C) „Stuhl ab“ an der Handbedienung drücken, um den Stuhlsockel auf die gewünschte Höhe anzuheben.

Entfernen der Beine des Montagehilfswerkzeugs ...

- A) „Stuhl auf“ an der Handbedienung drücken, um den Stuhlsockel auf den Boden oder den Rollwagen abzusenken.
- B) Auf den Freigabehebel des Keilwellenadapters anheben.
- C) Beine des Montagehilfswerkzeugs von den Keilwellenhalterungen schieben.

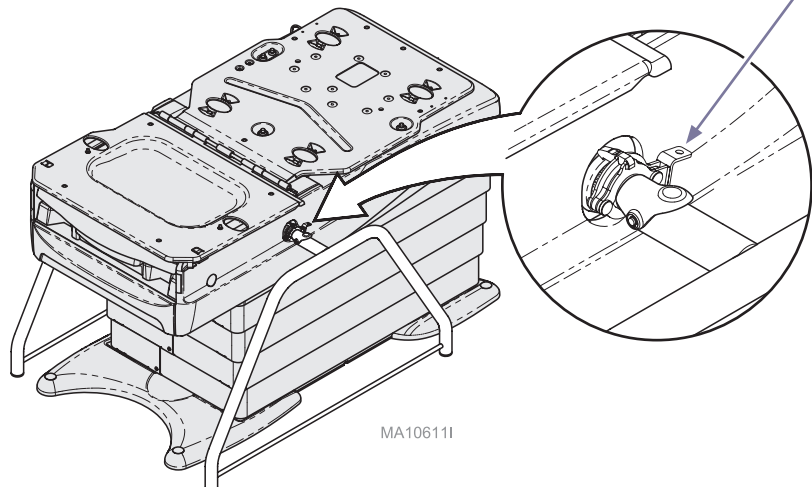

Bedienung

Modelle 222, 223, 622, 623 und 625




Gerätewarnung

Montagehilfswerkzeug nur an für diese Modelle bestimmtem Querträger anbringen. Zur Vermeidung von Beschädigungen NICHT direkt an den Keilwellen des Stuhls anbringen.




Schritt 1:

- A) Sitzfläche anheben.
- B) Querträger des Untersuchungsstuhls an Scharnierlippe einhaken.

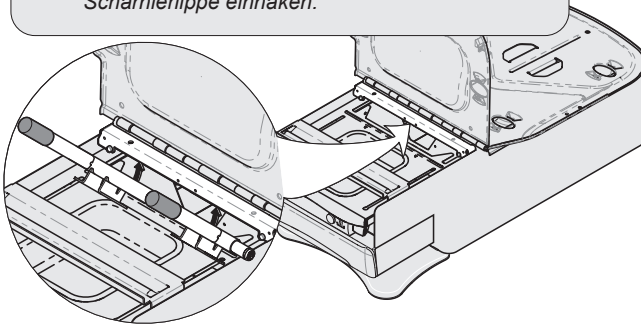

Schritt 2: Querträger des Untersuchungsstuhls flach auf die Metallquerstange legen.

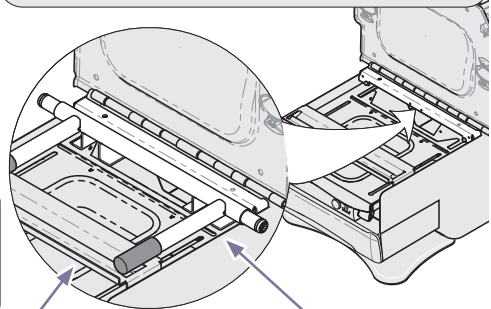


Metall-
querstange


Querträger des
Untersuchungsstuhls

Schritt 3:

- A) „Sockel auf“ an der Handbedienung drücken, um den Stuhl höher zu stellen.
- B) Montagehilfswerkzeug in die Keilwellenhalterungen einfügen.

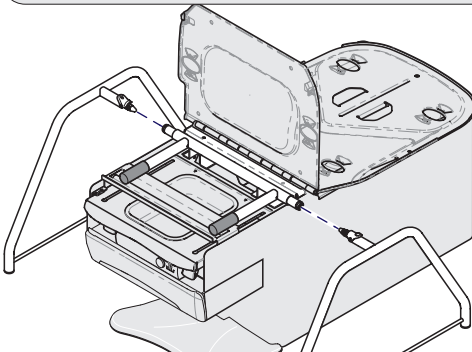

Schritt 4: „Sockel ab“ an der Handbedienung drücken, um den Stuhlsockel auf die gewünschte Höhe anzuheben.

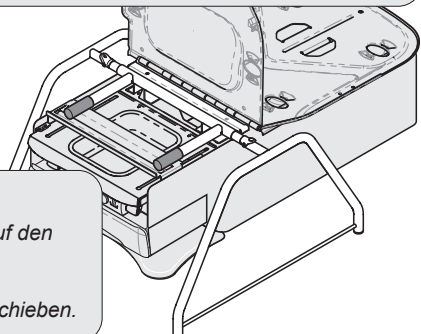

Entfernen der Beine des Montagehilfswerkzeugs ...

- A) „Stuhl auf“ an der Handbedienung drücken, um den Stuhlsockel auf den Boden oder den Rollwagen abzusinken.
- B) Auf den Freigabehebel des Keilwellenadapters anheben.
- C) Beine des Montagehilfswerkzeugs von den Keilwellenhalterungen schieben.



Bedienung

Modelle 230, 630(-001 bis -009),
641 und 647




Gerätewarnung

Montagehilfswerkzeug nur an für diese Modelle
bestimmtem Querträger anbringen. Zur
Vermeidung von Beschädigungen NICHT direkt
an den Keilwellen des Stuhls anbringen.

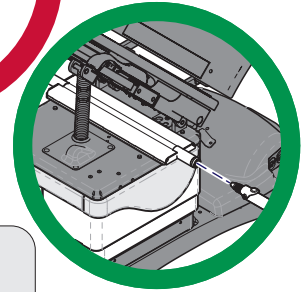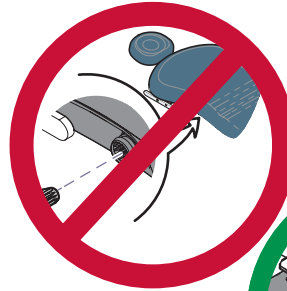

Schritt 1:


- A) „Hochlagerung auf“ an der Handbedienung drücken.
- B) Montagehilfswerkzeug für den Behandlungsstuhl hinter der Hochlagerungs-Antriebswelle platzieren.
- C) „Hochlagerung ab“ an der Handbedienung drücken.

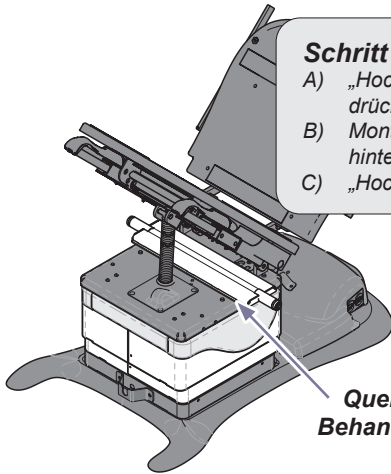


Querträger des
Behandlungsstuhls

Schritt 2:

- A) „Sockel auf“ an der Handbedienung drücken, um den Stuhl höher zu stellen.
- B) Beine des Montagehilfswerkzeugs in die Keilwellenhalterungen einfügen.

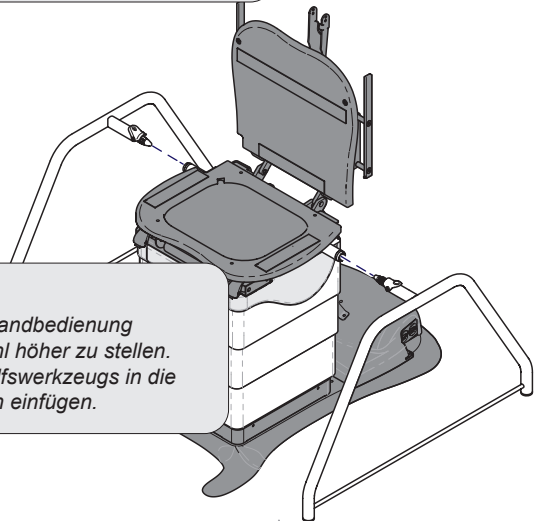

Schritt 3: „Sockel ab“ an der Handbedienung drücken, um den
Stuhlsockel auf die gewünschte Höhe anzuheben.

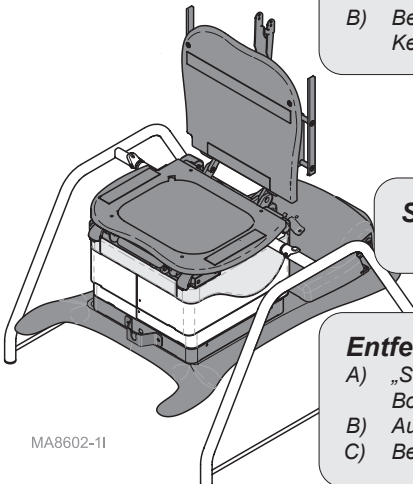

Entfernen der Beine des Montagehilfswerkzeugs ...

- A) „Stuhl auf“ an der Handbedienung drücken, um den Stuhlsockel auf den
Boden oder den Rollwagen abzusenken.
- B) Auf den Freigabehebel des Keilwellenadapters anheben.
- C) Beine des Montagehilfswerkzeugs von den Keilwellenhalterungen schieben.

MA8602-11

Bedienung

Modell 244, 630(-010 bis -013) (-020 bis -023) und 631-001


Schritt 1:

- A) „Stuhl auf“ an der Handbedienung drücken, um den Stuhl höher zu stellen.
- B) Beine des Montagehilfswerkzeugs in die Keilwellenhalterungen einfügen.

630 und 631-001





244

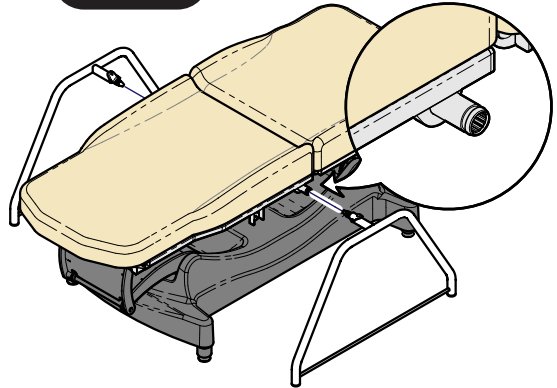

Schritt 2:

- „Stuhl ab“ an der Handbedienung drücken, um den Stuhlsockel auf die gewünschte Höhe anzuheben.

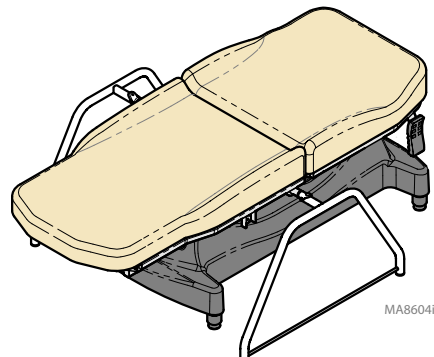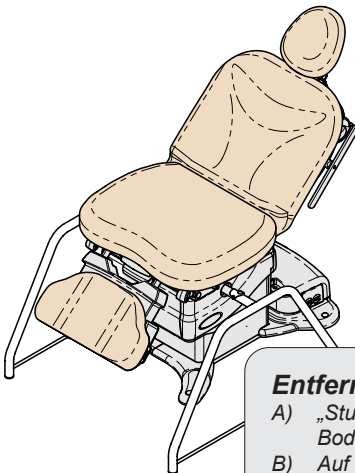


Entfernen der Beine des Montagehilfswerkzeugs ...

- A) „Stuhl auf“ an der Handbedienung drücken, um den Stuhlsockel auf den Boden oder den Rollwagen abzusenken.
- B) Auf den Freigabehebel des Keilwellenadapters anheben.
- C) Beine des Montagehilfswerkzeugs von den Keilwellenhalterungen schieben.

Wartung

Teileliste

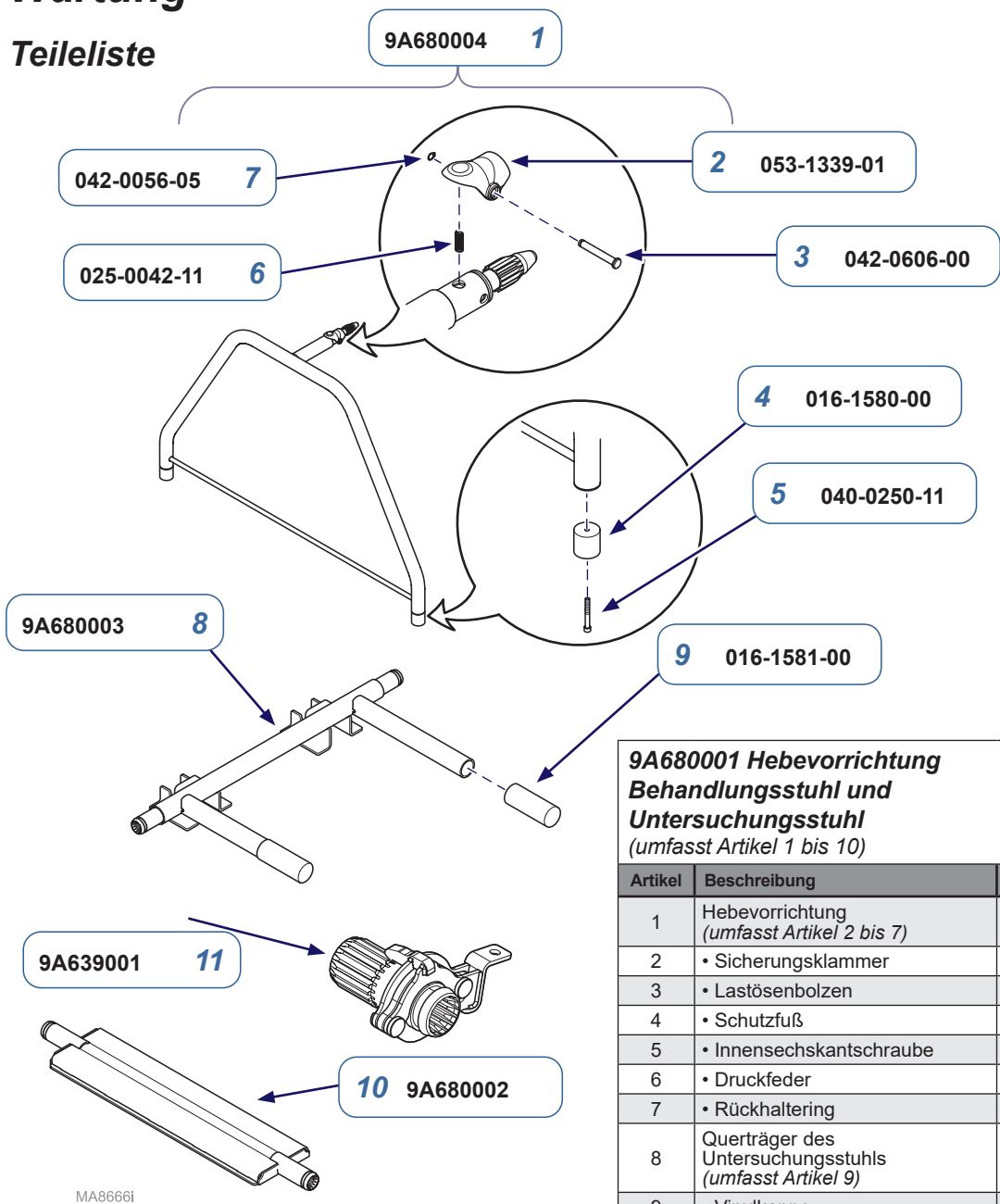

9A680001 Hebevorrichtung Behandlungsstuhl und Untersuchungsstuhl (umfasst Artikel 1 bis 10)		
Artikel	Beschreibung	Menge
1	Hebevorrichtung (umfasst Artikel 2 bis 7)	2
2	• Sicherungsklammer	1
3	• Lastösenbolzen	1
4	• Schutzfuß	2
5	• Innensechskantschraube	2
6	• Druckfeder	1
7	• Rückhalterung	1
8	Querträger des Untersuchungsstuhls (umfasst Artikel 9)	1
9	• Vinylkappe	2
10	Querträger des Behandlungsstuhls	1
11	Keilwellenadapter	2

MA8666i

Garantieinformationen



Garantieregistrierung



Hinweise:

Hinweise:

Hinweis

Für zusätzliche Sprachen siehe technicallibrary.midmark.com

Midmark Corporation

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 USA

1.800.643.6275

1.937.526.3662

midmark.com

