


Voor de volgende modellen:

(222 ,223, 622, 623, 625)
(230, 630, 631-001, 641, 647)
(224, 225, 626, 627)
(244)

Opmerking

Ga voor andere talen naar technicallibrary.midmark.com

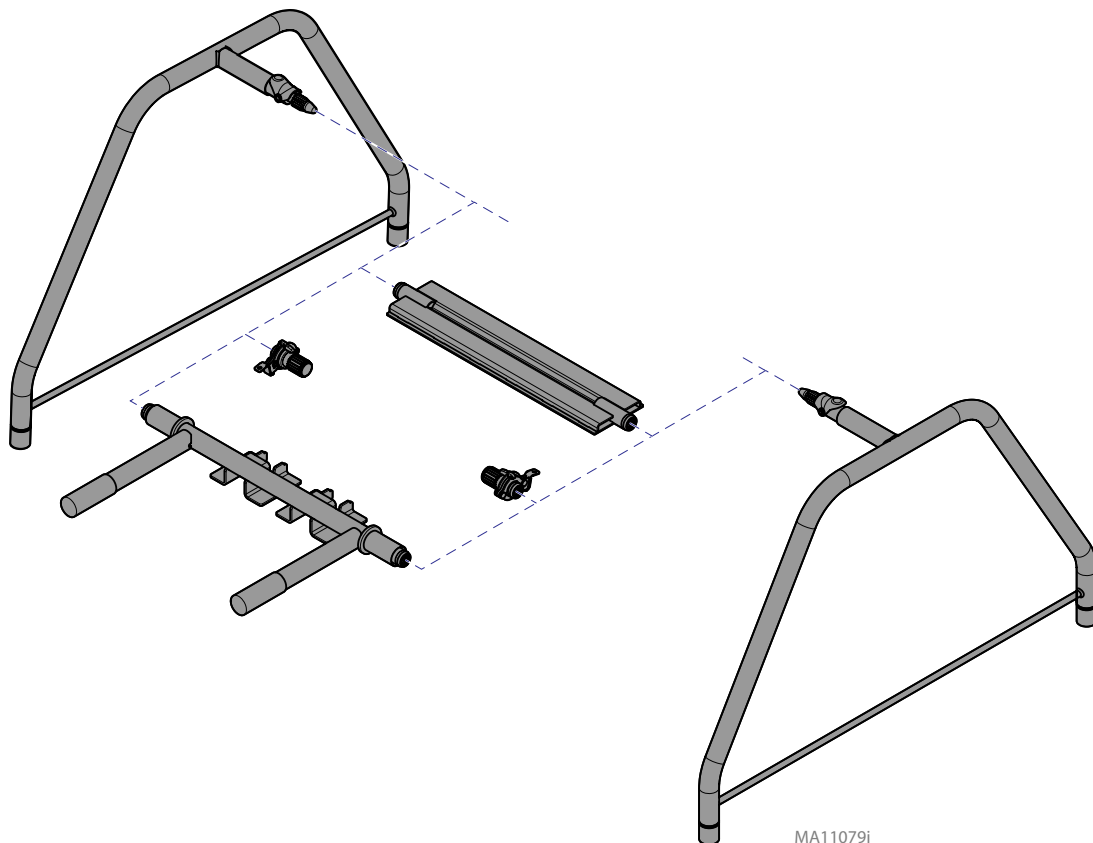

MA11079i

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

<u>Belangrijke informatie</u>	3
<u>Veiligheidsinstructies</u>	3
<u>Veiligheidssymbolen</u>	3
<u>Verzendingsymbolen</u>	3
<u>Transport- opslagvoorwaarden</u>	3
<u>Beoogd gebruik</u>	4
<u>Waarschuwingen en aanwijzingen voor de installatiehulp</u>	4

Bediening

<u>Modellen 224, 225, 626 en 627</u>	5
<u>Modellen 222, 223, 622, 623 en 625</u>	6
<u>Modellen 230, 630 (-001 tot -009), 641 en 647</u>	7
<u>Model 244, 630 (-010 tot -013) (-020 tot -023) en 631-001</u>	8

Onderhoud

<u>Onderdelenlijst</u>	9
------------------------------	---

Garantie

<u>Beperkte garantie</u>	10
--------------------------------	----

Belangrijke informatie

Deze symbolen kunnen op uw apparatuur en/of in de gebruikshandleidingen voorkomen

Veiligheidsinstructies

De voornaamste zorg van Midmark is dat de apparatuur wordt gehanteerd en onderhouden met het oog op de veiligheid van de gebruiker. Voor een veilig en betrouwbaar gebruik:

- Lees deze handleiding aandachtig voordat u de installatiehulp gebruikt;
- Zorg ervoor dat het nodige personeel over de inhoud van deze handleiding is geïnformeerd.

Veiligheidssymbolen



WAARSCHUWING

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel.



Let op

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot gering of matig letsel. Dit symbool kan ook gelden als waarschuwing tegen onveilige praktijken



Apparatuurwaarschuwing

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstige schade aan de apparatuur.

Verzendingssymbolen



Correcte oriëntatie tijdens transport



Opgelet, transportschade



Droog houden



Fabrikant

Transport- opslagvoorwaarden

Bereik voor omgevingstemperatuur..... -22°F to 140°F (-30°C to +60°C)
Relatieve luchtvochtigheid..... 10% tot 90% (niet-condenserend)
Atmosferische druk..... 500 hPa tot 1060 hPa

Belangrijke informatie

Beoogd gebruik

De installatiehulp is bedoeld als manier om medische stoelen van een transportpallet of verrijdbaar plateau gemakkelijk voor de installatie op te tillen.

Waarschuwingen en aanwijzingen voor de installatiehulp



WAARSCHUWING

- *Ontworpen voor gebruik uitsluitend met compatibele Midmark-stoelen.*
- *Gevaar voor letsel als de armen voor het gebruik niet volledig in de adapterplaat zitten.*
- *Gebruik alleen op schone effen ondergrond.*
- *Zit/leun niet tegen de stoel tijdens gebruik.*
- *Niet gebruiken bij beschadigde installatiehulp of stoel.*
- *Gevaar voor ernstig letsel of de dood wanneer de last boven mensen wordt gehesen.*
- *Voer geen onderhoud aan de stoel uit wanneer deze is opgetild.*
- *Plaats tijdens gebruik geen objecten op de stoel.*
- *Niet gebruiken wanneer een patiënt op de stoel zit*
- *Labels niet verwijderen, afdekken, beschadigen of op een andere manier onleesbaar maken.*
- *Maximale belasting: 550 pond (250 kg)*





Let op

Zorg ervoor dat het verrijdbare plateau centraal onder de stoel staat.

Bediening

Modellen 224, 225, 626 en 627

Stap 1: Schuif de aansluitadapters op de poten van de installatiehulp.

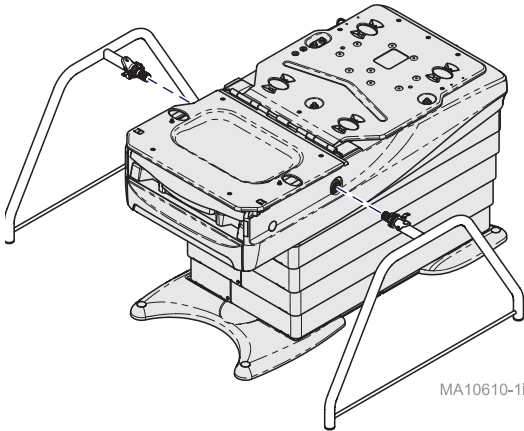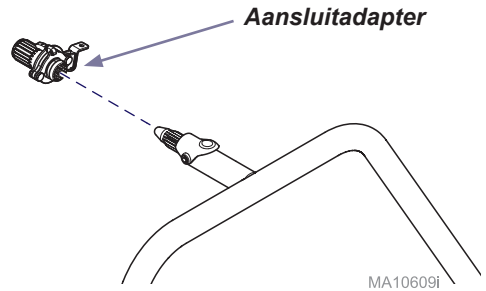


Stap 2:

- A) Druk op Chair Up (stoel omhoog) op de handbediening om de stoel hoger te zetten.
- B) Plaats de poten van de installatiehulp in de openingen van de aansluiting.
- C) Druk op Chair Down (stoel omlaag) op de handbediening om de stoelbasis op de gewenste hoogte te zetten.

Om de poten van de installatiehulp te verwijderen...

- A) Druk op Chair Up (stoel omhoog) op de handbediening om de stoelbasis neer te laten tot op de vloer of het verrijdbare plateau.
- B) Til de ontgrendeling van de aansluitadapter omhoog.
- C) Schuif de poten van de installatiehulp uit de openingen van de aansluiting.

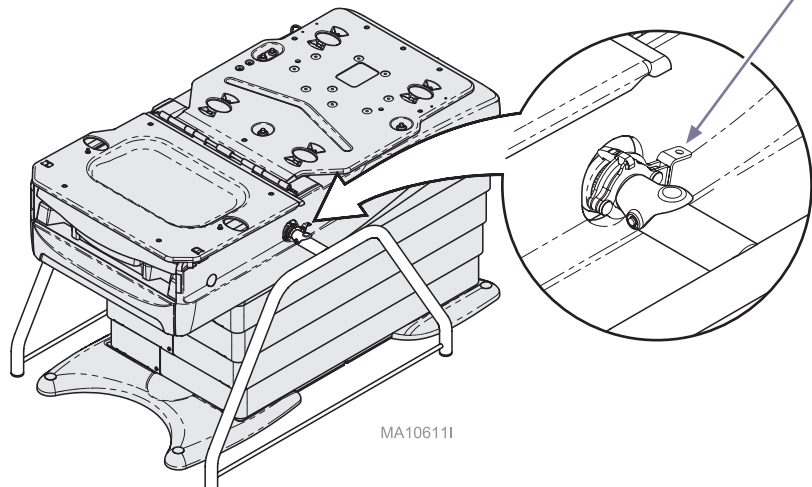

Bediening

Modellen 222, 223, 622, 623 en 625




Apparatuurwaarschuwing

Bevestig de installatiehulp alleen op een voor deze modellen ontworpen dwarsstang. Bevestig deze **NIET** direct op de aansluitstukken van de stoel om schade te voorkomen.




Stap 1:

- A) Til stoelgedeelte op.
- B) Haak de dwarsstang van de onderzoeksstoel in de grendellip.

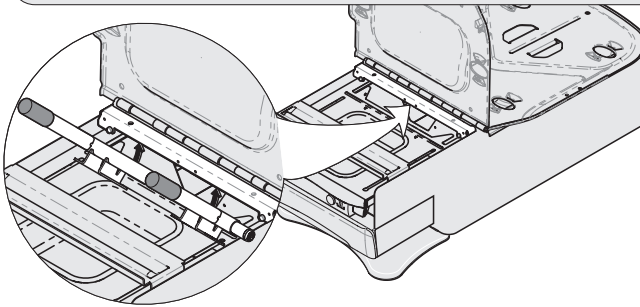

- Stap 2:** Leg de dwarsstang van de onderzoeksstoel plat op de metalen crossbar.

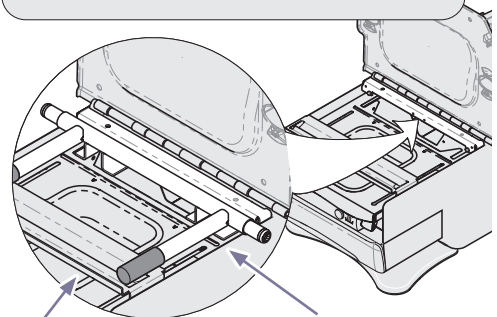


Metalen crossbar


Dwarsstang onderzoeksstoel

Stap 3:

- A) Druk op Base Up (basis omhoog) op de handbediening om de stoel hoger te zetten.
- B) Plaats de installatiehulp in de openingen van de aansluiting.

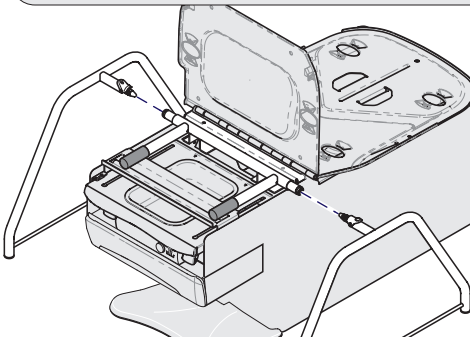

- Stap 4:** Druk op Base Down (basis omlaag) op de handbediening om de stoelbasis op de gewenste hoogte te zetten.

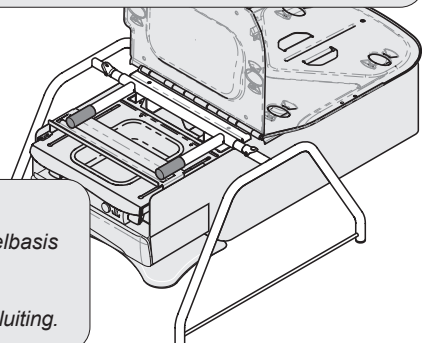

Om de poten van de installatiehulp te verwijderen...

- A) Druk op Chair Up (stoel omhoog) op de handbediening om de stoelbasis neer te laten tot op de vloer of het verrijdbare plateau.
- B) Til de ontgrendeling van de aansluitadapter omhoog.
- C) Schuif de poten van de installatiehulp uit de openingen van de aansluiting.



Bediening

**Modellen 230, 630 (-001 tot -009),
641 en 647**




Apparatuurwaarschuwing

Bevestig de installatiehulp alleen op een voor deze modellen ontworpen dwarsstang. Bevestig deze **NIET** direct op de aansluitstukken van de stoel om schade te voorkomen.

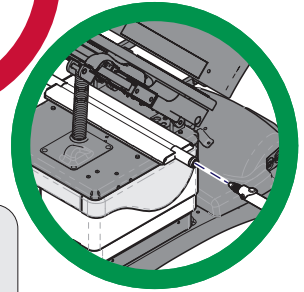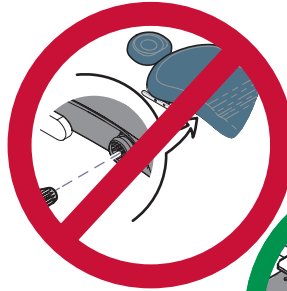

Stap 1:


- A) Druk op Tilt Up (naar voren hellen) op de handbediening.
- B) Plaats de installatiehulp voor de behandelingsstoel achter de aandrijfas voor het hellen.
- C) Druk op Tilt Down (naar achteren hellen) op de handbediening.

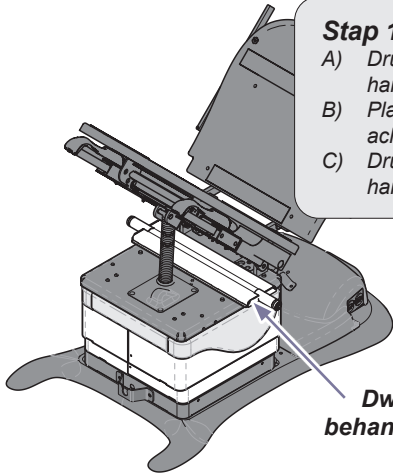

**Dwarsstang
behandelingsstoel**

Stap 2:

- A) Druk op Base Up (basis omhoog) op de handbediening om de stoel hoger te zetten.
- B) Plaats de poten van de installatiehulp in de openingen van de aansluiting.

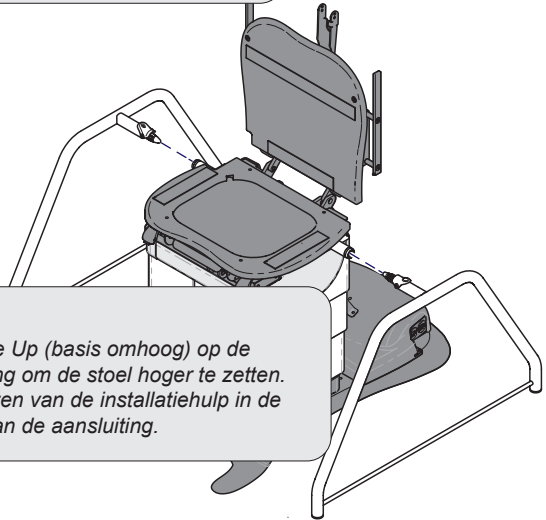


Stap 3:

- Druk op Base Down (basis omlaag) op de handbediening om de stoelbasis op de gewenste hoogte te zetten.

Om de poten van de installatiehulp te verwijderen...

- A) Druk op Chair Up (stoel omhoog) op de handbediening om de stoelbasis neer te laten tot op de vloer of het verrijdbare plateau.
- B) Til de ontgrendeling van de aansluitadapter omhoog.
- C) Schuif de poten van de installatiehulp uit de openingen van de aansluiting.

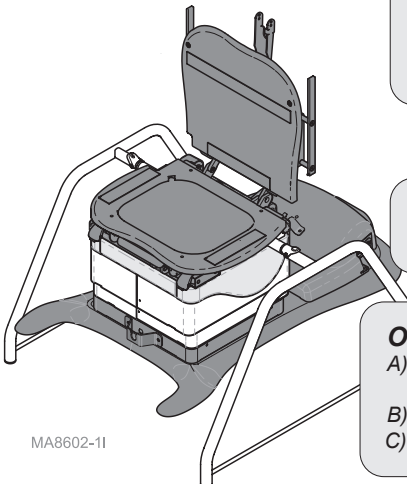

MA8602-11

Bediening

Model 244, 630 (-010 tot -013) (-020 tot -023) en 631-001


Stap 1:

- A) Druk op Chair Up (stoel omhoog) op de handbediening om de stoel hoger te zetten.
- B) Plaats de poten van de installatiehulp in de openingen van de aansluiting.



630 en 631-001



244

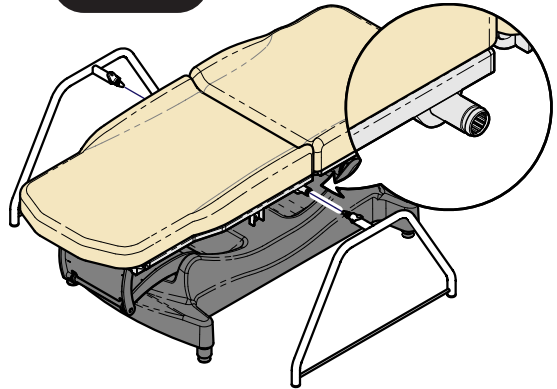

- Stap 2:** Druk op Chair Down (stoel omlaag) op de handbediening om de stoelbasis op de gewenste hoogte te zetten.

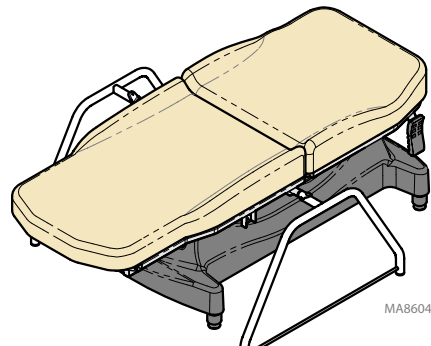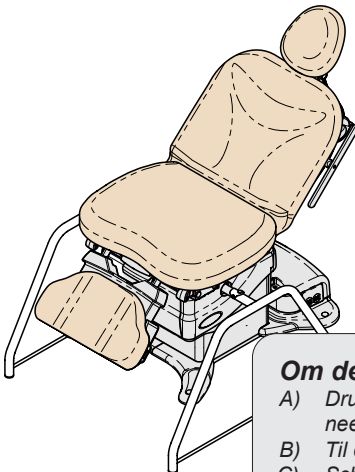


Om de poten van de installatiehulp te verwijderen...

- A) Druk op Chair Up (stoel omhoog) op de handbediening om de stoelbasis neer te laten tot op de vloer of het verrijdbare plateau.
- B) Til de ontgrendeling van de aansluitadapter omhoog.
- C) Schuif de poten van de installatiehulp uit de openingen van de aansluiting.

Onderhoud

Onderdelenlijst

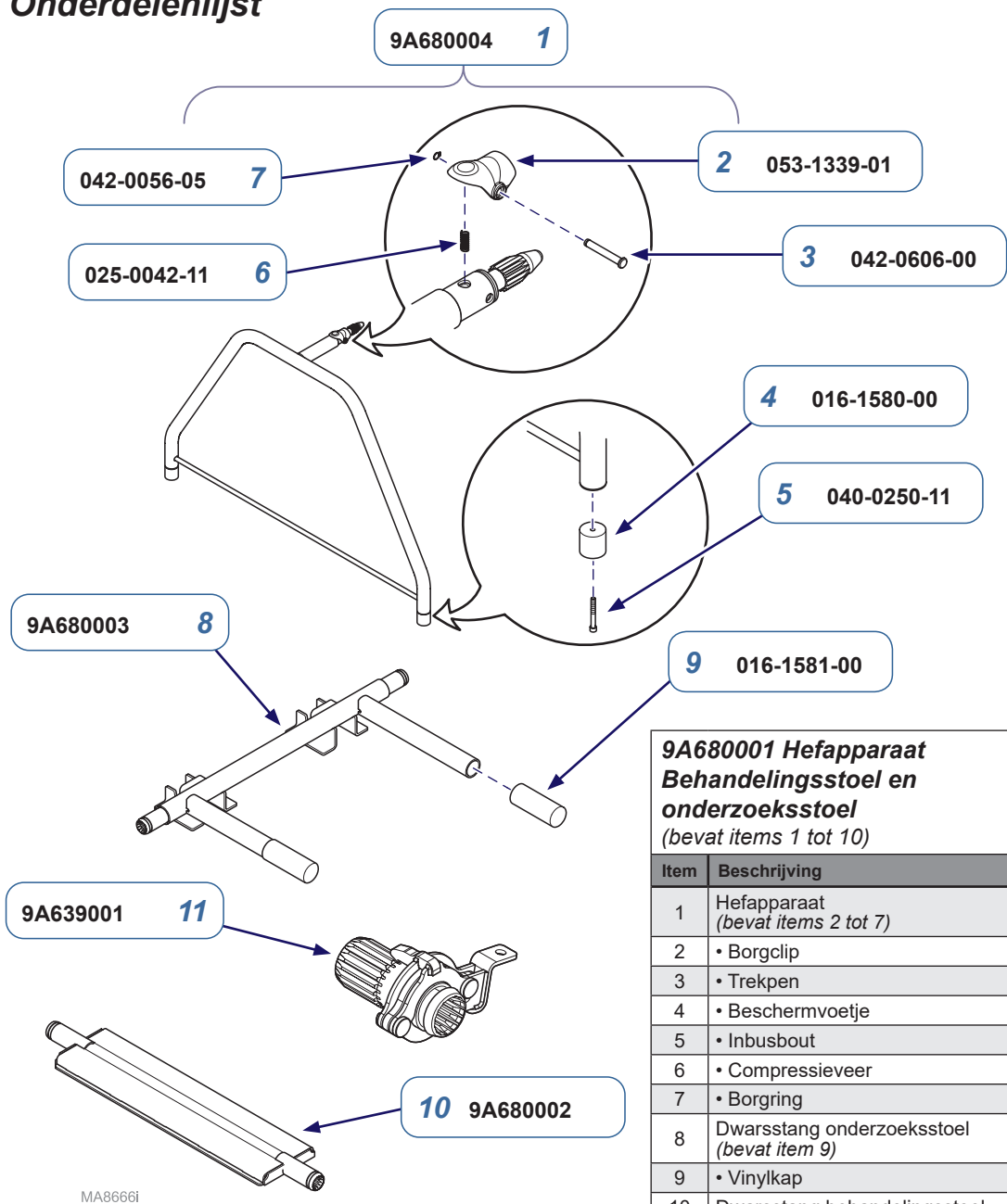

9A680001 Hefapparaat Behandelingsstoel en onderzoeksstoel (bevat items 1 tot 10)		
Item	Beschrijving	Hoev.
1	Hefapparaat (bevat items 2 tot 7)	2
2	• Borgclip	1
3	• Trekpen	1
4	• Beschermvoetje	2
5	• Inbusbout	2
6	• Compressieveer	1
7	• Borgring	1
8	Dwarsstang onderzoeksstoel (bevat item 9)	1
9	• Vinylkap	2
10	Dwarsstang behandelingsstoel	1
11	Aansluitadapter	2

MA8666i

Garantie-informatie



Garantie registratie



Opmerkingen:

Opmerkingen:

Opmerking

Ga voor andere talen naar technicallibrary.midmark.com

Midmark Corporation

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 VS

1.800.643.6275

1.937.526.3662

midmark.com

