

# Guide d'utilisation rapide

## Spiromètre Numérique Midmark v. 11.0

**01** Dans IQmanager®, **Recherchez** un patient dans l'écran d'ouverture et double-cliquez sur le nom du patient ou sélectionnez Nouveau patient. Assurez-vous que l'ethnie, la date de naissance, le sexe, la taille et le poids du patient sont entrés.

**02** **Sélectionnez** le bouton Nouveau test.

**03** **Entrez** les noms du technicien, du médecin et de l'indication. **Cliquez** sur l'icône de lecture à côté du spiromètre.

**04** **Préparez** le patient en vue du test de spirométrie.

**REMARQUE :** Une bonne préparation des patients entraîne moins de manœuvres répétées :

- a. Expliquez le but de la procédure de spirométrie pour déterminer la façon dont l'air peut être expiré avec force et rapidité.
- b. Insistez sur la posture appropriée, y compris les épaules en arrière et le menton en l'air (ne vous penchez pas vers l'avant pendant l'expiration).
- c. Démontrez la procédure.

**05** **Insérez** un nouvel embout buccal dans le spiromètre.

**06** **Appliquez** le pince-nez. **Demandez** au patient de tenir le spiromètre en haut et sur le côté de son visage.

**07** **Cliquez** sur Démarrer pré-test. Attendez que l'appareil soit à zéro. Si vous effectuez un test Post, cliquez sur Démarrer Post. Le cas échéant, cliquez sur Démarrer après avoir choisi l'incitation.

**08** **Commencez** le test :

- a. Encouragez le patient à inhaler au maximum, puis placez rapidement l'embout buccal dans la bouche et scellez les lèvres.
- b. Demandez au patient d'expirer très FORTEMENT lors de l'expiration (pendant six secondes). Ajustez la posture si nécessaire.

**REMARQUE :** Obtenez trois bonnes manœuvres et deux tests qui concordent. N'effectuez pas plus de huit manœuvres lors d'une séance de tests.

**09** **Cliquez** sur le bouton Review (Examiner) pour afficher l'écran de révision. Sélectionnez Enregistrer après avoir examiné le rapport pour enregistrer la session de test.

**10** **Éjectez** l'embout buccal dans le réceptacle à déchets une fois toutes les manœuvres terminées.

# Exemples de courbes de débit-volume normale, restrictive et obstructive

