


# Guide d'utilisation rapide

## Instructions pour mettre le Spiromètre Numérique Midmark en mode PCP

- 01** Cliquez sur le **bouton Paramètres** dans l'écran principal d'IQmanagerMD et naviguez jusqu'à l'onglet Périphériques.
- 02** Sélectionnez le **bouton Paramètres** de spirométrie.
- 03** Dans la section Configuration, sélectionnez **Mode PCP** dans la liste déroulante Profil de configuration.
- 04** Cliquez sur le bouton **Enregistrer** dans le coin inférieur gauche de l'écran. Cela enregistre le changement de paramètre et vous ramène à l'écran Paramètres de configuration d'IQmanager. spiromètre en haut et sur le côté de son visage.
- 05** Cliquez sur la **flèche vers l'arrière** dans l'écran Paramètres de configuration. Cela vous ramènera à l'écran d'ouverture d'IQmanager. nécessaire.
- 06** **Recherchez** un patient ou sélectionnez **Nouveau patient** pour lancer un test de spirométrie.

# Arbre de décision d'interprétation

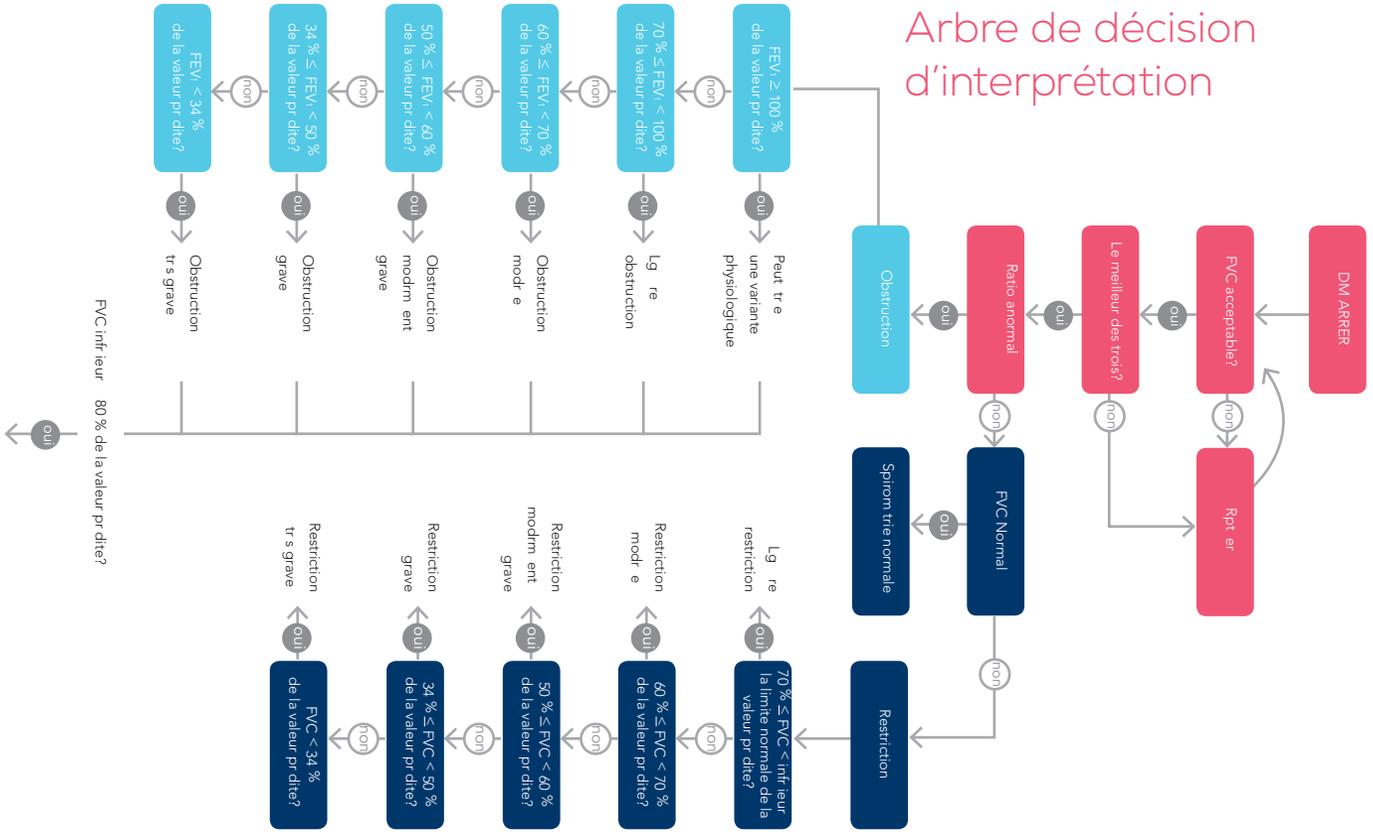

Et la faible capacité vitale ne peut pas exclure une restriction superposée.