

Kniesteunen/platen

9A410 / 9A411 / 9A412 / 9A413

**Van toepassing op de
volgende modellen:**


204 / 222 / 223

604 / 622 / 623 / 625

230 / 630

Speciale middelen:

geen

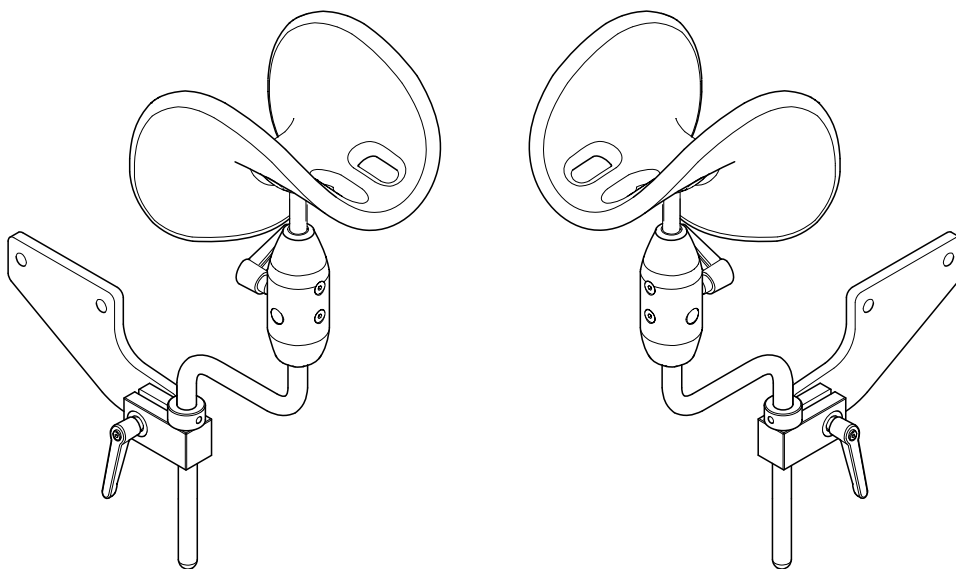

Montage-/gebruikershandleiding




Productinformatie

Distributeur:

Datum van aankoop:

Modelnummer/serienummer:

**Door Midmark geautoriseerd
servicebedrijf:**

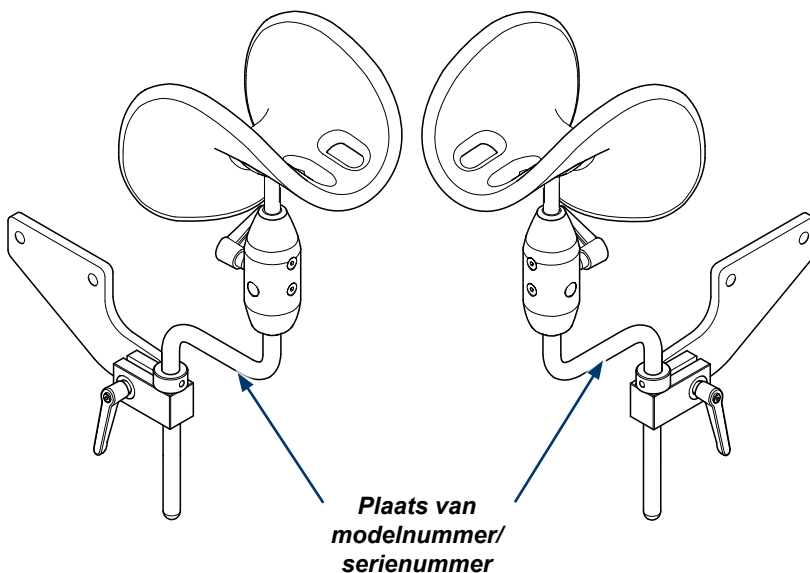

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie

<u>Productinformatie</u>	2
<u>Productregistratie</u>	4
<u>Bedrijfsomstandigheden</u>	4
<u>Apparatuur afvoeren</u>	4
<u>Geautoriseerde vertegenwoordiger</u>	4
<u>Belangrijke informatie</u>	5
<u>Beoogd gebruik</u>	5
<u>Veiligheidsinstructies</u>	5

Montage

<u>Platen verwijderen (modellen met platen)</u>	6
<u>Kniesteunbeugels (204 / 222 / 223 / 604 / 622 / 623 / 625)</u>	7
<u>Kniesteunbeugels (230 / 630)</u>	8

Bediening

<u>Positionering (alle modellen)</u>	10
--	----

Onderhoud

<u>Contact opnemen met de onderhoudsdienst</u>	11
<u>Reiniging</u>	11
<u>Preventief onderhoud</u>	11

Garantie

<u>Beperkte garantie</u>	12
--------------------------------	----

Productregistratie

Ga naar www.midmark.com om uw product te registreren

Bedrijfsomstandigheden

Omgevingstemperatuur:+10 °C tot +40 °C (+50 °F tot +104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid.....30% tot 75% (niet-condenserend)
Hoogte3000 m of minder

Apparatuur afvoeren

Aan het eind van hun gebruiksduur kunnen de stoel, bijbehorende accessoires en overige verbruiksartikelen zijn verontreinigd als gevolg van normaal medisch gebruik. Raadpleeg plaatselijk geldende wet- en regelgeving voor de correcte afvoer van apparatuur, accessoires en overige verbruiksartikelen.

Geautoriseerde vertegenwoordiger



Waarschuwing

Neem bij ernstige voorvallen met betrekking tot het toestel contact op met Midmark en de betreffende bevoegde autoriteit.

Klanten binnen de EU kunnen voor al hun vragen, voorvallen en klachten terecht bij de hieronder vermelde geautoriseerde vertegenwoordiger van Midmark.

CEpartner4U
Esdoornlaan 13
3951 DB Maarn, Nederland
Telefoon: +31 343 442 524
Fax: +31 343 442 162

Belangrijke informatie - Veiligheidssymbolen



WAARSCHUWING

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel.



Let op

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot gering of matig letsel. Dit symbool kan ook gelden als waarschuwing tegen onveilige praktijken



Apparatuurwaarschuwing

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot apparatuurschade.

Opmerking

Benadrukt een procedure, praktijk of voorwaarde.

Lijst van symbolen



Fabrikant

SN

Serienummer

REF

Catalogusnummer

Beoogd gebruik

Ondersteunen van de knieën/benen van de patiënt tijdens onderzoeken en procedures.

Veiligheidsinstructies



Waarschuwing

Sluit altijd de stroom naar de stoel af voordat afdekkingen worden verwijderd of onderhoudsprocedures worden uitgevoerd.



Waarschuwing

Aan dit apparaat mogen geen wijzigingen worden doorgevoerd.



Waarschuwing

Niet op kniesteunen zitten.



Waarschuwing


Kniesteunen niet als grijpvlak gebruiken tijdens op- en afstappen.

Montage - platen verwijderen (modellen met platen)

Opmerking


Verwijder alle accessoires (behalve armleuningen) voordat u deze procedure uitvoert.

Modellen: 622 / 623

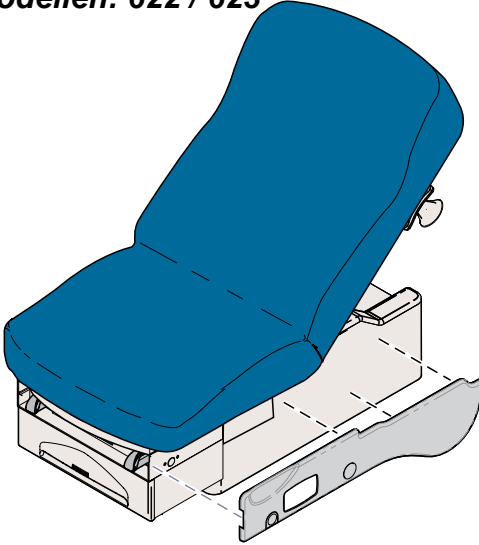

De plaat van 622 / 623 is magnetisch.
Trek naar buiten om te verwijderen.

Modellen: 625

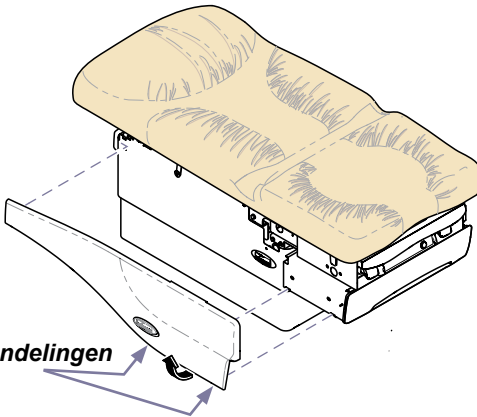

Om de plaat van 625 te verwijderen:

- Druk de twee vergrendelingen in.
- Trek de onderkant van de plaat van de tafel af.
- Til de plaat op om deze te verwijderen.


Vereisten:

Voor de modellen 604 / 622 / 623 is een speciale plaatkit vereist voor de kniesteunbeugels.
Raadpleeg de prijscatalogus van Midmark om de juiste kit te kiezen.

Opmerking

De plaat op de modellen van 604 met de serienummers V1177445 tot nu wordt magnetisch bevestigd. De laden en schroeven hoeven niet te worden verwijderd.

Schroef

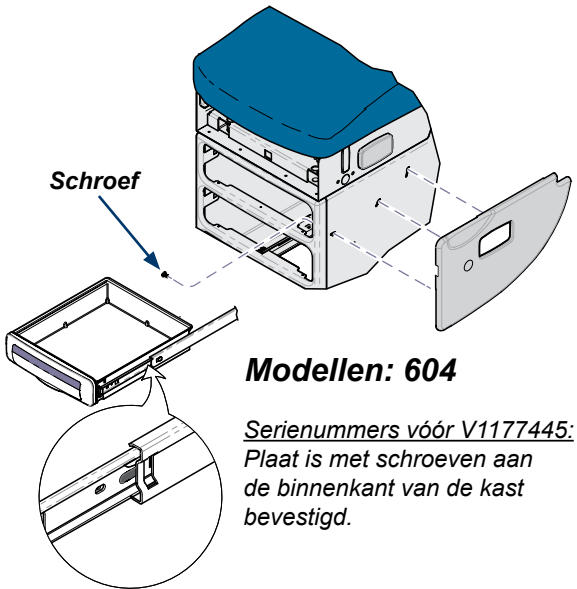

Modellen: 604

Serienummers vóór V1177445:
Plaat is met schroeven aan de binnenkant van de kast bevestigd.

Om de plaat van 604 te verwijderen...


- Trek de lade eruit.
- Druk de rechter vergrendeling omhoog en de linker vergrendeling omlaag en verwijder de lade.
- Verwijder de schroeven en platen.

Montage - modellen 204 / 222 / 223 / 604 / 622 / 623 / 625

Opmerking

Verwijder alle accessoires (behalve arMLEUNINGEN) voordat u deze procedure uitvoert.

(De installatie is dezelfde voor de kniesteunbeugel met spievertanding)

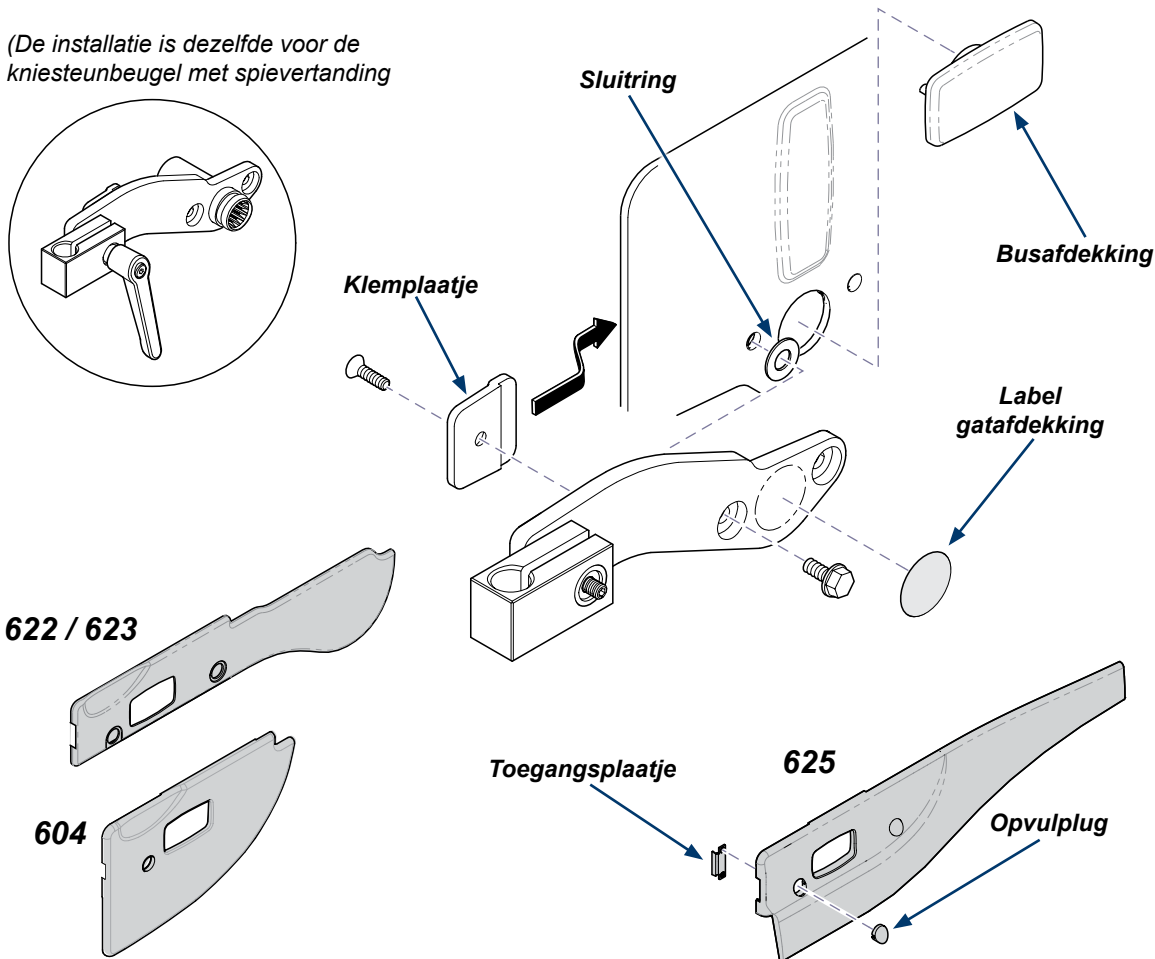


- A) Verwijder de busafdekking. (indien aanwezig)
- B) Positioneer de klembeugel en sluitringen. Zet vast met twee zeskantschroeven. Breng indien gewenst het label voor de gatafdekking aan. Herhaal dit voor de andere beugel.
- C) Positioneer de klemplaten met verschuiving tegen de bovenwikkeling zoals weergegeven op de afbeelding, zet de klemplaten vervolgens met schroeven vast op de beugels.
- D) (604 / 622 / 623) Installeer de ingekeepte zijplaten. Opmerking: Wanneer beugels met spievertandingen worden geïnstalleerd, moet u de opvulplug uit de zijplaat verwijderen.
- D) (625) Verwijder de toegangsplaatjes. Monteer de zijplaten. Opmerking: Wanneer beugels met spievertandingen worden geïnstalleerd, moet u de opvulpluggen uit de zijplaat verwijderen.

Montage - modellen 230 / 630

Opmerking

Verwijder alle accessoires (behalve armleuningen) voordat u deze procedure uitvoert.

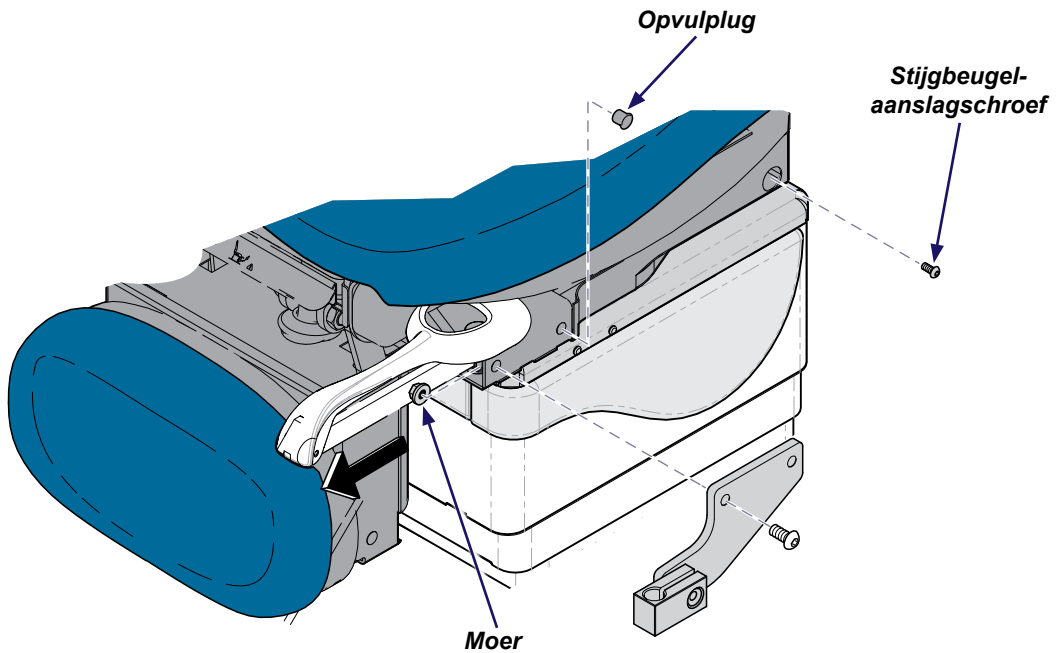

- A) Verwijder de opvulpluggen.
- B) Verwijder de stijgbeugel-aanslagschroef en het stijgbeugelsysteem.
- C) Positioneer de klembeugel. Zet vast met twee schroeven/moeren. Herhaal dit voor de andere beugel.
- D) Installeer het stijgbeugelsysteem en de stijgbeugel-aanslagschroef.

Montage - kniesteunen (alle modellen)


Om de kniesteun te monteren...

A) Plaats de hendel/sluitring zoals weergegeven.

(Draai de hendel niet vast)

B) Schuif de kniesteun in het blok.



C) Draai de hendel vast om de kniesteun te bevestigen.

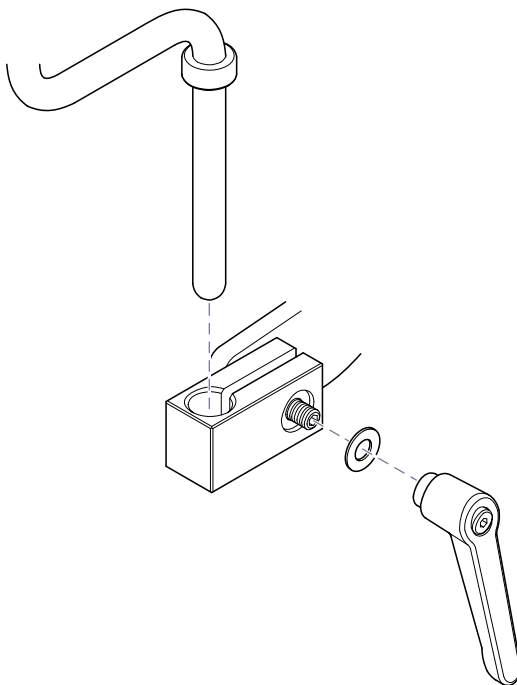

Bediening - kniesteunen (alle modellen)

Om de kniesteun te positioneren...

- A) Draai de vergrendelingshendel los om de kniesteun te positioneren.
- B) Draai de vergrendelingshendel vast om de kniesteun te bevestigen.

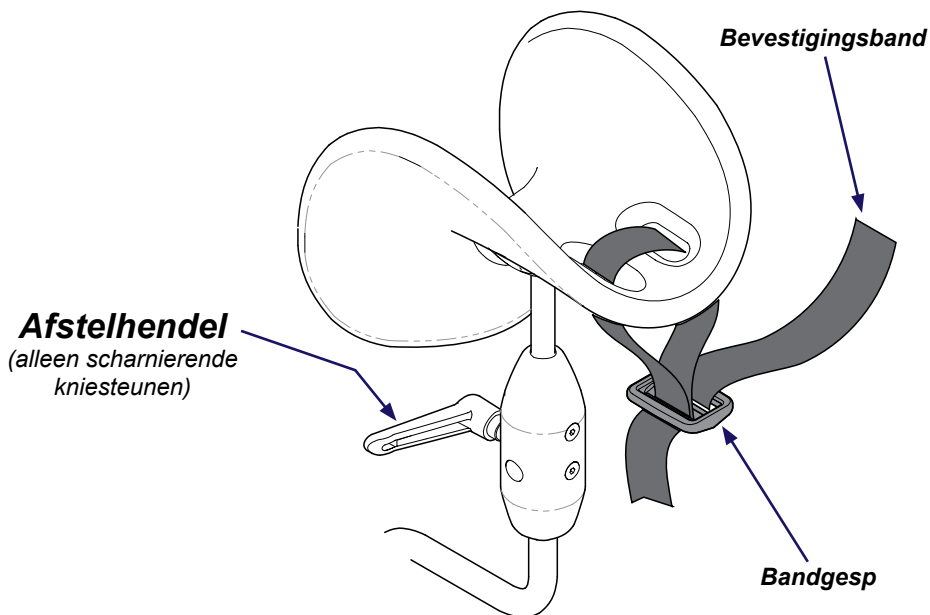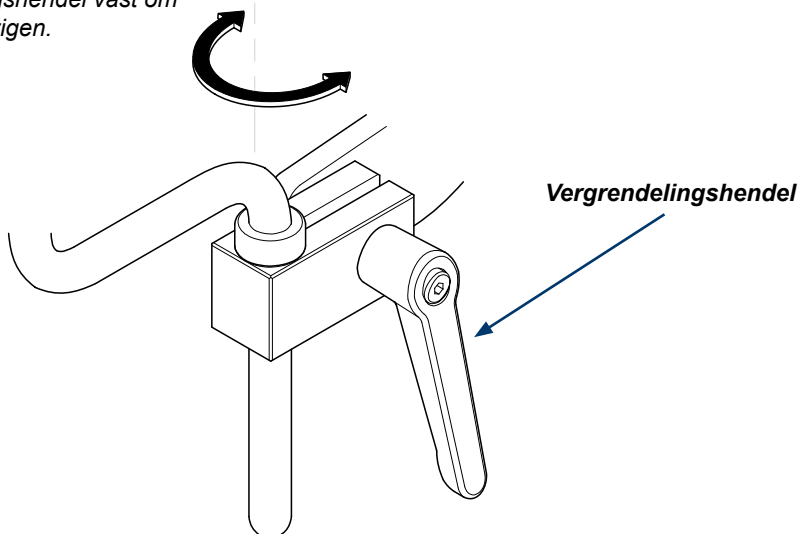

Onderhoud

Contact opnemen met de onderhoudsdienst

Opmerking

Als u contact opneemt met de onderhoudsdienst, dient u het modelnummer/serienummer bij de hand te hebben.

Voor reparatie en onderhoud kunt u contact opnemen met de geautoriseerde Midmark-distributeur.

Om direct contact op te nemen met Midmark Versailles Tech Service:

+1-937-526-3662

8:00 tot 19:00 maandag - donderdag (EST) [behalve op officiële Amerikaanse feestdagen]

8:00 tot 17:00 maandag - vrijdag (EST) [behalve op officiële Amerikaanse feestdagen]

www.midmark.com

Reiniging



Apparatuurwaarschuwing

De kniesteunen zijn bestand tegen de meeste vlekken afkomstig van geneesmiddelen. Wel kunnen de kniesteunen beschadigd raken als gevolg van oplosmiddelen en kleurstoffen. Als er vloeistof op de kniesteunen wordt gemorst, moet deze onmiddellijk worden verwijderd.

Gelakte metalen/plastic oppervlakken

Reinig gelakte metalen en plastic oppervlakken wekelijks met een schone, zachte doek en een mild reinigingsmiddel.

Preventief onderhoud

Inspecteer periodiek de volgende gebieden:

- Alle bevestigingsmiddelen moeten aanwezig zijn en goed vastzitten.
- Alle mechanische functies dienen correct te werken.

Garantie

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE GARANTIE Midmark Corporation ("Midmark") biedt de oorspronkelijke koper de garantie dat zij onderdelen van de door Midmark vervaardigde binnenlandse en internationale medische producten (uitgezonderd die onderdelen die staan vermeld onder "Garantie-uitsluitingen") met materiaal- of constructiefouten ofwel zal repareren ofwel zal vervangen, waarbij de keuze bij Midmark ligt. Het enige rechtsmiddel dat ingevolge deze beperkte garantie wordt geboden is reparatie of vervanging, waarbij de keuze bij Midmark ligt, van de betreffende onderdelen. De beperkte garantie is uitsluitend van toepassing op defecten die binnen de geldende garantietermijn aan Midmark zijn gemeld en waarvan het bestaan na onderzoek door Midmark is vastgesteld. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van een product en kan niet op derden worden overgedragen of aan derden worden toegewezen. Vervangende onderdelen of producten kunnen worden gebruikt en/of gereviseerde onderdelen of producten mits de kwaliteit en specificaties daarvan gelijk zijn aan die van nieuwe onderdelen of producten.

Midmark biedt de oorspronkelijke koper gedurende de garantietermijn de garantie dat zij software waarmee de door Midmark vervaardigde producten (uitgezonderd die onderdelen die staan vermeld onder "Garantie-uitsluitingen") zijn uitgerust ofwel zal repareren ofwel zal vervangen indien: (1) de media die de software bevatten bij normaal gebruik materiaal- of constructiefouten vertonen; of (2) de software niet in belangrijke mate voldoet aan de bekendgemaakte specificaties.

LOOPTIJD VAN DE GARANTIE De looptijd van de garantie voor alle producten en onderdelen die onder de garantie vallen, gaat in op de datum van de aan de oorspronkelijke koper verstrekte factuur voor het product en duurt voort tot één (1) jaar.

SERVICE OP GROND VAN GARANTIE Voor onderhoud of reparatie op grond van de garantie dient men zich te wenden tot Midmark zelf of tot een geautoriseerde distributeur van producten uit de productenreeks van Midmark waarvoor een beroep op service op grond van de garantie wordt gedaan. Voor vragen over of kwesties in verband met de service op grond van de garantie kunt u via www.midmark.com per e-mail contact opnemen. Voor telefonisch contact belt u naar 1-800-MIDMARK. Wilt u dit per briefpost doen, dan kan dit aan Midmark Corporation, 60 Vista Drive, Versailles, Ohio 45380, USA. De koper zelf is ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat een product bij Midmark of van haar geautoriseerde distributeurs wordt afgeleverd ten behoeve van een garantieservice. Deze levering komt voor rekening van de koper. Tevens is het de verantwoordelijkheid van de koper om zich te houden aan de instructies voor de garantieservice die zijn verstrekt door Midmark of haar geautoriseerde distributeur. De koper dient binnen dertig (30) dagen na aankoop een ingevuld garantieregistratieformulier aan Midmark te sturen om een beroep te kunnen doen op deze beperkte garantie.

GARANTIE-UITSLUITINGEN: Deze beperkte garantie is niet van toepassing op, en Midmark aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het volgende:

- (1) Gebreken, schade of andere gesteldheden die, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van verkeerd gebruik, misbruik, veronachtzaming, wijziging, ongeval, vrachtschade, onjuiste opslag, manipulatie of het niet tijdig verzoeken om en verkrijgen van reparatie of vervanging;
- (2) Producten die niet volgens de in de bij het betreffende product behorende "Installatiehandleiding" en/of "Installatie- en gebruikshandleiding" van Midmark vermelde vereisten of aanbevelingen zijn geïnstalleerd, gebruikt, gereinigd en onderhouden, met inbegrip van de gespecificeerde vereisten en aanbevelingen ten aanzien van structurele aspecten, de gebruiksomgeving en elektriciteit;
- (3) Producten die als verbruiksartikelen of steriele producten worden beschouwd;
- (4) Accessoires of onderdelen die niet door Midmark zijn vervaardigd;
- (5) Kosten die door derden in rekening worden gebracht voor aanpassingen, reparaties, vervangende onderdelen, installatie- of overige werkzaamheden aan of in verband met dergelijke producten waarvoor geen voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door Midmark is verleend;
- (6) Kosten en vergoedingen in verband met periodiek onderhoud en periodieke reiniging; en
- (7) Verklaringen en garanties die door andere personen of entiteiten dan Midmark worden afgegeven.
- (8) Overeenstemming van kleur, structuur of stof behalve dat het product voldoet aan commercieel aanvaardbare normen;
- (9) Verkleuringen ten gevolge van natuurlijk licht of kunstlicht;
- (10) Op maat vervaardigde producten;
- (11) Wijzigingen of aanpassingen aan het product door andere personen of entiteiten dan Midmark; en
- (12) Producten waarop deze beperkte garantie normaal gesproken wel van toepassing zou zijn, ware het niet dat deze zijn verworven: (i) van een andere persoon of entiteit dan Midmark of een van haar geautoriseerde distributeurs, of (ii) van een distributeur van Midmark die niet bevoegd is om het betreffende product te verkopen binnen het geografische gebied waar de koper is gevestigd, of niet bevoegd is om het betreffende product op de medische markt te verkopen.

SOFTWARE: TEN AANZIEN VAN SOFTWARE DIE EEN PRODUCT OF ONDERDEEL DAARVAN IS, GARANDEERT MIDMARK NIET DAT DE SOFTWARE: (1) VRIJ IS VAN FOUTEN; (2) ZONDER PROBLEMEN OF ONDERBREKINGEN KAN WORDEN GEBRUIKT; OF (3) NIET VATBAAR IS VOOR VIRUSSEN OF VIRUSAANVALLEN OF ANDERE GEVAREN.

EXCLUSIEF RECHTSMIDDEL: AFWIJZING GEVOLGSCHADE DE ENIGE VERPLICHTING VAN MIDMARK INGEVOLGE DEZE BEPERKTE GARANTIE OMVAT REPARATIE OF VERVANGING VAN DEFECTE ONDERDELEN. MIDMARK IS NIET AANSPRAKELIJK, EN WIJST AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND, VOOR ALLE RECHTSTREEKSE SCHADE, BUITENGEWONE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, EXEMPLAIRE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF VERTRAGINGEN, MET INBEGRIJ VAN, DOCH ZONDER BEPERKT TE ZIJN TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN DERIVING VAN WINSTEN OF INKOMSTEN, GEBRUIKSDERIVING, GEGEVENSVERLIES, NIET-BESCHIKBAARHEID, DEKKING ALSMEDE BEZOLDIGING VAN, BETALINGEN AAN EN VOORDELEN VOOR WERKNEMERS OF ZELFSTANDIGE INHUURKRACHTEN. DEZE AFWIJZING BLIJFT VAN KRACHT ONGEACHT ENIG TEKORTSCHieten OF VERMEEND TEKORTSCHieten VAN DE WEZENLIJKE DOELSTELLING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE OF DE HIERIN SPECIFIEK VERMELDE RECHTSMIDDELEN. AFWIJZING VAN GARANTIE DEZE GARANTIE IS DE ENIGE DOOR MIDMARK GEBODEN GARANTIE EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE OVERIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES. MIDMARK BIJDT GENEREEL STILZWIJGENDE GARANTIES, OOK NIET TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DEZE GARANTIE BEPERKT ZICH TOT DE REPARATIE OF VERVANGING VAN DEFECTE ONDERDELEN.

VERJARINGSTERMIJN Tegen Midmark kan na negentig (90) dagen na het verstrijken van de looptijd van de beperkte garantie geen gerechtelijke procedure wegens schending van deze beperkte garantie, een stilzwijgende garantie, voor zover daarvan sprake zou zijn, of enige andere vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de producten, worden ingesteld.

GEEN BEVOEGDHEID Geen persoon of firma is bevoegd om namens Midmark enige andere verplichting of aansprakelijkheid in verband met de producten tot stand te brengen of goed te keuren.

Notities:

Notities:

Notities:

Midmark Corporation

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 USA

1-800-643-6275

+1-937-526-3662



Designing better care.