

Regelbaar armsysteem 9A314001 / 9A627001



Van toepassing op de volgende modellen:

204 / 222 / 223 / 244

604 / 622 / 623 / 625

Speciale gereedschappen:

geen

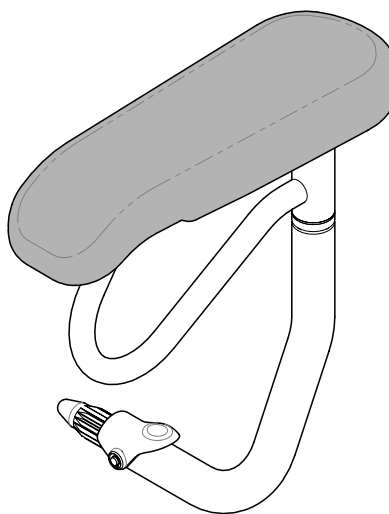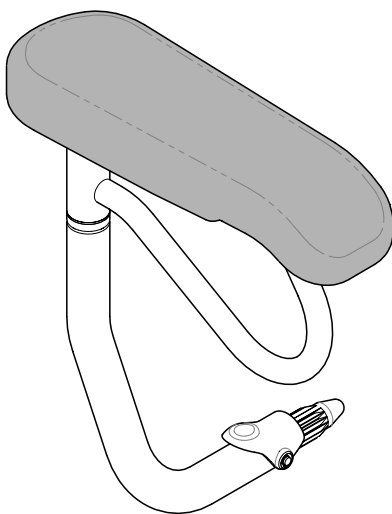

Montage-/gebruikershandleiding




Productinformatie

Distributeur:

Datum van aankoop:

Modelnummer/serienummer:

**Door Midmark geautoriseerd
servicebedrijf:**

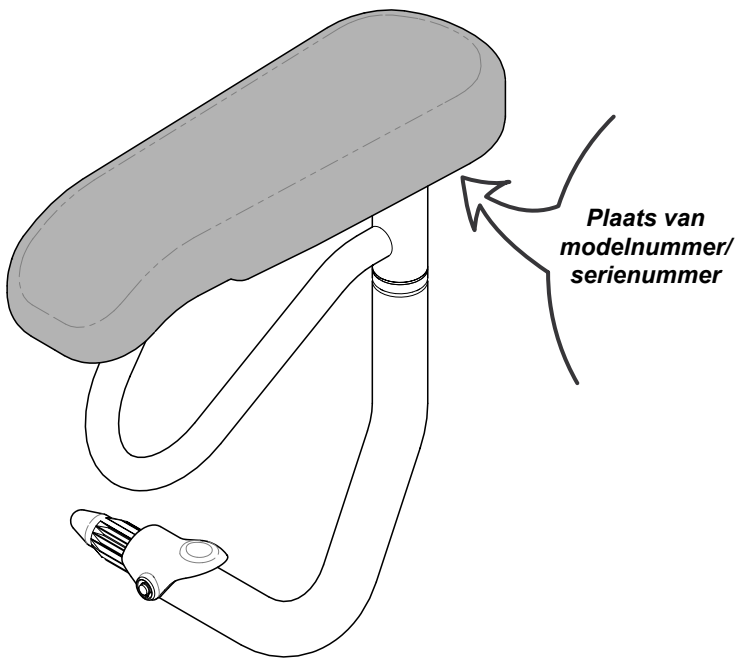

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie

<u>Productinformatie</u>	2
<u>Productregistratie</u>	4
<u>Transport-/opslagomstandigheden</u>	4
<u>Bedrijfsomstandigheden</u>	4
<u>Apparatuur afvoeren</u>	4
<u>Geautoriseerde vertegenwoordiger</u>	4
<u>Belangrijke informatie</u>	5
<u>Beoogd gebruik</u>	6
<u>Vereisten (beugelsets)</u>	6
<u>Veiligheidsinstructies</u>	6

Montage/bediening

<u>Montage-/bedieningsinstructies (222, 223, 622, 623, 625)</u>	7
<u>Montage-/bedieningsinstructies (204, 604)</u>	8
<u>Montage-/bedieningsinstructies (244)</u>	9

Onderhoud

<u>Contact opnemen met de onderhoudsdienst</u>	10
<u>Reiniging</u>	10
<u>Preventief onderhoud</u>	10

Garantie

<u>Beperkte garantie</u>	11
--------------------------------	----

Productregistratie

Ga naar www.midmark.com om uw product te registreren

Transport-/opslagomstandigheden

Omgevingstemperatuur:-30 °C tot +60 °C (-22 °F tot +140 °F)

Relatieve luchtvochtigheid.....10% tot 90% (niet-condenserend)

Bedrijfsomstandigheden

Omgevingstemperatuur:+10 °C tot +40 °C (+50 °F tot +104 °F)


Relatieve luchtvochtigheid.....30% tot 75% (niet-condenserend)

Hoogte.....3000 m of minder

Apparatuur afvoeren

Aan het eind van hun gebruiksduur kunnen de stoel, bijbehorende accessoires en overige verbruiksartikelen zijn verontreinigd als gevolg van normaal medisch gebruik. Raadpleeg plaatselijk geldende wet- en regelgeving voor de correcte afvoer van apparatuur, accessoires en overige verbruiksartikelen.

Geautoriseerde vertegenwoordiger

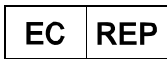

Waarschuwing

Neem bij ernstige voorvallen met betrekking tot het toestel contact op met Midmark en de betreffende bevoegde autoriteit.

Klanten binnen de EU kunnen voor al hun vragen, voorvallen en klachten terecht bij de hieronder vermelde geautoriseerde vertegenwoordiger van Midmark.

CEpartner4U
Esdoornlaan 13
3951 DB Maarn, Nederland
Telefoon: +31 343 442 524
Fax: +31 343 442 162

Belangrijke informatie - Veiligheidssymbolen



WAARSCHUWING

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel.



Let op

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot gering of matig letsel. Dit symbool kan ook gelden als waarschuwing tegen onveilige praktijken



Apparatuurwaarschuwing

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot apparatuurschade.

Opmerking

Benadrukt een procedure, praktijk of voorwaarde.

Lijst van symbolen



Druklimiet



Correcte oriëntatie tijdens transport



Breekbaar



Fabrikant



Temperatuurlimiet



Droog houden



Luchtvochtigheid



Serienummer



Catalogusnummer

Beoogd gebruik

Ondersteun de arm van de patiënt tijdens onderzoeken.

Vereisten (beugelsets):

204 / 604.....	9A632003
222 / 223 / 622 / 623.....	9A314005
244.....	geen
625.....	9A314005 / 9A314007

Veiligheidsinstructies



Waarschuwing

Aan dit apparaat mogen geen wijzigingen worden doorgevoerd.



Waarschuwing


Niet op de arm of het armkussen van de stoel zitten.

Montage/bediening (222, 223, 622, 623, 625)


- A) Positioneer de arm van de stoel zoals aangegeven. (zie opmerking)
B) Steek de arm in de bus tot de borgclip de arm op zijn plaats vergrendelt.

Opmerking

Zorg ervoor dat de hoek van de arm lasbuis degelijk gepositioneerd is voor het stoelmodel. Zie afbeelding voor meer details.

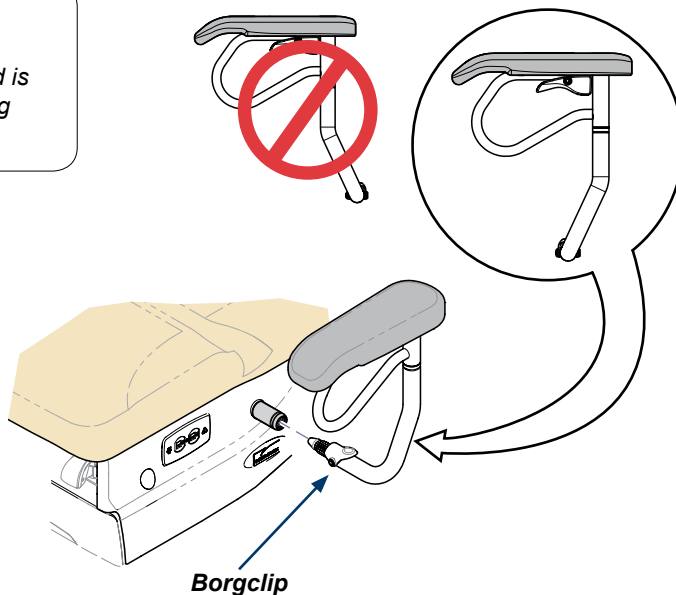

- A) Knijp in de ontgrendelknop om de arm van de stoel te positioneren.
B) Draai de arm van de stoel naar de gewenste positie.

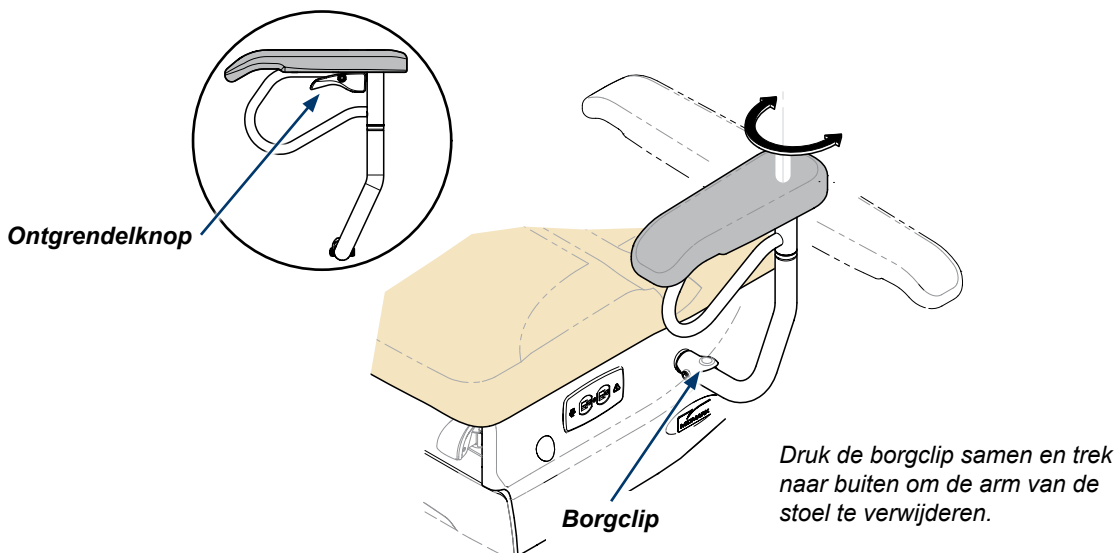


Montage/bediening (204 & 604)


- A) Positioneer de arm van de stoel zoals aangegeven. (zie opmerking)
B) Steek de arm in de bus tot de borgclip de arm op zijn plaats vergrendelt.

Opmerking

Zorg ervoor dat de hoek van de armlasbuis degelijk gepositioneerd is voor het stoelmodel. Zie afbeelding voor meer details.

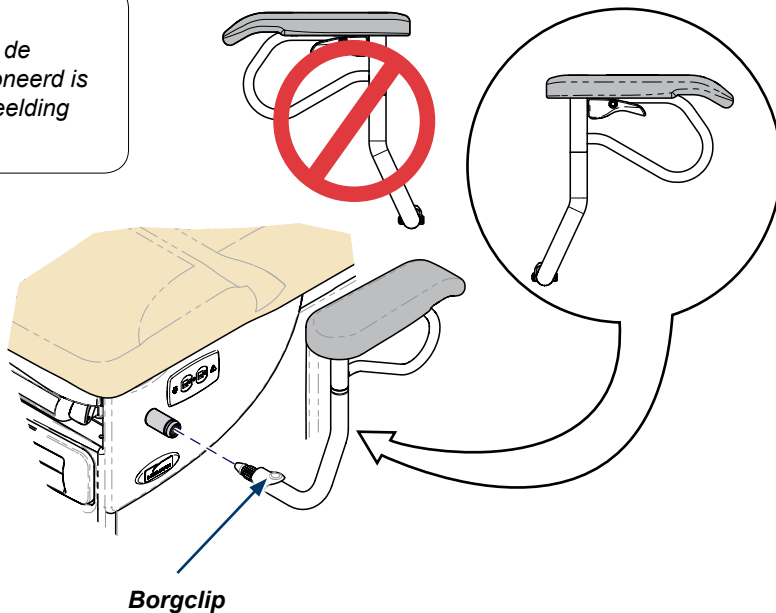

- A) Knijp in de ontgrendelknop om de arm van de stoel te positioneren.
B) Draai de arm van de stoel naar de gewenste positie.

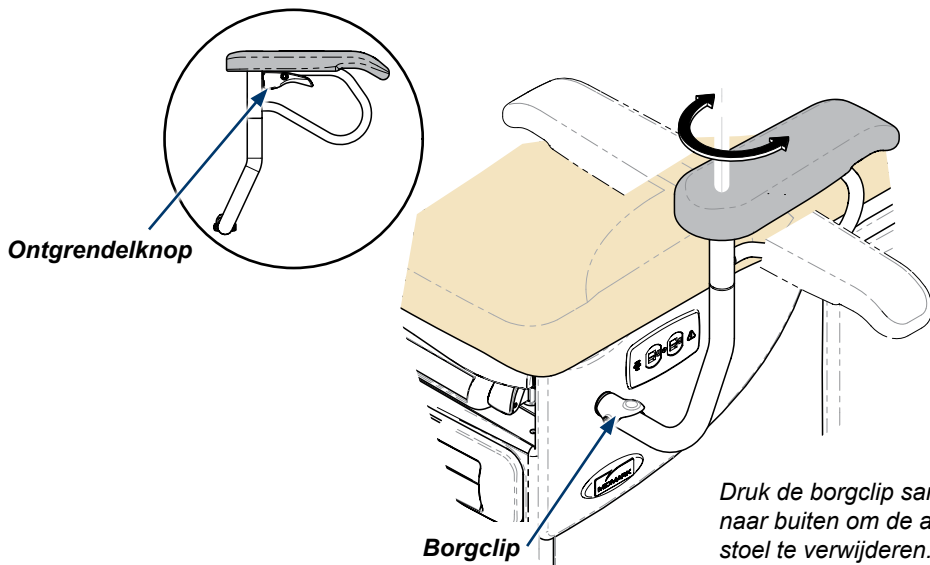


Montage/bediening (244)


- A) Positioneer de arm van de stoel zoals aangegeven. (zie opmerking)
B) Steek de arm in de bus tot de borgclip de arm op zijn plaats vergrendelt.

Opmerking

Zorg ervoor dat de hoek van de armlasbuis degelijk gepositioneerd is voor het stoelmodel. Zie afbeelding voor meer details.

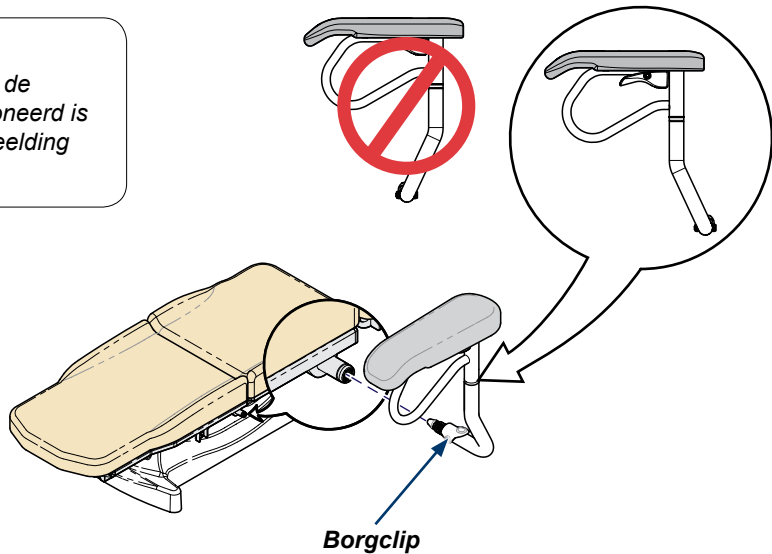

- A) Knijp in de ontgrendelknop om de arm van de stoel te positioneren.
B) Draai de arm van de stoel naar de gewenste positie.

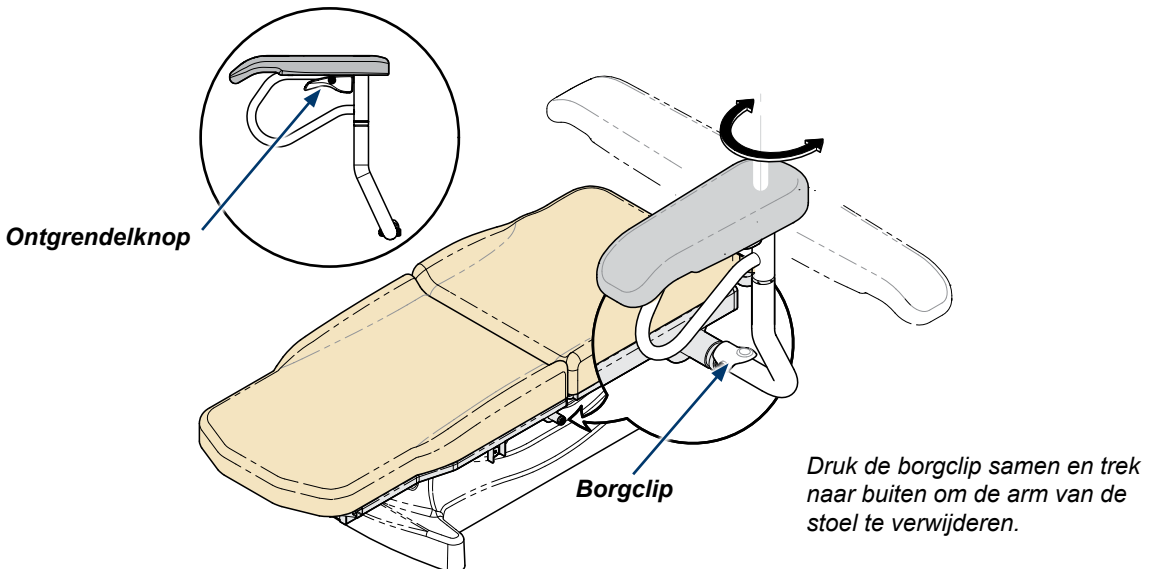

Onderhoud

Contact opnemen met de onderhoudsdienst

Opmerking

Als u contact opneemt met de onderhoudsdienst, dient u het modelnummer/serienummer bij de hand te hebben.

Voor reparatie en onderhoud kunt u contact opnemen met de geautoriseerde Midmark-distributeur.

Om direct contact op te nemen met Midmark Versailles Tech Service:

+1-937-526-3662

8:00 tot 19:00 maandag - donderdag (EST) [behalve op officiële Amerikaanse feestdagen]

8:00 tot 17:00 maandag - vrijdag (EST) [behalve op officiële Amerikaanse feestdagen]

www.midmark.com

Reiniging



Apparatuurwaarschuwing

De arm van de stoel is bestand tegen de meeste vlekken afkomstig van geneesmiddelen. Wel kan de arm van de stoel beschadigd raken als gevolg van oplosmiddelen en kleurstoffen. Als er vloeistof op de arm van de stoel wordt gemorst, moet deze onmiddellijk worden verwijderd.

Armkussen van de stoel

Reinig de arm van de stoel elke week met een mengsel van milde vloeibare zeep en water, spoel de arm van de stoel vervolgens af met schoon water en droog deze volledig af om te voorkomen dat er zich desinfecterend reinigingsmiddel op de arm van de stoel kan ophopen.

Ontsmet de arm van de stoel met een oplossing van standaardbleekmiddel en water in een verhouding van 1 op 10 (10 %) of met een op chloor gebaseerd reinigingsmiddel. Spoel de arm van de stoel vervolgens af met schoon water en droog het materiaal daarna grondig af. Raadpleeg de geldende richtlijnen voor desinfectie en sterilisatie in instellingen voor gezondheidszorg.

Om het risico van schade als gevolg van het opeenhopen van restanten van desinfecterend reinigingsmiddel zo gering mogelijk te houden, moet worden voorkomen dat er zich op de arm van de stoel plasjes desinfectiemiddel vormen. Zodra de voorgeschreven contactduur is bereikt, dient overtollige vloeistof op het oppervlak te worden verwijderd en dient het oppervlak te worden afgedroogd.

Met uw product zijn gedetailleerde instructies voor verzorging en onderhoud meegeleverd. Deze informatie vindt u ook op www.midmark.com in de Technische bibliotheek onder het tabblad Gebruikersinformatie voor uw product.

Gelakte metalen/plastic oppervlakken

Reinig gelakte metalen en plastic oppervlakken wekelijks met een schone, zachte doek en een mild reinigingsmiddel.

Preventief onderhoud

Inspecteer periodiek de volgende gebieden:

- Alle bevestigingsmiddelen moeten aanwezig zijn en goed vastzitten.
- Alle mechanische functies dienen correct te werken.

Garantie

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE GARANTIE Midmark Corporation ("Midmark") biedt de oorspronkelijke koper de garantie dat zij onderdelen van de door Midmark vervaardigde binnenlandse en internationale medische producten (uitgezonderd die onderdelen die staan vermeld onder "Garantie-uitsluitingen") met materiaal- of constructiefouten ofwel zal repareren ofwel zal vervangen, waarbij de keuze bij Midmark ligt. Het enige rechtsmiddel dat ingevolge deze beperkte garantie wordt geboden is reparatie of vervanging, waarbij de keuze bij Midmark ligt, van de betreffende onderdelen. De beperkte garantie is uitsluitend van toepassing op defecten die binnen de geldende garantietermijn aan Midmark zijn gemeld en waarvan het bestaan na onderzoek door Midmark is vastgesteld. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van een product en kan niet op derden worden overgedragen of aan derden worden toegewezen. Vervangende onderdelen of producten kunnen worden gebruikt en/of gereviseerde onderdelen of producten mits de kwaliteit en specificaties daarvan gelijk zijn aan die van nieuwe onderdelen of producten.

Midmark biedt de oorspronkelijke koper gedurende de garantietermijn de garantie dat zij software waarmee de door Midmark vervaardigde producten (uitgezonderd die onderdelen die staan vermeld onder "Garantie-uitsluitingen") zijn uitgerust ofwel zal repareren ofwel zal vervangen indien: (1) de media die de software bevatten bij normaal gebruik materiaal- of constructiefouten vertonen; of (2) de software niet in belangrijke mate voldoet aan de bekendgemaakte specificaties.

LOOPTIJD VAN DE GARANTIE De looptijd van de garantie voor alle producten en onderdelen die onder de garantie vallen, gaat in op de datum van de aan de oorspronkelijke koper verstrekte factuur voor het product en duurt voort tot één (1) jaar.

SERVICE OP GROND VAN GARANTIE Voor onderhoud of reparatie op grond van de garantie dient men zich te wenden tot Midmark zelf of tot een geautoriseerde distributeur van producten uit de productenreeks van Midmark waarvoor een beroep op service op grond van de garantie wordt gedaan. Voor vragen over of kwesties in verband met de service op grond van de garantie kunt u via www.midmark.com per e-mail contact opnemen. Voor telefonisch contact belt u naar 1-800-MIDMARK. Wilt u dit per briefpost doen, dan kan dit aan Midmark Corporation, 60 Vista Drive, Versailles, Ohio 45380, USA. De koper zelf is ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat een product bij Midmark of een van haar geautoriseerde distributeurs wordt afgeleverd ten behoeve van een garantieservice. Deze levering komt voor rekening van de koper. Tevens is het de verantwoordelijkheid van de koper om zich te houden aan de instructies voor de garantieservice die zijn verstrekt door Midmark of haar geautoriseerde distributeur. De koper dient binnen dertig (30) dagen na aankoop een ingevuld garantieregistratieformulier aan Midmark te sturen om een beroep te kunnen doen op deze beperkte garantie.

GARANTIE-UITSLUITINGEN: Deze beperkte garantie is niet van toepassing op, en Midmark aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het volgende: (1) Gebreken, schade of andere gesteldheden die, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van verkeerd gebruik, misbruik, veronachtzaming, wijziging, ongeval, vrachtschade, onjuiste opslag, manipulatie of het niet tijdig verzoeken om en verkrijgen van reparatie of vervanging;

(2) Producten die niet volgens de in de bij het betreffende product behorende "Installatiehandleiding" en/of "Installatie- en gebruikshandleiding" van Midmark vermelde vereisten of aanbevelingen zijn geïnstalleerd, gebruikt, gereinigd en onderhouden, met inbegrip van de gespecificeerde vereisten en aanbevelingen ten aanzien van structurele aspecten, de gebruiksomgeving en elektriciteit;

(3) Producten die als verbruiksartikelen of steriele producten worden beschouwd;

(4) Accessoires of onderdelen die niet door Midmark zijn vervaardigd;

(5) Kosten die door derden in rekening worden gebracht voor aanpassingen, reparaties, vervangende onderdelen, installatie- of overige werkzaamheden aan of in verband met dergelijke producten waarvoor geen voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door Midmark is verleend;

(6) Kosten en vergoedingen in verband met periodiek onderhoud en periodieke reiniging; en

(7) Verklaringen en garanties die door andere personen of entiteiten dan Midmark worden afgegeven.

(8) Overeenstemming van kleur, structuur of stof behalve dat het product voldoet aan commercieel aanvaardbare normen;

(9) Verkleuringen ten gevolge van natuurlijk licht of kunstlicht;

(10) Op maat vervaardigde producten;

(11) Wijzigingen of aanpassingen aan het product door andere personen of entiteiten dan Midmark; en

(12) Producten waarop deze beperkte garantie normaal gesproken wel van toepassing zou zijn, ware het niet dat deze zijn verworven: (i) van een andere persoon of entiteit dan Midmark of een van haar geautoriseerde distributeurs, of (ii) van een distributeur van Midmark die niet bevoegd is om het betreffende product te verkopen binnen het geografische gebied waar de koper is gevestigd, of niet bevoegd is om het betreffende product op de medische markt te verkopen.

SOFTWARE: TEN AANZIEN VAN SOFTWARE DIE EEN PRODUCT OF ONDERDEEL DAARVAN IS, GARANDEERT MIDMARK NIET DAT DE SOFTWARE: (1) VRIJ IS VAN FOUTEN; (2) ZONDER PROBLEMEN OF ONDERBREKINGEN KAN WORDEN GEBRUIKT; OF (3) NIET VATBAAR IS VOOR VIRUSSEN OF VIRUSAANVALLEN OF ANDERE GEVAREN.

EXCLUSIEF RECHTSMIDDEL: AFWIJZING GEVOLGSCHADE DE ENIGE VERPLICHTING VAN MIDMARK INGEVOLGE DEZE BEPERKTE GARANTIE OMVAT REPARATIE OF VERVANGING VAN DEFECTE ONDERDELEN. MIDMARK IS NIET AANSPRAKELIJK, EN WIJST AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND, VOOR ALLE RECHTSTREEKSE SCHADE, BUITENGEWONE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, EXEMPLAIRE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF VERTRAGINGEN, MET INBEGRIJP VAN, DOCH ZONDER BEPERKT TE ZIJN TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN DERIVING VAN WINSTEN OF INKOMSTEN, GEBRUIKSDERIVING, GEGEVENSVERLIES, NIET-BESCHIKBAARHEID, DEKKING ALSMEDE BEZOLDIGING VAN, BETALINGEN AAN EN VOORDELEN VOOR WERKNEMERS OF ZELFSTANDIGE INHUURKRACHTEN. DEZE AFWIJZING BLIJFT VAN KRACHT ONGEACHT ENIG TEKORTSCHIETEN OF VERMEEND TEKORTSCHIETEN VAN DE WEZENLIJKE DOELSTELLING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE OF DE HIERIN SPECIFIEK VERMEDELDE RECHTSMIDDELEN. AFWIJZING VAN GARANTIE DEZE GARANTIE IS DE ENIGE DOOR MIDMARK GEBODEN GARANTIE EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE OVERIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES. MIDMARK BIEDT GENERELEI STILZWIJGENDE GARANTIES, OOK NIET TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DEZE GARANTIE BEPERKT ZICH TOT DE REPARATIE OF VERVANGING VAN DEFECTE ONDERDELEN.

VERJARINGSTERMIJN Tegen Midmark kan na negentig (90) dagen na het verstrijken van de looptijd van de beperkte garantie geen gerechtelijke procedure wegens schending van deze beperkte garantie, een stilzwijgende garantie, voor zover daarvan sprake zou zijn, of enige andere voordeeling die voortvloeit uit of verband houdt met de producten, worden ingesteld.

GEEN BEVOEGDHEID Geen persoon of firma is bevoegd om namens Midmark enige andere verplichting of aansprakelijkheid in verband met de producten tot stand te brengen of goed te keuren.

Midmark Corporation

60 Vista Drive

Versailles, OH 45380 USA

1-800-643-6275

+1-937-526-3662



Designing better care.