


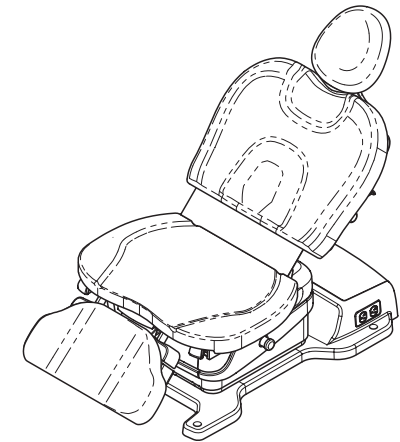

Ce guide présente le fonctionnement général du fauteuil. Consultez le guide de l'utilisateur joint pour des instructions supplémentaires sur le fonctionnement et l'entretien ainsi que des informations sur la conformité réglementaire.

Entretien

Examinez régulièrement les points suivants :

- Le cordon d'alimentation ne doit présenter aucun dommage visible.
- Toutes les fixations doivent être en place et bien attachées.
- Tous les dispositifs mécaniques doivent fonctionner.

Nettoyage

- Nettoyez la garniture avec une solution à base d'eau de Javel diluée. Rapport - 10:1 (eau:eau de Javel)
- Chaque semaine, essuyez les surfaces plastiques et métalliques peintes du fauteuil à l'aide d'un chiffon doux propre et d'un détergent doux.

Service technique

Si une réparation est nécessaire, contacter votre revendeur Midmark.

Medical US 844.856.1230 / Canada 937.526.8585
Du lundi au jeudi de 8h00 à 18h00 HNE
Vendredi de 8h00 à 17h00 HNE
midmark.com




Avertissement concernant l'équipement
Le fonctionnement simultané de plus de deux fonctions dans des conditions de charge maximale peut entraîner un dépassement du courant nominal du fauteuil et une protection contre les surintensités du circuit de dérivation (disjoncteurs, par exemple) peut se déclencher. Limitez le fonctionnement à deux fonctions simultanément au maximum dans ces conditions.

Pour utiliser les fonctions Base / Dossier / Inclinaison / Repose-pieds...
Maintenir le bouton approprié enfoncé.




Attention
La tête doit être fermement fixée avant d'effectuer tout examen ou toute procédure.


Pour régler la tête...
A) Desserrez le bouton de verrouillage.
B) Faites pivoter la tête dans la position souhaitée.
C) Serrez le bouton de verrouillage pour le verrouiller en place.

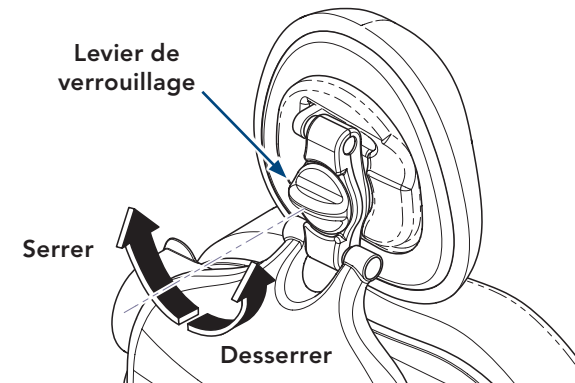

Pour allonger ou rétracter le repose-pieds...
A) Serrez la poignée d'un côté du repose-pieds.
B) Tirez ou poussez le repose-pieds de façon à le mettre dans la position désirée.
C) Relâchez la ou les poignée(s) pour le bloquer dans la position souhaitée.

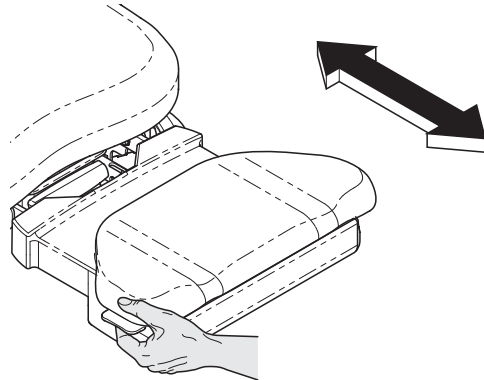

Remarque
La fonction Relevage/Abaissement du repose-pieds est désactivée lorsque la cuvette à résidus n'est pas en position de remisage.
(vous entendrez une série de « bips » si la cuvette à résidus n'est pas en position de remisage quand la fonction Relevage/Abaissement du repose-pieds est activée.)

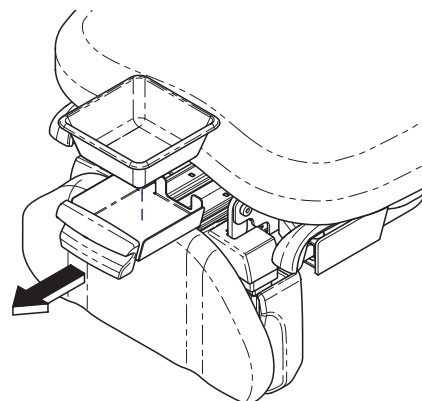


Pour accéder à la cuvette à résidus...
A) Assurez-vous que le repose-pieds est en position repliée.
B) Abaissez complètement la rallonge manuelle du repose-pieds.
C) Tirez la cuvette à résidus vers l'extérieur.



Fonction Quick Chair™
(avec pédale de commande uniquement)

Pour activer la fonction Quick Chair™...
Appuyez sur le bouton Quick Chair™ et maintenez-le enfoncé..

Remarque : Vous entendrez un seul « bip » et le fauteuil se déplacera vers la position Quick Chair™.

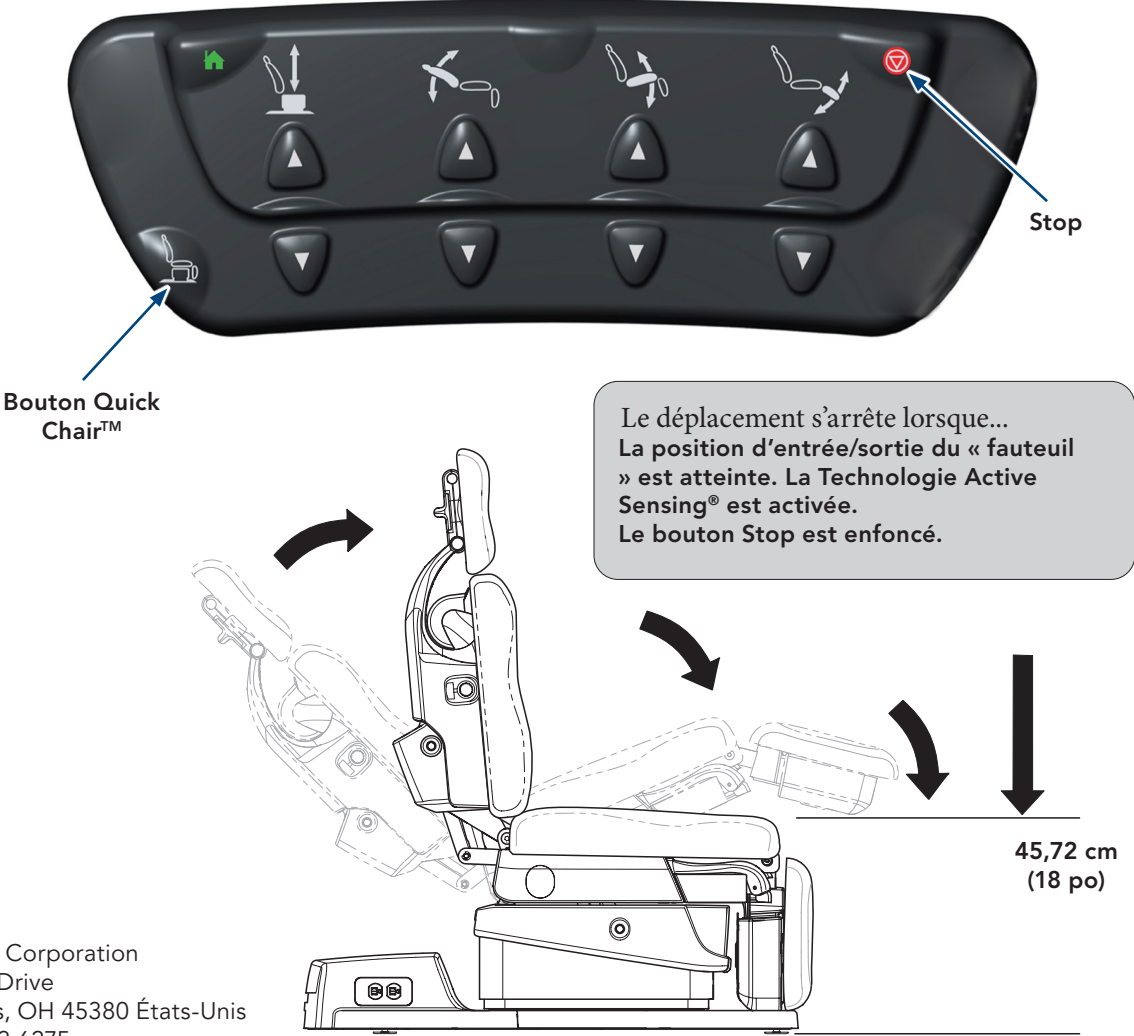

Fonction Position initiale

Remarque
Lorsque vous utilisez le bouton Origine qui automatise le mouvement vers le bas, le fauteuil s'arrête lorsqu'un dégagement entre le fauteuil et l'enceinte de la base atteint 12 cm (4,72 po).

Pour abaisser la base à une hauteur de 45,72 cm (18 po)...
Enfoncez puis relâchez le bouton Origine..

Remarque : Vous entendrez un seul « bip » et le fauteuil se déplacera vers la position Origine.

