


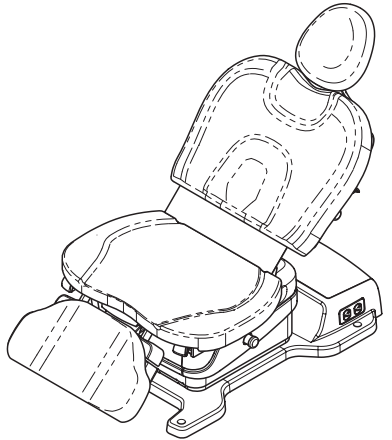

Esta guía resume el funcionamiento básico la silla. Consulte la Guía del usuario para ver instrucciones adicionales sobre el funcionamiento y cuidado, así como información sobre el cumplimiento normativo.

Mantenimiento

Revise periódicamente que:

- El cable de alimentación no presente daños visibles.
- Todos los elementos de sujeción estén colocados y apretados.
- Todas las funciones mecánicas funcionan correctamente.

Limpieza

- Limpie la tapicería con una solución de agua con lejía. Relación - 10:1 (agua:lejía)
- Limpie la silla una vez a la semana, pasando un paño suave y limpio humedecido con un limpiador suave sobre las superficies de plástico y metal pintado.

Cómo contactar con el servicio técnico

Póngase en contacto directamente con Midmark si necesita asistencia técnica.

Médica EE. UU. 844 856 1230/
Canadá 937 526 8585
De lunes a jueves de 8:00 a 18:00 ET
Viernes de 8:00 a 17:00 ET
midmark.com



Advertencia sobre el equipo

El funcionamiento simultáneo de más de dos funciones en condiciones de carga máxima puede hacer que la silla supere su nivel de capacidad, lo cual puede provocar que se active la protección contra sobrecarga del circuito de derivación (p. ej., disyuntores). Limite el funcionamiento a no más de dos funciones simultáneas en estas condiciones.

Para utilizar las funciones Base/Espalda/Inclinación/Reposapiés... Mantenga presionado el botón adecuado.




Precaución

El reposacabezas debe estar bien fijado antes de iniciar cualquier procedimiento o examen médico.


Para ajustar el reposacabezas...

- Afloje la perilla de bloqueo.
- Gire el reposacabezas hasta la posición deseada.
- Apriete la perilla de bloqueo para fijar el reposacabezas.

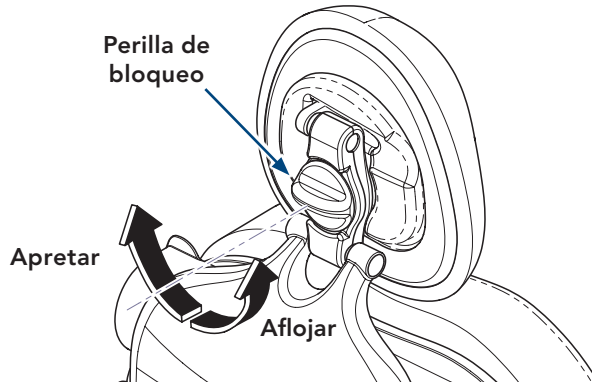


Para extender/retraer el reposapiés...

- Presione las palancas a cada lado del reposapiés.
- Ajuste el reposapiés hacia fuera o hacia dentro a la posición deseada.
- Suelte la palanca para fijar la posición.

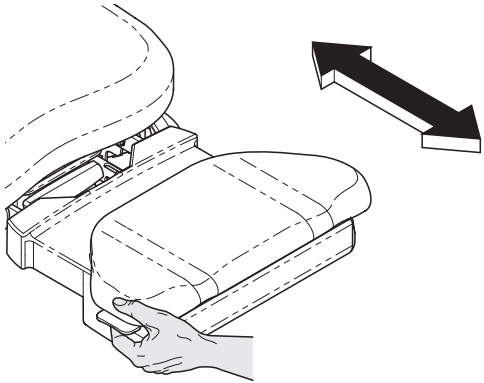

Nota

Las funciones de subir y bajar el reposapiés se desactivarán si la bandeja colectora **no** está replegada. (Oírás una serie de pitidos si la bandeja colectora no está replegada cuando se active la función «subir/bajar reposapiés»).

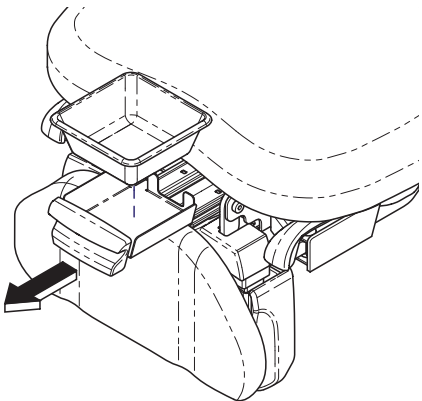

Para acceder a la bandeja colectora...

- Asegúrese de que la sección del reposapiés esté replegada.
- Baje completamente la extensión manual del reposapiés.
- Tire de la bandeja colectora hacia afuera.



003-10743-03 Rev AA2 (10/21/24)


Función Quick Chair™
(Solo con control de reposapiés)

Para activar la función Quick Chair™...
Pulse y suelte el botón Quick Chair™.

Nota: Escuchará un único pitido y la silla se moverá a la posición Quick Chair™.



El movimiento se detiene cuando...
Se alcanza la posición de entrada/salida de la «silla». Se activa la tecnología Active Sensing Technology®.
Se pulsa el botón de «detener».

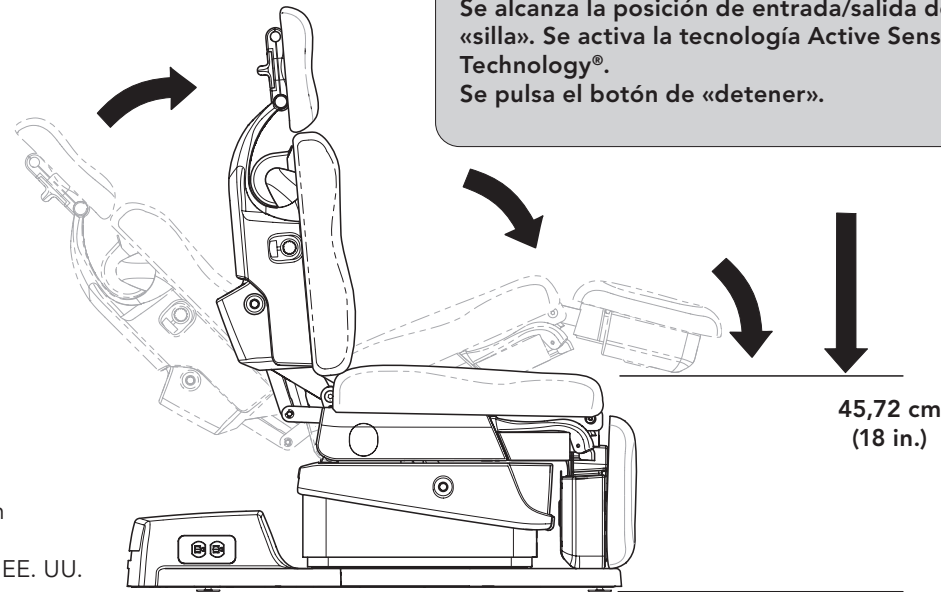

Función de inicio

Nota
Cuando se utiliza el botón de inicio que automatiza el movimiento hacia abajo, la silla se detendrá cuando el espacio libre entre la silla y la carcasa de la base alcance 12 cm (4,72 in.).

Para bajar la base hasta una altura de 45,72 cm (18 in.)...
Pulse y suelte el botón de inicio.

Nota: Escuchará un único pitido y la silla se moverá a la posición de inicio.



El movimiento se detiene cuando...
Se alcanza la posición de inicio.
Se activa la tecnología Active Sensing Technology®.
Se pulsa el botón de «detener».

