



Étape 1: Coupez le serre-câble.
Retirez le support de transport.

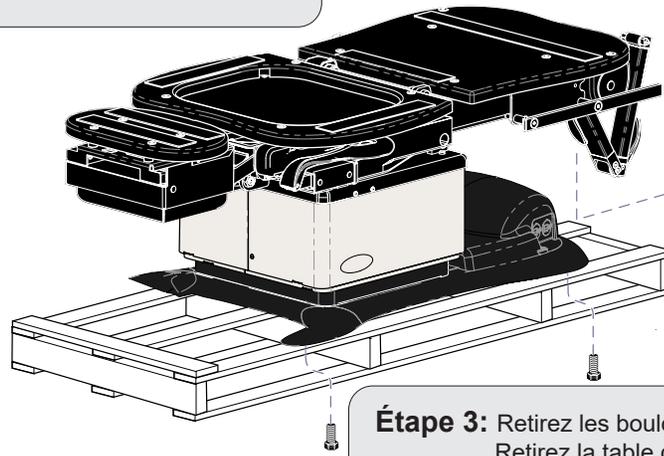

REMARQUE: Le support de transport peut ne pas être présente sur certains modèles.

Modèles à base rotative uniquement

Étape 2: Retirez le support de transport.

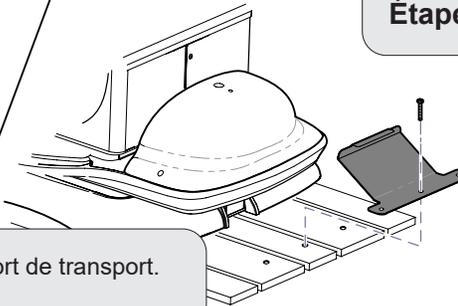

Étape 3: Retirez les boulons du support de transport.
Retirez la table du plateau.

Le réglage de la tension qui apparaît dans la fenêtre du porte-fusibles correspond-il à la tension d'alimentation de l'établissement ?

Si OUI, passez à l'Étape 4.

FSi NON, vous devez effectuer la Procédure de conversion de tension.




Avertissement matériel

Le réglage de la tension qui apparaît dans la fenêtre doit correspondre à la tension d'alimentation. Un mauvais réglage endommagera la table.

Procédure de conversion de tension:

- A. Ouvrez le couvercle du porte-fusibles.
- B. Retirez le porte-fusibles.
- C. Retournez le porte-fusibles à 180°.

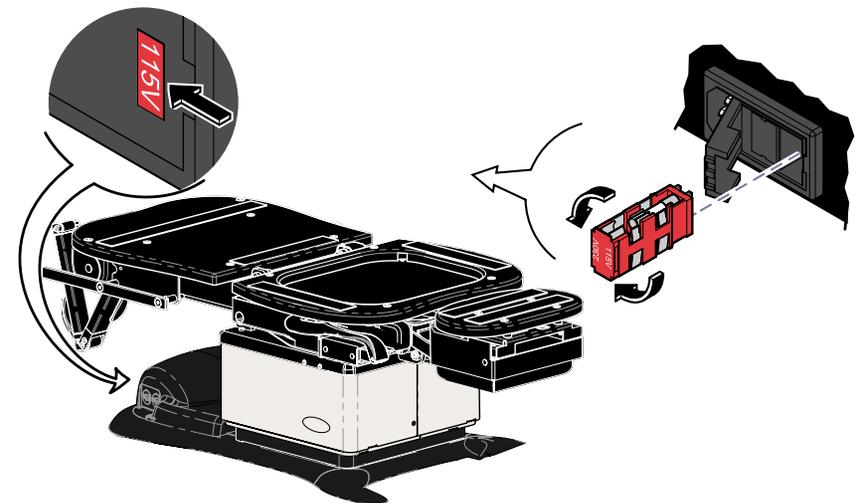


Avant de brancher le cordon d'alimentation de l'appareil Midmark à une prise électrique, il est conseillé de contacter un électricien agréé ou une autorité locale compétente en matière d'installation électrique intérieure des bâtiments afin de vérifier que l'appareil est conforme aux normes électriques en vigueur une fois allumé. Appliquer les valeurs de puissance électrique indiquées sur l'appareil afin de choisir le circuit de dérivation électrique et les contraintes de tension appropriés. Pour les modèles 115 V avec un courant nominal de 12 A ou plus, un circuit de dérivation spécifique peut s'avérer nécessaire si la protection du circuit de dérivation est assurée par un disjoncteur de 15 A.

Attention

Insérez la partie étroite du connecteur de câble dans le support, tel qu'indiqué.


Anneau de verrouillage

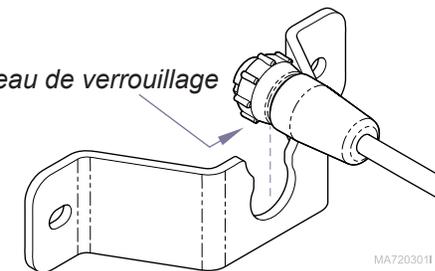

MA7203011

Étape 4: Branchez la manette / pédale dans la prise du câble.
Resserrez l'anneau de verrouillage.

Remarque: Les connecteurs de câble sont clavetés et doivent être correctement orientés.

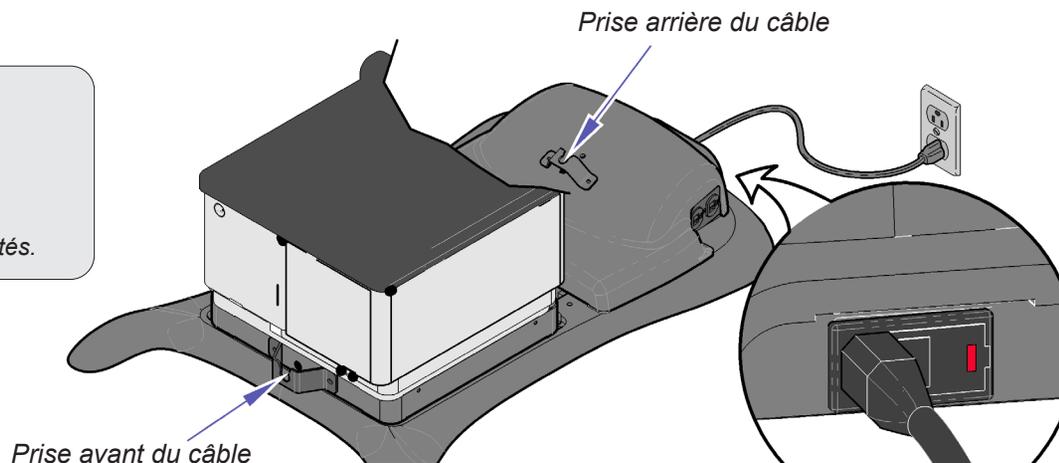

Étape 5: Branchez le cordon d'alimentation.




Avertissement matériel

La table doit être nivelée pour garantir un fonctionnement optimal.

Étape 6 : Mettez la table à niveau.

- A) À l'aide d'un niveau et d'une clé Allen, ajustez les vis de mise à niveau si besoin.
- B) Installez quatre caches de prise.

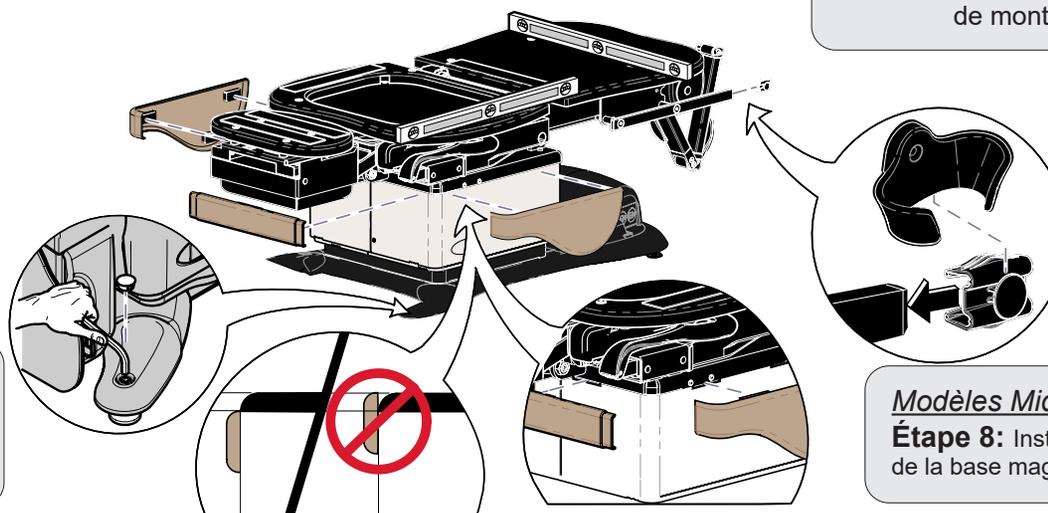

Étape 7: Installez les cylindres de montage de la manette (2).

Modèles Midmark uniquement

Étape 8: Installez les revêtements de la base magnétique (3).