

# Rollensockel [9A33000]

**Komponenten:**  
Installation .....1

**Zweckbestimmung:**  
Zur Mobilisierung des Untersuchungstischs.

**Einschränkungen:**  
Montieren Sie keine Rollen an Stühlen mit drehbarer Basis.  
**Nicht mit verwenden:**  
9A144 / 9A208 / 9A410 / 9A411  
9A337 / 9A341 / 9A344 / 9A345 / 9A421


**Spezielle Werkzeuge:**  
4" x 4" x 24" Halterung




**Vorsicht**

Zum Vermeiden von Verletzungen müssen die Rollen vor Beginn eines Verfahrens immer verriegelt sein.

Seriennummer

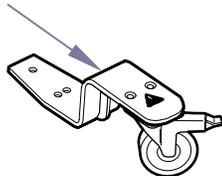

MA646700i

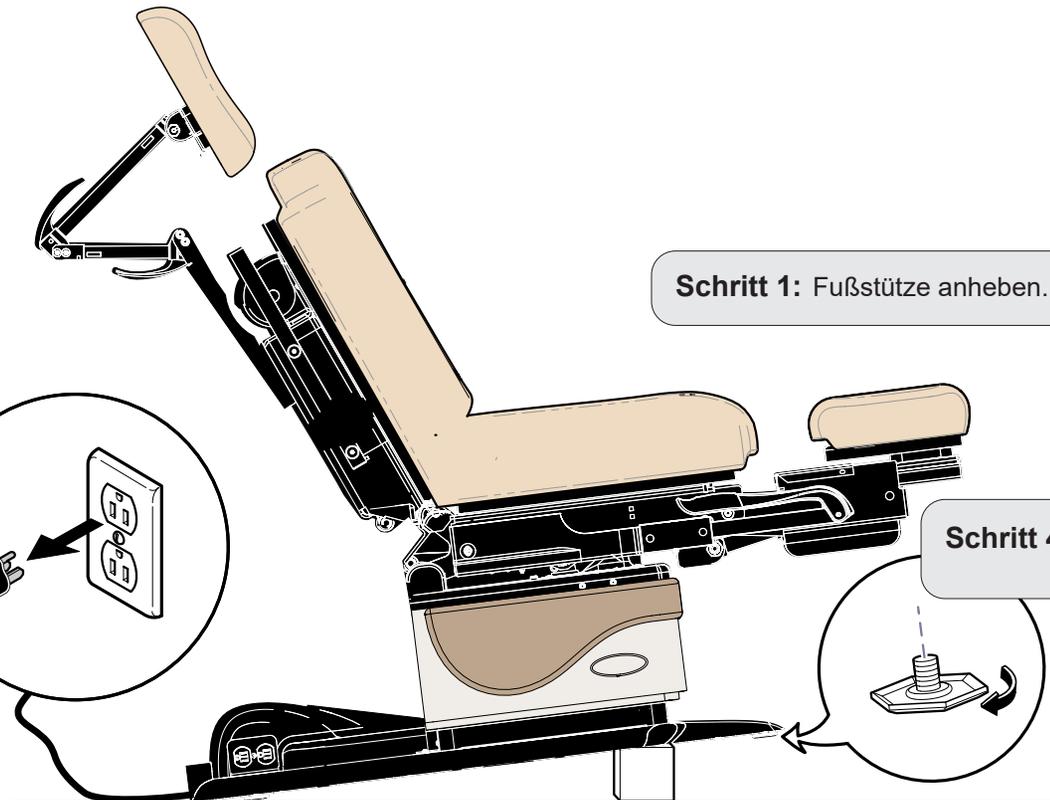

**Schritt 1:** Fußstütze anheben.

**Schritt 2:** Netzkabel abziehen.

**Schritt 4:** Nivellierschrauben entfernen.



**Vorsicht**

Zur Vermeidung von Verletzungen sollte dieser Schritt nur mit Unterstützung durchgeführt werden.

**Schritt 3:** Fußende des Tischs anheben und Stütze unter dem Sockel positionieren.



MA645600revB

**Schritt 5:**

Rollen am Fußende positionieren und jede Rolle mit zwei Schrauben sichern.

**Hinweis:**


*Rollen müssen angewinkelt sein (siehe Abbildung).*

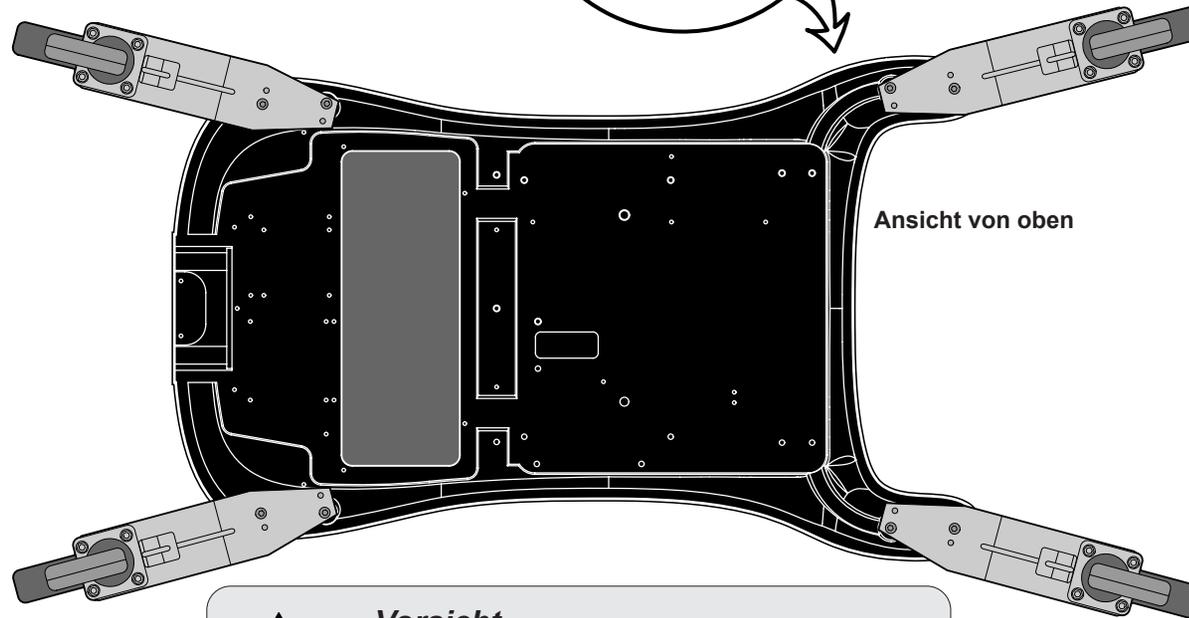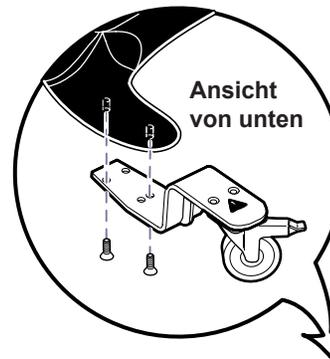

**Vorsicht**

*Zur Vermeidung von Verletzungen sind die Rollen am Fußende zu verriegeln, bevor Schritt 6 durchgeführt wird.*

**Schritt 6:** Stütze unter dem Kopfende des Sockels positionieren. Rollen am Kopfende installieren (siehe oben).

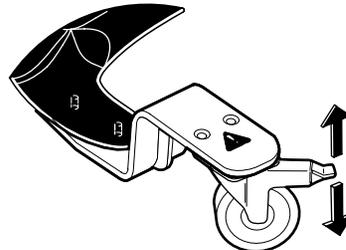

**Zum ENTRIEGELN der Rolle(n)**  
Bremspedal anheben.

**Zum VERRIEGELN der Rolle(n)**  
Bremspedal herunterdrücken.