

Base con ruedas [9A33000]

Contenido:

Instalación 1

Herramientas especiales:

Soporte de 4" x 4" x 24"

Uso previsto:

Para hacer móvil la mesa de reconocimiento.

Restricciones:

No se use en combinación con:

230 (-003)

630 (-005 / -006)

9A144 / 9A208 / 9A410 / 9A411


9A337 / 9A341 / 9A344 / 9A345 / 9A421



Precaución


Para evitar lesiones, siempre bloquee las ruedas antes de realizar cualquier trámite.

Número de serie

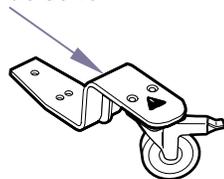


MA646700i


Paso 2: Desconecte el cable de potencia.

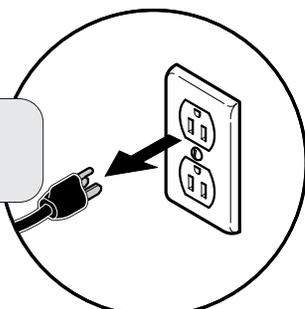

Paso 1: Eleve la sección de los pies.

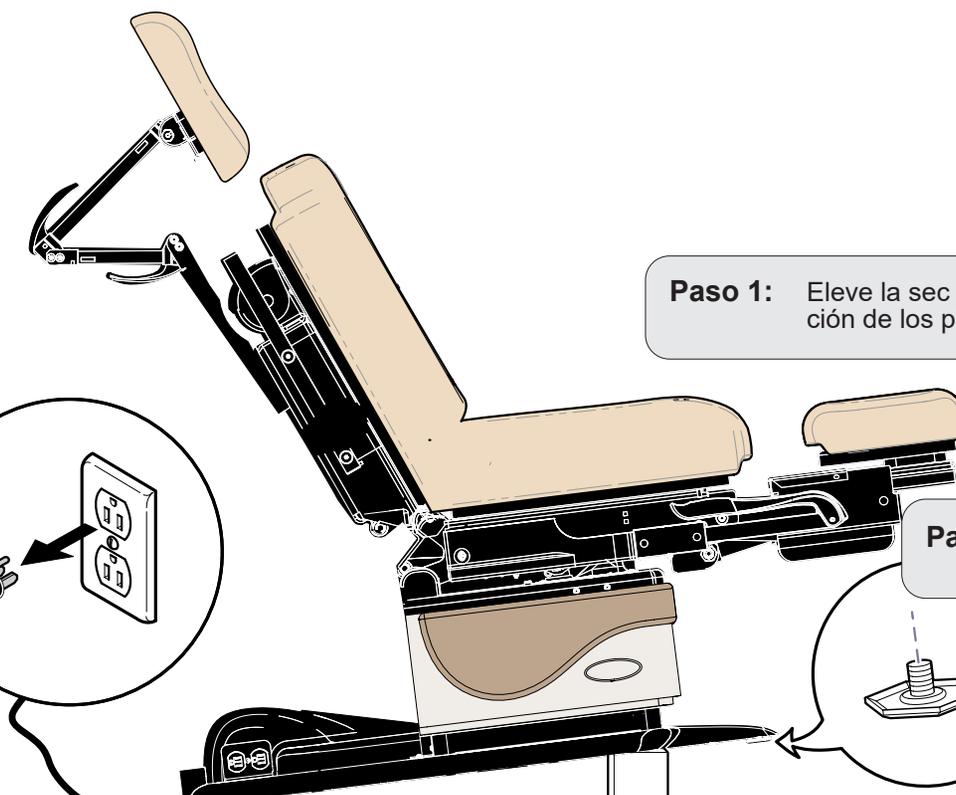

Paso 4: Retire los pernos nivelantes.

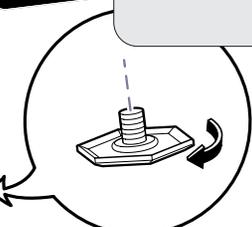

Precaución


Para evitar lesiones, pida a un asistente que lo ayude en este paso..

Paso 3: Levante el extremo de los pies de la mesa y coloque el soporte bajo la base.


MA645600revB

Paso 5: Coloque las ruedas en el extremo para pies y asegúrelas con dos tornillos en cada rueda.

Nota: Las ruedas deben estar inclinadas hacia afuera, tal como se muestra.

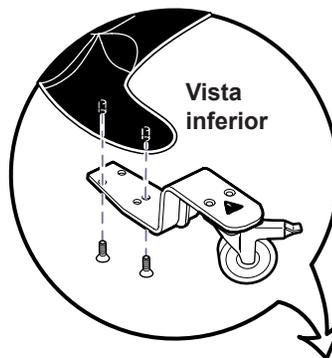

Vista inferior

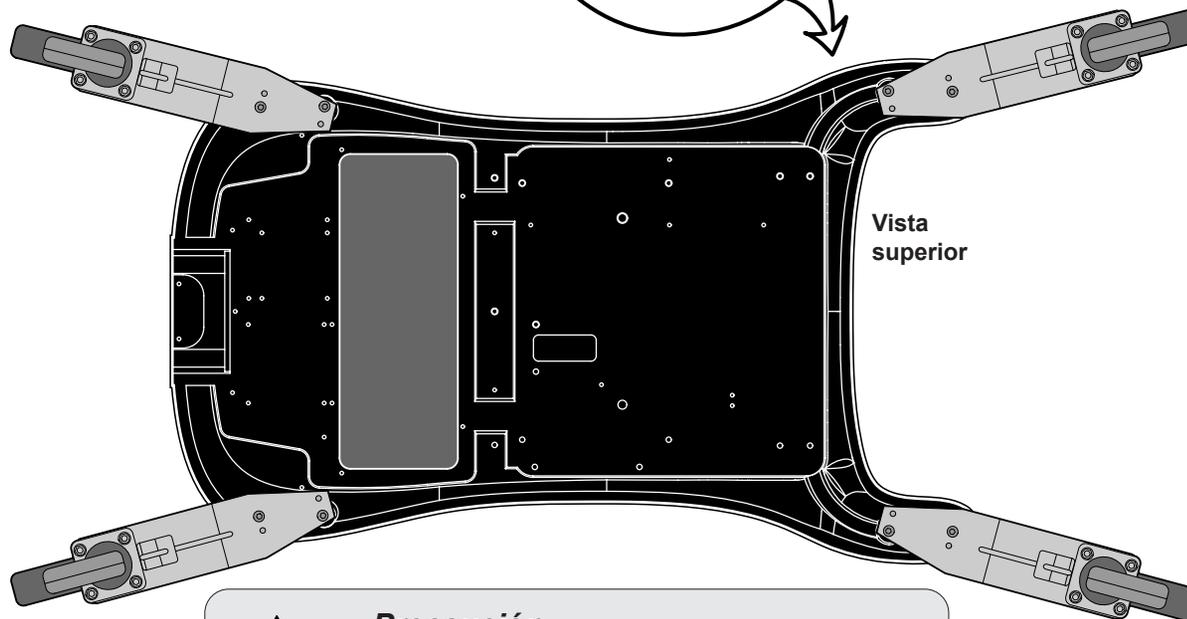


Vista superior



Precaución

Para evitar lesiones, fije las ruedas del extremo de los pies antes de realizar el paso 6.

Paso 6: Coloque el soporte bajo el extremo de cabecera de la base. Instale las ruedas del extremo de la cabecera (mismo procedimiento).

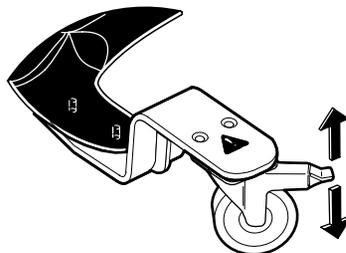

Para SOLTAR las ruedas...
Levante el pedal del freno.

Para FIJAR las ruedas...
Oprima el pedal del freno.