

Installation des manuellen Untersuchungstisches

Für die Modelle:

204 (alle)

604 (alle)

Ausgangssprache: Englisch



Gerätewarnung


Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie sich an die folgenden Anweisungen halten, wenn Sie den Tisch bewegen.

NIEMALS: a) den Tisch am Extensionsbügel anheben.
b) den Tisch am gepolsterten Oberteil anheben.



ACHTUNG!

Im Lieferumfang jedes Tisches befindet sich ein Papierrollenhalter.
Die Installationsanweisungen sind mit dem gepolsterten Oberteil verpackt. **WERFEN SIE DEN HALTER NICHT WEG!**

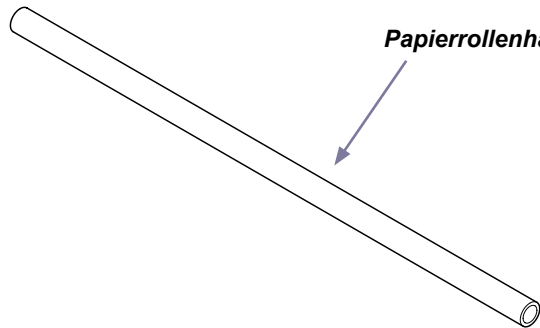

Papierrollenhalter




Vorsicht

Schwerer Gegenstand. Kann Muskelzerrungen oder Rückenverletzungen verursachen. Beim Bewegen Hebevorrichtungen und geeignete Hebetechniken verwenden.

Schritt 1: Den Tisch von der Palette nehmen.

- Entfernen Sie die Schrauben und die zwei Versandhalterungen.
- Nehmen Sie den Tisch von der Palette*.
- Transportieren Sie den Tisch an den gewünschten Ort.

*Hinweis: Eine Beschädigung des Bodens vermeiden Sie, indem Sie Pappe/eine Decke unter den Tisch legen.

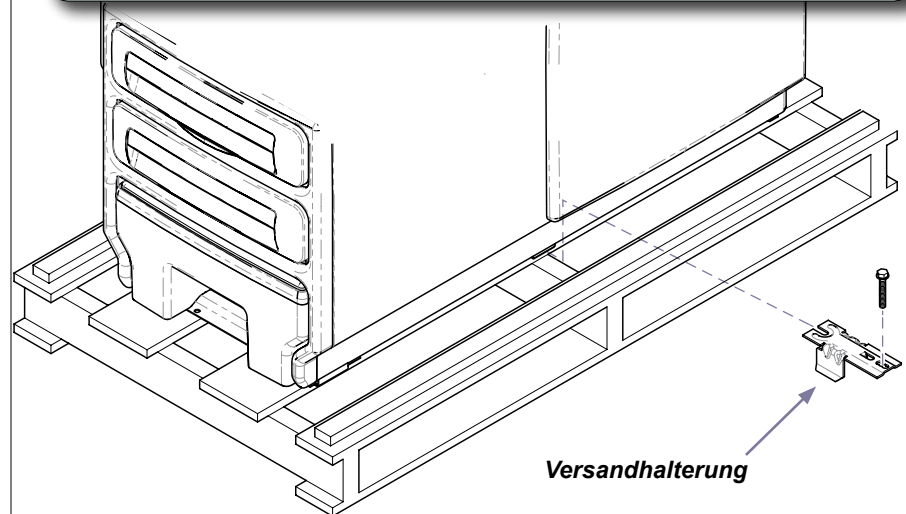


Versandhalterung

MA8093i


Nur Modell 604

Schritt 2: Magnetische Seitenverkleidung installieren.

- A) Positionieren Sie die Seitenverkleidung so, dass die obere Kante auf der oberen Kante der oberen Umrandung aufliegt.
- B) Wiederholen Sie dies für die Verkleidung auf der anderen Seite.

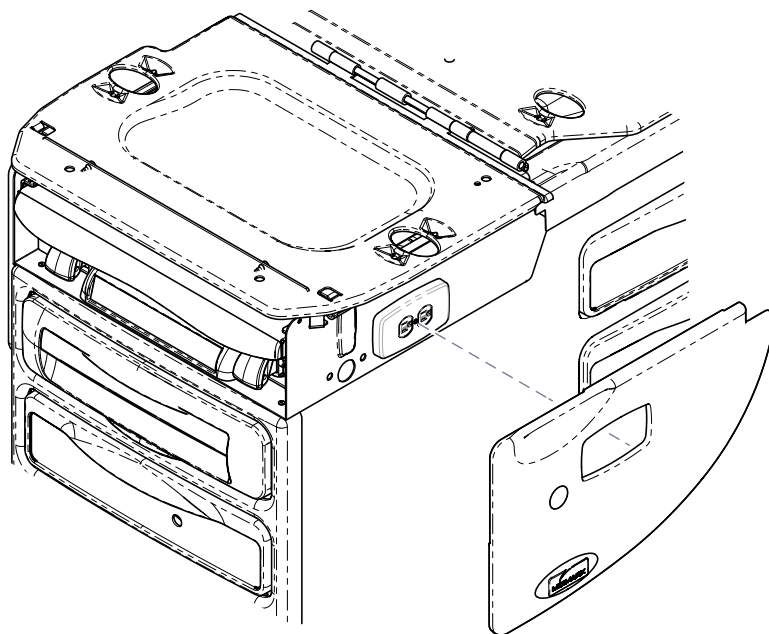

Bevor Sie das Netzkabel eines Midmark-Geräts in den Ausgang einer Stromquelle stecken, wird empfohlen, vor Ort einen zugelassenen Elektriker oder eine lokale Stelle, die für die interne Stromversorgung des Gebäudes zuständig ist, zu kontaktieren, um zu prüfen, ob das Gerät bei Inbetriebnahme alle örtlichen Elektronikvorschriften erfüllt. Halten Sie sich an die auf dem Gerät angegebene Nennleistung, um den passenden Nebenstromkreis und die Anforderungen an Stromausgänge zu bestimmen. Für Gerätemodelle mit einer Nennspannung von 115 V und einem Nennstrom von 12 oder darüber, kann ein eigener Nebenstromkreis erforderlich sein, falls der Nebenstromkreisschutz durch einen Trennschalter mit 15 A gewährleistet wird.

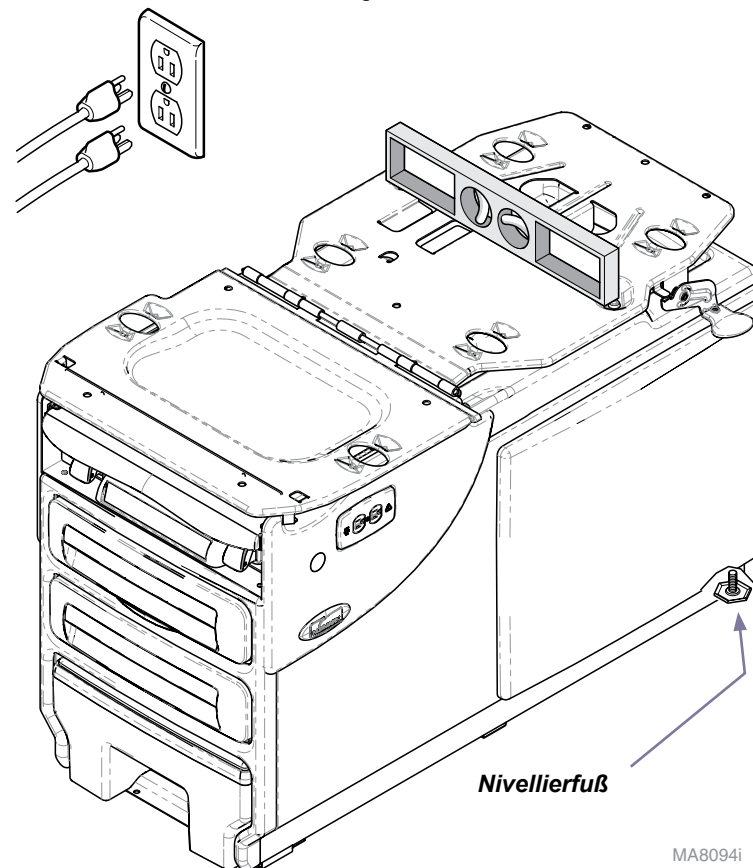

Schritt 3: Netzkabel anschließen/Tisch ausrichten.

- A) Schließen Sie das/die Netzkabel an eine Steckdose* an.
- B) Stellen Sie die beiden Nivellierfüße unter dem Kopfende des Tisches ein.

**Hinweis: Manche Modelle sind mit zwei Netzkabeln ausgestattet. Für den ordnungsgemäßen Betrieb müssen beide Netzkabel angeschlossen werden.*

(Optional)


Umkehrung der seitlichen Schubladen – nur Modell 604

Die seitlichen Schubladen können umgekehrt werden, damit sie von der gegenüberliegenden Seite des Tisches aus geöffnet werden können.

Umkehrung der seitlichen Schubladen

- A) Entfernen Sie die Seitenverkleidung.
- B) Entfernen Sie die Vorderseite der Schubladen.
- C) Installieren Sie die Vorderseiten der Schubladen an der gegenüberliegenden Seite.
- D) Bringen Sie die Seitenverkleidung auf der gegenüberliegenden Seite an.

Hinweis: Zum Entfernen der **Seitenverkleidung** ziehen Sie diese von der Unterkante aus heraus. Zum Entfernen der **Vorderseite der Schubladen** ziehen Sie die Laschen nach unten, um die Vorderseite zu lösen.

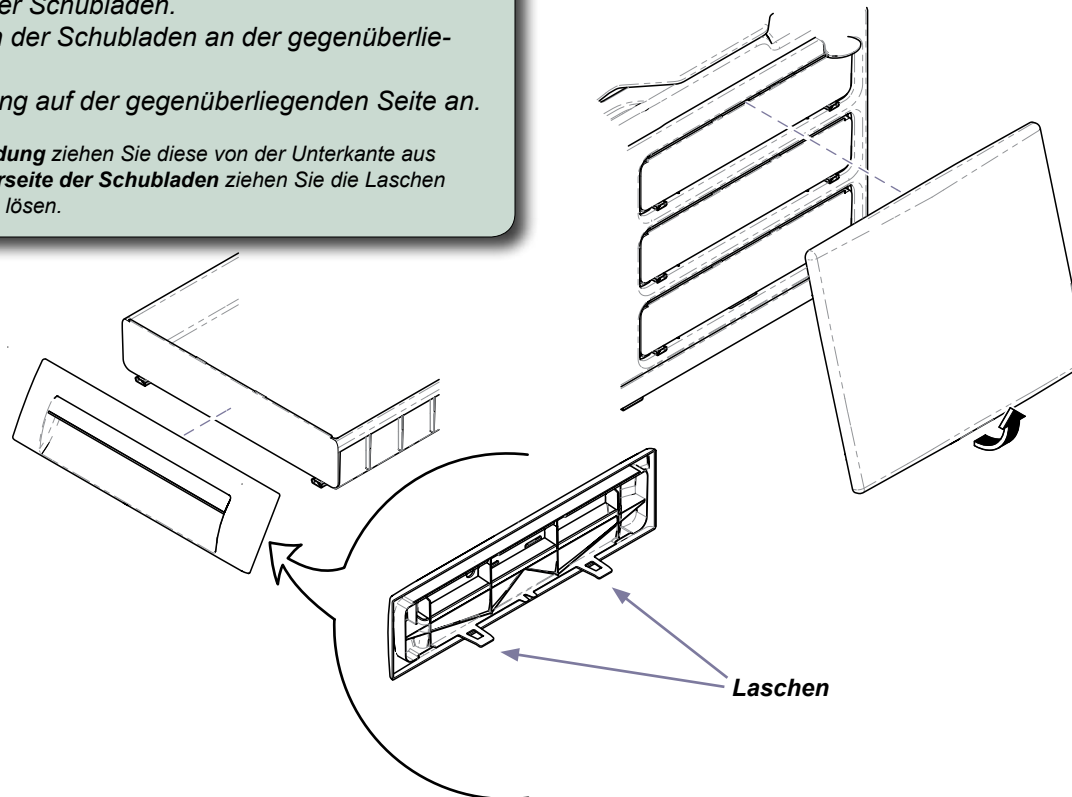

MA8095i