

Installation de la table d'examen manuel

Modèles concernés :

204 (tous)

604 (tous)

Langue d'origine : anglais



Avertissement relatif à l'équipement

Lorsque vous déplacez la table, vous devez respecter les instructions suivantes.

NE JAMAIS : a) utiliser les étriers pour soulever la table


b) soulever la table en la saisissant par la garniture matelassée



ATTENTION !

Chaque table est expédiée avec une tige de rouleau de papier.

Les instructions d'installation accompagnent la garniture matelassée. **NE PAS JETER LA TIGE !**

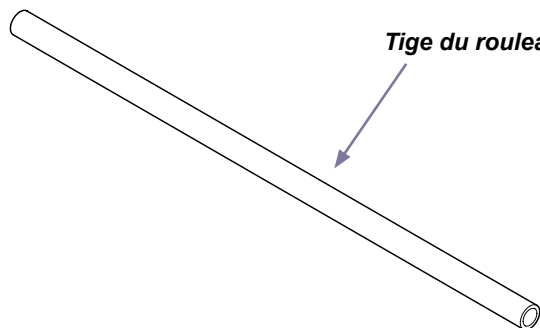

Tige du rouleau de papier



Attention


Objet lourd. Peut provoquer un claquage musculaire ou une blessure au dos. Utilisez un dispositif d'aide au levage et des techniques de levage adéquates lors du déplacement.

Étape 1 : retirez la table de la palette.

A) Retirez les boulons et les deux supports d'expédition.

B) Retirez la table de la palette*.

C) Déplacez-la à l'emplacement souhaité.

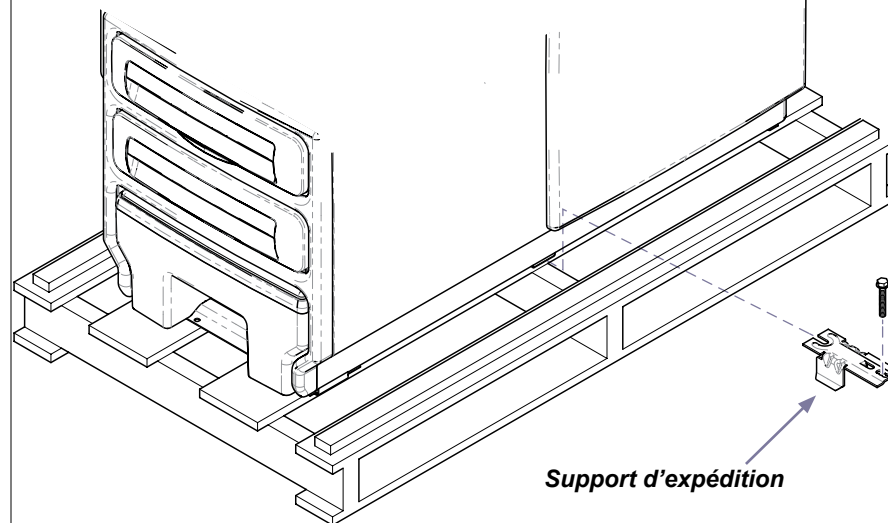


Support d'expédition

MA8093i


Modèles 604 uniquement

Étape 2 : installez la protection latérale magnétique.

- A) Positionnez la protection latérale de sorte que son rebord supérieur repose sur le rebord de la plaque enveloppante supérieure.
- B) Suivez la même procédure pour la protection du côté opposé.

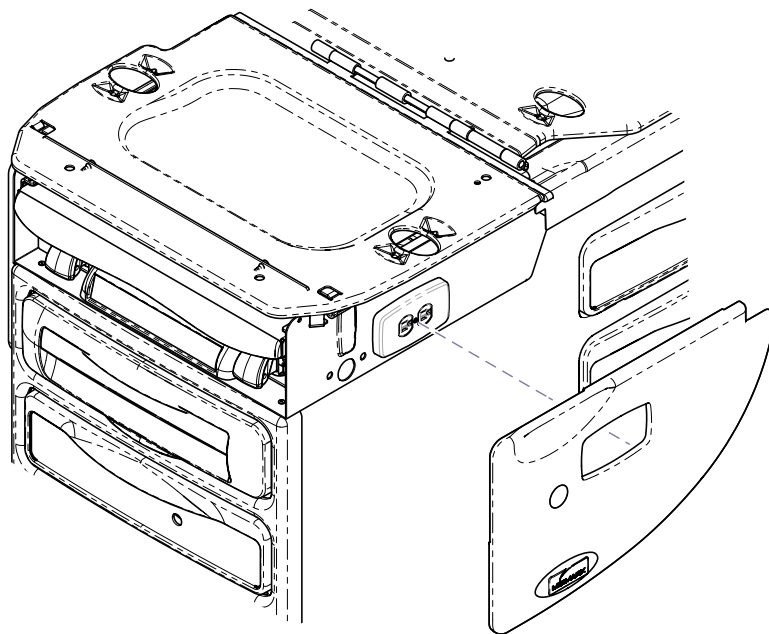

Avant de brancher le cordon d'alimentation de l'appareil Midmark à une prise électrique, il est conseillé de contacter un électricien agréé ou une autorité locale compétente en matière d'installation électrique intérieure des bâtiments afin de vérifier que l'appareil est conforme aux normes électriques en vigueur une fois allumé. Appliquer les valeurs de puissance électrique indiquées sur l'appareil afin de choisir le circuit de dérivation électrique et les contraintes de tension appropriés. Pour les modèles 115 V avec un courant nominal de 12 A ou plus, un circuit de dérivation spécifique peut s'avérer nécessaire si la protection du circuit de dérivation est assurée par un disjoncteur de 15 A.

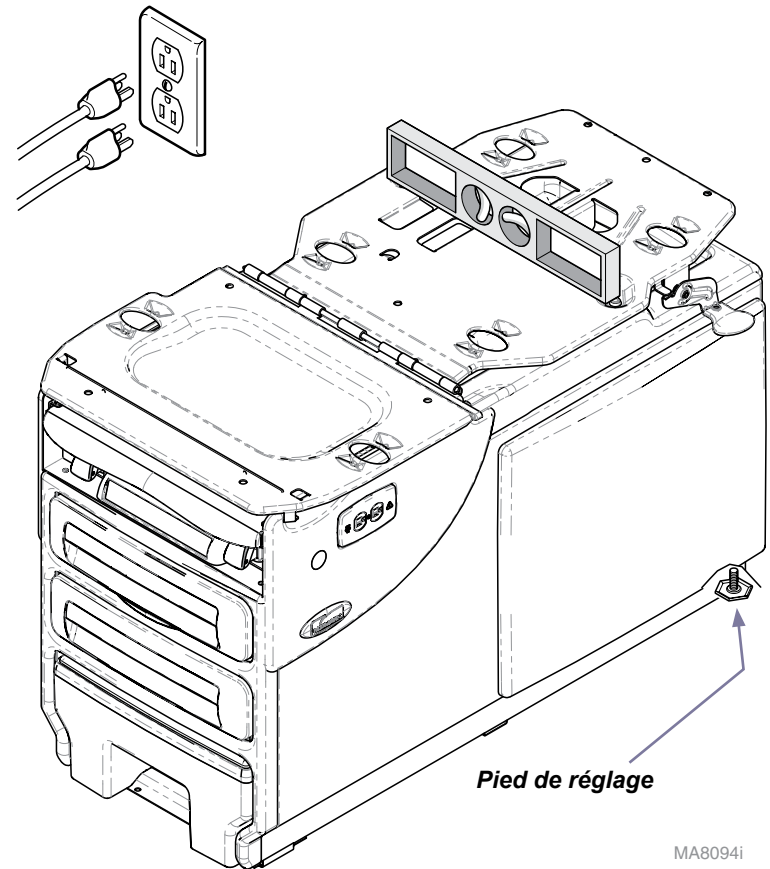

MA8094i

Étape 3 : branchez le cordon d'alimentation/mettez la table de niveau.

- A) Branchez le ou les cordons d'alimentation dans une prise murale*.
- B) Ajustez les deux pieds de réglage du côté « tête » de la table.

*Remarque : certains modèles sont dotés de deux cordons d'alimentation. Les deux cordons doivent être branchés pour assurer le bon fonctionnement de la table.

(En option)


Inversion des tiroirs latéraux – modèles 604 uniquement

Les tiroirs latéraux peuvent être inversés de façon à pouvoir être ouverts du côté opposé de la table.

Pour inverser les tiroirs latéraux...

- A) Retirez le panneau latéral.
- B) Retirez la façade des tiroirs.
- C) Installez la façade des tiroirs sur le côté opposé.
- D) Installez le panneau latéral sur le côté opposé.

Remarque : pour retirer le **panneau latéral**, tirez-le depuis le bas. Pour retirer la **façade d'un tiroir**, tirez sur les languettes vers le bas pour les détacher.

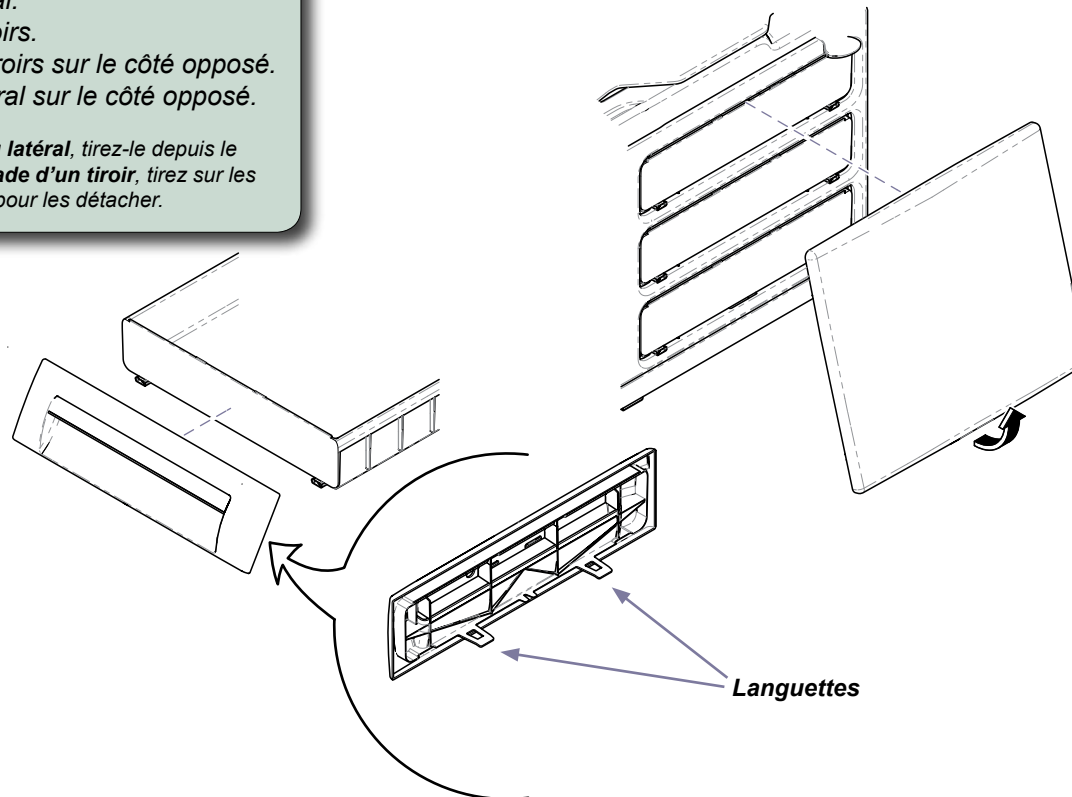

MA8095i