

MIDMARK®

Manueller Untersuchungstisch

Für Modelle:
604 (alle)



MA706600i

Benutzerhandbuch

CE

Siehe Konformitätstabelle
in diesem Handbuch.

Produktdaten

(Die nachfolgenden Informationen sollten Ihnen vorliegen, wenn Sie den Kundendienst anrufen)

Händler [Name/Telefon]:

Kaufdatum:

Modell-/Seriennummer:

Midmark-Vertragshändler
[Name/Telefon]:

**Anordnung der
Modell-/Seriennummer**



MA706500i

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen

<u>Sicherheitssymbole</u>	4
<u>Warnhinweise</u>	5
<u>Zweckbestimmung</u>	5
<u>Elektrische Anforderungen</u>	5
<u>Elektromagnetische Störungen</u>	6
<u>Geräteentsorgung</u>	6
<u>EU-Beauftragter</u>	6
<u>Richtlinien für Transport und Aufbewahrung</u>	6

Bedienung

<u>Positionierung der Rückenlehne</u>	7
<u>Fersenstützen</u>	8
<u>Fußstütze und Instrumentenfach</u>	9
<u>Fußschemel</u>	9
<u>Papierrolle und Abreißband</u>	10
<u>Schubladenheizung (optional)</u>	11
<u>Beckenhochlagerung (optional)</u>	12
<u>Steckdose (optional)</u>	13
<u>Polsterheizung (optional)</u>	14
<u>Exam Assistant® Schubladensystem</u>	15
<u>Umkehren der seitlichen Schubladen</u>	16

Wartung

<u>Reinigung</u>	17
<u>Vorbeugende Wartung</u>	17
<u>Serviceanfragen</u>	17

Technische Daten

<u>Gewichte und Abmessungen</u>	18
<u>Tabelle über Spannung, Stromstärke, Frequenz und Konformität</u>	19

Garantieinformationen

<u>Eingeschränkte Garantie</u>	20
--------------------------------------	----

Wichtige Informationen

Sicherheitssymbole



Achtung!

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann.



Vorsicht!

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann. Es kann auch auf unsichere Handlungsweisen aufmerksam machen.



Gerätewarning

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann.

Hinweis

Hebt Vorgänge, Verfahren oder Bedingungen hervor.



Zeigt die korrekte Oberseite beim Versand an



Zerbrechlich



Anwendungsteil Typ B (Polsterung)



Schutzerdung



Max. Patientengewicht



Hersteller




Seriennummer



Trocken halten



Maximale Stapelhöhe (Paletten)

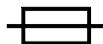

Nennleistung der Sicherungen



Gefährliche Stromspannung/ Elektroschockgefahr



Siehe Bedienungsanleitung



Katalognummer

Warnhinweise



Achtung!

Um Verletzungen zu vermeiden, bringen Sie Kopf oder Gliedmaßen nicht unter den Papier-Abreißstreifen.



Achtung!

Durch den Anschluss von Geräten an die Mehrfachsteckdose entsteht ein medizinisches elektrisches System und die Sicherheit kann dadurch beeinträchtigt werden.



Achtung!

Der Tisch muss so positioniert werden, dass ein ungehinderter Zugriff auf die Netzkabel zum Trennen von der Stromversorgung gewährleistet ist.



Achtung!

Zur Vermeidung einer Stromschlaggefahr darf dieses Gerät ausschließlich an Stromquellen mit Schutzerdung angeschlossen werden.



Achtung!

Dieses Gerät **ist nicht** für den Einsatz in der Nähe von entflammaren Anästhesiemischungen mit Sauerstoff, Luft oder Lachgas geeignet.

Erläuterung: Das Gerät ist zum Einsatz in Gegenwart von Sauerstoff, Luft oder Lachgas geeignet.



Achtung!

Änderungen an dieser Ausrüstung sind nicht zulässig.

Zweckbestimmung

Dieses Produkt ist als Tisch für die Positionierung von Patienten bei Untersuchungen durch medizinisches Fachpersonal in einer Praxis vorgesehen.

Elektrische Anforderungen



Vorsicht!

Beide Netzkabel müssen abgezogen werden, um den Tisch vollständig von der Stromversorgung zu trennen.

Bei Verwendung von chirurgischen Hochfrequenzgeräten oder endokardialen Kathetern:

- Nicht leitende Materialien verwenden, um für eine Isolation zwischen Patient und den Metallteilen des Tisches zu sorgen.
- Die Bedienungsanleitung des Geräts durchlesen, bevor es zusammen mit einer Schubladen- oder Polsterheizung verwendet wird.

Andernfalls erleidet der Patient möglicherweise einen elektrischen Schock oder Verbrennungen.

Elektromagnetische Störungen

Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass elektromagnetische Störungen mit anderen Geräten so niedrig wie möglich gehalten werden.

Beachten Sie bitte Folgendes, falls es trotzdem zu Störungen kommen sollte:

- Das störende Gerät aus dem Raum entfernen.
- Den Stuhl an einen isolierten Stromkreis anschließen.
- Den Abstand zwischen dem Stuhl und dem Gerät, das die Störung verursacht, vergrößern.
- Wenden Sie sich an Midmark, wenn die Störung weiterhin besteht.

Geräteentsorgung

Es ist möglich, dass der Tisch, dessen Zubehör sowie andere Verbrauchsgüter am Ende des Produktlebenszyklus durch den normalen Betrieb verunreinigt sind. Die örtlichen Verordnungen und Bestimmungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Geräten, Zubehör und anderen Verbrauchsgütern beachten.

EU-Beauftragter

Wenn Ihr Land Mitglied der EU ist, wenden Sie sich bitte mit allen Fragen, Informationen über Vorkommnisse oder Beschwerden an den folgenden EU-Beauftragten von Midmark:

Midmark EMEA Ltd
Beech House
First Floor, East Wing
Ancells Business Park
Fleet
Hampshire GU51 2UN
United Kingdom

Tel: + 44 (0) 1252 360 940
Fax: + 44 (0) 1252 360 941

Richtlinien für Transport und Aufbewahrung

Umgebungstemperaturbereich-5 °C bis +38 °C (+23 °F bis 100 °F)
Relative Feuchte.....10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Luftdruck.....500 hPa bis 1060 hPa (0,49 atm bis 1,05 atm)

Bedienung


Positionierung der Rückenlehne

Positionieren der Rückenlehne

- A) Die Rückenlehne festhalten und den Freigabegriff der Rückenlehne (auf einer Seite) zusammendrücken.
- B) Die Rückenlehne in die gewünschte Position bringen.
- C) Den Griff loslassen, um die Rückenlehne in dieser Position zu verriegeln.



Freigabegriff der Rückenlehne

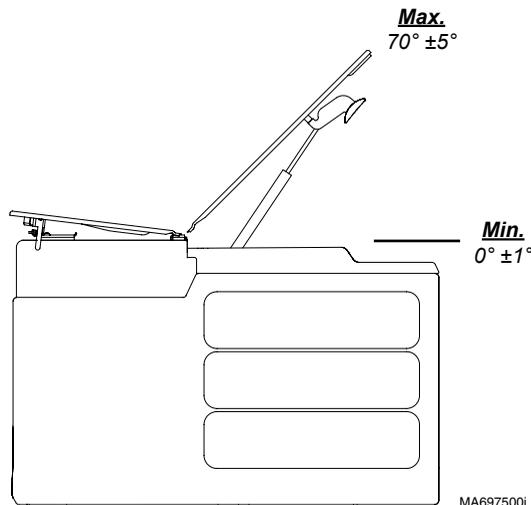

Fersenstützen




Vorsicht!

Vor dem Einsatz sicherstellen, dass die Fersenstützen verriegelt sind.
Die Fersenstützen können nicht das gesamte Gewicht des Patienten tragen.

Positionieren der Fersenstützen

- A) Die Fersenstütze herausziehen und aufklappen.
- B) Die Fersenstütze leicht anheben und nach Bedarf nach links oder rechts schieben.
- C) Die Fersenstütze loslassen und so in der gewünschten Position verriegeln.

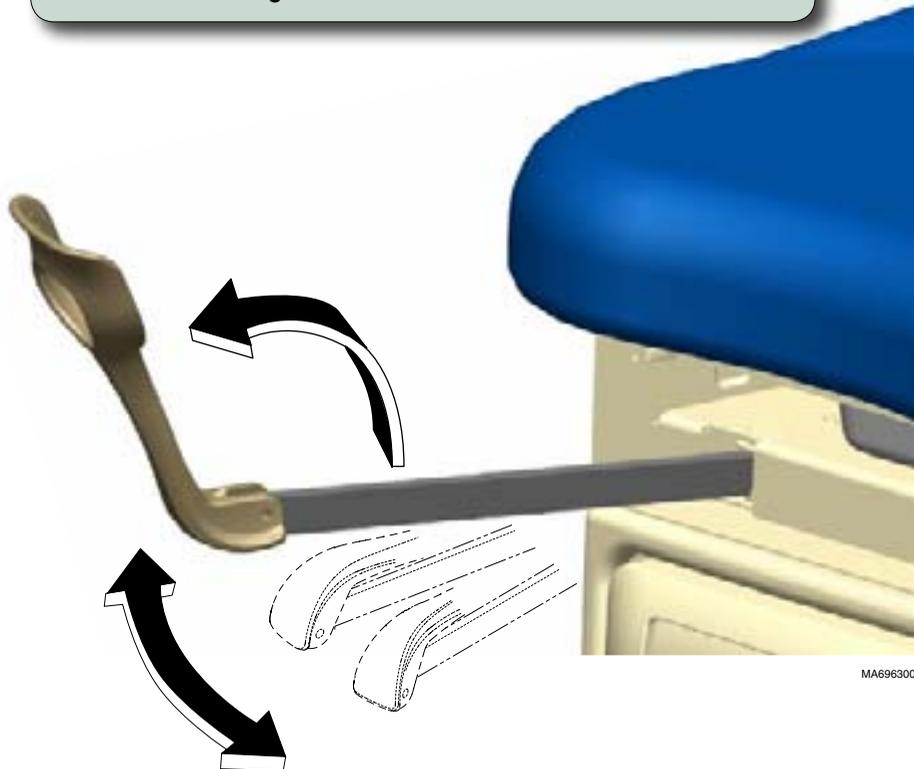

Fußstütze und Instrumentenfach



Vorsicht!

Die Fußstütze sollte nicht das gesamte Gewicht des Patienten tragen.

Zugreifen auf das Instrumentenfach

Das Fußstützenpolster leicht anheben und dann wieder in den Tisch schieben.



Ausfahren der Fußstütze


Die Fußstütze in die gewünschte Position herausziehen.

MA696401p

Fußschemel

Zugreifen auf den Fußschemel

Den Fußschemel leicht anheben und dann herausziehen.

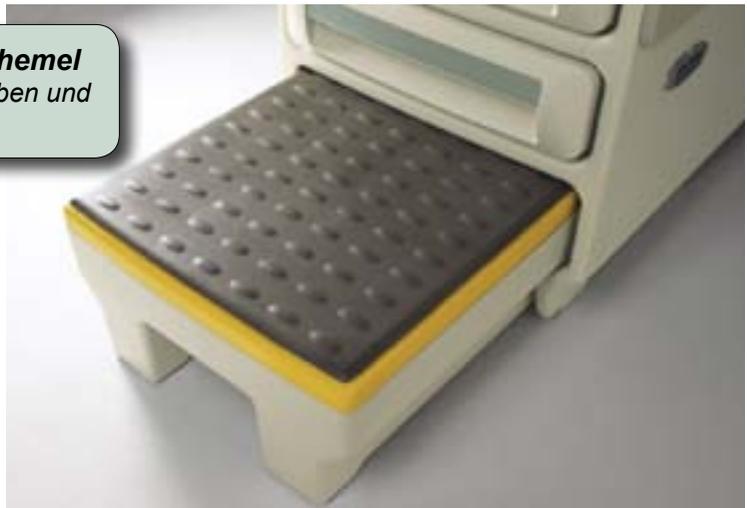


MA696600i

Papierrolle und Abreißband

Hinweis

Unter der Rückenlehne können bis zu vier Papierrollen aufbewahrt werden.

Größe der Papierrolle (max.): 53 cm Breite x 9 cm Durchmesser
(21 in. x 3.5 in.)

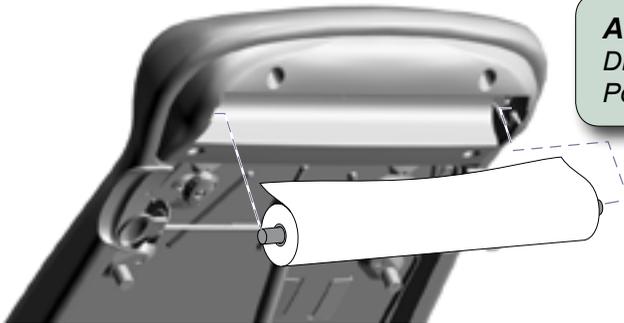

Anbringen der Papierrolle

Die Stange unter dem Kopfende des Polsters in die Halterungen einsetzen.



Anbringen des Papierabreißbands

Das Band an den Druckknöpfen an den Seiten des Tisches befestigen.

MA696800i

Schubladenheizung (optional)

Hinweis

Der Schalter der Schubladenheizung leuchtet auf, wenn die Heizung eingeschaltet ist (I).

Die Schubladenheizung erwärmt den Schubladeninhalt auf ca. 37 °C (98 °F).



Ein- und Ausschalten der Schubladen- heizung

*Den Knopf für die Schubladenheizung
betätigen.*



**Knopf für die
Schubladenheizung (weiß)**

MA697000p

Beckenhochlagerung (optional)

Anheben der Sitzfläche


Den Sitz anheben, bis die Beckenstütze einrastet.



Zurückstellen in die horizontale Position

- A) Die Sitzfläche leicht anheben.
- B) Den Auslösegriff nach oben drehen.
- C) Die Sitzfläche absenken.

MA702300i

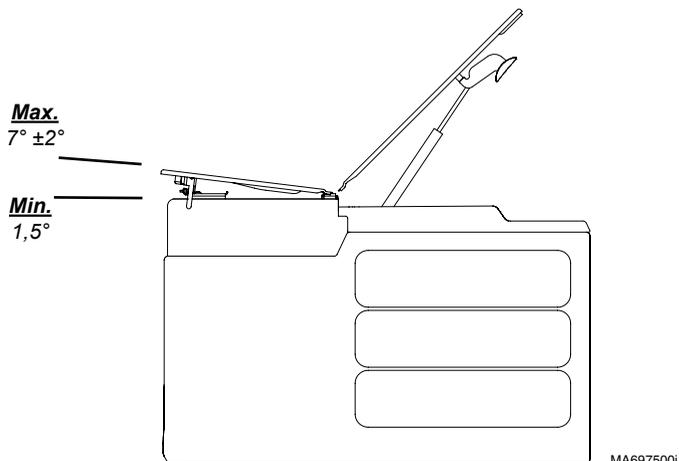



Steckdose (optional)

Die Doppelsteckdose an der Seite des Tisches liefert Strom für Zubehör, das während medizinischer Verfahren verwendet wird. Unter der Sitzfläche befinden sich zwei Trennschalter. Wird die maximal zulässige Last für die Steckdose überschritten, wird die Stromzufuhr zur Steckdose durch die Trennschalter unterbrochen.

Maximale Last..... 5 A

Zurücksetzen des/der Trennschalter(s)

Den Trennschalter-Kippschalter drücken.

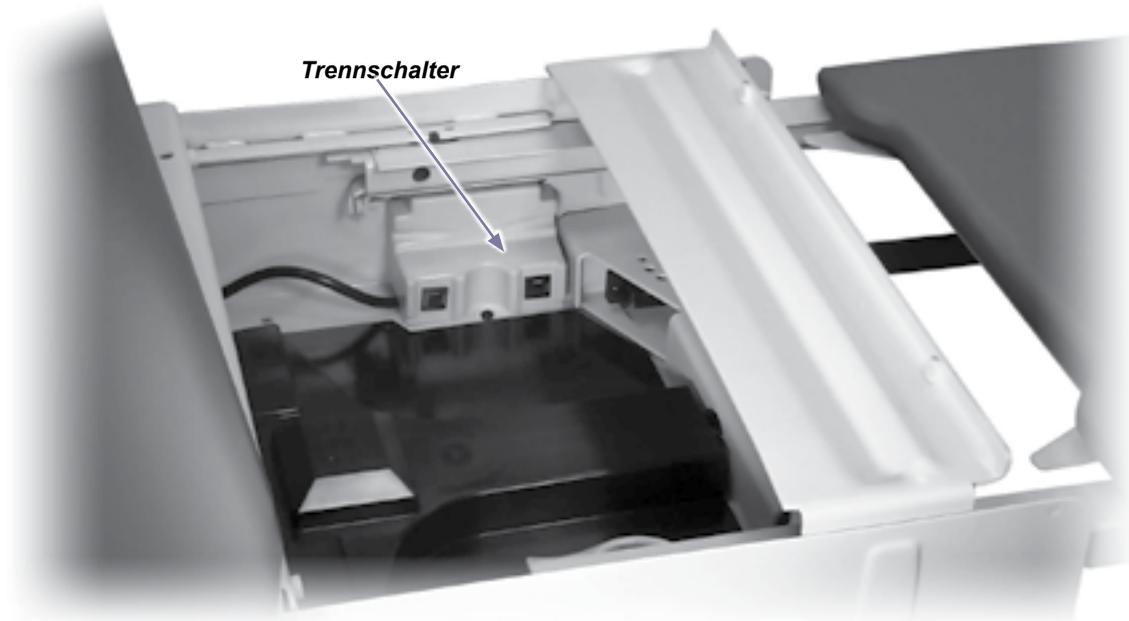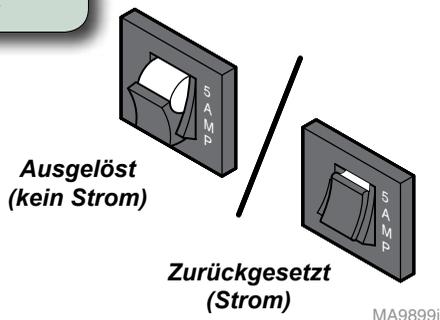

Polsterheizung (optional)

Ein- und Ausschalten der Polsterheizung

Den Knopf für die Polsterheizung betätigen.

Hinweis: Die Polsterheizung

- erreicht ihre Betriebstemperatur nach 15 bis 20 Minuten.
- schaltet sich nach 8 Stunden automatisch ab.

Hinweis

Der Knopf für die Polsterheizung leuchtet auf, wenn die Heizung eingeschaltet ist (I).



Knopf für die Polsterheizung (grün)



MA697000p



Gerätewarnung

Die maximale Leistungsaufnahme des Heizelements beträgt 45 W; es sollte nur über den bereitgestellten Anschluss gespeist werden.

Wird die beheizte Polsterung durchstochen, muss sie repariert oder ersetzt werden, damit eine ordnungsgemäße Funktion gewährleistet ist.

Exam Assistant® Schubladensystem

Verwenden der Schubladenklappe als Ablage

Die Schubladenklappe nach unten ziehen, um die Magnetverbindung zu lösen.

Wird die Schubladenklappe versehentlich zu weit nach unten geklappt:

Die Schubladenklappe nach oben ziehen, bis sie wieder in der horizontalen Stellung einrastet.



MA7045001



Gerätewarnung

Das maximal zulässige Traggewicht der Ablagefläche beträgt 4,5 kg (10 lbs).

Umkehren der seitlichen Schubladen

Die seitlichen Schubladen können umgekehrt werden, damit sie von der gegenüberliegenden Seite des Tisches aus geöffnet werden können.




Schritt 1: Die Seitenabdeckung entfernen.

(Die Abdeckung von der Unterseite aus entfernen.)

Schritt 2: Die Schubladenklappen entfernen.

(Die Laschen zum Lösen nach unten ziehen.)

Laschen

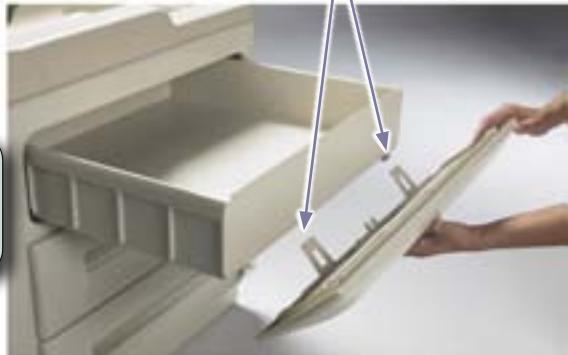

Schritt 3: Die Schubladenklappen an der gegenüberliegenden Seite des Tisches anbringen.



Schritt 4: Die Seitenabdeckung an der gegenüberliegenden Seite des Tisches anbringen.

(Die Abdeckung ausrichten und dann gerade andrücken.)

MA705400i

Wartung

Reinigung

Polster

Gerätewarnung

Die Polsterung ist gegenüber den meisten in einer medizinischen Umgebung auftretenden Flecken beständig, kann aber durch Lösungs- und Färbemittel beschädigt werden. Verschüttete Flüssigkeiten sind umgehend vom Polster zu entfernen.

Waschen Sie Ihre Polstermöbel wöchentlich mit einem milden Spülmittel und Wasser Gemisch, mit klarem Wasser nachspülen und Trocknen komplett zu entfernen Desinfektion Reiniger build-up.

Desinfizieren Sie Ihre Polstermöbel mit einer Lösung von standard Bleichmittel und Wasser gemischt 1 in 10 (10 %) oder chlorbasierte Reinigungsmittel. Folgen Sie dieser mit einem klaren Wasser abspülen und gründlich trocknen. Siehe aktuellen CDC-Richtlinie für Desinfektion und Sterilisation in Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Zur Minimierung von Schäden verursacht durch Desinfektionsreiniger Ansammlung von Rückständen, lassen Sie nicht zu, dass Desinfektionsmittel für Schwimmbad auf dem Polster Oberfläche. Sobald der zugelassenen Kontakt Zeit gewonnen wurde, entfernen und trockene überschüssige Flüssigkeit auf der Oberfläche.

Ausführliche Pflege- und Wartungsanweisungen liegen Ihrem Produkt bei. Diese Information ist auch auf www.midmark.com in der Technischen Bibliothek unter der Rubrik Dokumente verfügbar.

Lackierte Metall-/Kunststoffoberflächen

Lackierte Metall- und Kunststoffoberflächen wöchentlich mit einem sauberen, weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Regelmäßiges Auftragen von Möbelpolitur erleichtert die Reinigung und verhindert das Abstumpfen der Oberflächen.

Vorbeugende Wartung

Die folgenden Bereiche regelmäßig überprüfen:

- Das Netzkabel darf keine Einschnitte oder anderen sichtbaren Schäden aufweisen.
- Alle Befestigungsteile sollten angebracht und fest angezogen sein.
- Alle mechanischen Funktionen sollten ordnungsgemäß durchgeführt werden können.

Den Untersuchungstisch alle sechs Monate von einem qualifizierten Servicetechniker untersuchen lassen.

Serviceanfragen

Hinweis

Halten Sie die Modell-/Seriennummer bereit, wenn Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

Wenden Sie sich wegen der erforderlichen Wartungen und Reparaturen an Ihren Midmark-Händler.
Direkte Kontaktaufnahme mit Midmark:

+1-937-526-3662


Montag–Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr EST (14:00 bis 23:00 Uhr MEZ)

www.midmark.com

Technische Daten

Gewichte und Abmessungen

Maximales Patientengewicht:	226 kg (500 lbs)
Papierrolle (maximale Größe):	(siehe Seite „Papierrolle und Abreißband“)
Bewegungsbereich und Abmessungen:	(Siehe Abbildung unten)
Tischgewicht:	99,8 kg (220 lbs)
Netzkabel:	1,8 m (6 ft.) lang

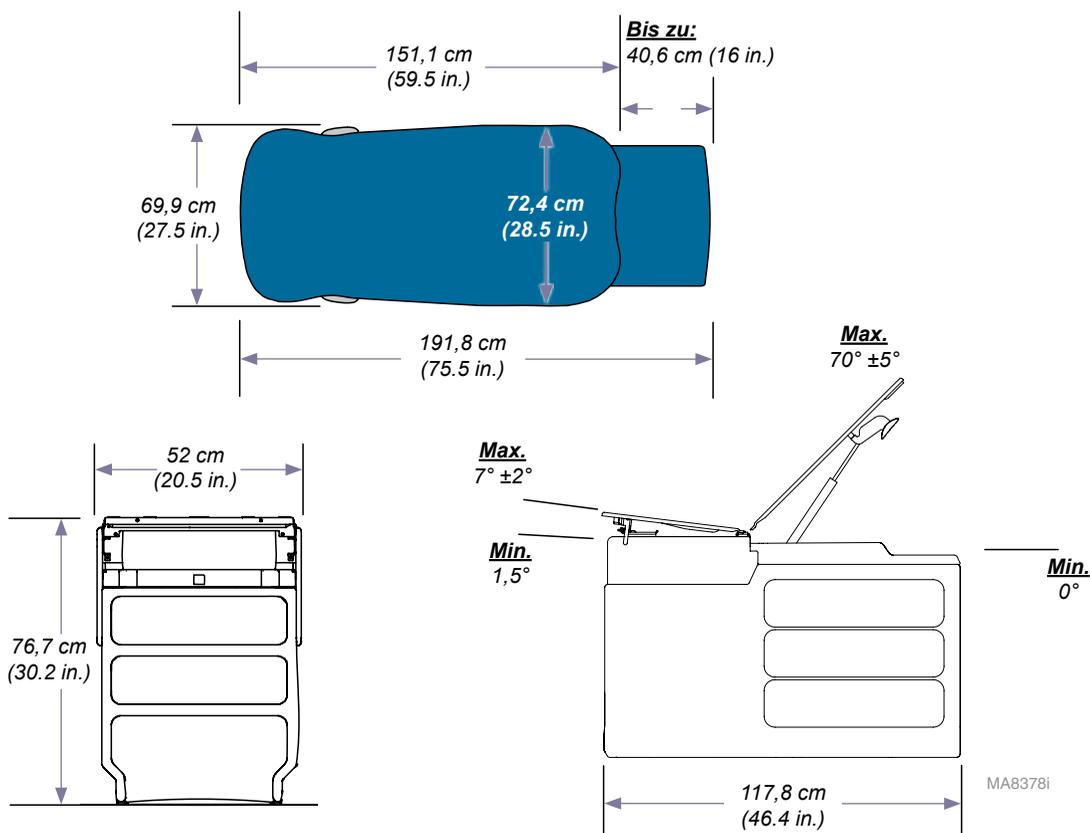

Technische Daten (Fortsetzung)

Tabelle über Spannung, Stromstärke, Frequenz und Konformität

Modell	Beschreibung	Elektrische Nennwerte:					
		ES 60601-1	CAN/CSA C22.2, 60601-1	CE	VAC +/- 10 %	Am- pere	Hertz
604-001	Midmark Untersuchungstisch mit Steckdose	•	•		115	5	50/60
604-002	Midmark Untersuchungstisch mit Steckdose, Beckenhochlagerung und Schubladenheizung	•	•		115	5,5	50/60
604-003	Midmark Untersuchungstisch mit Steckdose, Beckenhochlagerung, Schubladenheizung und beheiztem Polster	•	•		115	6,5	50/60
604-004	Midmark Untersuchungstisch – Export mit Beckenhochlagerung	•	•	•	-	-	-
604-005	Midmark Untersuchungstisch – Export mit Steckdose und Beckenhochlagerung	•	•	•	230	5	50/60

Garantieinformationen

GARANTIEUMFANG Midmark Corporation („Midmark“) garantiert dem Original-Endabnehmer die Reparatur oder den Ersatz von Komponenten von in- und ausländischen Medizinprodukten, die von Midmark hergestellt wurden (außer den Komponenten, die gemäß „Ausnahmen“ nicht unter die Garantie fallen), die bei normaler Nutzung und Wartung Materialfehler oder Verarbeitungsmängel aufweisen. Das einzige Rechtsmittel aufgrund dieser eingeschränkten Garantie besteht nach dem Ermessen von Midmark in der Reparatur oder dem Ersatz der entsprechenden Komponenten. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für Mängel, die Midmark innerhalb des entsprechenden Garantiezeitraums gemeldet werden und die sich nach Untersuchung durch Midmark als tatsächlich vorhanden erweisen. Diese Garantie gilt nur für den Original-Endabnehmer eines Produkts. Sie kann nicht übertragen oder abgetreten werden. Bei den Ersatzteilen kann es sich um gebrauchte und/oder überholte Komponenten oder Produkte handeln, sofern sie die gleiche Qualität und die gleichen Spezifikationen wie neue Komponenten oder Produkte aufweisen.

Midmark garantiert dem Original-Endabnehmer, dass die Firma Midmark während des geltenden Garantiezeitraums die in einem von Midmark hergestellten Produkt (außer denjenigen, die gemäß „Ausnahmen“ nicht unter die Garantie fallen) enthaltene Software reparieren oder ersetzen wird, wenn: (1) der Träger, auf dem die Software geliefert wird, bei normaler Nutzung Materialfehler oder Verarbeitungsmängel aufweist oder (2) die Software in wesentlichen Aspekten nicht ihren angegebenen Spezifikationen entspricht.

GELTENDER GARANTIEZEITRAUM Der geltende Garantiezeitraum beginnt mit dem Datum der an den Original-Endabnehmer des Produkts zugestellten Rechnung und beträgt für sämtliche Produkte und Komponenten ein (1) Jahr.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIELEISTUNG Die Garantieleistung muss entweder über Midmark oder über einen für die Produktlinie, für welche die Garantieleistung angefordert wird, autorisierten Händler besorgt werden. Für Anfragen wegen Garantieleistungen oder Problemen kann Midmark per E-Mail unter www.midmark.com, telefonisch unter +1-937-526-3662, oder postalisch unter Midmark Corporation, 60 Vista Drive, Versailles, Ohio 45380 kontaktiert werden. Der Endabnehmer ist verpflichtet, die Lieferung eines Produkts an Midmark oder an einen der autorisierten Midmark-Händler zwecks Garantieleistungen zu organisieren. Diese Lieferung erfolgt auf Kosten des Endabnehmers. Der Original-Endabnehmer ist verpflichtet, die durch Midmark oder die autorisierten Midmark-Händler bereitgestellten Anweisungen für die Garantieleistung zu erfüllen. Der Endabnehmer muss Midmark die ausgefüllte Information zur Garantieregistrierung innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Kauf zur Verfügung stellen, damit er die Leistungen dieser Garantie erhalten kann.

AUSNAHMEN: Folgende Punkte sind von der eingeschränkten Garantie ausgeschlossen und Midmark übernimmt hierfür keine Haftung: (1) Mängel, Beschädigungen oder andere Umstände, die ganz oder teilweise durch unsachgemäße Nutzung, übermäßige Nutzung, Fahrlässigkeit, Veränderung, Unfall, Transportschäden, unsachgemäße Lagerung, Manipulation oder nicht rechtzeitige Anforderung und Erhalt von Reparatur oder Ersatz verursacht wurden; (2) Produkte, die nicht gemäß der für das Produkt geltenden „Midmark-Installationsanleitung“ und/oder „Midmark-Installations-/Betriebsanleitung“ installiert, genutzt und sachgemäß gereinigt und gewartet wurden; einschließlich der festgelegten strukturellen und betrieblichen Umgebungsbedingungen und elektrischen Anforderungen; (3) Produkte, die als Verbrauchsmaterial oder steril gelten; (4) Zubehörteile oder Teile, die nicht von Midmark hergestellt wurden; (5) Von beliebigen Personen berechnete Kosten für Einstellungen, Reparaturen, Ersatzteile, Installation oder andere Arbeiten, die in Verbindung mit solchen Produkten ausgeführt worden sind und nicht zuvor schriftlich ausdrücklich durch Midmark genehmigt wurden; (6) Kosten und Aufwendungen für Routinewartung und Reinigung; (7) Erklärungen und Gewährleistungen, die durch eine andere Person oder Einrichtung als Midmark abgegeben wurden. (8) Abstimmung von Farbe, Oberflächenbild oder Struktur, ausgenommen wirtschaftlich annehmbare Standards; (9) Farbänderungen, die durch natürliches oder künstliches Licht erzeugt wurden; (10) Kundenspezifisch gefertigte Produkte; (11) Änderungen oder Modifikationen am Produkt durch eine Person oder Einrichtung, die nicht zu Midmark gehört; und (12) Produkte, die anderenfalls unter diese eingeschränkte Garantie fallen würden, aber erworben wurden von: (i) einer Person oder Einrichtung, die nicht zu Midmark oder dessen zugelassenen Händlern gehört oder (ii) von einem Midmark-Händler, der nicht autorisiert ist, das betreffende Produkt in dem geografischen Gebiet, in dem der Käufer ansässig ist, zu verkaufen, oder der nicht autorisiert ist, das betreffende Produkt in dem medizinischen Markt zu verkaufen.

SOFTWARE; IN BEZUG AUF SOFTWARE, DIE EIN PRODUKT ODER EIN BESTANDTEIL EINES PRODUKTES IST, ÜBERNIMMT MIDMARK KEINE GARANTIE DAFÜR, DASS DIE SOFTWARE (1) FREI VON FEHLERN IST, (2) PROBLEMLOS ODER OHNE UNTERBRECHUNGEN GENUTZT WERDEN KANN ODER (3) NICHT ANFÄLLIG FÜR DAS EINDRINGEN ODER ANGRIFFE VON VIREN ODER ANDEREN METHODEN IST.

AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL; HAFTUNGSAUSSCHLUSS FOLGESCHÄDEN IM RAHMEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIEERKLÄRUNG IST MIDMARK LEDIGLICH ZUR REPARATUR ODER ZUM ERSATZ FEHLERHAFTER TEILE VERPFLICHTET. MIDMARK HAFTET NICHT UND LEHNT HIERMIT JEDE HAFTUNG AB FÜR DIREKTE, BESONDERE, INDIREKTE SCHÄDEN, BEGLEITSCHÄDEN ODER EXEMPLARISCHEN SCHADENERSATZ, FOLGESCHÄDEN ODER VERSPÄTUNGEN, DARUNTER SCHADENERSATZ FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER ENTGANGENEN ERTRAG, NUTZUNGS-AUSFALL, DATENVERLUST, STILLSTANDZEITEN, DECKUNG SOWIE LÖHNE, ZAHLUNGEN UND LEISTUNGEN FÜR ANGESTELLTE ODER SELBSTSTÄNDIGE UNTERNEHMER U. A. DIESER HAFTUNGS-AUSSCHLUSS GILT AUCH BEI NICHTERFÜLLUNG ODER ANGENOMMENER NICHTERFÜLLUNG DES WESENTLICHEN ZWECKS DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE ODER DER HIERIN ANGEGEBENEN RECHTSMITTEL. HAFTUNGS-AUSSCHLUSS DIESER GARANTIE IST DIE EINZIGE GARANTIE DER FIRMA MIDMARK UND GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. DIE FIRMA MIDMARK GEWÄHRT KEINE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN IRGENDWEINER ART, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER STILLSCHWEIGENDER GARANTIEERKLÄRUNGEN ÜBER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE GARANTIEERKLÄRUNG BESCHRÄNKT SICH AUF DIE REPARATUR BZW. DEN ERSATZ FEHLERHAFTER TEILE.

VERJÄHRUNGSRIST Keine Klage kann gegen Midmark aufgrund eines Verstoßes gegen diese eingeschränkte Garantie, gegebenenfalls eine stillschweigende Garantie; oder einer anderen Anspruchsgrundlage aus oder im Zusammenhang mit den Produkten nach Ablauf von neunzig (90) Tagen ab dem Ablauf des Zeitraums der eingeschränkten Garantie erhoben werden.

BEVOLLMÄCHTIGUNG Keine Person und kein Unternehmen sind bevollmächtigt, andere mit den Produkten im Zusammenhang stehende Haftungsansprüche oder Verpflichtungen an die Firma Midmark zu stellen oder zu genehmigen.

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380-0286
Tel.: +1-937-526-3662
Fax: +1-937-526-5542
www.midmark.com



Because we care.