


# Instalación de la tapicería (Midmark)

**Se aplica a los modelos:**  
 604 (all)  
 622 (-007 & -008)  
 623 (-007 thru -011)  
 625 (all)  
 Language of origin: Inglés

**Restricciones:**  
 Los juegos de tapicería de 81 cm (32 in.) de ancho sólo se pueden instalar en el modelo 625.

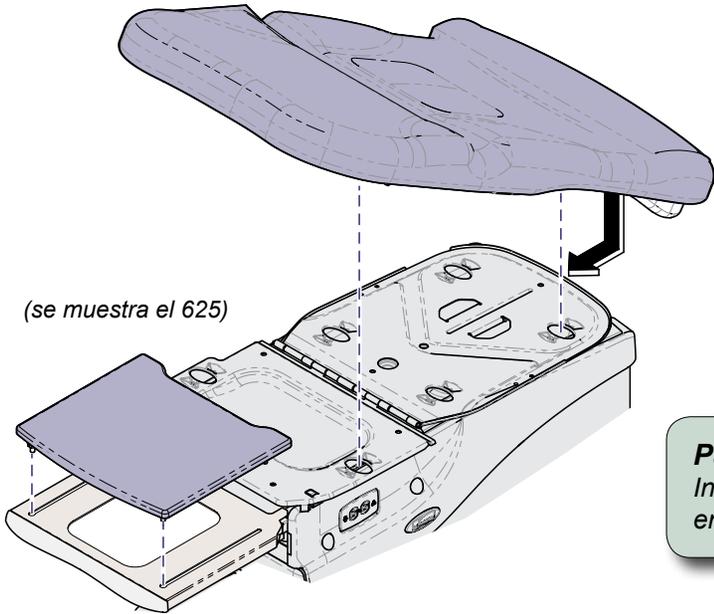


(se muestra el 625)

**Alerta del equipo**  
 Compruebe que la barra del rollo de papel ha sido retirada de la bisagra del asiento/respaldo antes de instalar la parte superior de la tapicería.

**Para instalar la tapicería del asiento / del respaldo...**


- Quite de nuevo la placa de soporte del compartimento del rollo de papel.
- Coloque la tapicería de modo que los tiradores de bloqueo estén alineados con los orificios de los soportes.
- Gire todos los tiradores de bloqueo poniéndolos en posición BLOQUEADO.

**Para instalar la barra del rollo de papel...**  
 Inserte los extremos de la barra del rollo de papel en los orificios del compartimento.

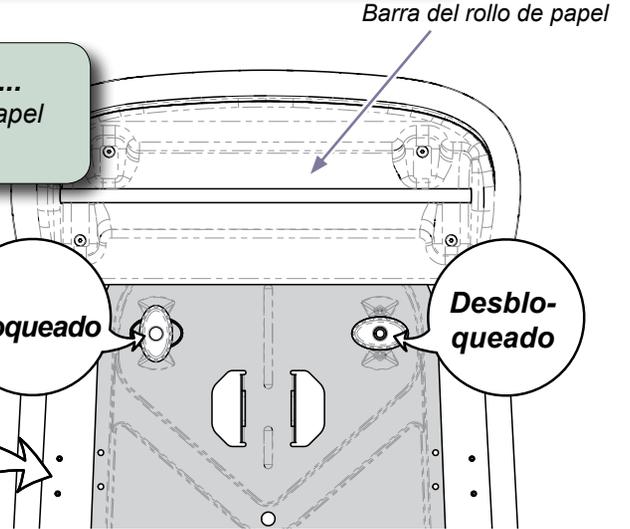

**Para instalar la almohadilla del reposapiés...**

- Extienda la bandeja del reposapiés.
- Coloque los deslizadores del reposapiés en las ranuras de la bandeja.

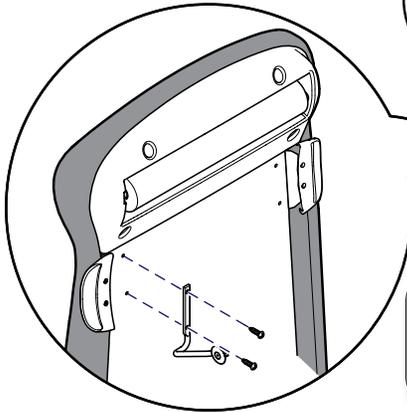



**Alerta del equipo**  
 Al instalar tapicería de 81 cm (32 in.) de ancho, hay que volver a poner el soporte del control manual.

**Para volver a poner el soporte del control manual...**  
 Quite dos tornillos y mueva el soporte del control manual desde la parte soldada del respaldo hacia la tapicería, y luego fíjelo con dos tornillos.

**Nota**  
 El soporte del control manual puede ir montado en el lado derecho o en el izquierdo.

MA9178i

*Sólo para modelos con cajones:*

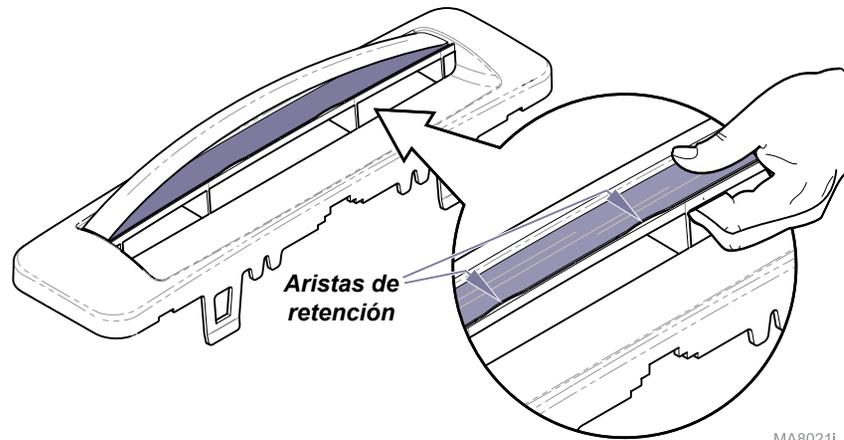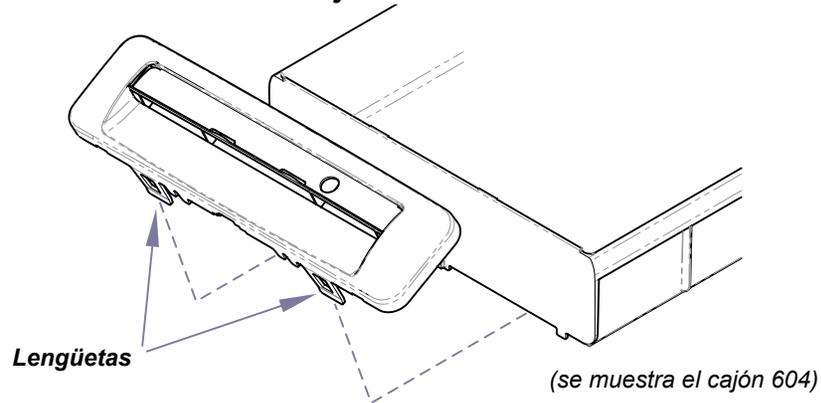


MA8021i

**Para instalar los embellecedores de color en los tiradores del cajón...**

- A) Retire la parte delantera del cajón. (Tire de las lengüetas para soltarlo).
- B) Retire la capa transparente de los embellecedores.
- C) Coloque el embellecedor de color.
- D) Quite la capa transparente de los embellecedores.  
(Inserte los extremos en sus ranuras primero uno y después el otro)

*Nota:* Para poner en su posición el embellecedor con seguridad, apriete con fuerza hasta que haga click bajo las dos aristas de retención.

*Sólo para modelos con tapicería climatizada:*

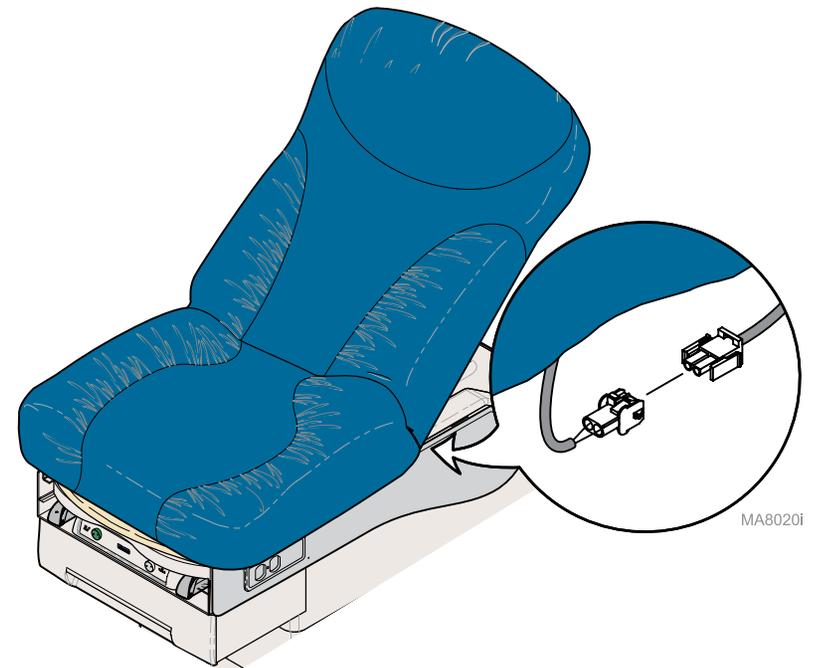

MA8020i



**Alerta del equipo**

Asegúrese de que el cable no queda pinzado entre la tapicería y la cubierta.

**Para conectar la corriente del calentador de la tapicería:**

- A) Conecte los terminales del calentador de la tapicería.