

Sprache des Ursprungs: Englisch


**Für Modelle:**

204 (alle)  
222 (-015 / -016 / -017)  
223 (-015 / -016)

**Schritt 2:** Kopfpolster auf Tisch positionieren.

**Hinweis:** Sicherstellen, dass die Arretierknöpfe mit den Löchern in der Rückenlehnen-/ Sitzmontageplatte ausgerichtet sind.

**Schritt 1:** Fußstützenpolster installieren.

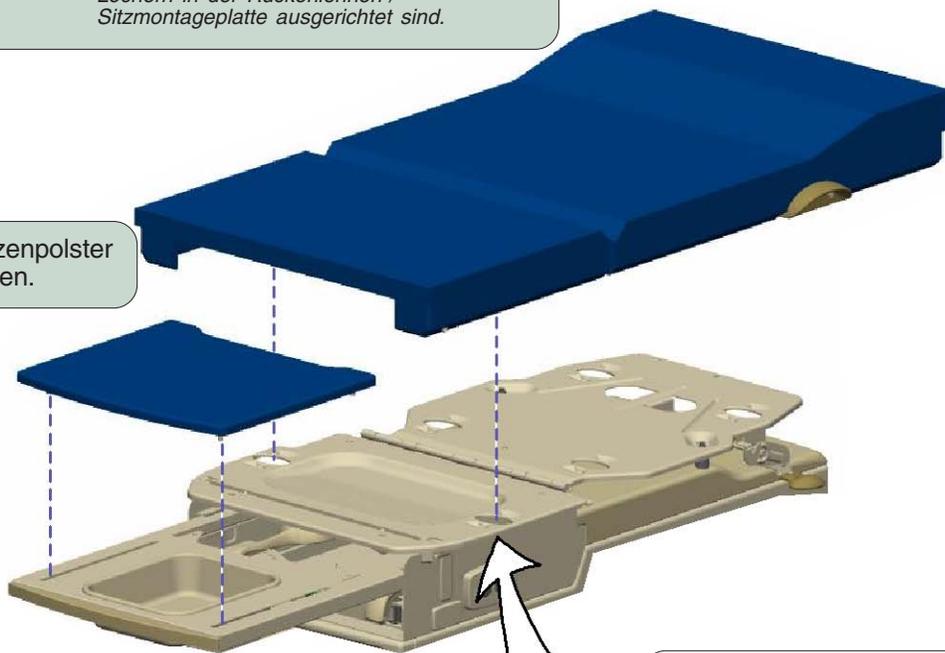


**Arretierknopf**

(in verriegelter Position dargestellt)

**Schritt 3:** Die sechs Arretierknöpfe in die Verriegelungsposition drehen.

**Hinweis:** Es befinden sich vier Arretierknöpfe unter der Rückenlehne und zwei unter der Sitzfläche.

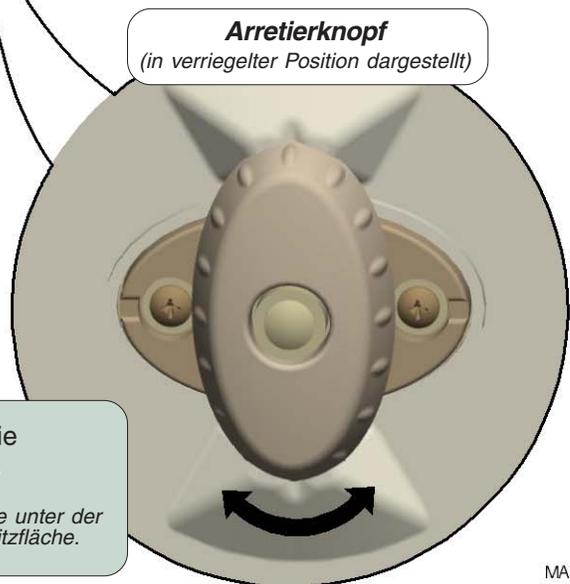

MA703800i

**Nur 204**

**Zum Installieren der Farbeinsätze auf den Schubladenvorderseiten...**


Zuerst ein Ende des Einsatzes einsetzen, den Einsatz nach Bedarf biegen und dann das andere Ende einsetzen.

**Hinweis**

Zur besseren Übersichtlichkeit ist die Schubladenvorderseite in dieser Abbildung abgenommen.

Die Schubladenvorderseite muss zum Installieren der Einsätze nicht entfernt werden.

Farbeinsatz

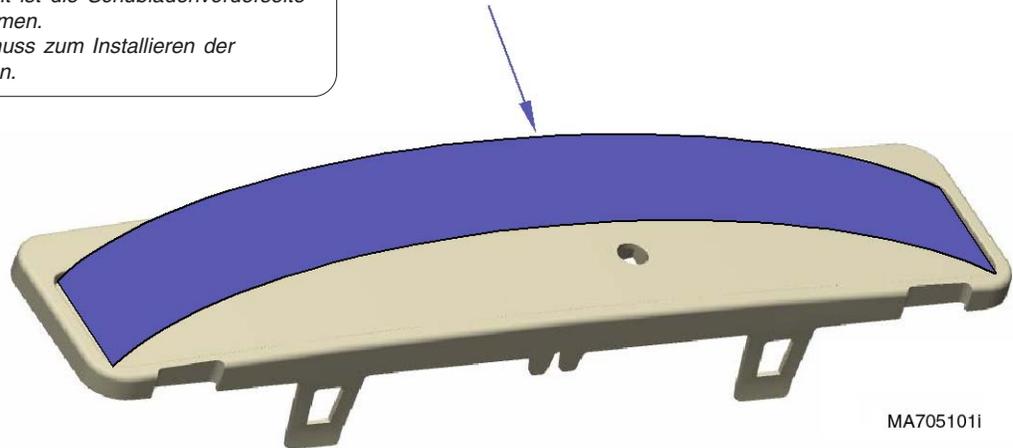

MA705101i