

El idioma de origen: Ingles

Para los modelos:

204 (todos)


222 (-015 / -016 / -017)

223 (-015 / -016)

Paso 2: Coloque la cubierta tapizada sobre la mesa.

Nota: Asegúrese de alinear los botones de retención con los orificios de las placas de montaje del respaldo y del asiento.

Paso 1: Instale la almohadilla del reposapiés.

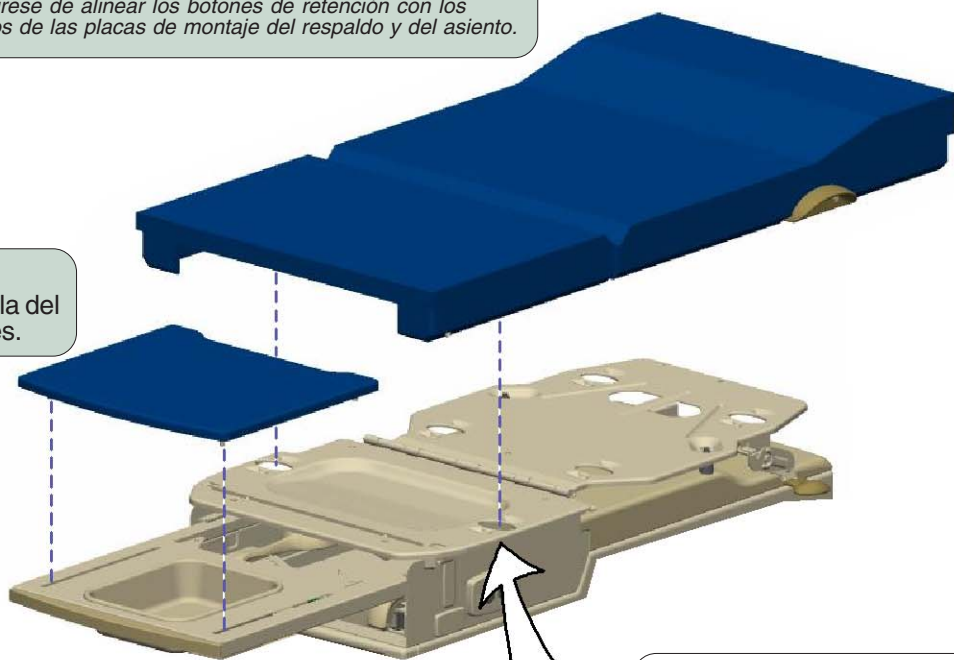

Botón de retención
(se muestra en la posición de bloqueo)

Paso 3: Gire los seis botones de retención a la posición de bloqueo.

Nota: Hay cuatro botones de retención bajo la sección de respaldo y dos bajo la sección del asiento.



MA703800i

204 solamente

Para instalar piezas insertas de color en la parte frontal de los cajones...

Instale un extremo de la pieza inserta, dóblela e instale luego el otro.

Nota

Por motivos de claridad, se ha quitado la parte frontal del cajón en la ilustración.

No es necesario quitar la parte frontal del cajón para instalar las piezas insertas.

Pieza inserta de color

