

Sprache des Ursprungs: Englisch

Für Modelle

222

223

623



Gerätewarnung

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Untersuchungstisch führen.



VORSICHT


Schwerer Gegenstand

Kann Muskelzerrungen oder Rückenverletzungen verursachen. Beim Bewegen Hebevorrichtungen und geeignete Hebetechniken verwenden.

NIEMALS auf die Sockelverkleidung drücken.

Tisch **NIEMALS** anhand der Fersenstützen anheben.

Tisch **NIEMALS** anhand der Polsterauflage anheben.

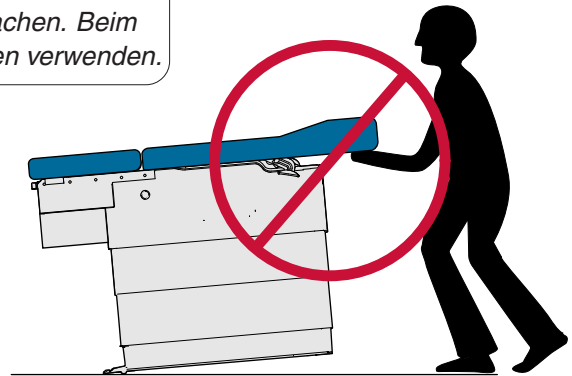

Tisch **IMMER** erst ganz herunterfahren und dann transportieren.

Die vier (4) Sockelverkleidungsstützen **NUR** entfernen, wenn der Tisch seinen Aufstellungsort erreicht hat.




MA61840211i


Schritt 1: ENTFERNEN Sie zwei Gewindeschrauben, die durch die Sicherungsbänder gehen, mit denen der Tisch an der Palette befestigt ist. Schieben Sie die Sicherungsbänder zur Mitte des Tisches, damit diese sich aus den Schlitten am Tischsockel lösen können.

Gewindeschraube

Gewindeschraube

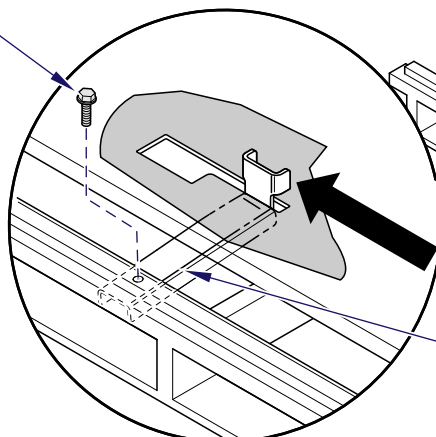

Sicherungsband

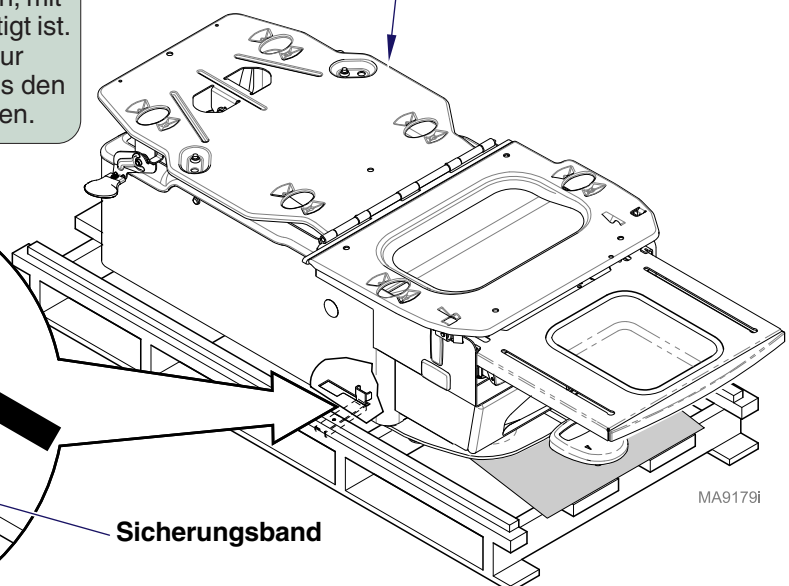

MA9179i




Gerätewarnung

Der Tisch muss zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs eben ausgerichtet sein.

Schritt 2: Nivellierschrauben am Kopfende des Tisches nach Bedarf einstellen.

Nur 623

Schritt 3: Handsteuerung vom Instrumentenfach entfernen.

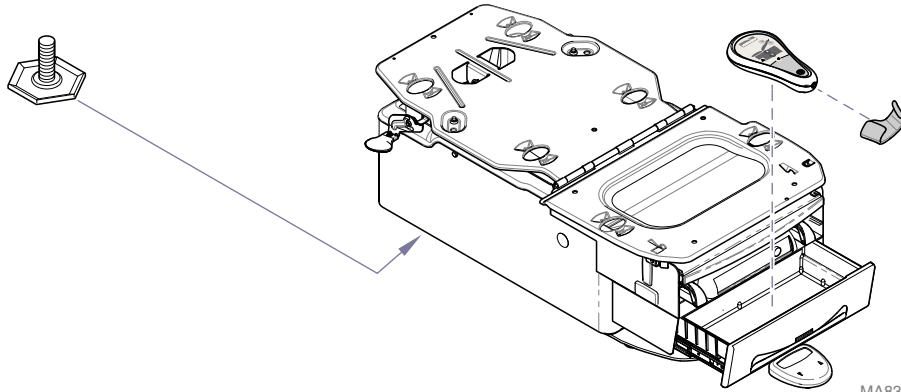

MA8331i


Bevor Sie das Netzkabel eines Midmark-Geräts in den Ausgang einer Stromquelle stecken, wird empfohlen, vor Ort einen zugelassenen Elektriker oder eine lokale Stelle, die für die interne Stromversorgung des Gebäudes zuständig ist, zu kontaktieren, um zu prüfen, ob das Gerät bei Inbetriebnahme alle örtlichen Elektronikvorschriften erfüllt.

Halten Sie sich an die auf dem Gerät angegebene Nennleistung, um den passenden Nebenstromkreis und die Anforderungen an Stromausgänge zu bestimmen. Für Gerätemodelle mit einer Nennspannung von 115 V und einem Nennstrom von 12 oder darüber, kann ein eigener Nebenstromkreis erforderlich sein, falls der Nebenstromkreisschutz durch einen Trennschalter mit 15 A gewährleistet wird.

Bei Modellen ohne Steckdose muss das Netzkabel gemäß Abbildung am Tisch angeschlossen werden.

Schritt 4: Netzkabel anschließen.

Hinweis: Modelle mit der optionalen Steckdose verfügen über zwei Netzkabel. Beide Kabel müssen angeschlossen sein, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

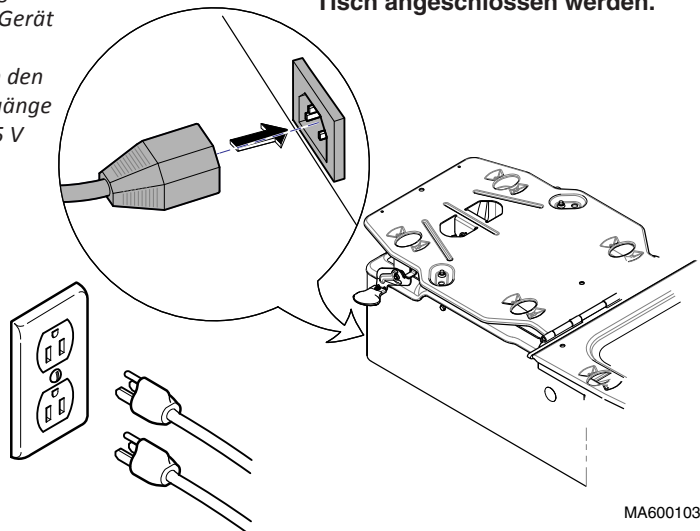


MA600103i

Nur 223/623

Schritt 5: Fußpedal/Handsteuerung anschließen.

223: Fußende.

623: Fuß- oder Kopfende

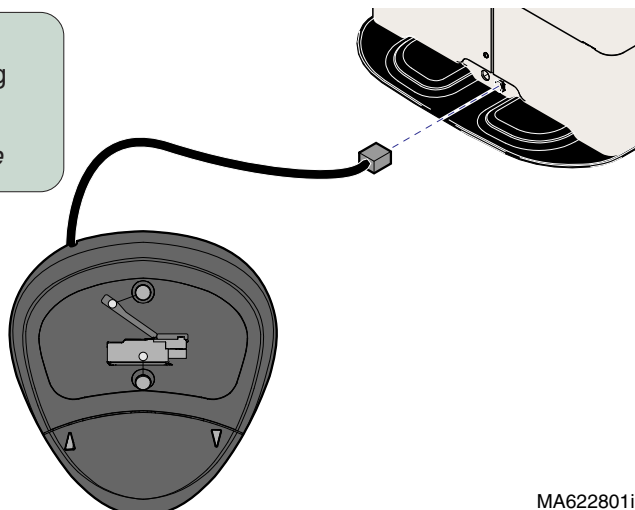

MA622801i