

El idioma de origen: Inglés



Alerta del equipo

Si no se cumplen estas instrucciones se pueden provocar daños al equipo.



PRECAUCIÓN

Objeto pesado

Puede ocasionar destensión muscular o lesiones de espalda.

Utilice accesorios de elevación y emplee las técnicas correctas para elevarlo durante su traslado.

Aplica a los modelos

222

223


623

NUNCA presione las cubiertas de la base.


NUNCA utilice los estribos para levantar la mesa.

NUNCA utilice la cubierta superior tapizada para levantar la mesa.

SIEMPRE transporte la mesa en la posición completamente abajo ("full-down").

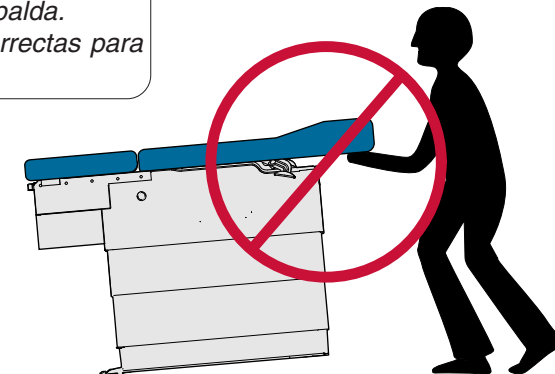

SIEMPRE mantenga (4) los soportes de la cubierta de la base en su lugar hasta la entrega final.

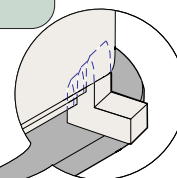


MA61840211


Paso 1: RETIRE los dos tirafondos que atraviesan las correas de transporte y sujetan la camilla a la plataforma. Deslice las correas de transporte hacia el centro de la camilla, permitiendo que se liberen de las ranuras de la base de la plataforma.

Tirafondo

Tirafondo

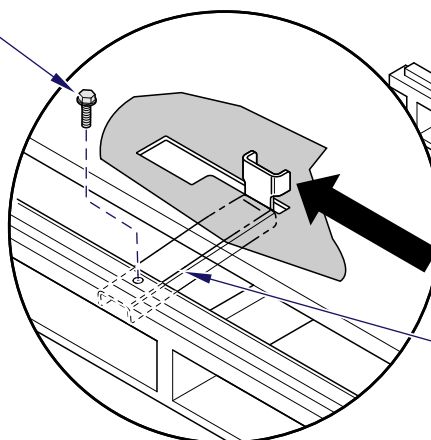

Correa de transporte

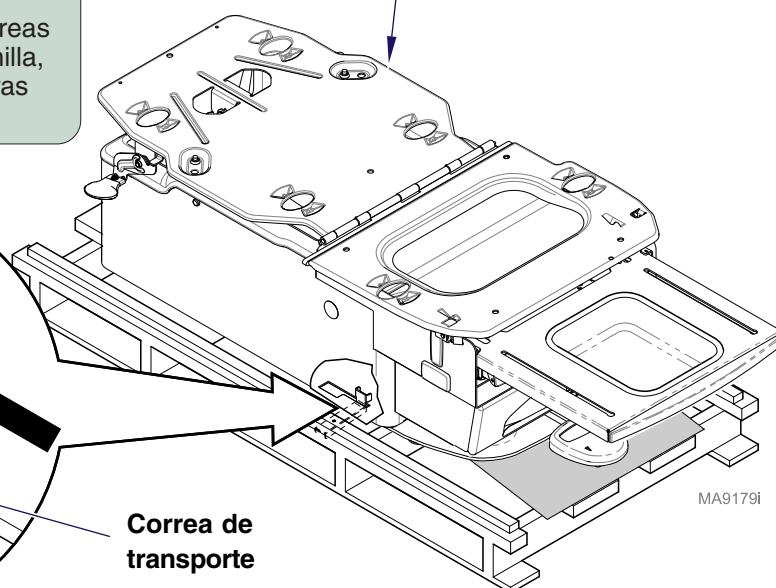


MA9179I



Alerta del equipo

La mesa debe estar nivelada para garantizar un funcionamiento correcto.

Paso 2: Ajuste los tornillos de nivelación de la cabecera de la mesa según sea necesario

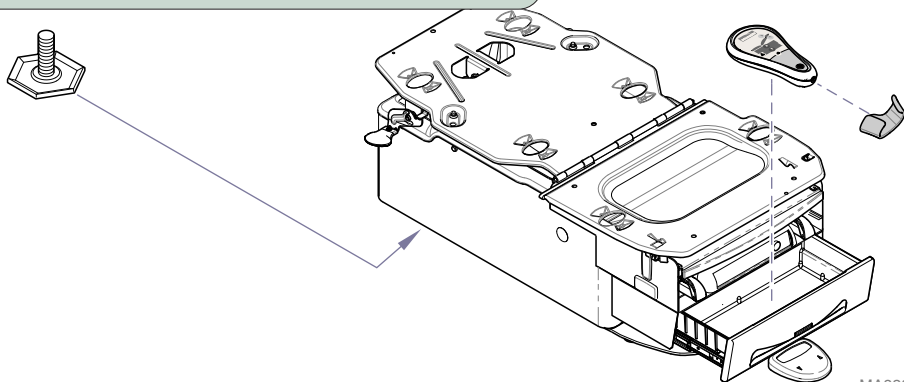

MA8331i


623 solamente

Paso 3: Retire el control manual de la bandeja de tratamiento.

Antes de conectar el cable de alimentación del dispositivo Midmark a una fuente de alimentación eléctrica, se recomienda contactar con un electricista local autorizado o una autoridad local que tenga jurisdicción sobre la distribución de energía interna del edificio para verificar que, al conectar el dispositivo, este cumple con todos los códigos eléctricos locales. Utilice la potencia eléctrica marcada en el dispositivo para determinar cuáles son los circuitos eléctricos derivados apropiados y los requisitos de salida. Para modelos de 115 V con una calificación de corriente de 12 amperios o más, puede requerirse un circuito dedicado en caso de que la protección de dicho circuito provenga de un disyuntor de 15 amperios.

Paso 4: Conecte el cable de alimentación.

Nota: Los modelos con tomacorriente opcional tienen dos cables de alimentación. Los dos cables de alimentación deben estar conectados para un funcionamiento correcto.

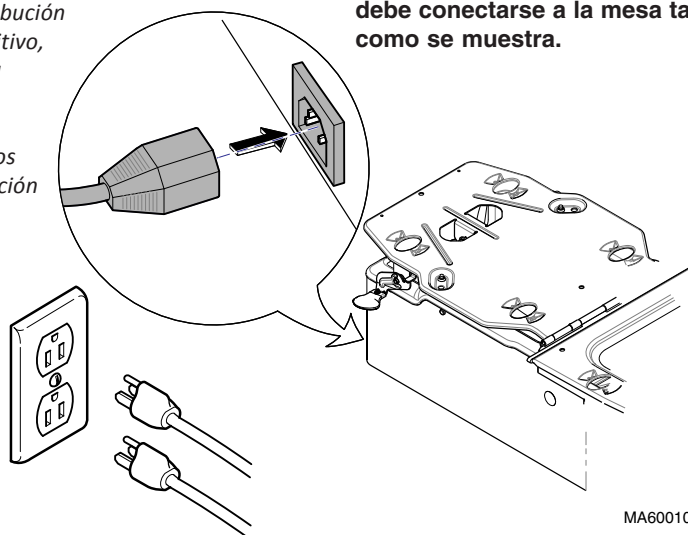


MA600103i

223/623 solamente

Paso 5: Conecte el pedal de control/control manual.

223: extremo de los pies.

623: cabecera o extremo de los pies

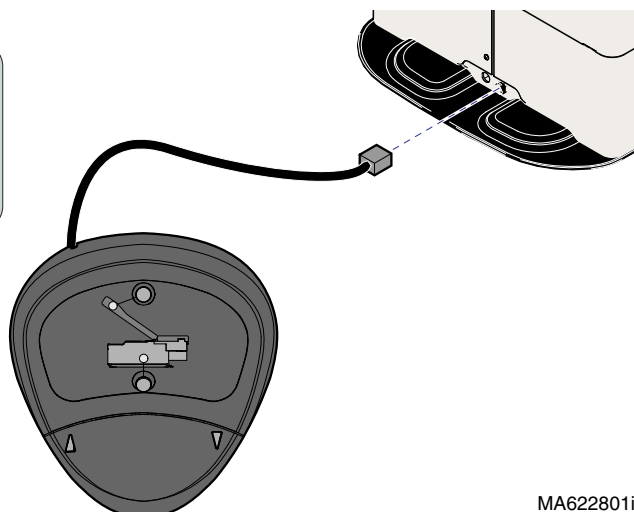

MA622801i