

## Porte-rouleau de papier Export [9A334, 9A355, 9A618]

### **Utilisation :**


permet de placer sur la table un rouleau de papier au format européen.  
50 cm de long x 12 cm de diamètre (19,7 in x 4,7 in)

### **Conditions requises/Restrictions :**

Ne peut être utilisé avec la cuve de stockage arrière 9A313.

**Étape 1 :** Retirez le porte-rouleau de papier standard.

**Remarque :** conservez les vis et la tige pour le nouveau porte-rouleau.

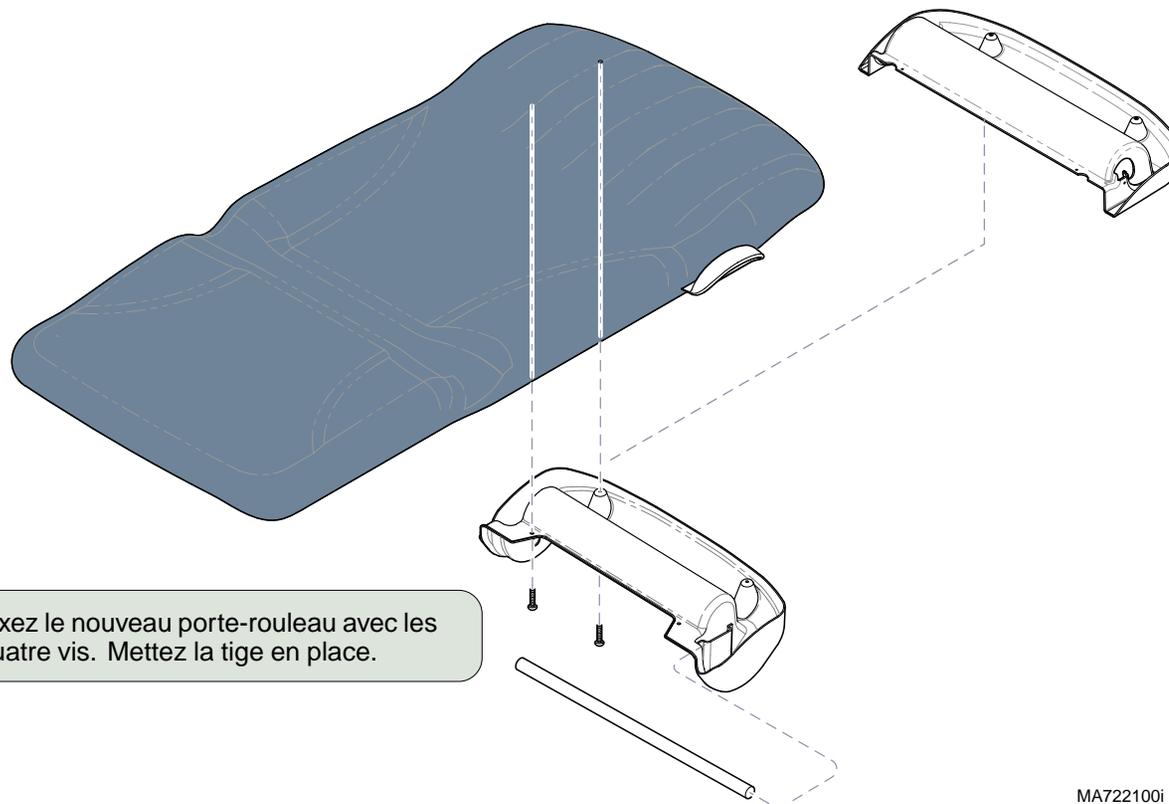

**Étape 2 :** Fixez le nouveau porte-rouleau avec les quatre vis. Mettez la tige en place.

MA722100i