


# Porta-rollos de papel Export [9A334, 9A355, 9A618]

**Uso previsto:**  
Para que la mesa acepte rollos de papel de tamaño europeo.  
50 cm largo x 12 cm diámetro (19,7 pulg. largo x 4,7 pulg. diámetro)

**Requisitos/restricciones:**  
No puede utilizarse con el compartimiento de almacenamiento posterior 9A313.

**Paso 1:** Retire el porta-rollos de papel estándar.  
**Nota:** Guarde los tornillos y la barra de posición para el nuevo porta-rollos.

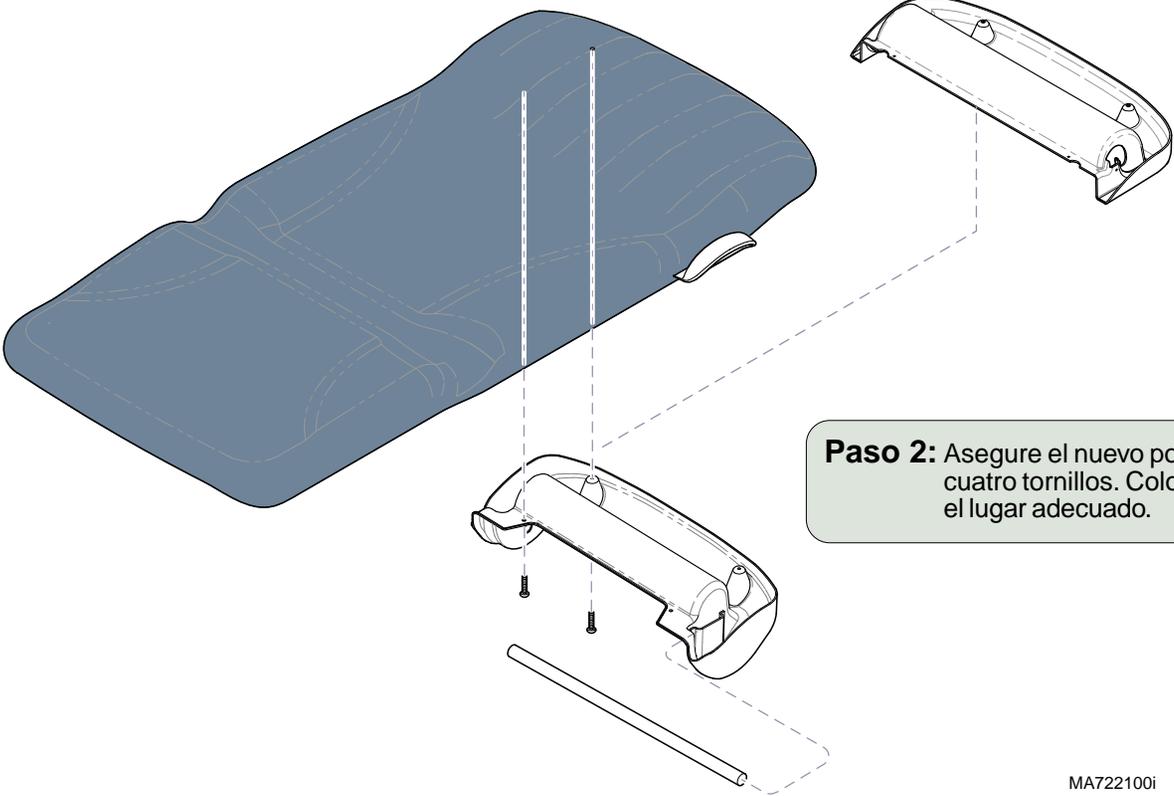

**Paso 2:** Asegure el nuevo porta-rollos de papel con cuatro tornillos. Coloque la barra de posición en el lugar adecuado.

MA722100i