


Pour installer la garniture matelassée de l'assise / dossier

- A. Surélevez le dossier d'environ 30°
- B. Alignez l'avant de la garniture de l'assise sur l'armature
- C. Appuyez fermement sur l'assise, puis mettez en place la garniture du dossier et appuyez fermement.

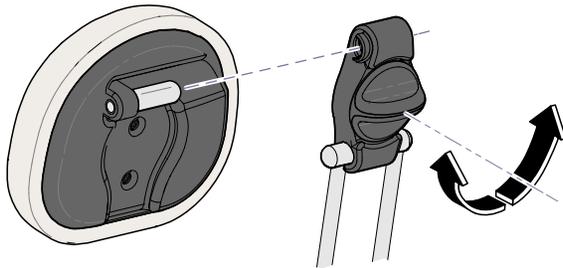


Pour installer la garniture de l'appui-tête

- A. Desserrez le bouton de réglage de l'appui-tête.
- B. Insérez la tige de montage dans la fente de l'appui-tête.
- C. Positionnez l'appui-tête à votre gré.
- D. Resserrez le bouton de réglage de l'appui-tête.

Pour installer la garniture matelassée du repose-pieds / rallonge

- A. Alignez l'avant de la garniture du repose-pieds/rallonge sur l'armature.
- B. Posez la garniture à plat puis appuyez fermement.

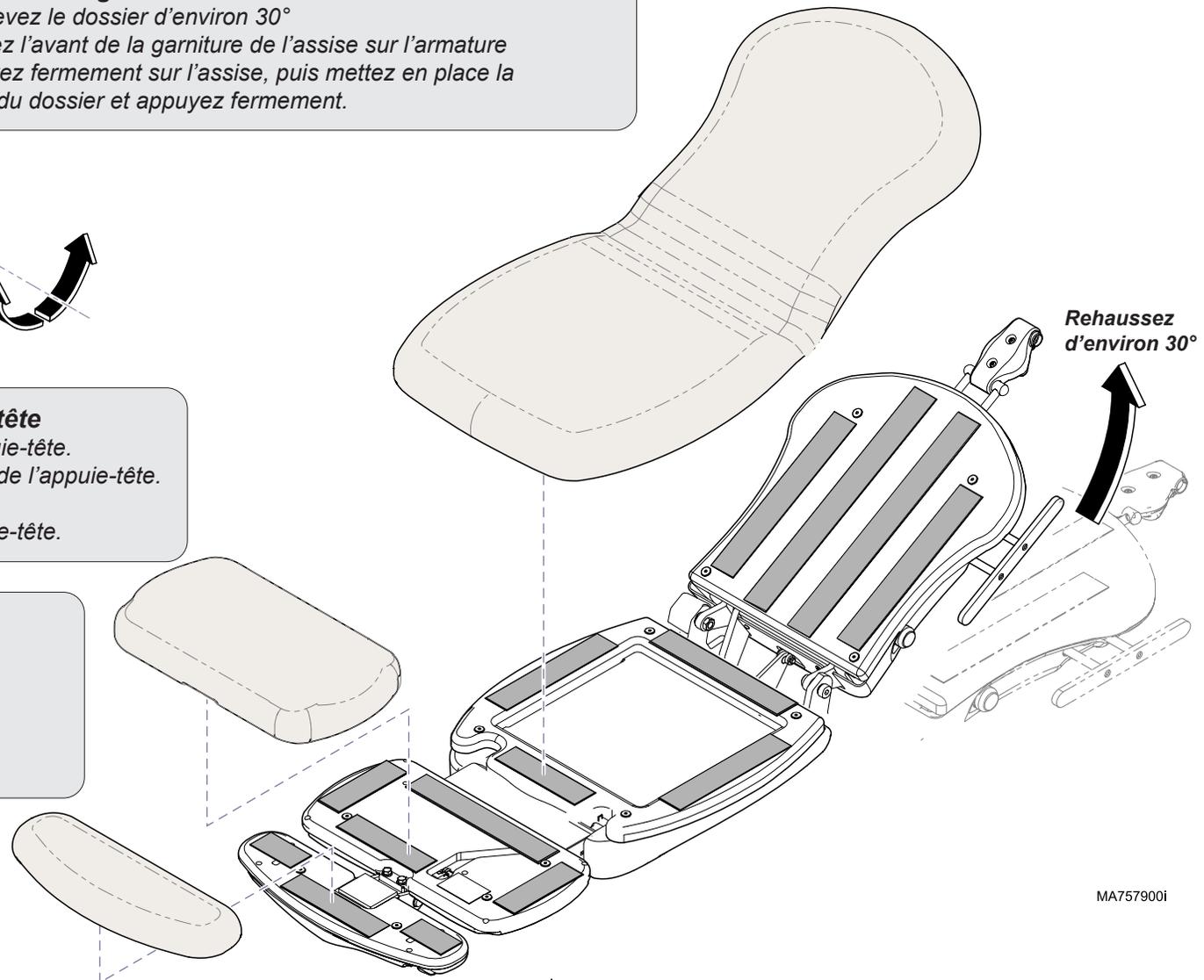

MA7579001