

Instalación de la tapicería del sillón eléctrico para uso médico


Para los modelos:

641 (todos)

El idioma de origen: Ingles

Para instalar el asiento / el respaldo tapizado

- Levante el respaldo de la camilla aproximadamente unos 30°.
- Coloque la parte delantera de la tapicería del asiento Qcontra el lado superior del tablero.
- Presione el asiento hacia abajo con fuerza y después coloque la sección del respaldo en la posición adecuada y presione hacia abajo con fuerza.

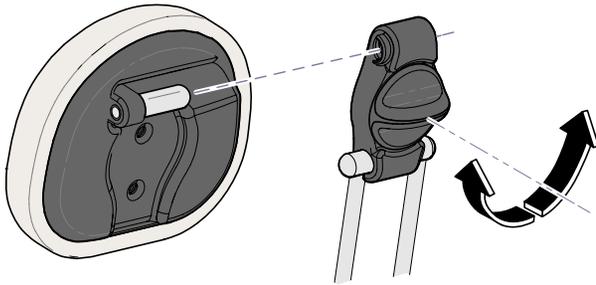


Para instalar el cabecero

- Afloje el tirador de ajuste del cabecero.
- Inserte en tornillo de soporte para la instalación del cabecero.
- Coloque el cabecero en la posición deseada.
- Apriete el tirador de ajuste del cabecero.

Para instalar el reposapiés / la sección tapizada

- Coloque la sección tapizada sobre el lado superior del tablero.
- Extienda la tapicería y después presione hacia abajo con fuerza.

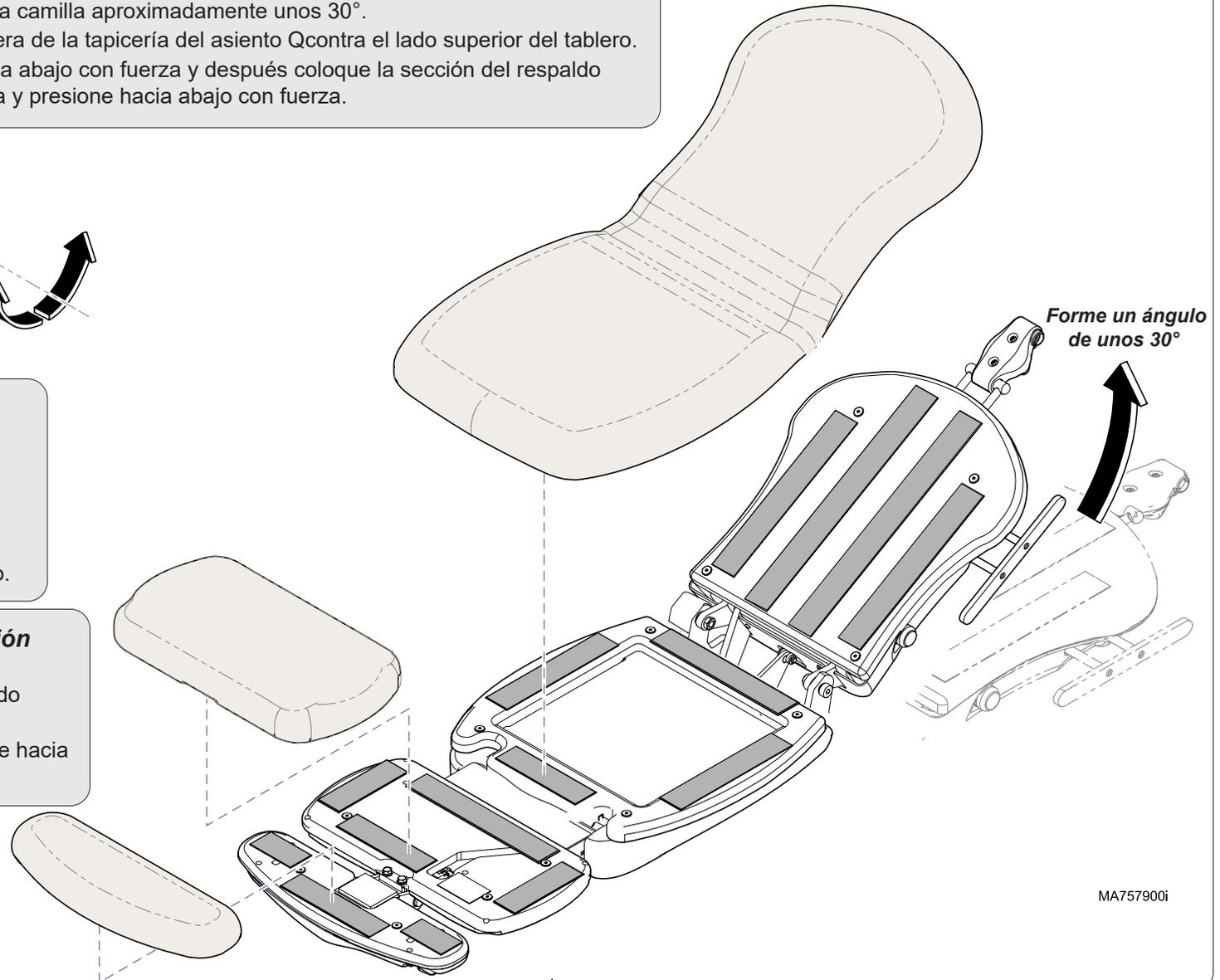

MA757900i