


Zweckbestimmung:

Für mehr Beweglichkeit für die Ritter 253-Untersuchungslampe.


Vor Gebrauch der Lampe:

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Linse.

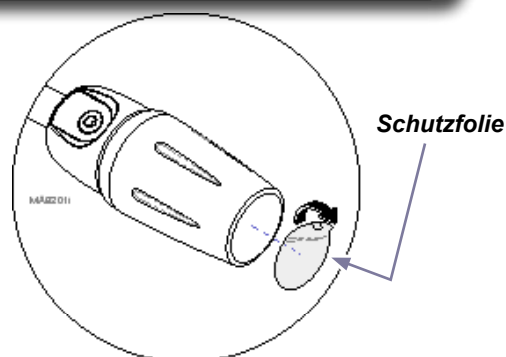

Schritt 1: Installation des Verlängerungsrohrs.

- Drücken Sie das Verlängerungsrohr in den Rollfuß.
- Befestigen Sie das Rohr mit Unterlegscheibe und Schraubbolzen.

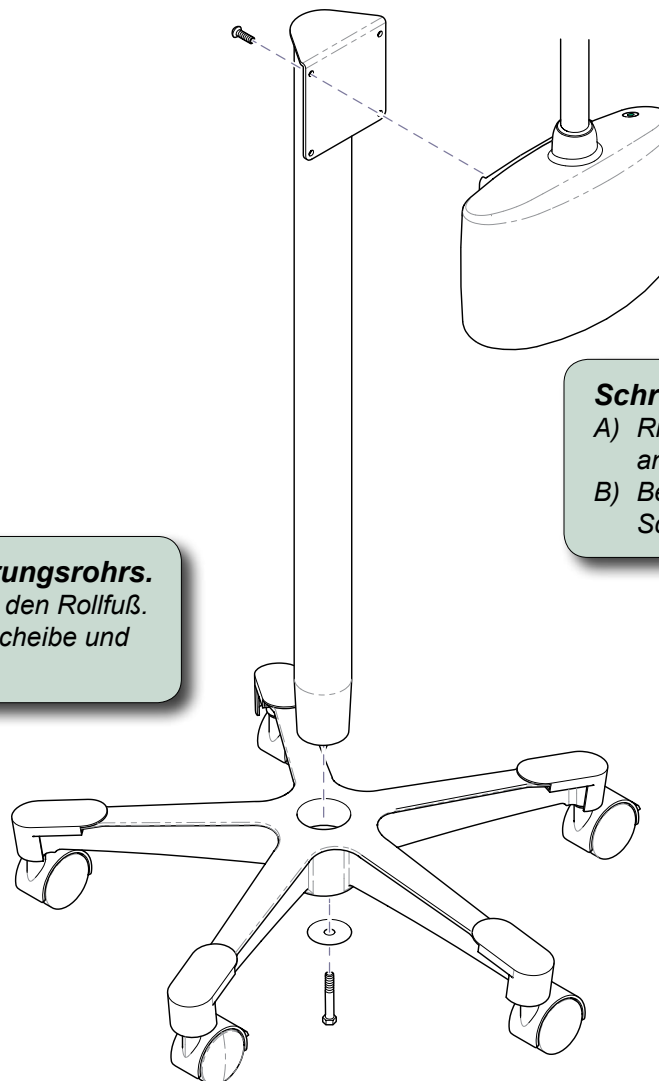

Schritt 2: Installation der Lampe.

- Richten Sie die Lampe mit den Löchern an der Befestigungsplatte aus.
- Befestigen Sie die Lampe mit vier Schrauben.

MA81933