


## **Utilisation prévue :**

Permettre la mobilité de la lampe d'examen Ritter 253.


### **Avant d'utiliser la lampe :**

Retirez le film protecteur de la lentille.

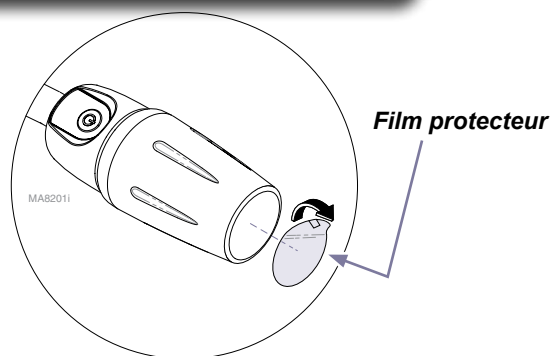

### **Étape 1 : installer le tube central.**

- A) Enfoncez le tube central dans le support à roulettes.
- B) Fixez le tube avec la rondelle et le boulon.

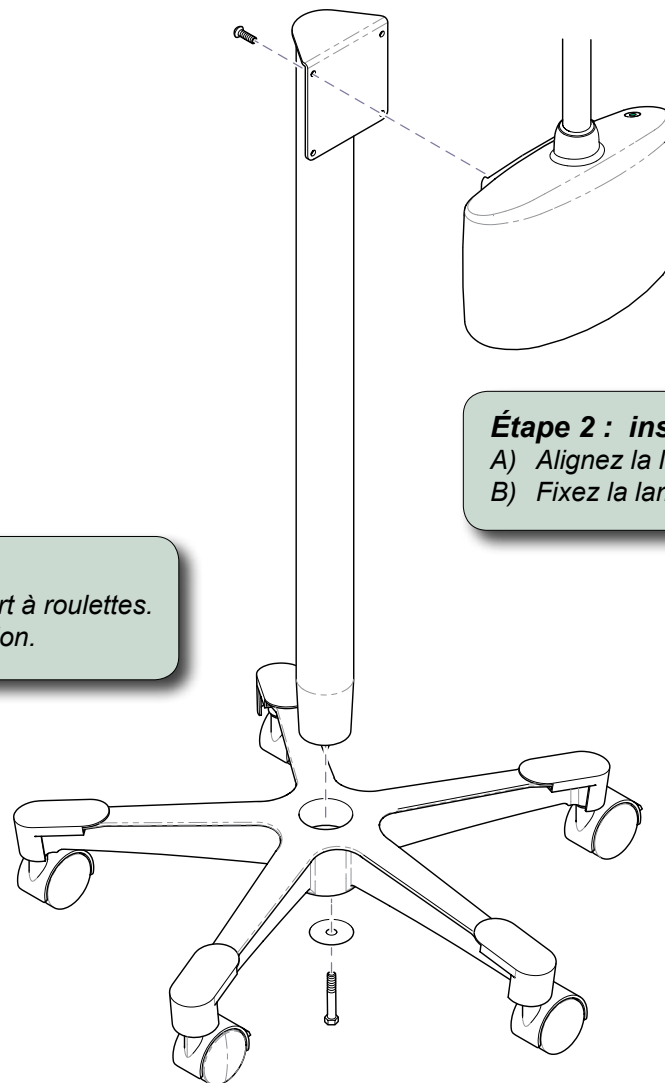

### **Étape 2 : installer la lampe.**

- A) Alignez la lampe sur les orifices de la plaque de montage.
- B) Fixez la lampe avec quatre vis.