

Base giratoria [9A458]

Compatible con:
Lámpara de exploración
Ritter 253


Idioma original: inglés

Uso previsto:

Dar movilidad a la lámpara de exploración Ritter 253.

Antes de utilizar la lámpara:

Retire la película protectora de la lente.

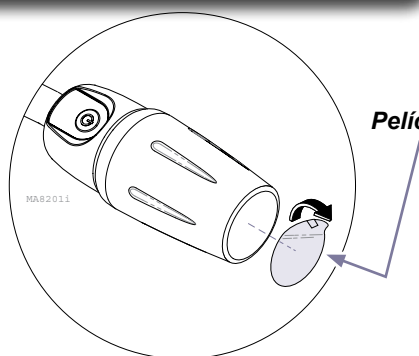


Paso 1: Instale el tubo de extensión.

- Introduzca el tubo de extensión en la base giratoria.
- Fíjelo con un perno y una arandela.

Paso 2: Instale la lámpara.

- Haga coincidir la lámpara con los orificios de la pletina.
- Fije la lámpara con cuatro tornillos.

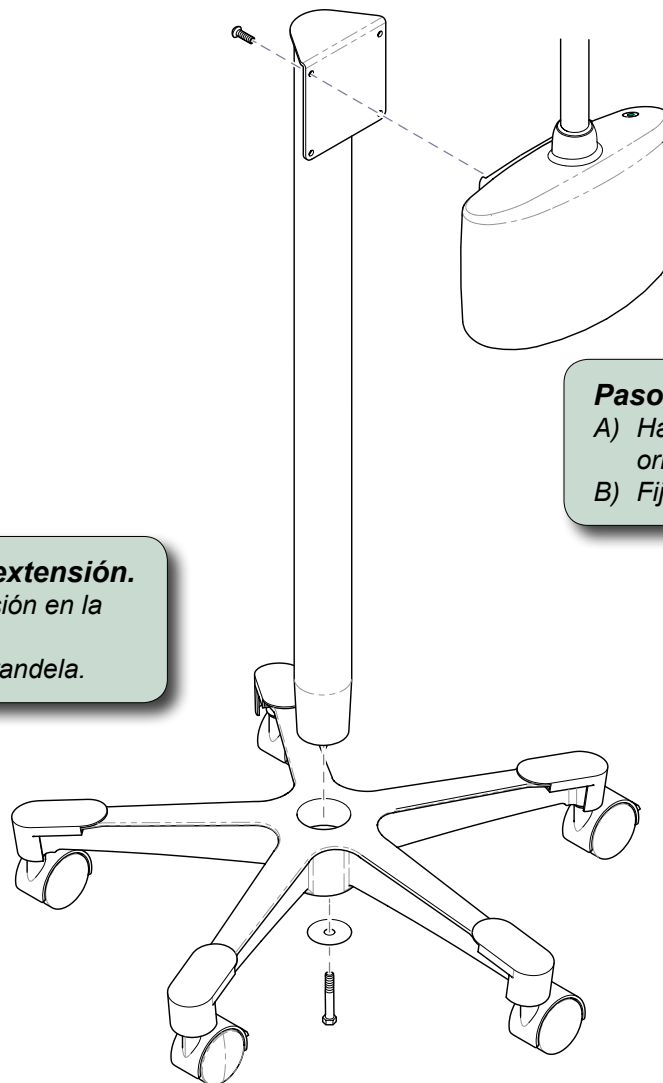

MA81933