

Service Bulletin: Elevance Chair Calibration

Applies to Models:

153810 (see Note)


Language of origin: English

Note

This bulletin applies to Elevance Chairs (before serial number V1350075) installed with Elevance Delivery Systems (before serial number V1350036).

Attention

Elevance Delivery System must be turned OFF using the master switch before chair calibration.

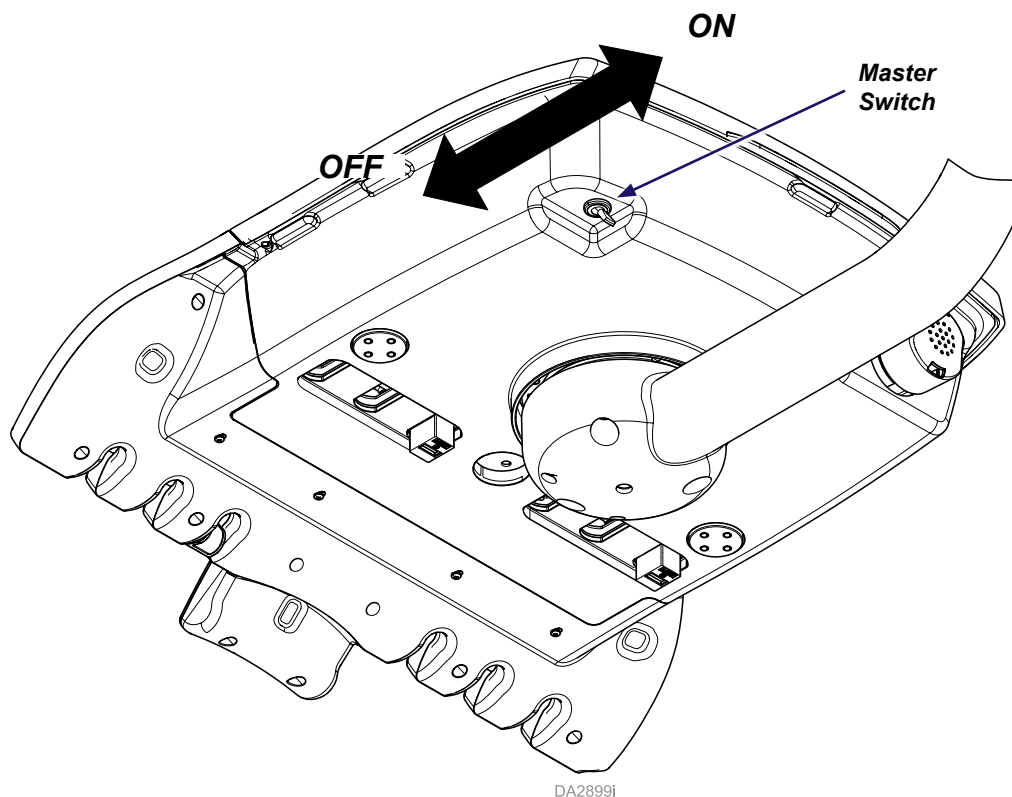

Service-Bulletin: Kalibrierung des Elevance-Patientenstuhls

Für die Modelle:
153810 (alle)


Ausgangssprache: Englisch

Hinweis

Dieses Bulletin ist für alle Elevance-Patientenstühle bestimmt (vorher SN V1350075), die mit dem Elevance-Dentalsystem ausgestattet sind (vorher SN V1350036).

Aufmerksamkeit

Das Elevance-Dentalsystem muss vor der Sitzkalibrierung mit dem Hauptschalter AUSSCHALTEN.

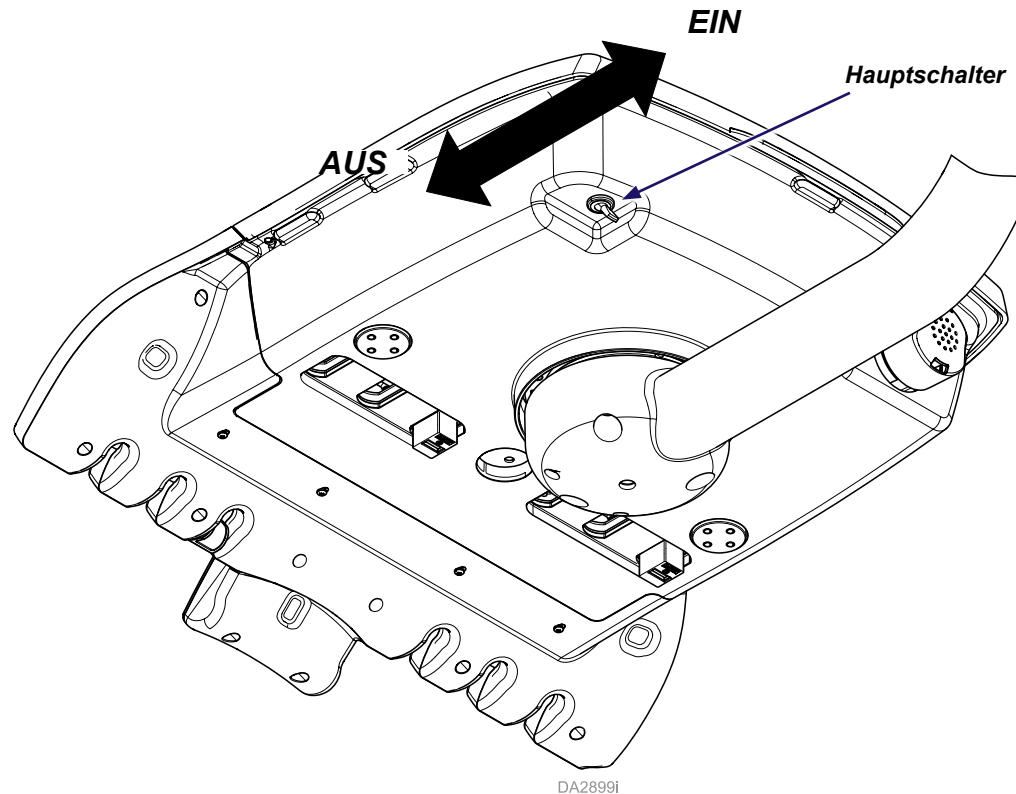


DA2899i

Remarque

Ce bulletin s'applique aux fauteuils Elevance (avant SN V1350075) installés avec les unités dentaires Elevance (avant SN V1350036).

Attention

L'unité dentaire Elevance doit S'ÉTEINT en utilisant l'interrupteur principal avant l'étalonnage du fauteuil.

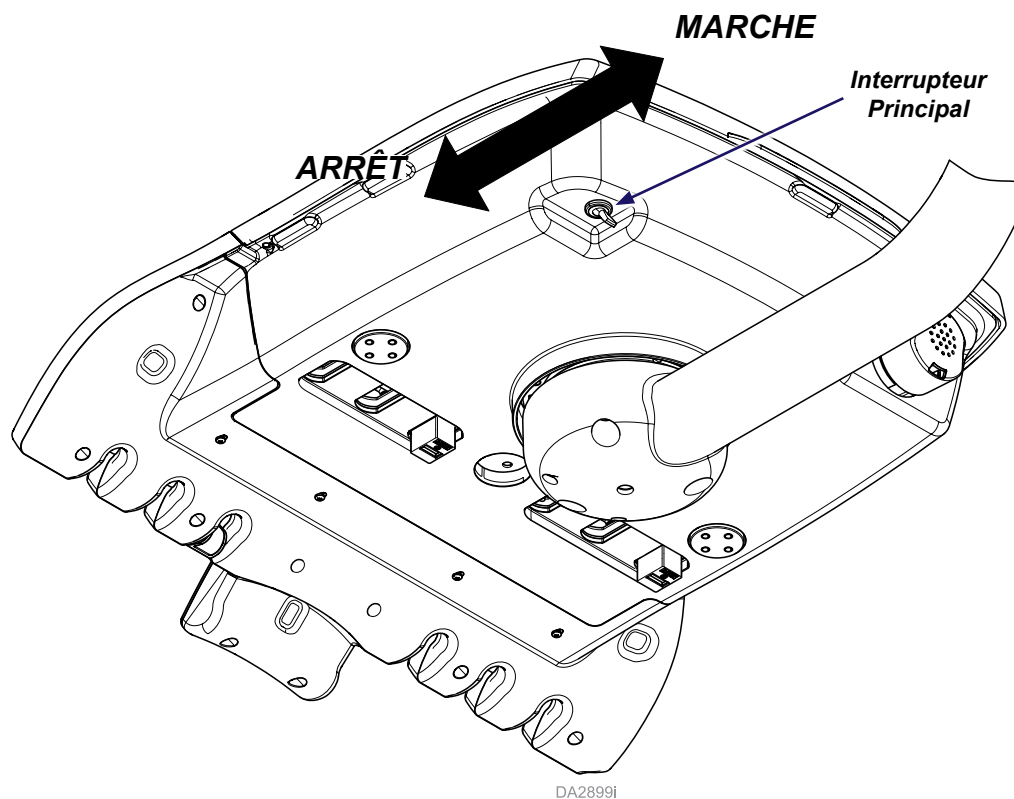

DA2899i

Boletín de servicio: Calibración del sillón Elevance

**Se aplica a los
modelos:**
153810 (todos)


Idioma de origen: Inglés

Nota

Este boletín se aplica a los sillones Elevance (antes SN V1350075) instalados con sistemas dentales Elevance (antes SN V1350036).

Atención

El sistema dental Elevance debe APAGADO utilizando el interruptor principal antes de la calibración del sillón.

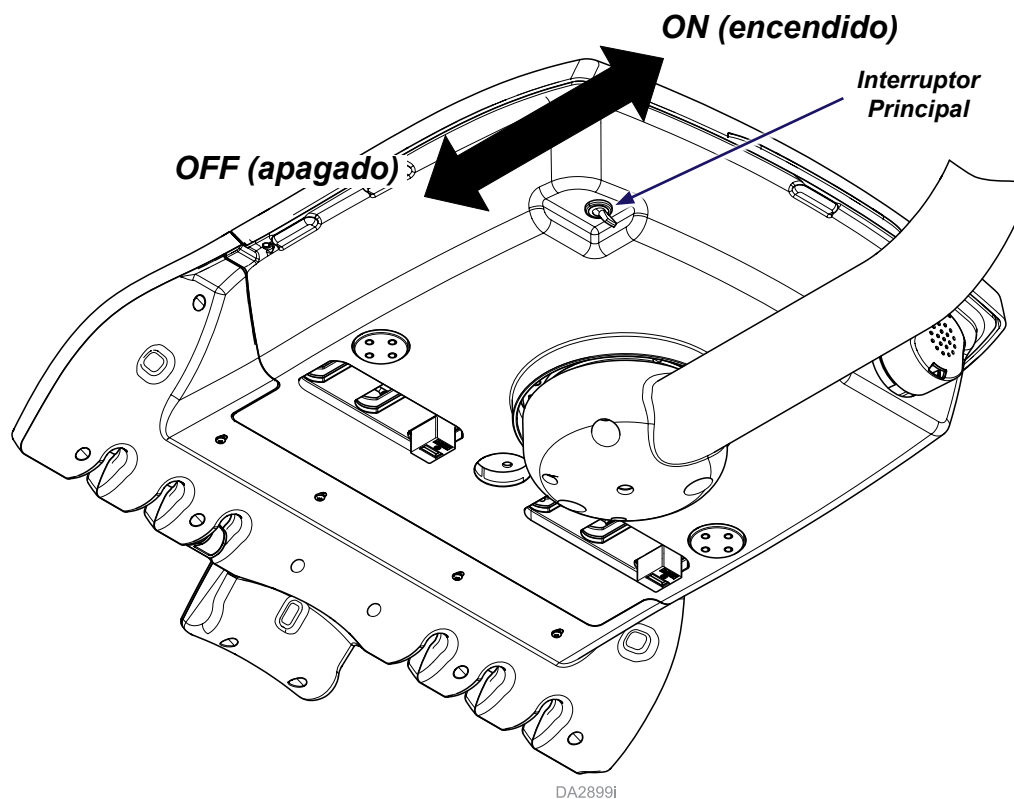

Bollettino di servizio: Calibrazione della poltrona Elevance™

Applicabile ai modelli:
153810 (tutte)

Lingua di origine: inglese

Nota

Questo bollettino riguarda le poltrone Elevance (prima SN V1350075) installate con sistemi di erogazione Elevance (prima SN V1350036).

Attenzione

Il sistema di erogazione Elevance va SPENTO premendo l'interruttore principale prima della calibrazione

