



Gerätewarnung

Der Mindestfreiraum zwischen Tür und Geräten mit Standardsockel beträgt 71 cm (28 in.) und bei Geräten mit Drehsockel 86 cm (34 in.). Vorsicht beim Transport des Tisches durch Türen.




Vorsicht!

Dieser Tisch wiegt ca. 217 kg (475 lb.). Den Tisch nur zu zweit anheben.

Schritt 1: Tisch von der Palette abladen.

- A) Vier Muttern und Klemmen entfernen.
- B) Vorsichtig den Tisch von der Palette herunterheben.

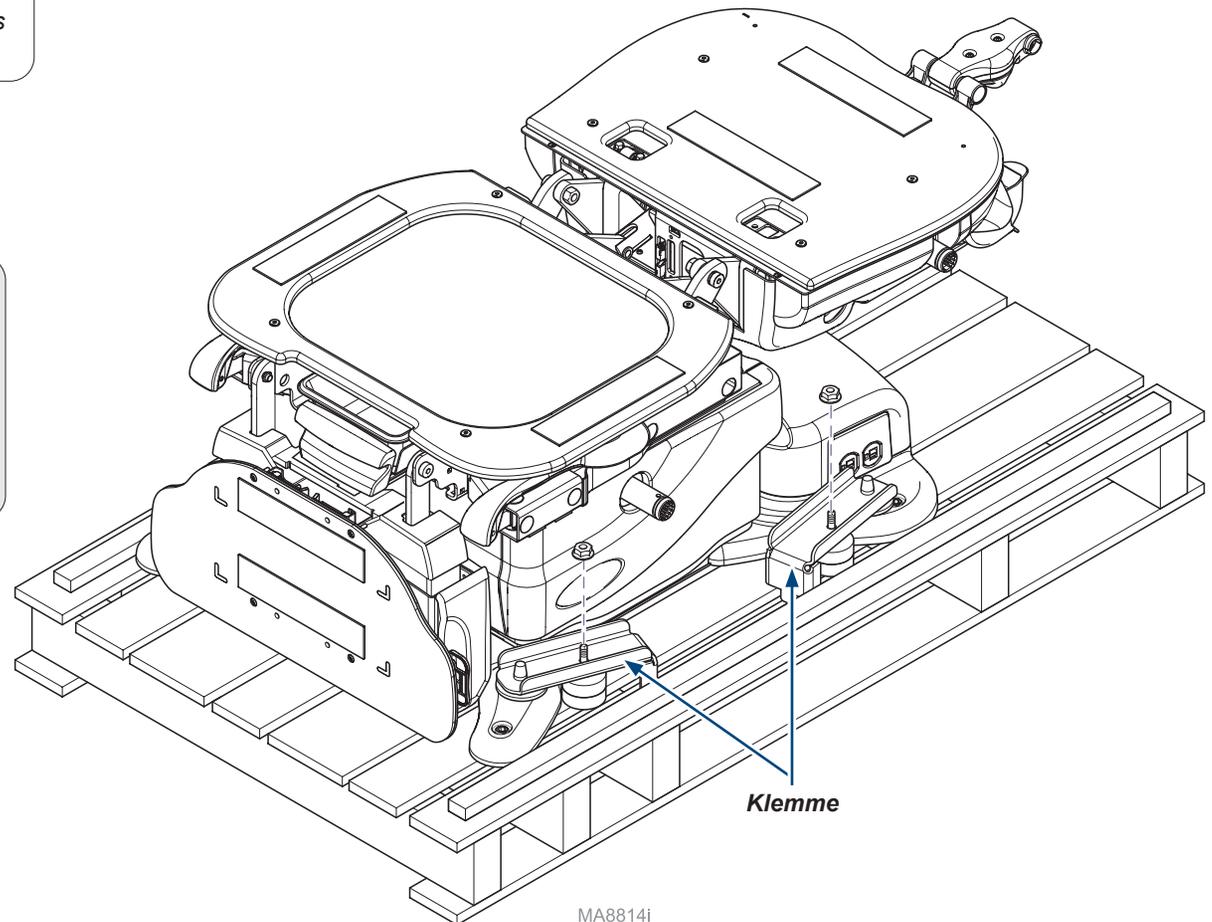

Klemme

MA8814i


Bevor Sie das Netzkabel eines Midmark-Geräts in den Ausgang einer Stromquelle stecken, wird empfohlen, vor Ort einen zugelassenen Elektriker oder eine lokale Stelle, die für die interne Stromversorgung des Gebäudes zuständig ist, zu kontaktieren, um zu prüfen, ob das Gerät bei Inbetriebnahme alle örtlichen Elektronikvorschriften erfüllt. Halten Sie sich an die auf dem Gerät angegebene Nennleistung, um den passenden Nebenstromkreis und die Anforderungen an Stromausgänge zu bestimmen. Für Gerätemodelle mit einer Nennspannung von 115 V und einem Nennstrom von 12 oder darüber, kann ein eigener Nebenstromkreis erforderlich sein, falls der Nebenstromkreisschutz durch einen Trennschalter mit 15 A gewährleistet wird.

Hinweis

Sofern nicht speziell für die Ausfuhr abweichend angefordert, sind die Geräte werkseitig auf 115 V Wechselstrom eingestellt.

Schritt 2: Spannung anpassen (falls erforderlich).


- A) Rückabdeckung abnehmen (drei Schrauben).
- B) Schalter an der Platine auf die richtige Spannung einstellen.
- C) Abdeckung wieder aufsetzen.

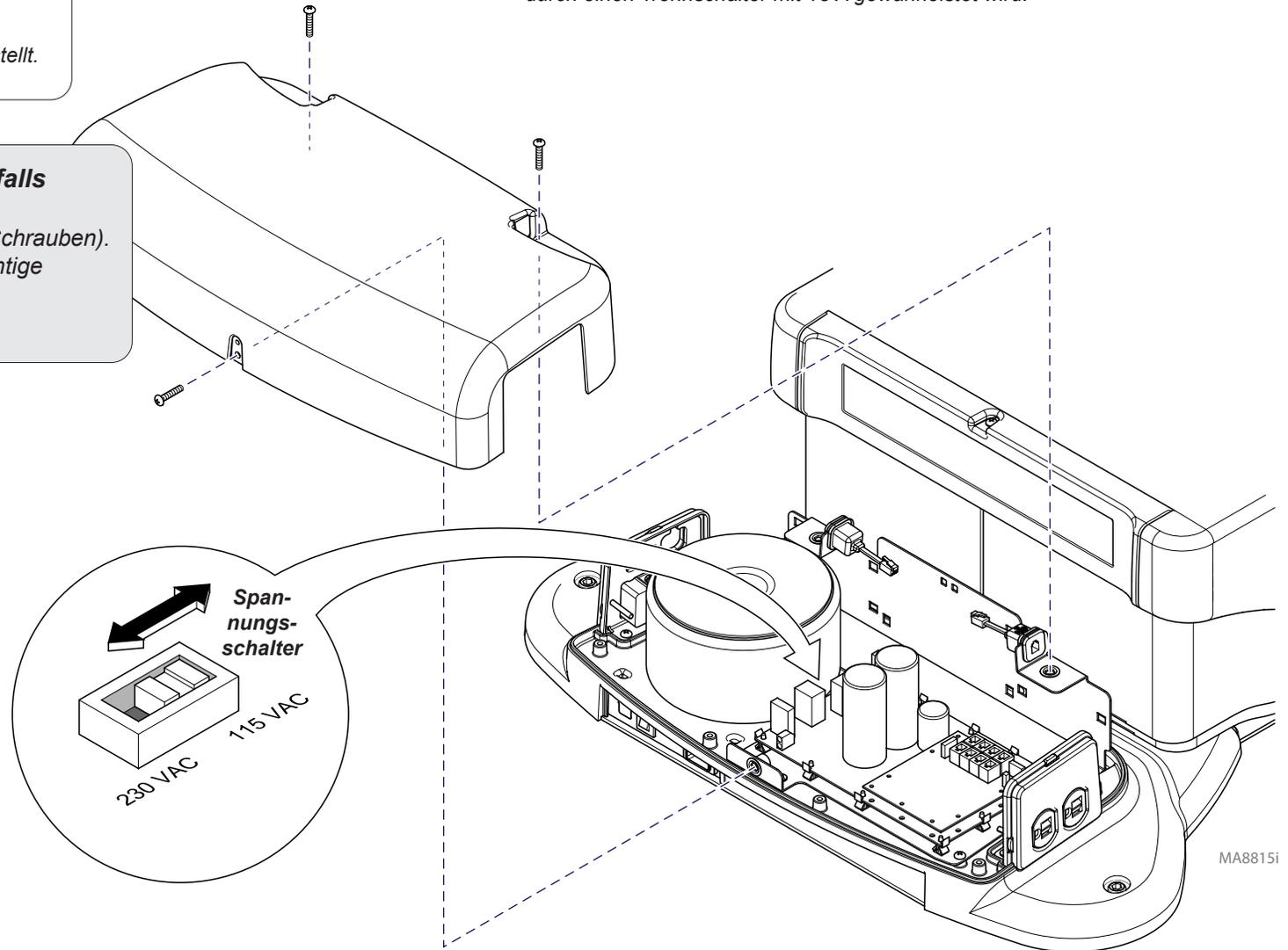

MA8815i

Schritt 3: Halter für die Handbedienung montieren.



- A) Zwei Montagebolzen einsetzen und mit Fingerschrauben sichern.
- B) Halter an den Montagebolzen anbringen.

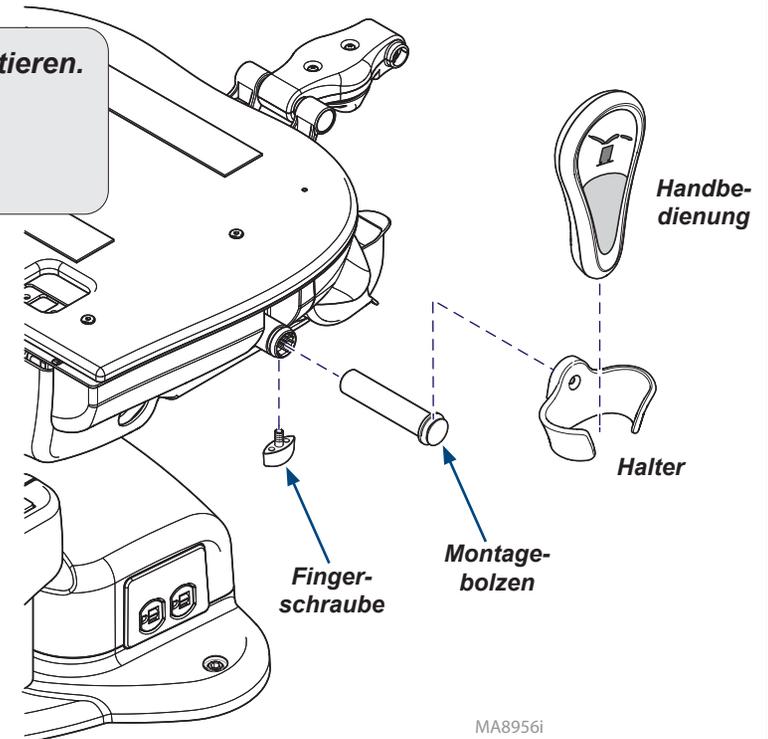

Schritt 4: Fußbedienung anschließen.

- A) Stecker in Modularbuchse an der Vorderseite des Tisches einstecken.

Hinweis: Einige Tische verfügen über eine kabellose Steuerung.

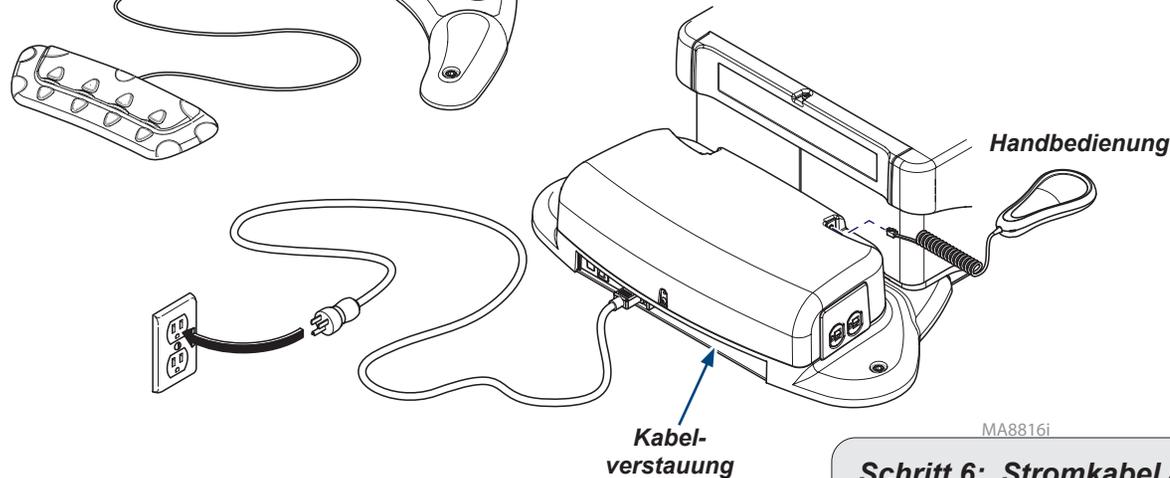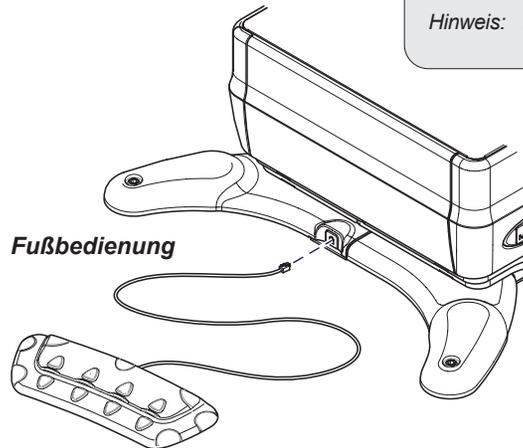

Schritt 5: Handbedienung anschließen.

- A) Stecker in Modularbuchse an beiden Seiten der Rückabdeckung einstecken.

Hinweis: Einige Tische verfügen über eine kabellose Steuerung.

Schritt 6: Stromkabel anschließen.

- A) Eckigen Stecker in die Wechselstrombuchse an der Tischrückseite einstecken.
- B) NEMA-5-Stecker in die Wandsteckdose einstecken.
- C) Stromkabel aufwickeln und in die Kabelverstaung einlegen.



Gerätewarnung



Der Tisch muss zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs eben ausgerichtet sein.

Schritt 7: Den Tisch eben ausrichten.

- A) Mithilfe einer Wasserwaage und Innensechskantschlüssels die Nivellierschrauben nach Bedarf anpassen.
- B) Vier Stopfen einsetzen.

Schritt 8: Schaumstoffblöcke entfernen.

- A) Die Schaumstoffblöcke hinter den Griffen der Fußstütze entfernen.

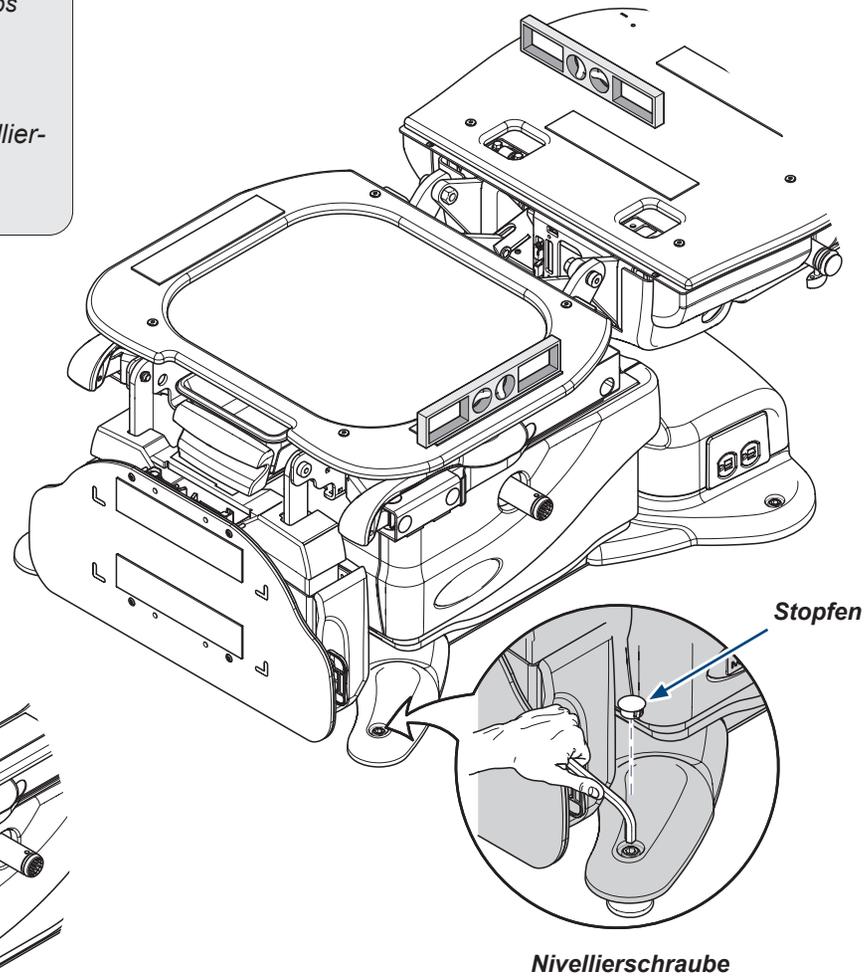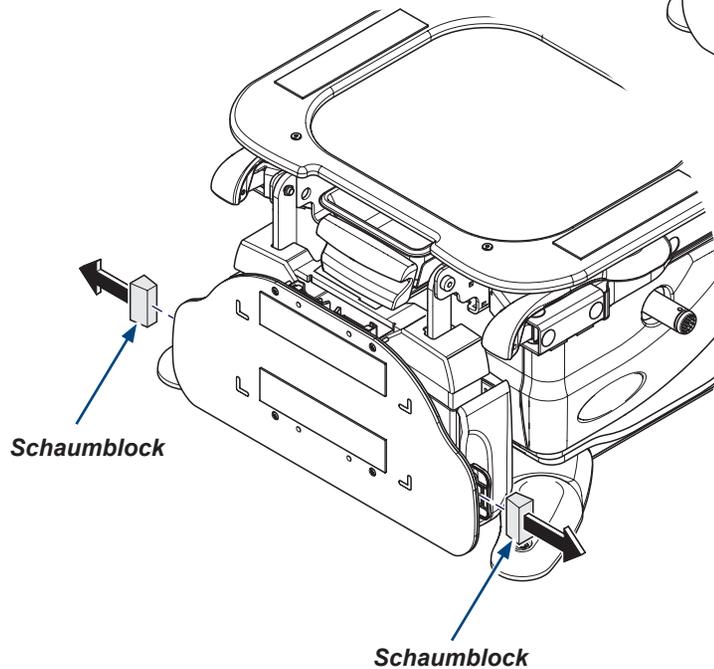

MA8817

Schritt 9: Ordnungsgemäßen Betrieb überprüfen.

A) Mit der Fußbedienung die folgenden Funktionen aktivieren:

Sockel AUF/AB

Lehne AUF/AB

Hochlagerung AUF/AB

Fuß AUF/AB

Quick Chair

Ausgangsposition

B) Die Funktion für die Ausgangsposition wieder aktivieren.


Die STOPP-Taste drücken, während sich der Tisch bewegt.
(Jegliche Bewegung sollte nun unterbleiben.)

C) Die Punkte A und B mit der Handbedienung wiederholen.

Hinweis: Die Quick Chair-Funktion ist nur über die Fußbedienung aktivierbar.

Hinweis

Wenden Sie sich bei einer Fehlfunktion an den technischen Kundendienst von Midmark unter der Nummer: +1.937.526.3662

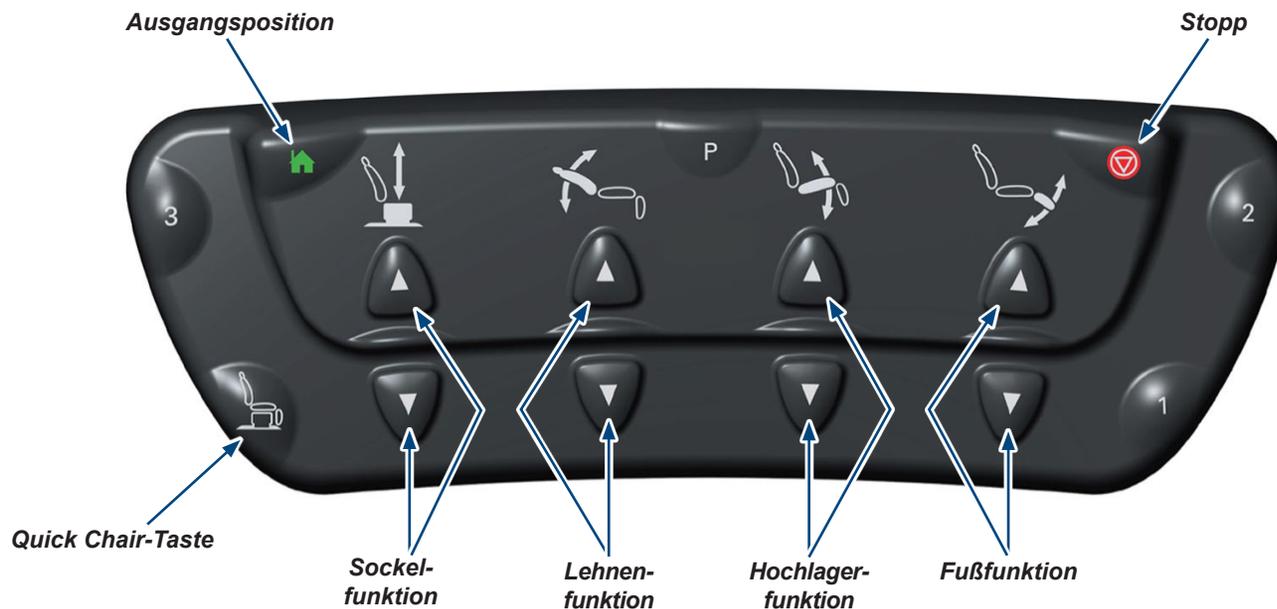

Schritt 10: Die gepolsterte Auflage anbringen (nicht abgebildet).

Hinweis: Die Montageanleitung ist mit der Polsterung verpackt.