

**Avertissement relatif à l'équipement**


La dimension minimale d'ouverture de la porte est de 71 cm (28 pouces) pour les unités possédant une base standard et de 86 cm (34 pouces) pour les unités possédant une base rotative. Prenez garde au passage des portes lors du déplacement de la table.

**Attention**

Cette table pèse environ 215 kg (475 lb).
Faites-vous aider pour soulever la table.

Étape 1 : Retirez la table de la palette.

- A) Retirez quatre écrous et pattes de serrage.
- B) Soulevez délicatement la table de la palette.

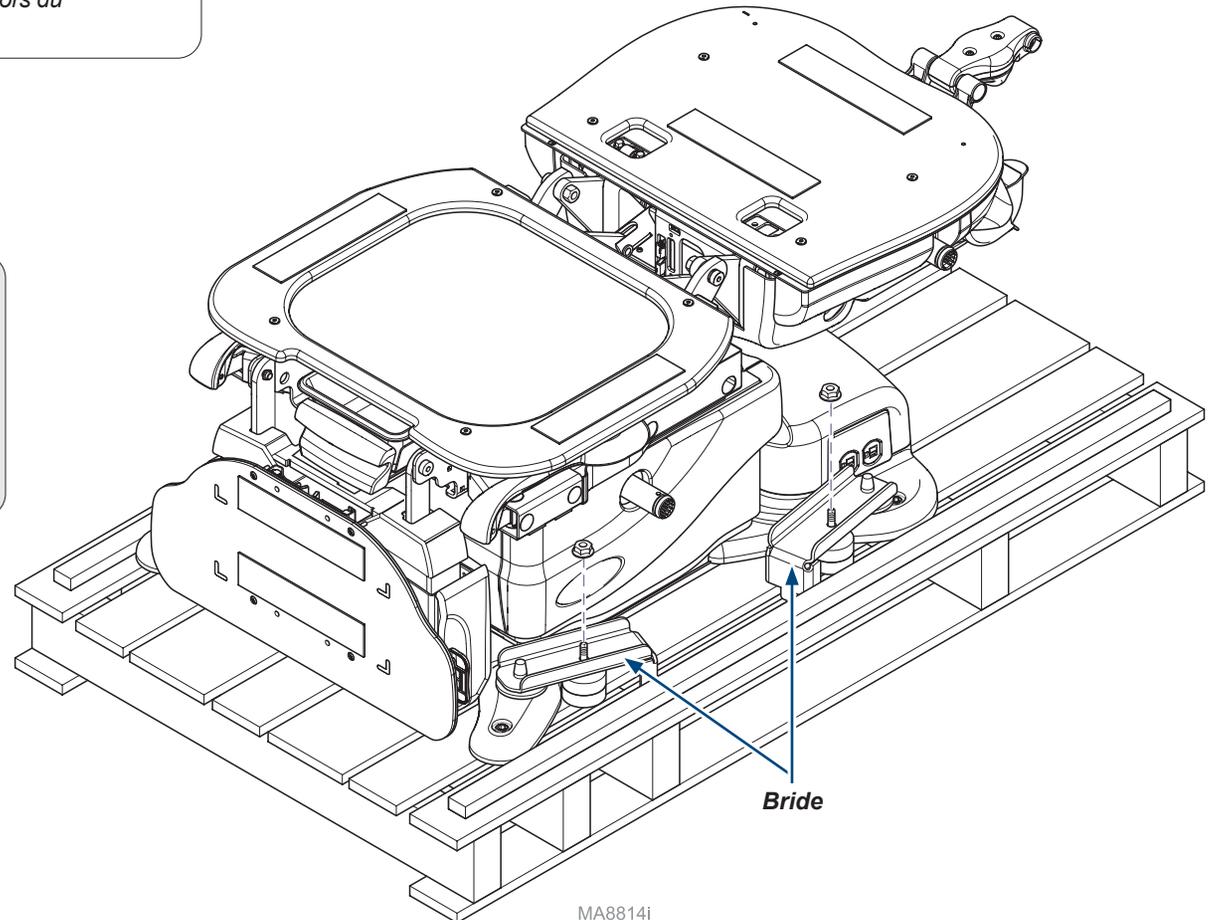


Avant de brancher le cordon d'alimentation de l'appareil Midmark à une prise électrique, il est conseillé de contacter un électricien agréé ou une autorité locale compétente en matière d'installation électrique intérieure des bâtiments afin de vérifier que l'appareil est conforme aux normes électriques en vigueur une fois allumé. Appliquer les valeurs de puissance électrique indiquées sur l'appareil afin de choisir le circuit de dérivation électrique et les contraintes de tension appropriés. Pour les modèles 115 V avec un courant nominal de 12 A ou plus, un circuit de dérivation spécifique peut s'avérer nécessaire si la protection du circuit de dérivation est assurée par un disjoncteur de 15 A.

Remarque

La tension des unités est fixée à 115 V c.a. à l'usine, sauf s'il s'agit de modèles destinés à l'exportation.

Étape 2 : Modifiez la tension (au besoin).


- A) Retirez le cache arrière (trois vis).
- B) Réglez la tension à l'aide du commutateur situé sur le tableau principal.
- C) Remettez le cache.

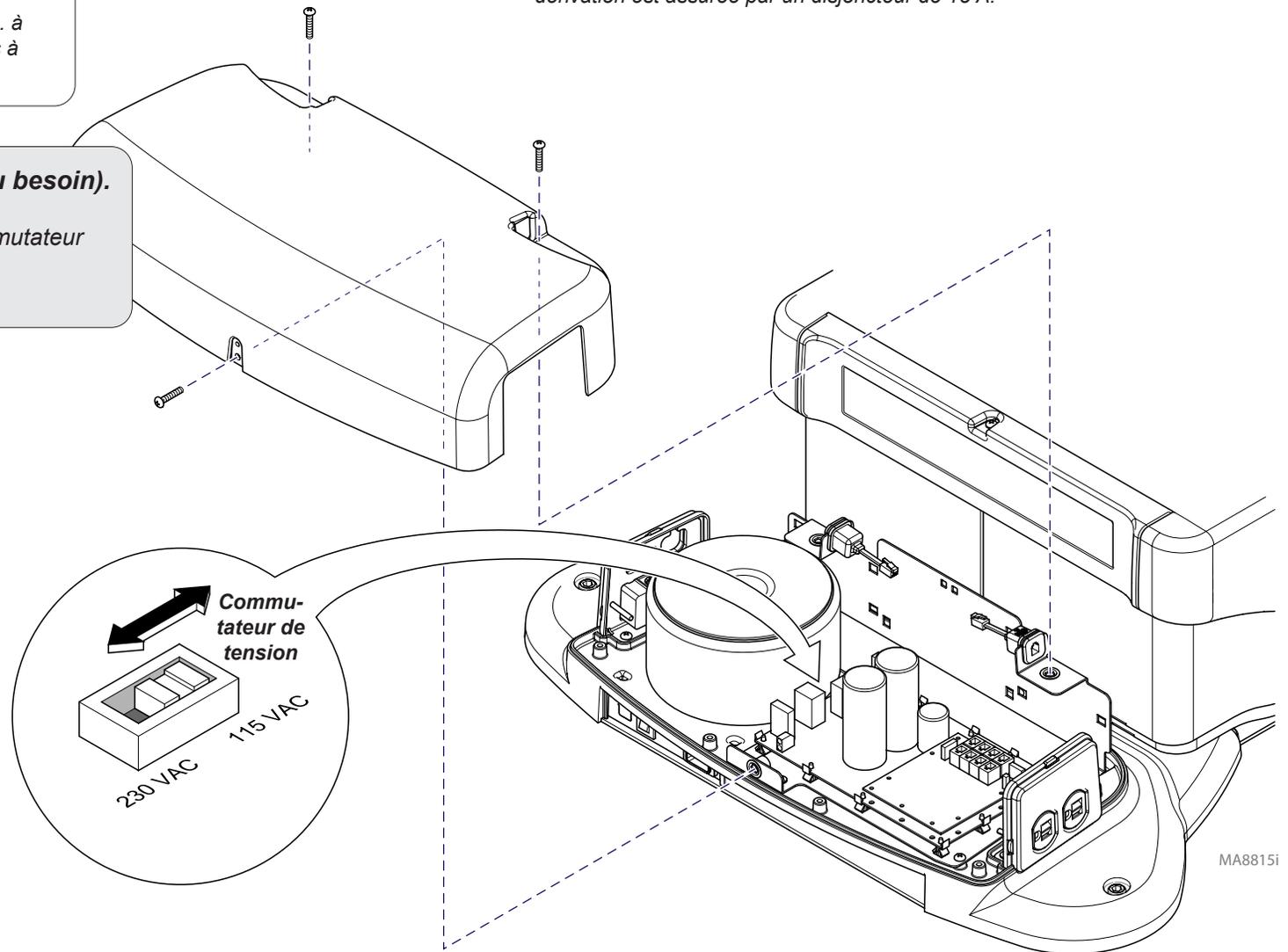

MA88151

Étape 3 : Installez l'étui de la commande manuelle.


- A) Installez deux broches de montage et fixez-les à l'aide de vis de serrage.
- B) Placez les étuis sur les broches de montage.

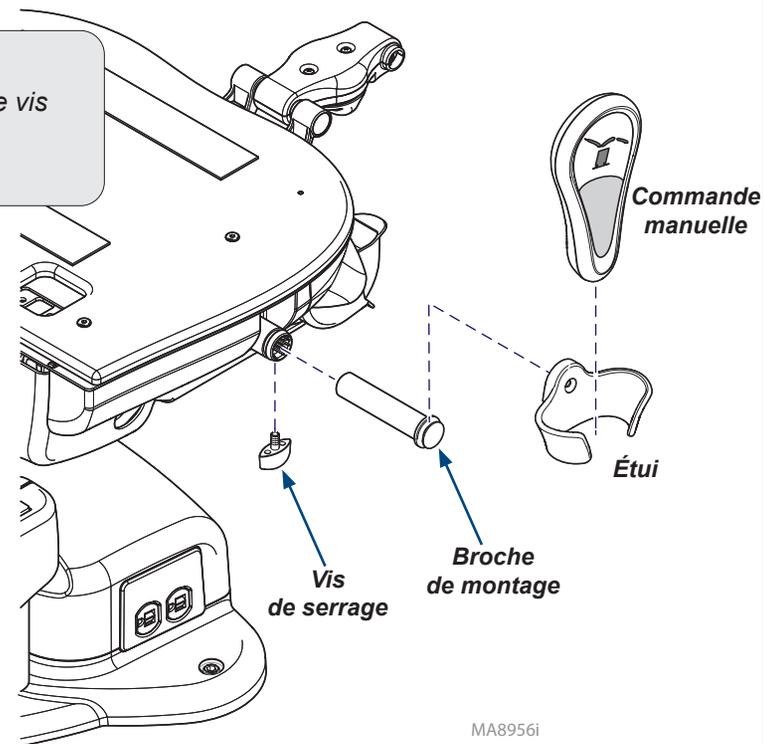

Étape 4 : Connectez la pédale de commande.

- A) Branchez le connecteur dans la prise modulaire située à l'avant de la table.

Remarque : certaines tables sont dotées de commandes sans fil.

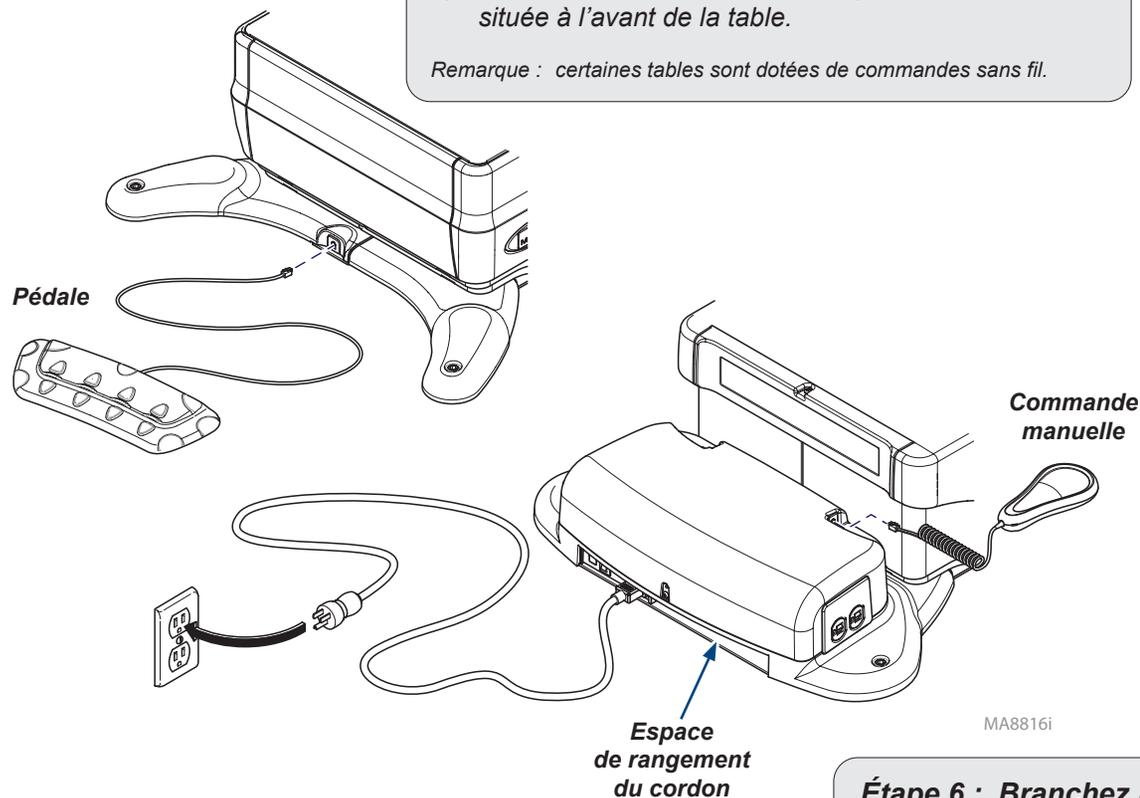

Étape 5 : Connectez la pédale de commande.

- A) Branchez le connecteur dans la prise modulaire située sur l'un des côtés du cache arrière.

Remarque : certaines tables sont dotées de commandes sans fil.

Étape 6 : Branchez le cordon d'alimentation.

- A) Branchez l'extrémité carrée dans la prise c.a. située à l'arrière de la table.
- B) Branchez la fiche à trois broches dans la prise murale.
- C) Enroulez le reste du cordon d'alimentation et placez-le dans son espace de rangement.



Avertissement relatif à l'équipement


La table doit être mise à niveau afin d'assurer un fonctionnement correct.

Étape 7 : Mettez la table à niveau.

- A) À l'aide d'un niveau et d'une clé Allen, ajustez les vis de mise à niveau si besoin.
- B) Installez quatre caches de prise.


Étape 8 : Retirez les blocs de mousse.

- A) Retirez les blocs de mousse derrière les poignées des repose-pieds.

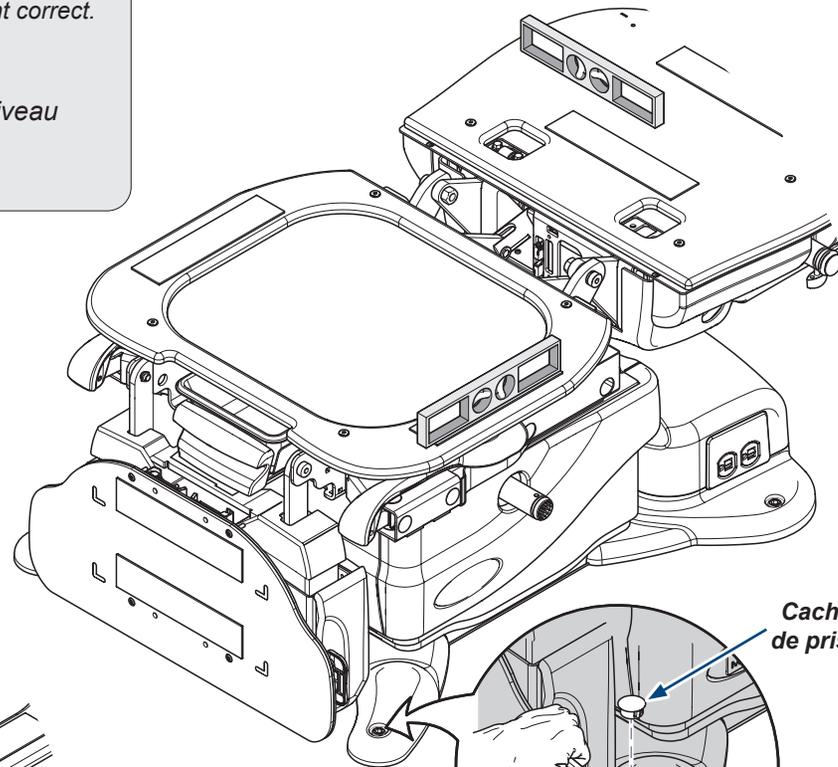

Cache de prise

Vis de mise à niveau

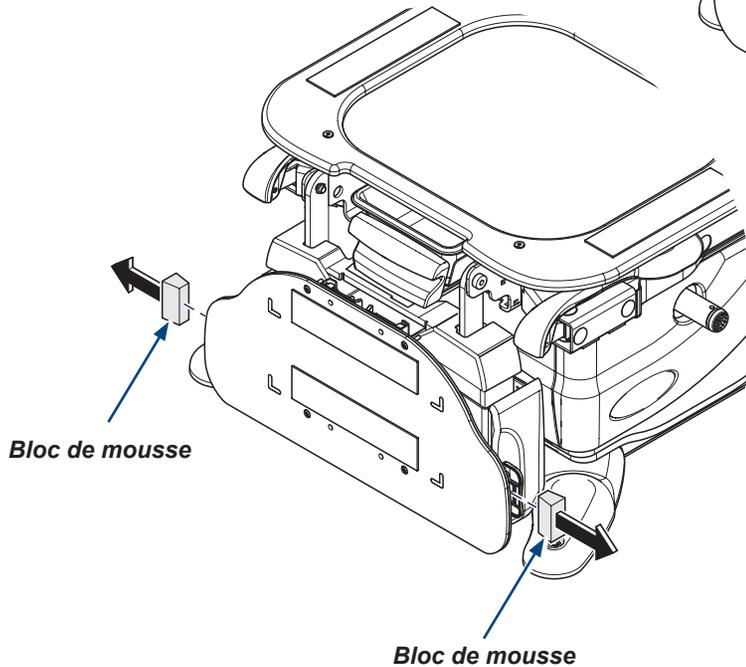

Bloc de mousse

Bloc de mousse

MA8817


Étape 9 : Vérifiez le bon fonctionnement.

- A) Utilisez la pédale de commande pour activer les fonctions suivantes :
- RELEVAGE/ABAISSEMENT de la base
 - RELEVAGE/ABAISSEMENT du dossier
 - Inclinaison VERS LE HAUT/VERS LE BAS
 - RELEVAGE/ABAISSEMENT des pieds
 - Quick Chair
 - Origine
- B) Activez à nouveau la fonction ORIGINE. Pendant que la table est en mouvement, appuyez sur le bouton STOP. (Tout mouvement doit cesser)
- C) Répétez les points A et B en utilisant la poignée de commande.

Remarque : La fonction Quick Chair se trouve uniquement sur la pédale de commande.

Remarque

en cas de dysfonctionnement, contactez le service technique de Midmark en composant le +1.937.526.3662

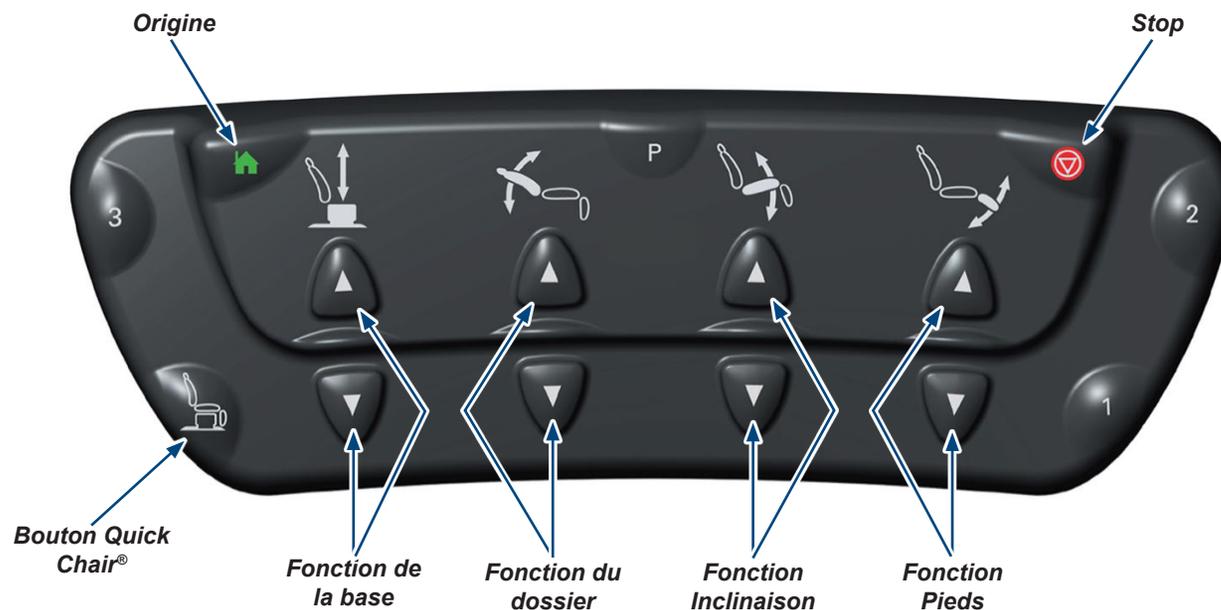

Étape 10 : Installez la garniture matelassée (non illustrée).

Remarque : les instructions d'installation accompagnent la garniture.