

Sillón de tratamiento Midmark 630 HumanFORM®

Se aplica a los modelos:

630 (-010 a -013)

630 (-020 a -023)

Herramientas especiales:

Nivel

llave Allen

Idioma original:: Inglés



Alerta del equipo

La distancia mínima de la puerta para unidades con base estándar es de 71 cm (28 in.) y de 86 cm (34 in.) para unidades con base giratoria. Tenga cuidado al desplazar la mesa a través de puertas.




Precaución

Este sillón pesa aproximadamente 215 kg (475 lb). Pida ayuda para levantar el sillón.

Paso 1: Retirar el sillón de la plataforma.

A) Retire cuatro tuercas y abrazaderas.

B) Con cuidado, levante el sillón de la plataforma.

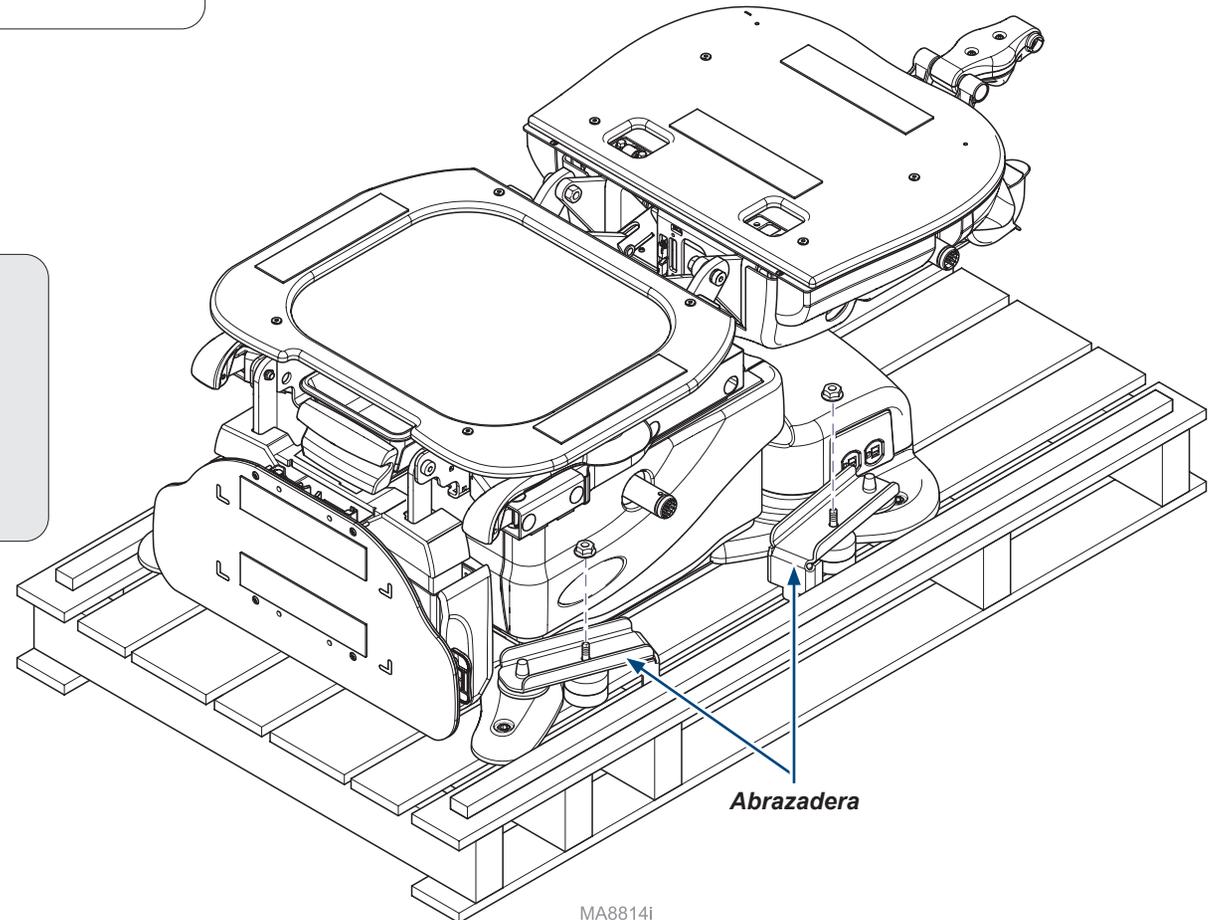

Abrazadera

MA8814i


Antes de conectar el cable de alimentación del dispositivo Midmark a una fuente de alimentación eléctrica, se recomienda contactar con un electricista local autorizado o una autoridad local que tenga jurisdicción sobre la distribución de energía interna del edificio para verificar que, al conectar el dispositivo, este cumple con todos los códigos eléctricos locales. Utilice la potencia eléctrica marcada en el dispositivo para determinar cuales son los circuitos eléctricos derivados apropiados y los requisitos de salida. Para modelos de 115 V con una calificación de corriente de 12 amperios o más, puede requerirse un circuito dedicado en caso de que la protección de dicho circuito provenga de un disyuntor de 15 amperios.

Nota

A menos que se pidan expresamente para exportación, las unidades van ajustadas de fábrica a 115 V CA.

Paso 2: Cambiar el voltaje (si es preciso).


- A) Retire la cubierta trasera (tres tornillos).
- B) Ajuste el interruptor de la placa de circuito impreso al voltaje correcto.
- C) Vuelva a instalar la cubierta.

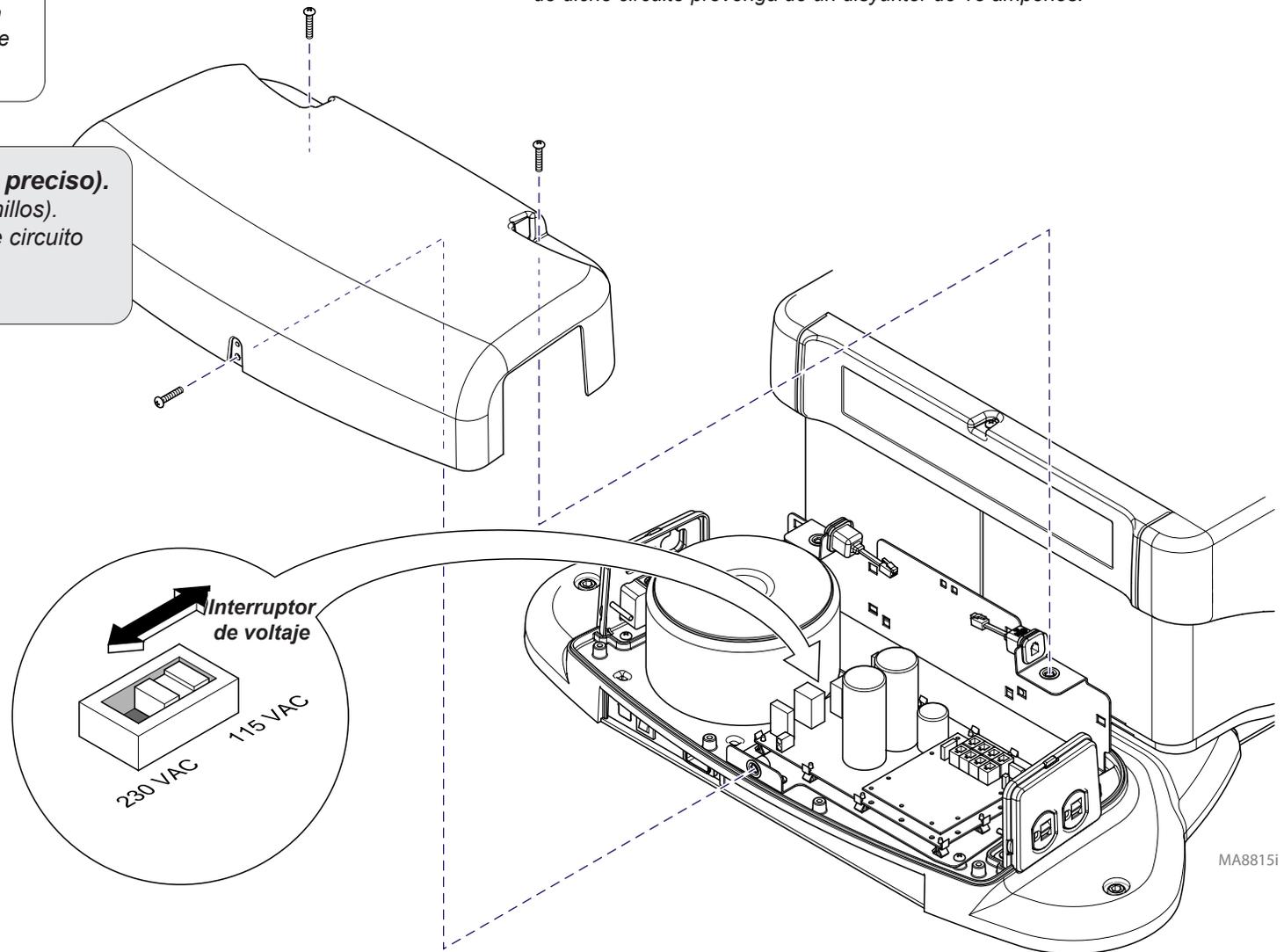

MA88151

Paso 3: Instalar el soporte del mando de control manual.


- A) Instale dos pasadores de montaje y fíjelos con tornillos de mariposa.
- B) Instale los soportes en los pasadores de montaje.

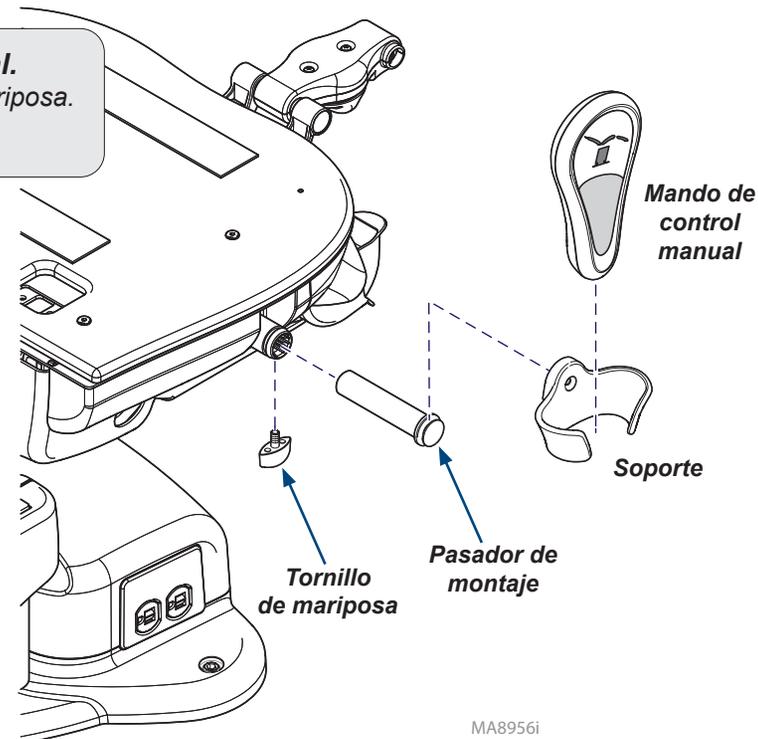

Paso 4: Conectar el pedal de control.

- A) Enchufe el conector a la entrada modular de la parte frontal de la mesa.

Nota: Algunas mesas tienen controles inalámbricos.

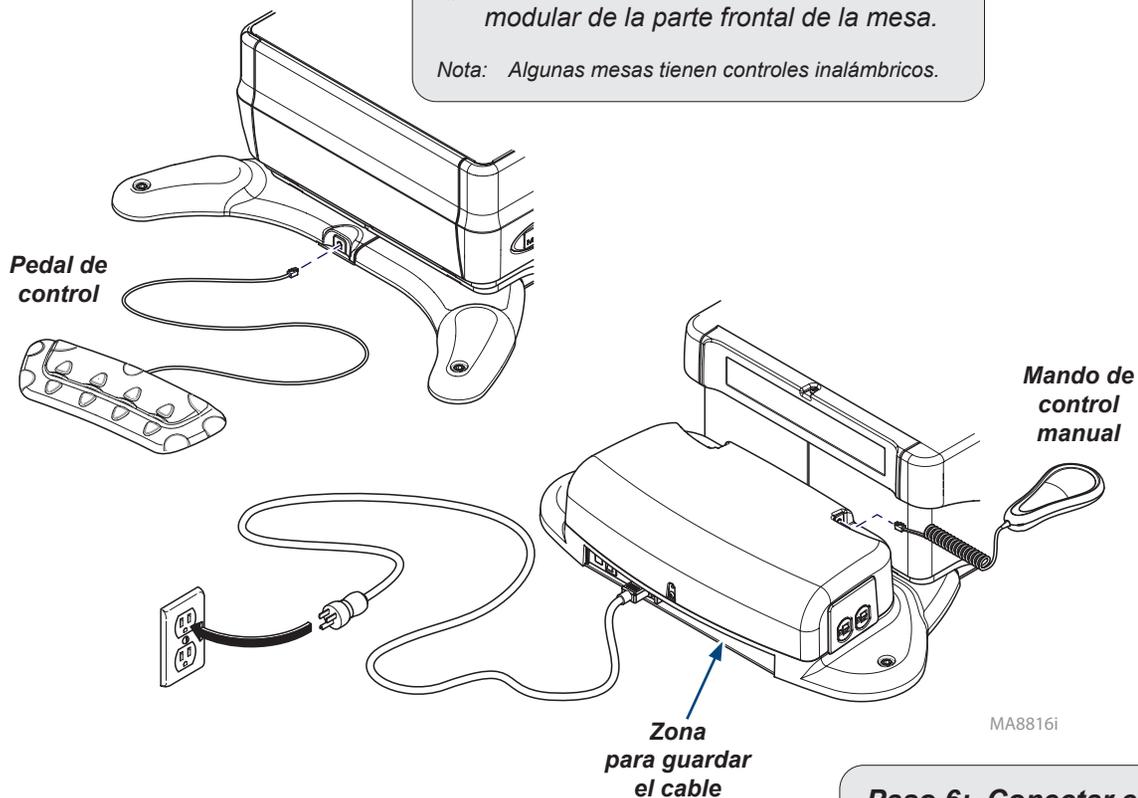

Paso 5: Conectar el mando de control manual.

- A) Enchufe el conector a la entrada modular que hay a ambos lados de la cubierta trasera.

Nota: Algunas mesas tienen controles inalámbricos.

Paso 6: Conectar el cable de alimentación.

- A) Enchufe el extremo cuadrado en la entrada de CA de la parte trasera de la mesa.
- B) Conecte el enchufe de tres clavijas a una toma de pared.
- C) Enrolle el cable de alimentación sobrante y colóquelo en la zona para guardar el cable.




Alerta del equipo

El sillón debe estar nivelado para garantizar su correcto funcionamiento.

Paso 7: Nivelar el sillón.

- A) Con un nivel y la llave Allen, ajuste los tornillos de nivelación según sea preciso.
- B) Instale cuatro tapones para orificios.

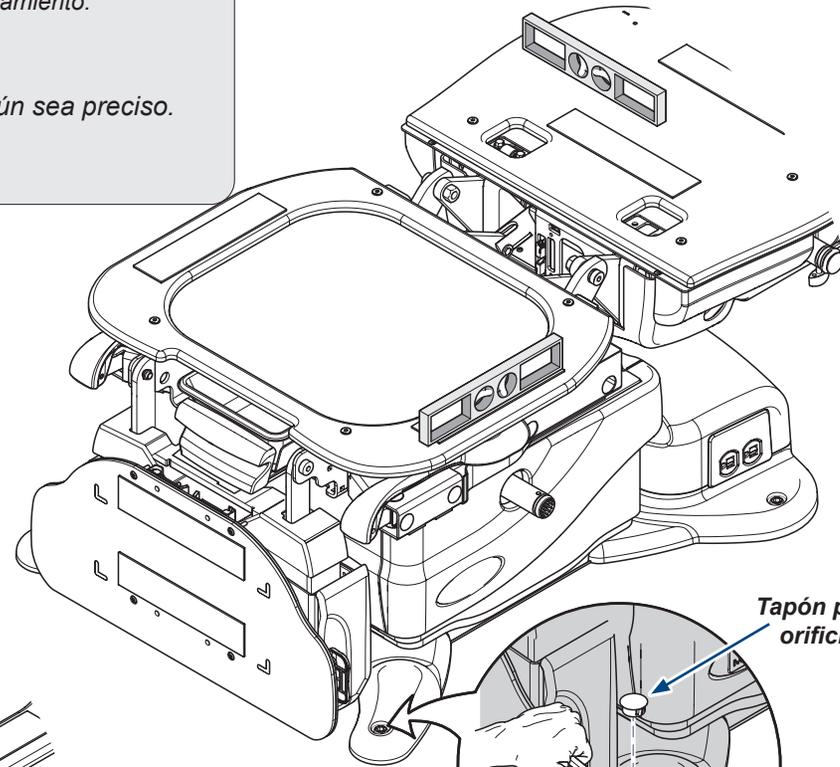


Tapón para orificio

Tornillo de nivelación

Paso 8: Retirar los bloques de espuma.

- A) Retire los bloques de espuma ubicados detrás de las manijas del reposapiés.

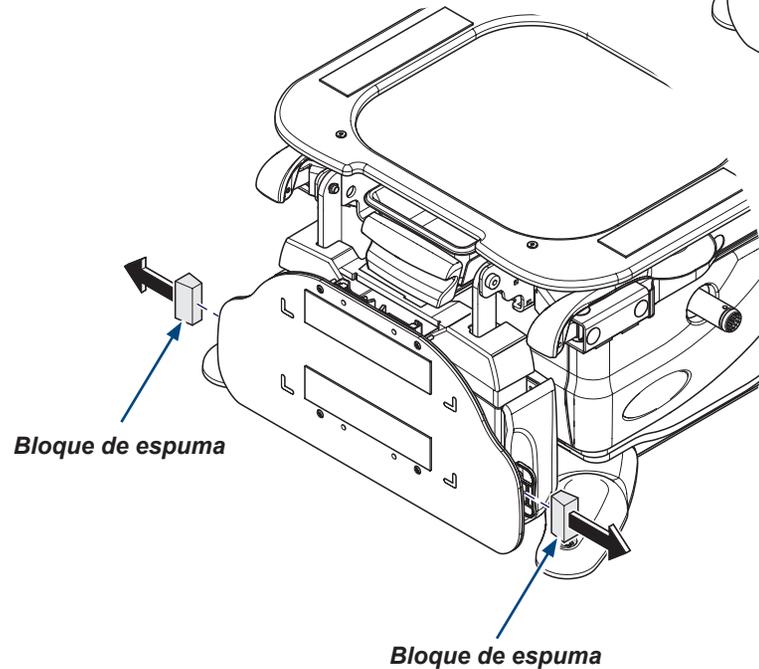

Bloque de espuma

Bloque de espuma

MA8817

Paso 9: Comprobar que el funcionamiento es correcto.

A) Utilice el pedal de control para activar las siguientes funciones:

SUBIR/BAJAR base

SUBIR/BAJAR respaldo

SUBIR/BAJAR inclinación

SUBIR/BAJAR reposapiés

Quick Chair

Inicio


B) Active otra vez la función INICIO. Mientras se esté moviendo la mesa, pulse el botón DETENER. (Debe detenerse por completo el movimiento).

C) Repita los pasos A y B utilizando el mando de control manual.

Nota: La función Quick Chair se encuentra solo en el pedal de control.

Nota

Si detecta que el funcionamiento es incorrecto, póngase en contacto con el servicio técnico de Midmark llamando al número: +1.937.526.3662

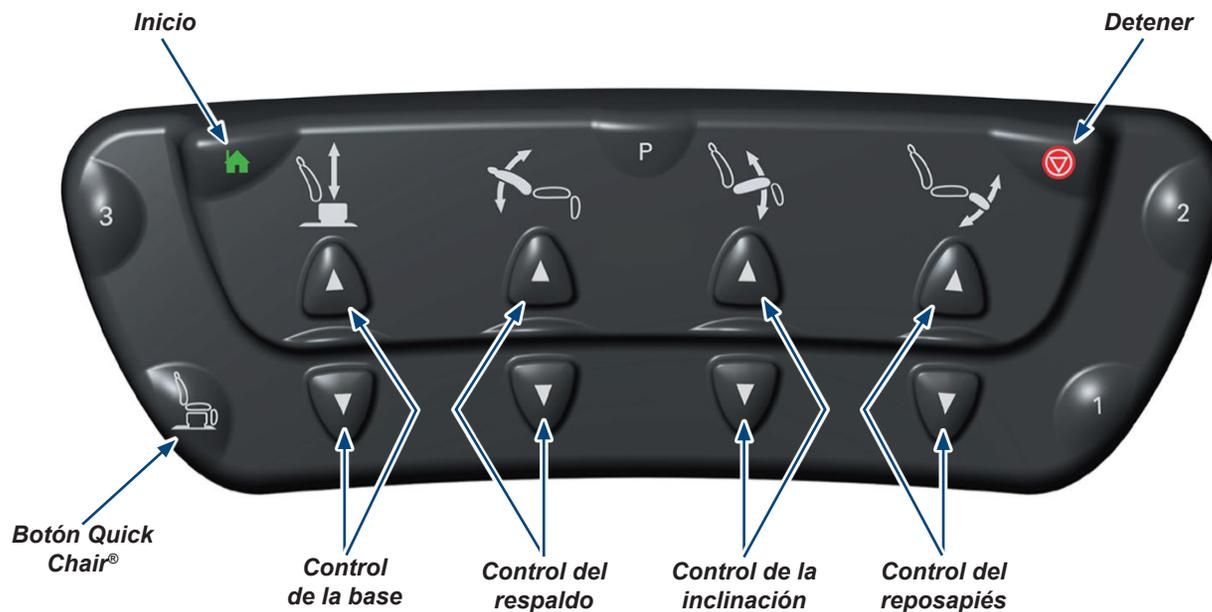

Paso 10: Instalar la parte superior tapizada (no se muestra).

Nota: Las instrucciones de instalación vienen en el embalaje de la tapicería.