



### Anbringen der Sitz-/Rückenlehnenpolsterung:

- A) Rückenlehne des Tisches flach positionieren.
- B) Vorderteil der Sitzfläche auf der Montageplatte des Sitzes positionieren.
- C) Sitzfläche und Rückenlehne fest andrücken.
- D) Oberteil der Rückenlehne auf dem Oberteil der Montageplatte der Rückenlehne positionieren.
- E) Auf konstante Lücke zwischen Sitzfläche und Rückenlehne prüfen.
- F) Rückenlehne fest nach unten drücken.

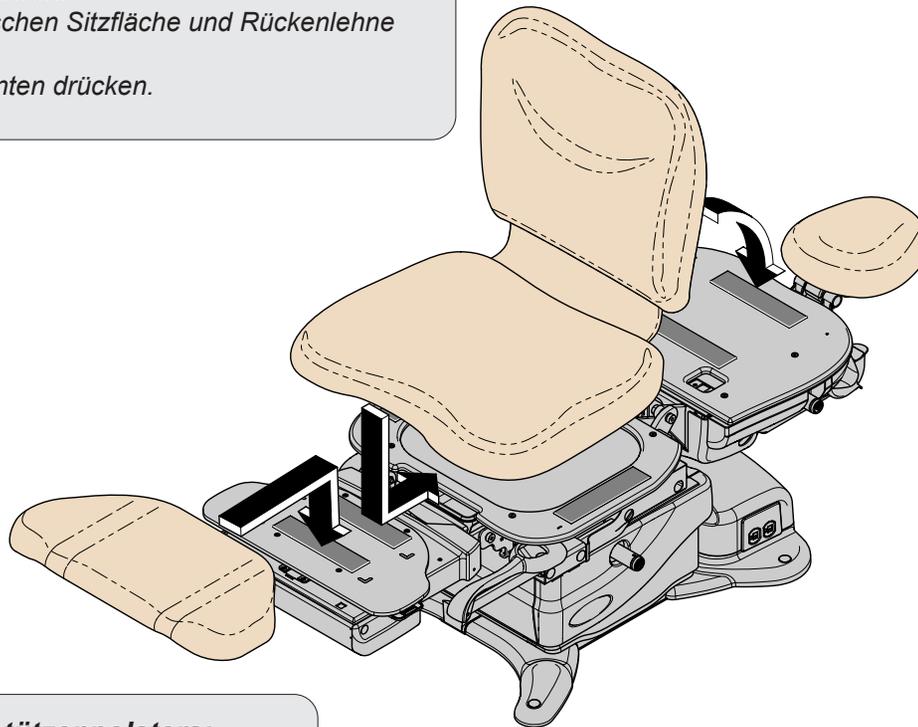

### Anbringen der Kopfstütze:

- A) Einstellknopf der Kopfstütze lösen.
- B) Montagestift in die Kopfstützenverankerung stecken.
- C) Kopfstütze in die gewünschte Position bringen.
- D) Einstellknopf der Kopfstütze feststellen.

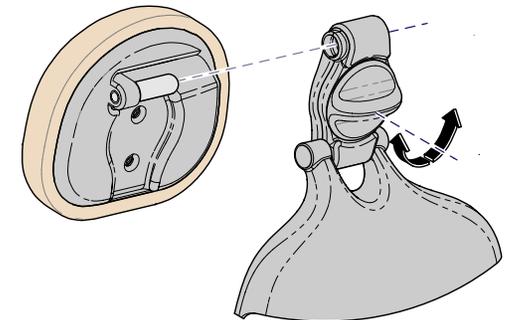

### Anbringen des Fußstützenpolsters:

- A) Klettbänder aufeinander ausrichten.
- B) Fest andrücken.

MA8978I