



Pour installer la garniture de l'assise/du dossier...

- A) Mettez le dossier de la table à plat.
- B) Placez l'avant de l'assise contre le plateau de fixation de l'assise.
- C) Enfoncez fermement l'assise et le dossier.
- D) Placez le haut du dossier contre le haut du plateau de fixation du dossier.
- E) Contrôlez l'espace entre l'assise et le dossier.
- F) Enfoncez fermement le dossier

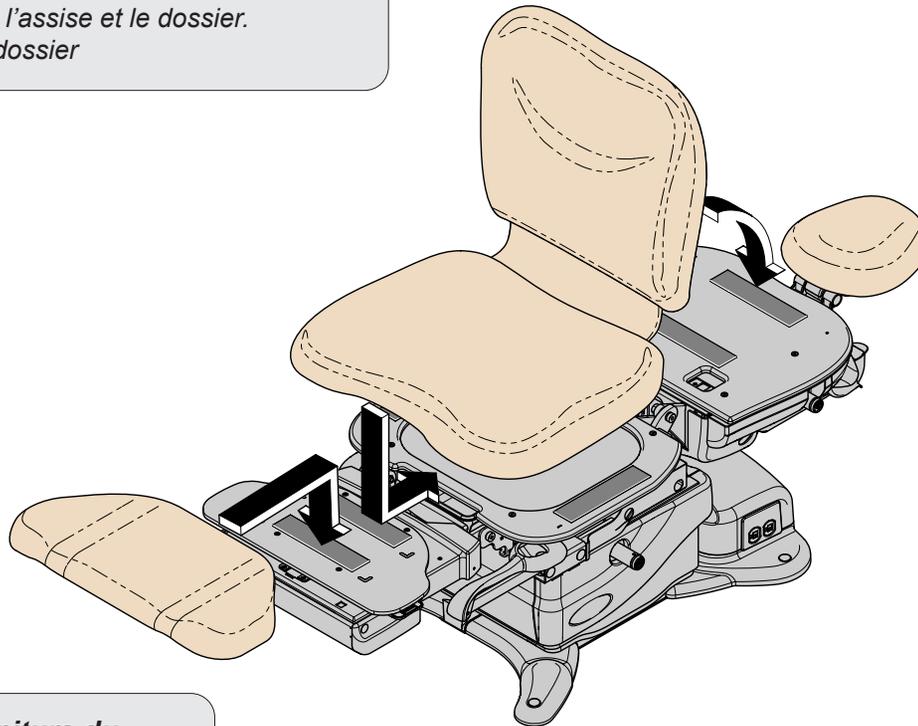

Pour installer la tête...

- A) Desserrez le bouton de réglage de la tête.
- B) Insérez le goujon de fixation dans l'armature de la tête.
- C) Positionnez la tête comme voulu.
- D) Serrez le bouton de réglage de la tête.

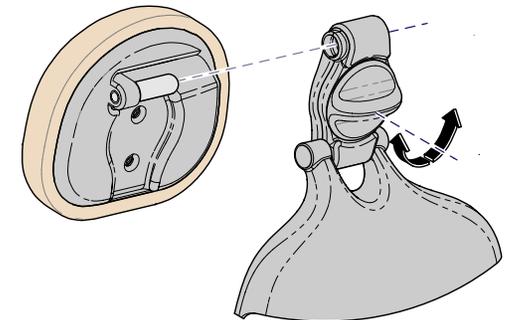

Pour installer la garniture du repose-pied...

- A) Alignez les bandes Velcro.
- B) Appuyez fermement.

MA8978I