



Para instalar la tapicería del asiento/respaldo...

- Coloque la sección del respaldo del sillón en posición horizontal.
- Coloque la parte delantera de la sección del asiento sobre el tablero de montaje del asiento.
- Haga presión sobre las secciones del asiento y del respaldo con firmeza.
- Coloque la parte superior de la sección del respaldo sobre la parte superior del tablero de montaje del respaldo.
- Compruebe que la separación entre el asiento y la sección posterior sea constante.
- Presione hacia abajo y con firmeza la sección posterior.

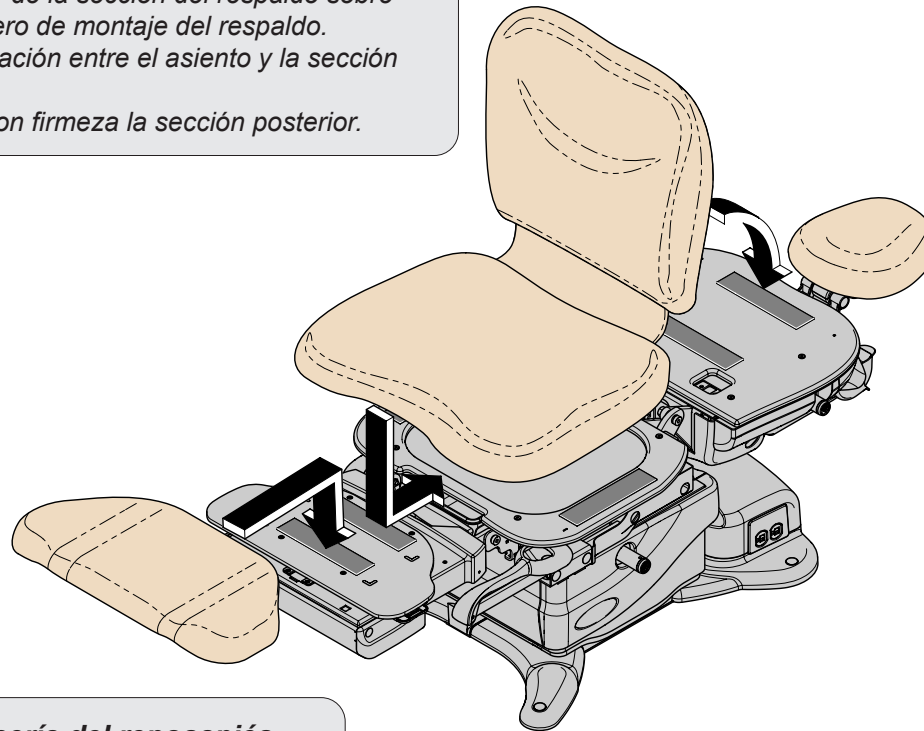

Para instalar el conjunto del reposacabezas...

- Afloje la perilla de ajuste del reposacabezas.
- Inserte el perno de montaje en la pieza de sujeción del reposacabezas.
- Coloque el reposacabezas en la posición deseada.
- Apriete la perilla de ajuste del reposacabezas.

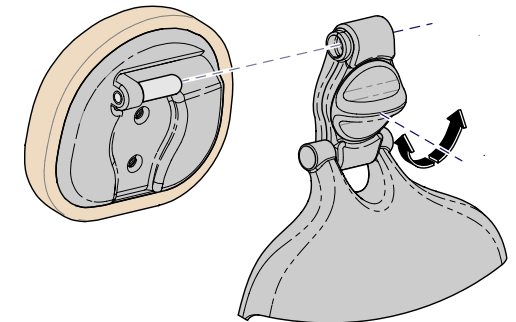

Para instalar la tapicería del reposapiés...

- Alinee las tiras de velcro.
- Presione con firmeza.

MA8978i