



Vorsicht!

Um Verletzungen zu vermeiden, bewegen oder positionieren Sie den Tisch niemals neu, wenn ein Patient darauf liegt.




Vorsicht!

Um Verletzungen zu vermeiden, sperren Sie vor der Durchführung von Behandlungen immer die Laufrollen.

Um den Tisch über eine Schwelle zu bewegen...

- A) Richten Sie den Tisch wie abgebildet auf die Schwelle aus.
- B) Rollen Sie den Tisch mit jeweils nur einer Laufrolle über die Schwelle.


Hinweis: Positionieren Sie den Tisch wie abgebildet. (Lehne auf/Sockel ab/Hochlagerung ab/Fuß ab).

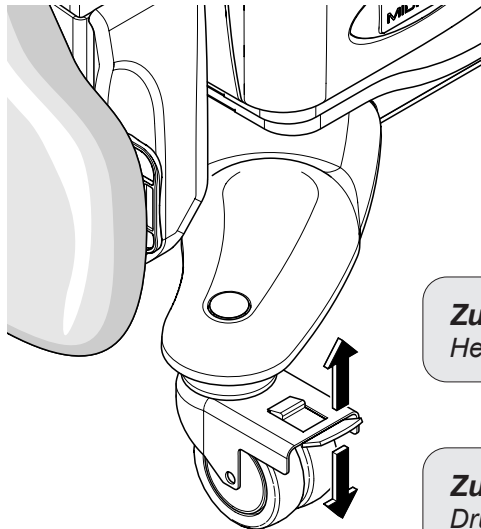

MA8968i

Zum ENTSPERREN der Laufrolle(n)...
Heben Sie den Bremshebel an.

Zum SPERREN der Laufrolle(n)...
Drücken Sie den Bremshebel herunter.

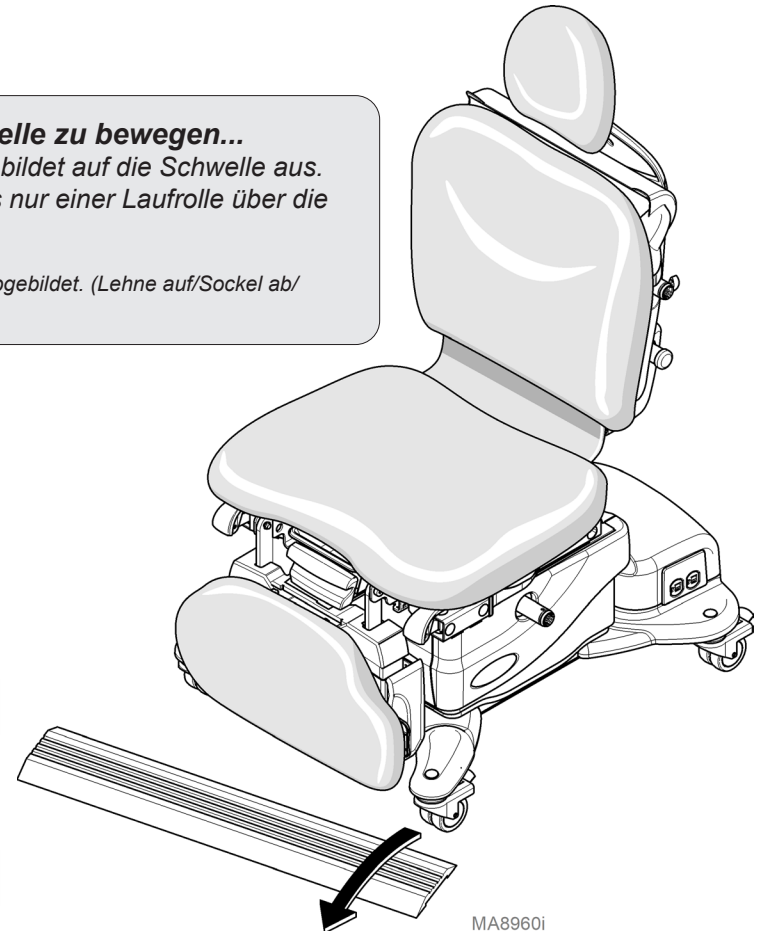

MA8960i