



Attention

Pour éviter toute blessure, ne déplacez ou ne repositionnez jamais la table lorsqu'un patient se trouve dessus.




Attention

Pour éviter de vous blesser, verrouillez les roulettes avant d'effectuer toute manipulation.

Pour déplacer la table au-dessus d'un seuil...

- A) Placez la table face au seuil, comme illustré.
- B) Faites rouler la table au-dessus du seuil en faisant passer une roulette à la fois.

Remarque : Placez la table comme sur l'illustration. (Dossier redressé, base abaissée, inclinaison vers le bas, pieds abaissés).

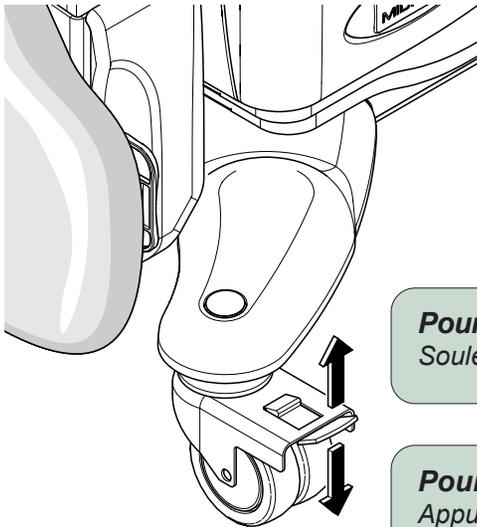


MA8968i

Pour DÉVERROUILLER les roulettes...

Soulevez le levier de verrouillage.

Pour VERROUILLER les roulettes...

Appuyez sur le levier de verrouillage.

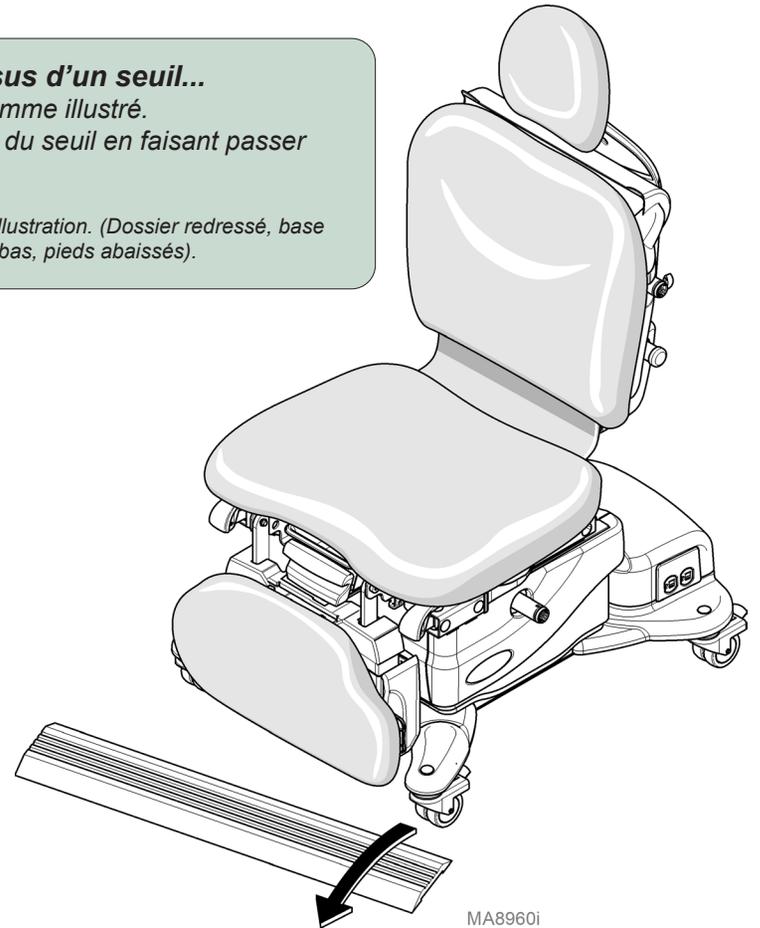

MA8960i